

## Checkliste jährliche Inspektion

Modelltyp: \_\_\_\_\_

Seriennummer: \_\_\_\_\_

### Vorbereiten:

- Reinigung durchgeführt

### Überprüfen:

- Rahmen, Rückeneinheit, Anbauteile und Zubehör überprüft auf Beschädigung, Verbiegungen, Risse und Korrosion,
- Befestigungsschrauben auf Vollständigkeit und festen Sitz überprüft,
- Lenk- und Antriebsräder sowie dazugehörige Anbauteile auf Zustand, Funktionstüchtigkeit und Laufeigenschaften kontrolliert,
- Speichen auf festen Sitz und Vollständigkeit überprüft,
- Bremsen gereinigt und gewartet,
- Verschlussmechanismen (Stativfedern der Schiebegriffe, Steckachsen, Exzenterspanner, etc.) auf Funktionstüchtigkeit überprüft,
- Kippschutz auf festen Sitz und Funktionstüchtigkeit überprüft.

### Ölen:

- bewegliche Teile sowie Lager geölt

### Endkontrolle:

- Funktionskontrolle aller mechanischen Verstellvorrichtungen durchgeführt

### Bemerkungen:

---

---

---

---

---

- jährliche Inspektion durchgeführt nach Checkliste

Stempel:

\_\_\_\_\_  
Datum/ Unterschrift Fachhändler

## Checkliste jährliche Inspektion

Kopiervorlage (steht als Download auf [www.sorgrollstuhltechnik.de/downloadportal](http://www.sorgrollstuhltechnik.de/downloadportal) bereit)