

Boogie Drive

ERSATZTEILKATALOG



[SORG Rollstuhltechnik](#)

Revision: 27.09.2023 10:50:34



Sehr geehrter Kunde,

auf den folgenden Seiten finden Sie eine Liste aller Einzelteile aus denen dieser Stehfahrer gebaut wird.

Um eine korrekte Ersatzteillieferung zu gewährleisten ist es notwendig, dass Sie uns bei der Bestellung zusätzlich zur Artikelnummer folgende Informationen vom Typenschild zukommen lassen.

1. Seriennummer des Hilfsmittels

Die Seriennummer ermöglicht uns, auf die Konfiguration der ursprünglichen Lieferung zuzugreifen.

2. Rahmengröße, Rahmenbreite, Radgröße

Die Maße auf dem Typenschild beziehen sich auf die Konfiguration der Ursprungslieferung. Sofern Maße nach der Lieferung verändert wurden, beispielsweise durch Stuhlverbreiterung, benötigen wir die aktuellen Maße.

3. Rahmenfarbe

Bitte spezifizieren Sie die Rahmenfarbe des Hilfsmittels wenn Sie ein pulverbeschichtetes Ersatzteil bestellen. Bitte geben Sie auch an, ob die Beschichtung matt oder glänzend ist.

4. Andere Änderungen nach der Auslieferung (Anbauartikel etc.)

Unter Umständen haben wir von Änderungen die nach der Erstauslieferung durchgeführt wurden keine Kenntnis. Wenn Sie nicht sicher sind, ob Änderungen Einfluss auf benötigte Ersatzteile haben, informieren Sie uns bitte detailliert.

Abkürzungen:

Pos.	Positionsnummer
Art.-Nr.	Artikelnummer
M/1	erforderliche Menge pro Rollstuhl bzw. Baugruppe
RG	Rahmengröße
RB	Rahmenbreite
RH	Rückenhöhe
alt.	alternativ

Erläuterungen:

Es können nur Artikel bestellt werden, die in der Spalte **Art.Nr.** einen Nummerneintrag haben.

Bitte beachten Sie in der Spalte **Variante** die erforderlichen Bestellangaben, ohne die Ihre Bestellung nur mit Verzögerung bearbeitet werden kann.

Die Angaben **Links/Rechts** sind immer auf die Fahrtrichtung bezogen.

Bei Unklarheiten oder Fragen rufen Sie uns einfach an, wir beraten Sie gerne.

SORG Rollstuhltechnik GmbH Co.KG

Benzstraße 3-5
68794 Oberhausen-Rheinhausen
Fon 07254 - 9279 0
Fax 07254 - 9279 10

info@sorgrollstuhltechnik.de

<https://www.sorgrollstuhltechnik.de>

Öffnungszeiten:

Montag - Freitag 8.00 - 16.30 Uhr


Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Preise auf Nachfrage

Inhaltsverzeichnis


<u>Rahmen</u>	
Rahmen Gr.1 und Gr.2	1
Rahmen Gr.3	2
<u>Mittelsäule</u>	
Mittelsäule	3
Teleskopneigungsverstellung Rahmengröße 1 + 2	4
Teleskopneigungsverstellung Rahmengröße 3	5
Gasdruckfeder-Neigungsverstellung	6
<u>Lenkrad</u>	
Lenkrad hinten	12
Stützrad vorne	13
<u>Antriebsrad</u>	
Antriebsradaufnahme	14
Räder, Bereifungen, Greifring-Überzüge, Speichenschützer	15
<u>Beinstütze</u>	
Fußplatte geteilt Standard	7
Fußplatte durchgehend Standard	8
Fußplatte mit 3D-Verstellung ab 2019	10
Fußschalen	11
<u>Pelotten</u>	
Kniepelotte Standard, Gr.1 (Kniebreite 4,5-7,5cm)	16
Kniepelotte Standard, Gr.2 (Kniebreite 6-11cm)	17
Kniepelotte mit Anlagebügel	19
Rückenpelotte (nur für Rahmengröße 1 + 2)	20
Rückenpelotte mit Schwenkbügelrahmen	22
Brustpelotte ohne Rückenpelotte	24
Gesäßpelotte	26
Gesäßpelotte mit Kurbel (Linearteil)	28
Gesäßpelotte mit Kurbel (Pelottenteil)	29
Seitliche Brustpelotten / seitliche Gesäßpelotten	31
Seitliche Beckenpelotten	33
Spinenpelotte 2-teilig	34
<u>Bremse</u>	
Bremsgriff und Bowdenzug für Trommelbremse	35
Bremsgriff am Therapietisch	36
Bremsgriff an der Mittelsäule	37
<u>Zubehör</u>	
Therapietisch	38
Therapietisch mit Therapiemulde	40

Rahmen Gr.1 und Gr.2

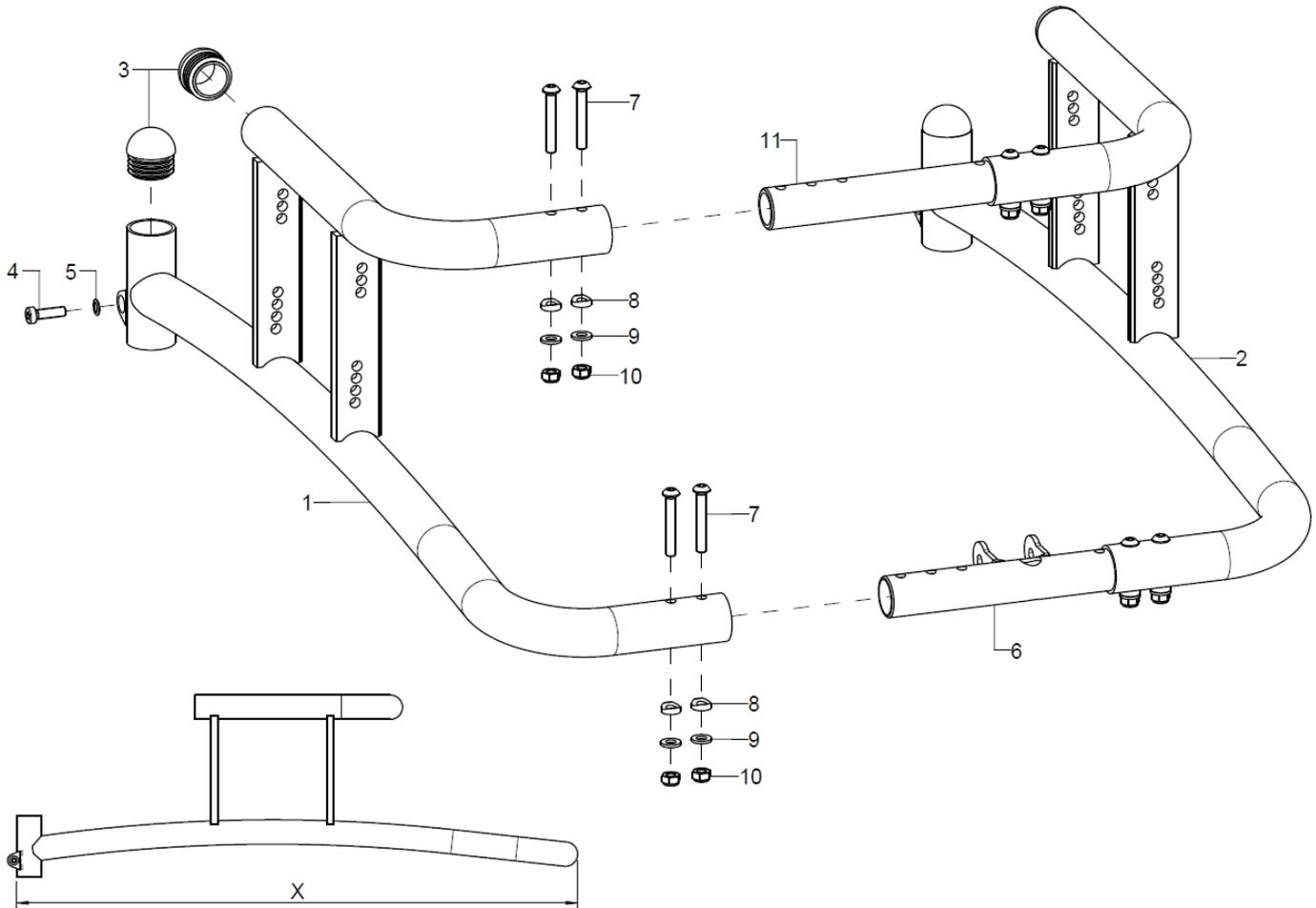


Pos.:	Menge:	Artikelnr.:	Artikelbezeichnung:	Variante:
1+3-5	1	59590102	Rahmenteil Boogie Drive RG1, rechts	Farbe, Länge X
2-5	1	59590101	Rahmenteil Boogie Drive RG1, links	Farbe, Länge X
o.B.	1	59590202	Rahmenteil Boogie Drive RG2, rechts	Farbe, Länge X
o.B.	1	59590201	Rahmenteil Boogie Drive RG2, links	Farbe, Länge X
3	2		Lamellenkappe Halbkugel Ø30	
4	1		Zylinderschraube niedriger Kopf DIN 7984 - M6x20	
5	1		Sicherungsscheibe S6 - FST	
6-10	1	59590501	Stützradtraverse für RG 1/2 bei Teleskopneigungsverstellung	
o.B.	1	59590502	Stützradtraverse für RG 1/2 bei Gasdruckfederneigungsverstellung	
7	4		Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x40	
8	4		Sattelscheibe ø12/6,2x2,5	
9	4		Scheibe ISO 7089 (DIN 125) - A 6,4	
10	4		Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M6	
11+7-10	1	59590601	Mittelsäulentraverse für RG1	
o.B.	1	59590602	Mittelsäulentraverse für RG2	
o.B.	2		Rahmenverbreiterungsdistanz	

Rahmen Gr.3

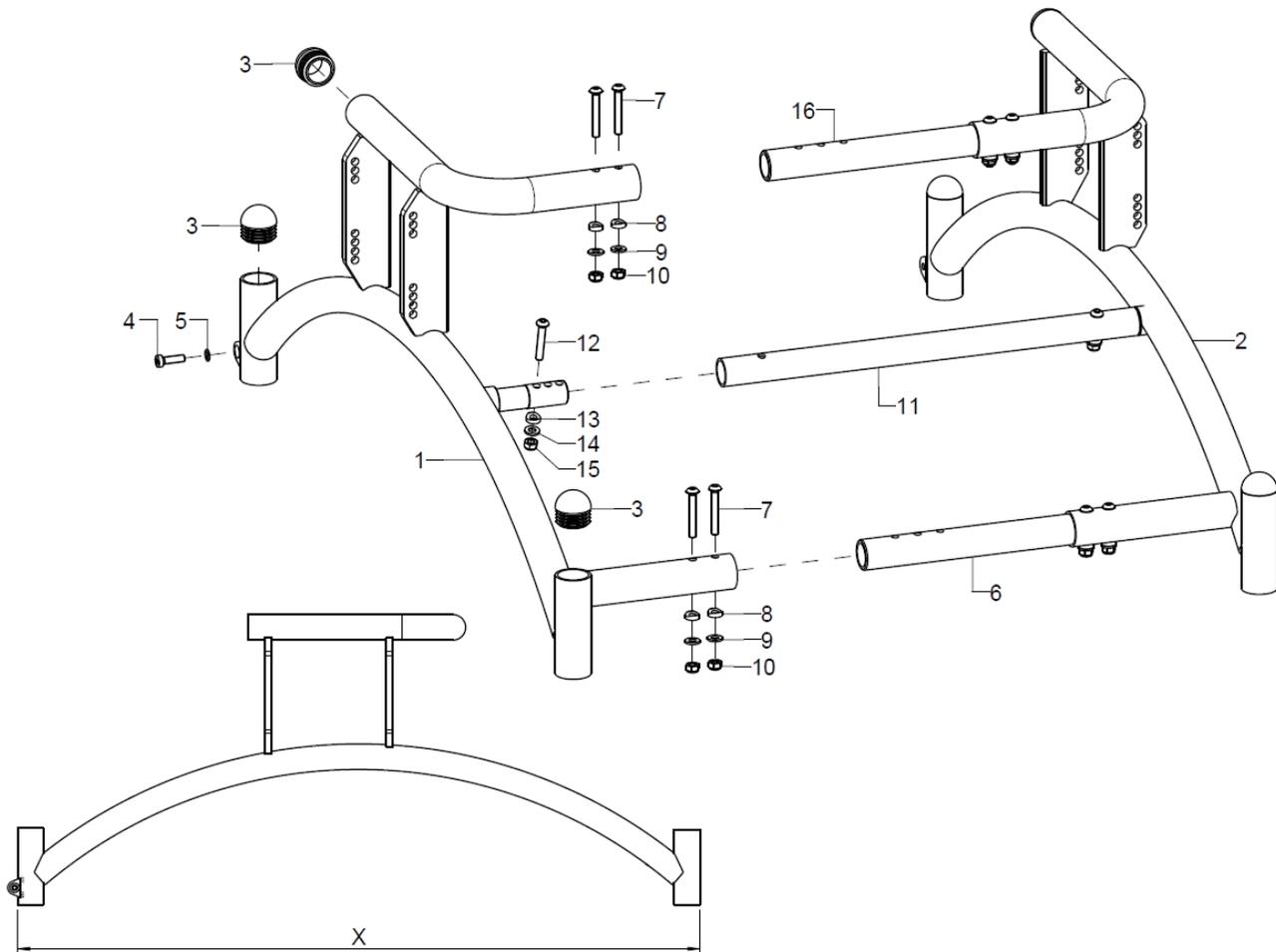


Pos.:	Menge:	Artikelnr:	Artikelbezeichnung:	Variante:
1+3-5	1		Rahmenteil RG3, rechts	Farbe, Länge X
2-5	1		Rahmenteil RG3, links	Farbe, Länge X
3	3		Lamellenkappe Halbkugel Ø30	
4	1		Zylinderschraube niedriger Kopf DIN 7984 - M6x20	
5	1		Sicherungsscheibe S6 - FST	
6-10	1		Mittelsäulentraverse GR.3/4	Bei Teleskopneigungsverstellung
o.B.	1		Traverse Neigungsverst. Gasdruckfeder für RG 3/4	
7	4		Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x40	
8	4		Sattelscheibe ø12/6,2x2,5	
9	4		Scheibe ISO 7089 (DIN 125) - A 6,4	
10	4		Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M6	
11-15	1		Rahmentraverse RG3	Farbe
12	2		Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x35	
13	2		Sattelscheibe ø12/6,2x2,5	
14	2		Scheibe ISO 7089 (DIN 125) - A 6,4	
15	2		Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M6	
16+7-10	1		Mittelsäulentraverse GR.3/4	Bei Teleskopneigungsverstellung
o.B.	4		Rahmenverbreiterungsdistanz	


Mittelsäule

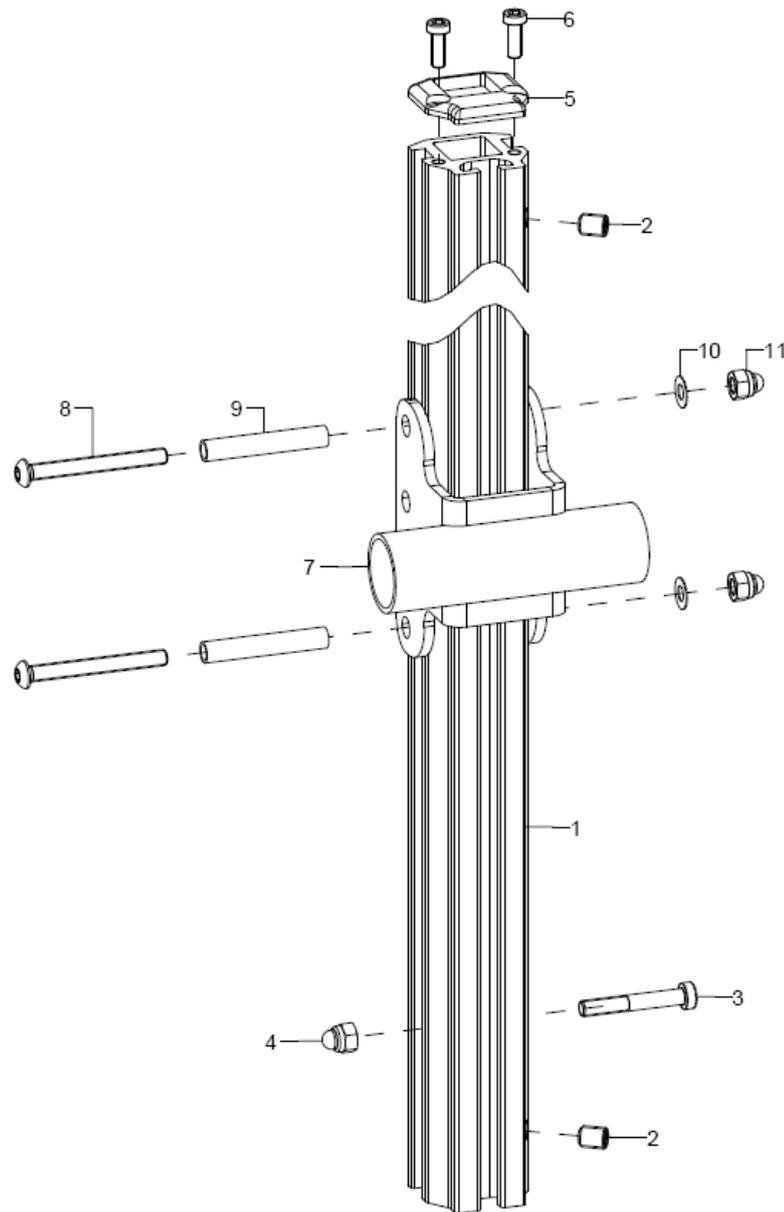


Pos.:	Menge:	Artikelnr:	Artikelbezeichnung:	Variante:
1-6	1	57021001	Mittelsäule Gr.1, Boogie Drive inkl. Abdeckkappe	
o.B.	1	57021002	Mittelsäule Gr.2, Boogie Drive inkl. Abdeckkappe	
o.B.	1	57021003	Mittelsäule Gr.3, Boogie Drive inkl. Abdeckkappe	
2	2		Gewindestift mit Innensechskant ISO 4026 (DIN 913), M8x10	
3	1		Zylinderschraube niedriger Kopf DIN 7984 - M6x40	
4	1		Sechsk.-Hutmutter niedr. Form mit Klemmt. DIN 986 - M6	
5+6	1	57020601	Abdeckkappe	
6	2		Zylinderkopfschraube niedriger Kopf DIN 6912 - M5x14	
7-11	1	57020202	Aufhängung Mittelsäule RG2-3 inkl. Montagematerial	
altern.	1	57020101	Aufhängung Mittelsäule RG1 inkl. Montagematerial	
8	2		Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x55	
9	2		Buchse 8x6x48	
10	2		Passscheibe DIN 988 - 6x12x0,5 - A2	
11	2		Sechsk.-Hutmutter niedr. Form mit Klemmt. DIN 986 - M6	

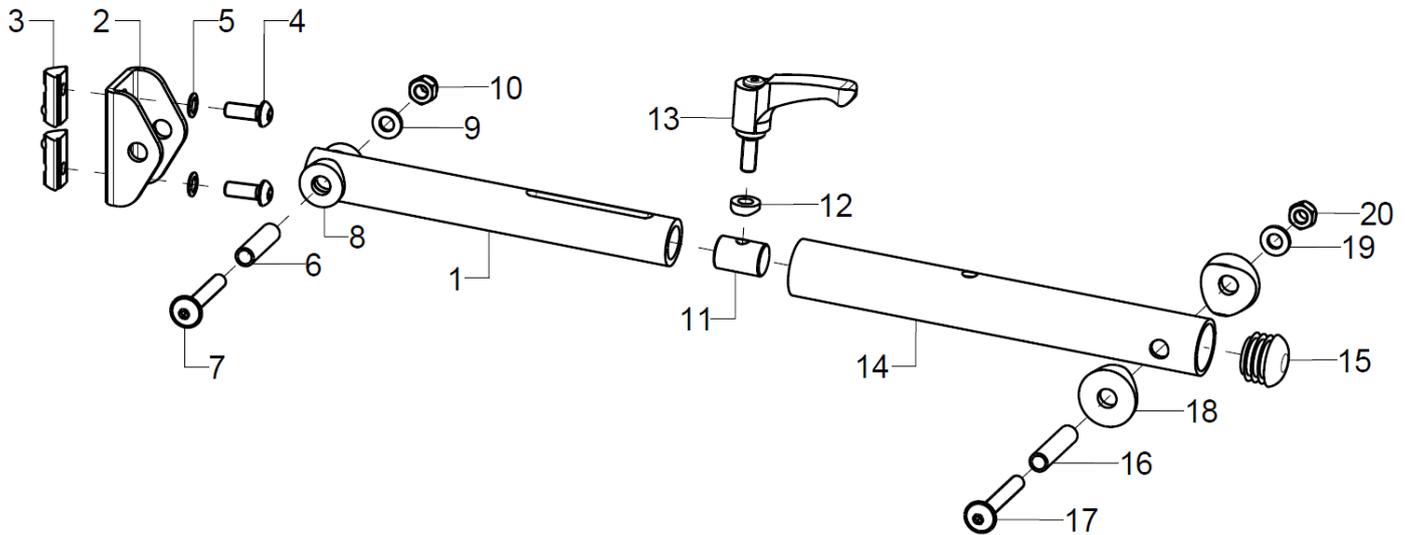Teleskopneigungsverstellung Rahmengröße 1 + 2


Pos.:	Menge:	Artikelnr:	Artikelbezeichnung:	Variante:
1-20	1	57030201	Teleskopneigungsverstellung kpl. für RG1 Boogie Drive	Farbe
o.B.	1	57030202	Teleskopneigungsverstellung kpl. für RG2 Boogie Drive	Farbe
1	1	57031001	Teleskop-Innenrohr NVT, Rahmengr. 1	
o.B.	1	57031002	Teleskop-Innenrohr NVT, Rahmengr. 2	
2-10	1	57020301	Gabelteil für Neigungsverstellung	Gasdruckfeder- oder Teleskopverstellung
3	2		Nutenstein mit Steg M6	
4	2		Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x16	
5	2		Sicherungsscheibe S6 - FST	
6	1		Buchse 31,5mm	
7	1		Linsenflanschschraube mit Innensechskant M6x40	
8	2		Sattelscheibe schwarz Nenn- \varnothing 19/8	
9	1		Scheibe ISO 7089 (DIN 125) - A 6,4	
10	1		Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M6	
11-13	1	57020501	Gewindebolzen NVT inkl. Montagezubehör	
12	1		Sattelscheibe \varnothing 12/6,2x2,5	
13	1		Klemmhebel verstellbar M6x15, schwarz	
14-20	1	57030210	Teleskop-Außenrohr RG1/2	
15	1		Stopfen mit Lamellen für Rohr \varnothing 22x1-2, schwarz	
16	1		Buchse D8/ d6x36	
17	1		Linsenflanschschraube mit Innensechskant M6x45	
18	2		Sattelscheibe schwarz Nenn- \varnothing 24/8	
19	1		Scheibe ISO 7089 (DIN 125) - A 6,4	
20	1		Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M6	

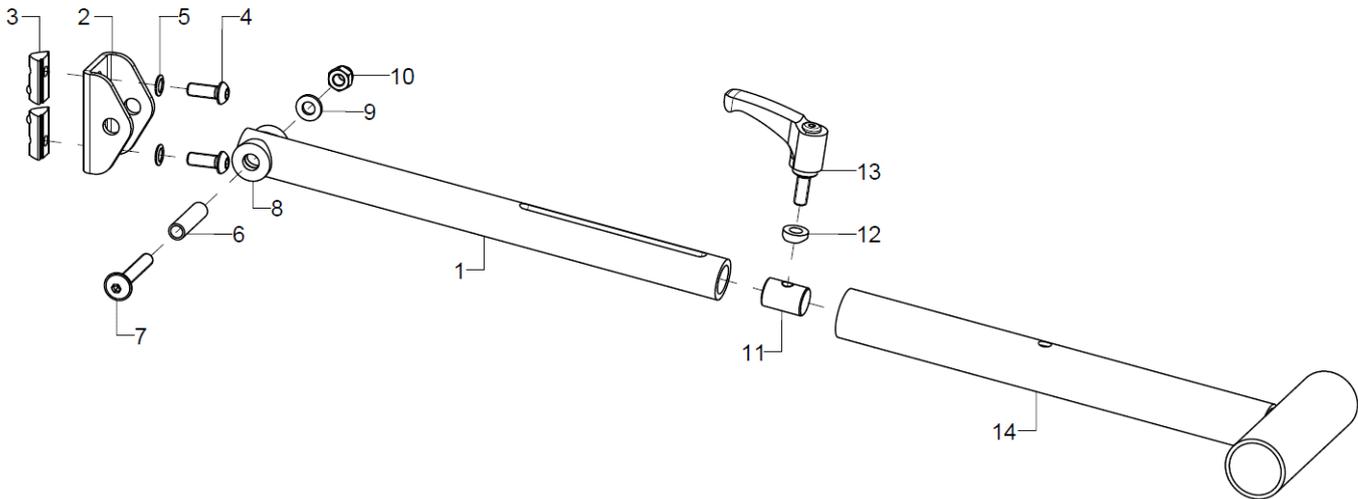
Teleskopneigungsverstellung Rahmengröße 3


Pos.:	Menge:	Artikelnr.:	Artikelbezeichnung:	Variante:
1-14	1	57030203	Teleskopneigungsverstellung kpl. für RG3 Boogie Drive	Farbe
1	1	57031003	Teleskop-Innenrohr NVT, RG3	
2-10	1	57020301	Gabelteil für Neigungsverstellung	Gasdruckfeder- oder Teleskopverstellung
3	2		Nutenstein mit Steg M6	
4	2		Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x16	
5	2		Sicherungsscheibe S6 - FST	
6	1		Buchse 31,5mm	
7	1		Linsenflanschschraube mit Innensechskant M6x40	
8	2		Sattelscheibe schwarz Nenn- \varnothing 19/8	
9	1		Scheibe ISO 7089 (DIN 125) - A 6,4	
10	1		Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M6	
11-13	1	57020501	Gewindebolzen NVT inkl. Montagezubehör	
12	1		Sattelscheibe \varnothing 12/6,2x2,5	
13	1		Klemmhebel verstellbar M6x15, schwarz	
14	1	57030211	Teleskop-Außenteil RG3	Farbe

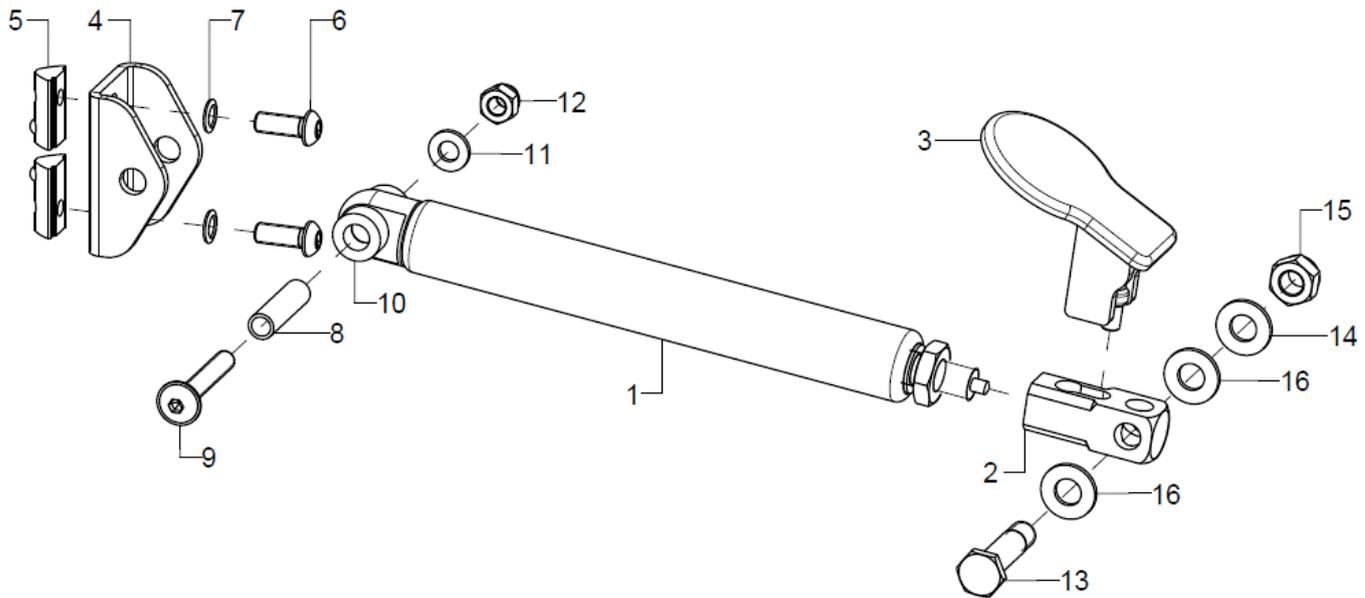Gasdruckfeder-Neigungsverstellung


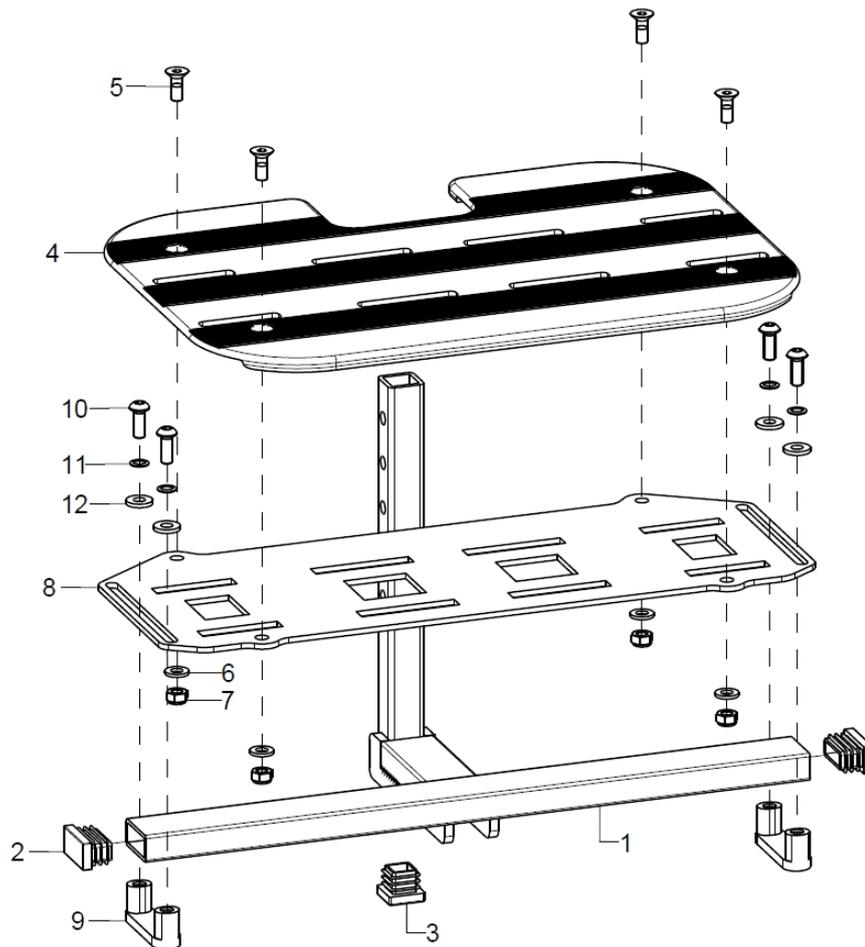
Pos.:	Menge:	Artikelnr:	Artikelbezeichnung:	Variante:
1-2	1	57020401	Gasdruckfeder 100N/48mm für Neigungsverstellung Mittelsäule incl. Auslösekopf	
altern.	1	57020402	Gasdruckfeder 125N/61mm für Neigungsverstellung Mittelsäule incl. Auslösekopf	
altern.	1	57020403	Gasdruckfeder 150N/76mm für Neigungsverstellung Mittelsäule incl. Auslösekopf	
2	1		GDF-Auslösekopf M10x1	
3	1	57020405	Fusspedal für Neigungsverstellung GDF	
4-12	1	57020301	Gabelteil für Neigungsverstellung	Gasdruckfeder- oder Teleskopverstellung
5	2		Nutenstein mit Steg M6	
6	2		Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x16	
7	2		Sicherungsscheibe S6 - FST	
8	1		Buchse 31,5mm	
9	1		Linsenflanschschraube mit Innensechskant M6x40	
10	2		Buchse D15/d8,2x7	
11	1		Scheibe ISO 7089 (DIN 125) - A 6,4	
12	1		Sechsk.-Hutmutter niedr. Form mit Klemmt. DIN 986 - M6	
13-16	1	190503	Passschraube M8x35 SW13 inkl. Montagezubehör	
14	1		Scheibe ISO 7089 (DIN 125) - A 8,4	
15	1		Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M8	
16	1		Scheibe ISO 7089 (DIN 125) - A 8,4 - PA schwarz	

Fußplatte geteilt Standard

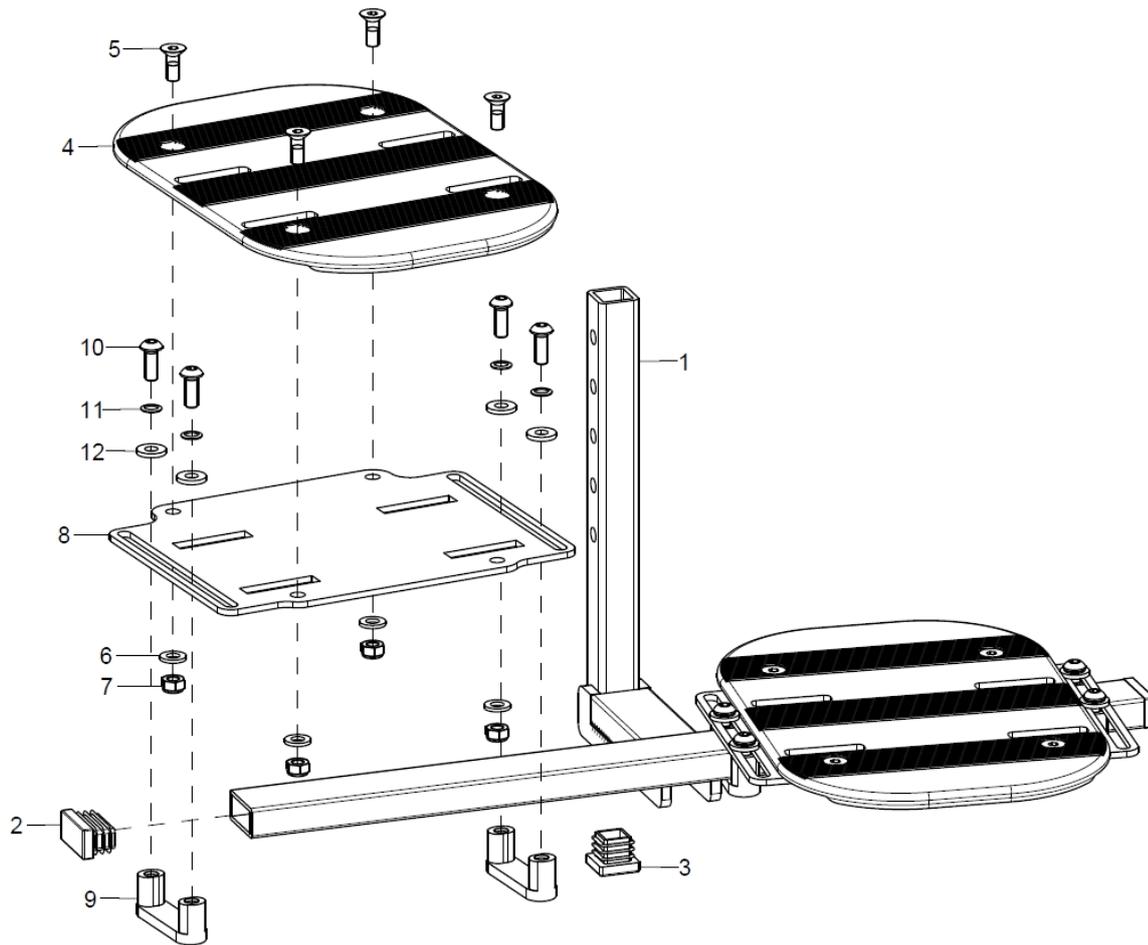


Pos.:	Menge:	Artikelnr:	Artikelbezeichnung:	Variante:
1-3	1	40842001	Fußplattenhalter incl. Lamellenstopfen, schwarz	Rahmengröße
2	2		Lamellenstopfen 30x15	
3	1		Lamellenstopfen 20x20	
4-7	2	40841001	Fußplatte geteilt Standard (RB und Farbe angeben) incl. Montageschrauben	Farbe, Rahmengröße
5	4		Senkschraube mit Innensechskant ISO 10642 (DIN 7991) M6x16	
6	4		Scheibe ISO 7089 (DIN 125) - A 6,4	
7	4		Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M6	
8-12	2	40841002	Unterbauplatte für geteilte Fußplatte (RB angeben) incl. Montagematerial	Rahmengröße
9	4		Klemmhälfte	
10	4		Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x16	
11	4		Sicherungsscheibe S6 - FST	
12	4		Scheibe verstärkt Ø14/6,2x2	

Fußplatte durchgehend Standard




Pos.:	Menge:	Artikelnr.:	Artikelbezeichnung:	Variante:
1-3	1	40842001	Fußplattenhalter incl. Lamellenstopfen, schwarz	Rahmengröße
2	2		Lamellenstopfen 30x15	
3	1		Lamellenstopfen 20x20	
4-7	1	40860401	Fußplatte durchgehend Standard (RB und Farbe angeben) incl. Montageschrauben	
5	4		Senkschraube mit Innensechskant ISO 10642 (DIN 7991) M6x16	
6	4		Scheibe ISO 7089 (DIN 125) - A 6,4	
7	4		Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M6	
8-12	1	40860402	Unterbauplatte für durchgehende Fußplatte (RB angeben) incl. Montagematerial	Rahmengröße
9	2		Klemmhälfte	
10	4		Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x16	
11	4		Sicherungsscheibe S6 - FST	
12	4		Scheibe verstärkt Ø14/6,2x2	

Fußplatte mit 3D-Verstellung ab 2019

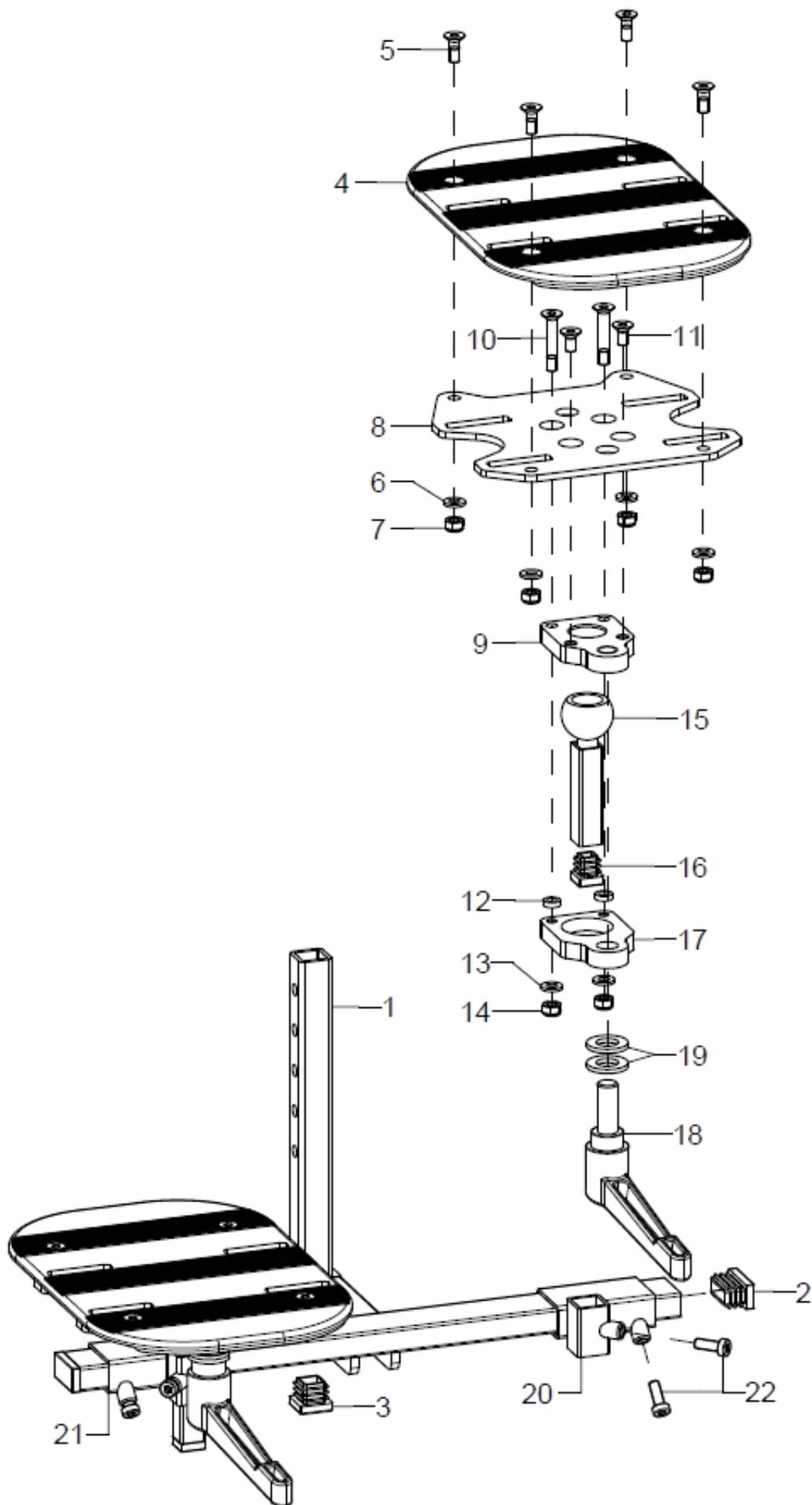


Pos.:	Menge:	Artikelnr:	Artikelbezeichnung:	Variante:
1-3	1	40842001	Fußplattenhalter incl. Lamellenstopfen, schwarz	Rahmengröße
2	2		Lamellenstopfen 30x15	
3	1		Lamellenstopfen 20x20	
4-20+22	1	40850001	Fußplatte-3D winkelverstellbar, links kpl. mit Höhenverstellung (ohne Fußplattenhalter an Mittelsäule)	
4-19+21+22	1	40850002	Fußplatte-3D winkelverstellbar, rechts kpl. mit Höhenverstellung (ohne Fußplattenhalter an Mittelsäule)	
4-7	2		Fußplatte geteilt	Farbe, Rahmengröße
5	4		Senkschraube mit Innensechskant ISO 10642 (DIN 7991) M6x16	
6	4		Scheibe ISO 7089 (DIN 125) - A 6,4	
7	4		Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M6	
8	2		Unterbauplatte FB3D	
9-14	2		Pfanne Oberteil FB3D	
10	2		Senkschraube mit Innensechskant ISO 10642 (DIN 7991) M6x35	
11	2		Senkschraube mit Innensechskant ISO 10642 (DIN 7991) M6x12	
12	2		Distanzbuchse D10/ d6x3	
13	2		Scheibe ISO 7089 (DIN 125) - A 6,4	
14	2		Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M6	
15+16	2		Höhenverstellung FB3D	
16	1		Stopfen mit Lamellen für Vierkantrohre, schwarz, 15x15	
17	1		Pfanne Unterteil FB3D	
18-19	2		Klemmhebel verstellbar M12x30, schwarz	
19	2		Scheibe ISO 7089 (DIN 125) - A 13	
20	1		Breitenverstellung FB3D, links	
21	1		Breitenverstellung FB3D, rechts	
22	2		Zylinderschraube niedriger Kopf DIN 7984 - M6x16	

Fußschalen

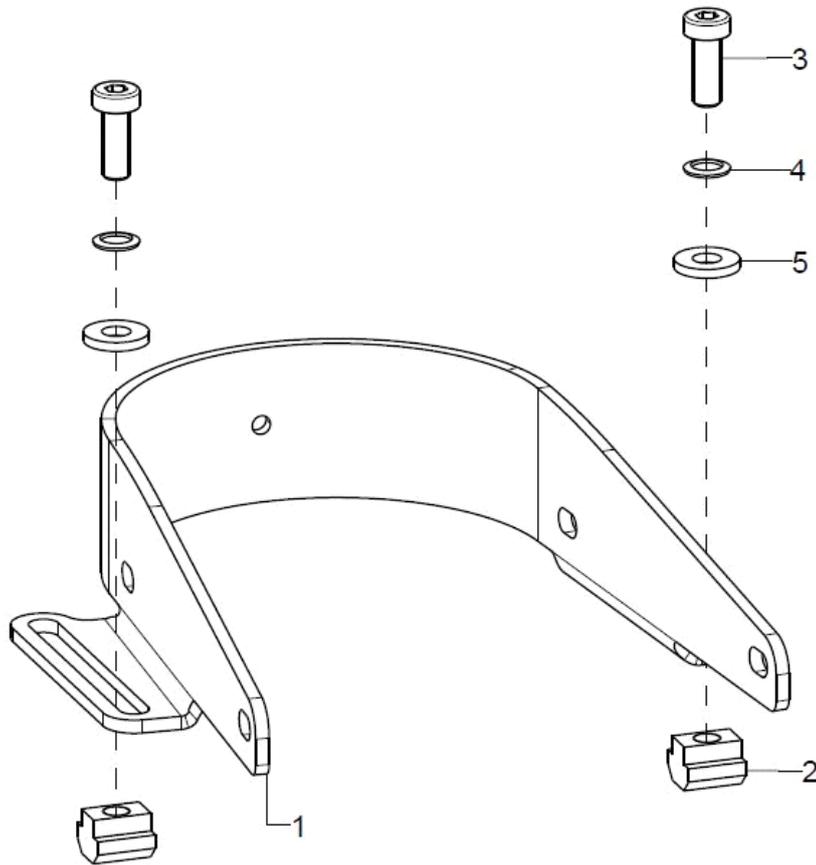


Pos.:	Menge:	Artikelnr.:	Artikelbezeichnung:	Variante:
1-5	2	40200701	Fußschale für Boogie Größe 1, schwarz incl. Montagematerial	max. Schuhbreite 6,5cm
altern.	2	40200702	Fußschale für Boogie Größe 2, schwarz incl. Montagematerial	max. Schuhbreite 8,5cm
altern.	2	40200703	Fußschale für Boogie Größe 3, schwarz incl. Montagematerial	max. Schuhbreite 9,5cm
2	2		Mutter für T-Nuten ISO 299 (DIN 508) - M6 - vz	
3	2		Zylinderschraube niedriger Kopf DIN 7984 - M6x16	
4	2		Sicherungsscheibe S6 - FST	
5	2		Scheibe verstärkt Ø14/6,2x2	
o.B.	2	40201501	Fußschalengurt Gr.1 vorne/hinten (2-teilig komplett mit Polster) incl. Montagematerial zur Montage an Fußschale	
altern.	2	40201502	Fußschalengurt Gr.2 vorne/hinten (2-teilig komplett mit Polster) incl. Montagematerial zur Montage an Fußschale	
altern.	2	40201503	Fußschalengurt Gr.3 vorne/hinten (2-teilig komplett mit Polster) incl. Montagematerial zur Montage an Fußschale	

Lenkrad hinten

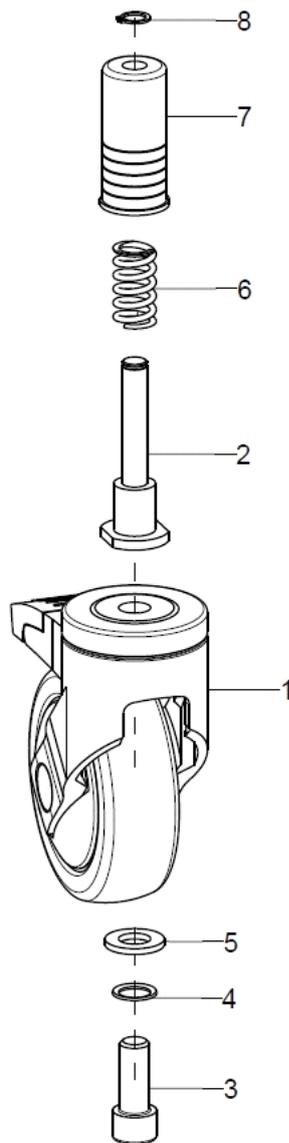


Pos.:	Menge:	Artikelnr:	Artikelbezeichnung:	Variante:
1-8	2	28590200	Lenkrad hinten, kpl. für Boogie	Rahmengröße
1	1		Lenkrolle Levina feststellbar	
2-8	1	28590208	Montagezubehör Lenkrad hinten	Rahmengröße
2	1		Lenkachse	
3	1		Zylinderschraube ISO 4762 (DIN 912) M12x30	
4	1		Sicherungsscheibe S12 - FST	
5	1		Scheibe ISO 7089 (DIN 125) - A 13	
6	1		Druckfeder Form 1: 2x12,5x35 n=7,25	Rahmengröße 1
altern.	1		Druckfeder Form 1: 2,25x12,75x33,3 n=6,25	Rahmengröße 2
altern.	1		Druckfeder Form 1: 2,4x12,9x32,7 n=5,75	Rahmengröße 3
7	1		Lenkgehäuse	
8	1		Sicherungsring 10, DIN 471	

Stützrad vorne

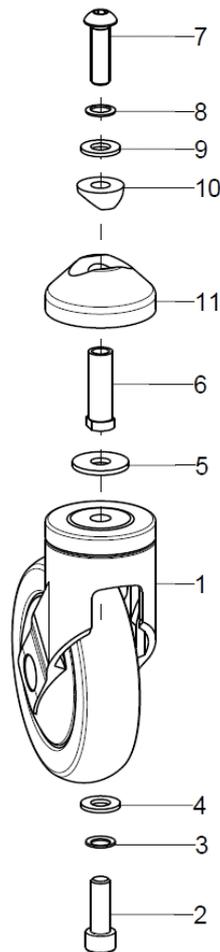

Pos.:	Menge:	Artikelnr:	Artikelbezeichnung:	Variante:
1-11	1		Stützrad vorne Rahmengröße 1 + 2, kpl.	
1-9	2		Stützrad vorne Rahmengröße 3, kpl.	
1	1		Lenkrolle Levina 5370PJP125P30-11, graphitschwarz	
2-11	1		Montagezubehör Stützrad vorne. Rahmengr. 1 + 2	
2-9	1		Montagezubehör Stützrad vorne. Rahmengr. 3	
2	1		Zylinderschraube ISO 4762 (DIN 912) M10x30	
3	1		Sicherungsscheibe S10 - FST	
4	1		Scheibe ISO 7089 (DIN 125) - A 10,5	
5	1		Scheibe ISO 7093 (DIN 9021) - 10,5	
6	1		Gewindebuchse LRAD	
7	1		Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M10x35	Rahmengröße 1 + 2
altern.	1		Zylinderschraube ISO 4762 (DIN 912) M10x30	Rahmengröße 3
8	1		Sicherungsscheibe S10 - FST	
9	1		Scheibe ISO 7089 (DIN 125) - A 10,5	
10	1		Sattelscheibe schwarz Nenn- \varnothing 25/10	
11	1		Lenkraddistanz	

Antriebsradaufnahme

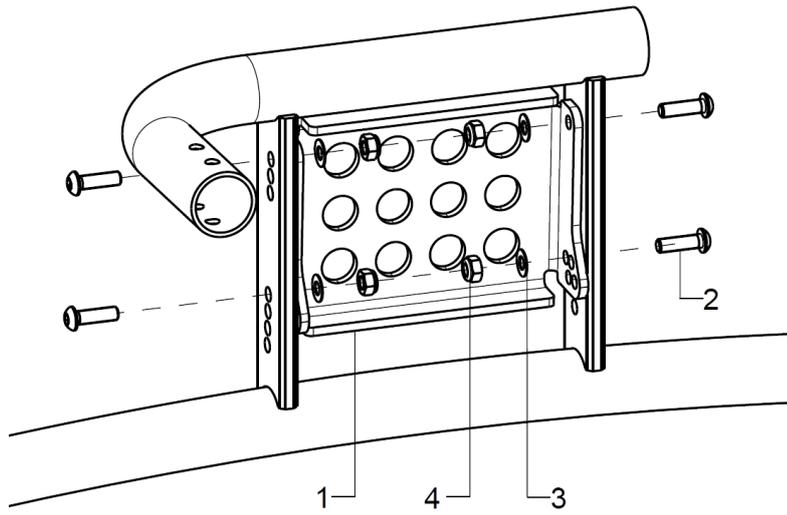

Pos.:	Menge:	Artikelnr.:	Artikelbezeichnung:	Variante:
1-4	2		Lochplatte	
2	4		Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x20	
3	4		Passscheibe DIN 988 - 6x12x0,5 - A2	
4	4		Sechsk.-Hutmutter niedr. Form mit Klemmt. DIN 986 - M6	


Räder, Bereifungen, Greifring-Überzüge, Speichenschützer

Pos.:	Menge:	Artikelnr:	Artikelbezeichnung:	Variante:
o.B.	2	222440	Profilradfelge 24 Zoll/Trommelbrems-Nabe und integr. Greifring	
o.B.	2	222640	Profilradfelge 26 Zoll/Trommelbrems-Nabe und integr. Greifring	
o.B.	2	242840	Profilradfelge 28 Zoll/Trommelbrems-Nabe und integr. Greifring	
o.B.	2	243040	Profilradfelge 30 Zoll/Trommelbrems-Nabe und integr. Greifring	
o.B.	2	243240	Profilradfelge 32 Zoll/Trommelbrems-Nabe und integr. Greifring	
o.B.	2	243640	Profilradfelge 36 Zoll/Trommelbrems-Nabe und integr. Greifring	
o.B.	2	232411	Pannensichere Bereifung 24 x 1 Zoll	
o.B.	2	232611	Pannensichere Bereifung 26 x 1 Zoll	
o.B.	2	232811	Pannensichere Bereifung 28 x 1 Zoll	
o.B.	2	233011	Pannensichere Bereifung 30 x 1 Zoll	
o.B.	2	233211	Pannensichere Bereifung 32 x 1 Zoll	
o.B.	2	233611	Pannensichere Bereifung 36 x 1 Zoll	
o.B.	2	322402	Greifring-Überzug 24 Zoll Silikon für 24" Profilrad (1660mm)	
o.B.	2	322602	Greifring-Überzug 26 Zoll Silikon für 26" Profilrad, 26" Greifring hoch Edelstahl (1853mm)	
o.B.	2	372801	Greifring-Überzug 28 Zoll Silikon für 28" Profilrad (1915mm)	
o.B.	2	373001	Greifring-Überzug 30 Zoll Silikon für 30" Profilrad (2129mm)	
o.B.	2	373201	Greifring-Überzug 32 Zoll Silikon für 32" Profilrad (2287mm)	
o.B.	2	373601	Greifring-Überzug 36 Zoll Silikon für 36" Profilrad (2608mm)	
o.B.	2	322401	Greifring-Überzug Profilrad, Ergo 24"	
o.B.	2	322601	Greifring-Überzug Profilrad, Ergo 26"	
o.B.	2	3628	Greifring-Überzug Profilrad, Ergo 28"	
o.B.	2	3630	Greifring-Überzug Profilrad, Ergo 30"	
o.B.	2	3632	Greifring-Überzug Profilrad, Ergo 32"	
o.B.	2	3636	Greifring-Überzug Profilrad, Ergo 36"	
o.B.	2	252400	Speichenschutz 24", Unicolor transparent	
o.B.	2	252600	Speichenschutz 26", Unicolor transparent	
o.B.	2	252800	Speichenschutz 28", Unicolor transparent	
o.B.	2	253000	Speichenschutz 30", Unicolor transparent	
o.B.	2	253200	Speichenschutz 32", Unicolor transparent	
o.B.	2	253600	Speichenschutz 36", Unicolor transparent	

Design-Dekor-Speichenschützer (nur 24 + 26") können Sie unter den folgenden Internetadressen wählen:

www.blueprince.de
www.speichen-schutz.de
www.wheelchairgadgets.com

Kniepelotte Standard, Gr.1 (Kniebreite 4,5-7,5cm)

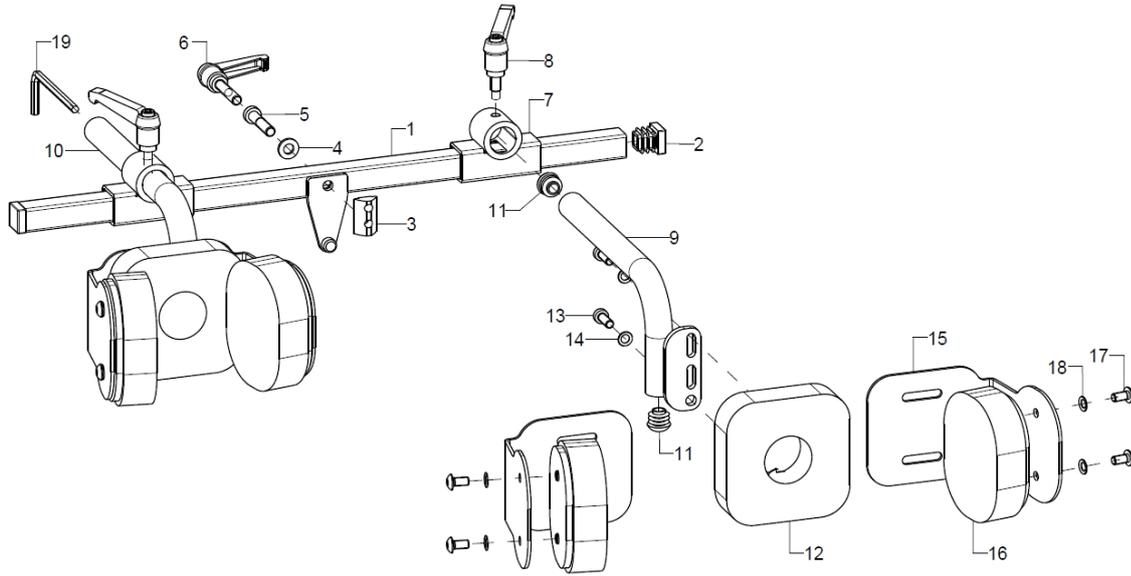


Pos.:	Menge:	Artikelnr:	Artikelbezeichnung:	Variante:
1-5(6)	1	68360210	Traversenträger Kniepelotten für Rahmengröße 1 inkl. Montagematerial	
altern.	1	68360211	Traversenträger Kniepelotten für Rahmengröße 2 inkl. Montagematerial	
altern.	1	68360212	Traversenträger Kniepelotten für Rahmengröße 3 inkl. Montagematerial	
2	2		Stopfen mit Lamellen für Vierkantrohre, schwarz, 15x15	
3	1		Nutenstein mit Steg M6	
4	1		Scheibe ISO 7089 (DIN 125) - A 6,4	
5	1		Zylinderschraube niedriger Kopf DIN 7984 - M6x30	
6	1	68360303	Klemmhebel verstellbar M6x30, schwarz	
Option				
7-9+11-18	1	68360101	Kniepelotte Standard, Gr.1, inkl. Bezug, links	Farbe
7+8+10-18	1	68360102	Kniepelotte Standard Gr.1, inkl. Bezug, rechts	Farbe
7+8	2	68360301	Kreuzhalter für Kniepelotte standard inkl. Klemmhebel	
8	1		Klemmhebel verstellbar M6x10, schwarz	
9+11	1	68360402	Halter für Kniepelotte standard, rechts	
10+11	1	68360401	Halter für Kniepelotte standard, links	
11	2		Lamellenstopfen für Rohr Ø14x1-2	
12-14	2	68361101	Kniepelottenpolster Gr.1, inkl. Bezug	Farbe
13	2		Zylinderkopfschraube niedriger Kopf DIN 6912 - M5x14	
14	2		Sicherungsscheibe S5 - FST	
15	4	68360501	Tragwinkel für Kniepelotte seitlich Gr.1	
16-18	4	68361102	Kniepelottenpolster seitlich Gr.1, inkl. Bezug	Farbe
17	2		Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M5x10	
18	2		Sicherungsscheibe S5 - FST	
19	1		Winkelschraubendreher 6-kt SW4 L72mm	
o.B.	1		Bezug Kniepelottenpolster Gr.1	Farbe
o.B.	1		Bezug Kniepelottenpolster seitlich Gr.1	Farbe

Schwarz (.90)
 Feuerrrot (.92)
 Violett (.93)
 Türkis (.94)

Taubenblau (.95)
 Limone (.96)
 Grün (.97)

Kniepelotte Standard, Gr.2 (Kniebreite 6-11cm)

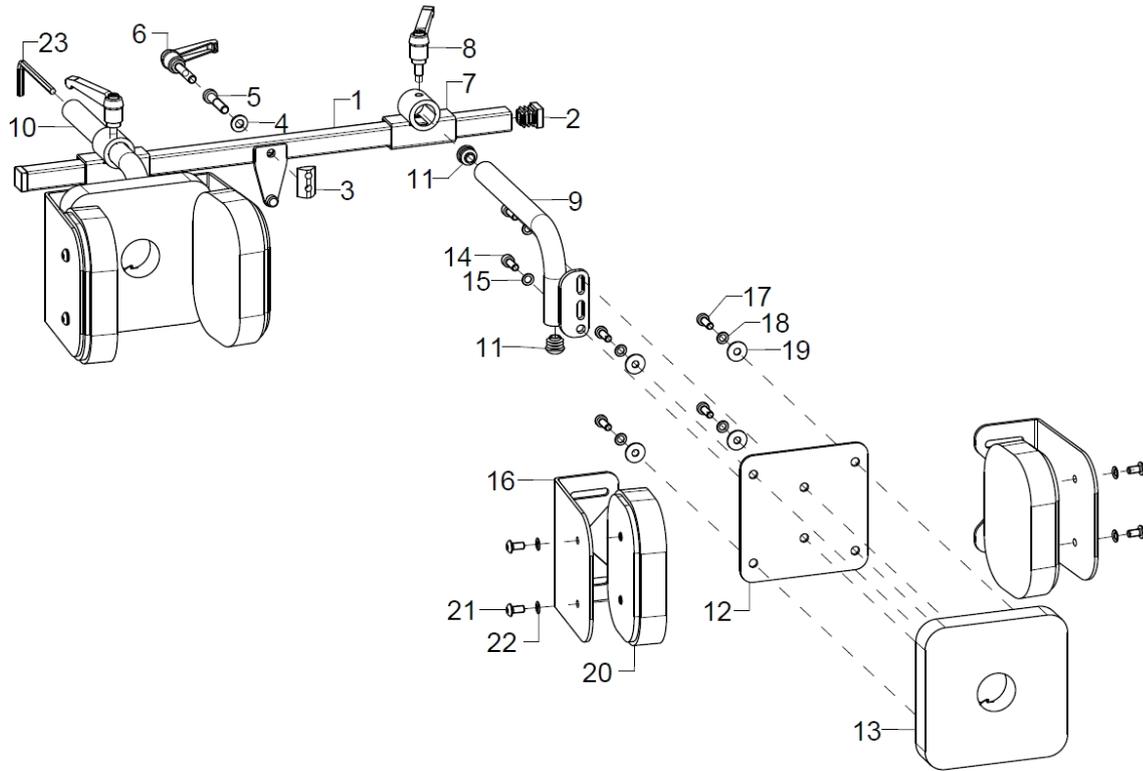

Pos.:	Menge:	Artikelnr:	Artikelbezeichnung:	Variante:
1-5(6)	1	68360210	Traversenträger Kniepelotten für Rahmengröße 1 inkl. Montagematerial	
altern.	1	68360211	Traversenträger Kniepelotten für Rahmengröße 2 inkl. Montagematerial	
altern.	1	68360212	Traversenträger Kniepelotten für Rahmengröße 3 inkl. Montagematerial	
2	2		Stopfen mit Lamellen für Vierkantrohre, schwarz, 15x15	
3	1		Nutenstein mit Steg M6	
4	1		Scheibe ISO 7089 (DIN 125) - A 6,4	
5	1		Zylinderschraube niedriger Kopf DIN 7984 - M6x30	
6	1	68360303	Klemmhebel verstellbar M6x30, schwarz	
Option				
7-9+11-22	1	68360201	Kniepelotte Standard, Gr.2, inkl. Bezug, links	Farbe
7+8+10-22	1	68360202	Kniepelotte Standard, Gr.2, inkl. Bezug, rechts	Farbe
7+8	2	68360301	Kreuzhalter für Kniepelotte standard inkl. Klemmhebel	
8	1		Klemmhebel verstellbar M6x10, schwarz	
9+11	1	68360402	Halter für Kniepelotte standard, rechts	
10+11	1	68360401	Halter für Kniepelotte standard, links	
11	2		Lamellenstopfen für Rohr Ø14x1-2	
12	2	68350502	Tragblech KNP Gr.2	
13-15	2	68361201	Kniepelottenpolster Gr.2, inkl. Bezug	Farbe
14	2		Zylinderkopfschraube niedriger Kopf DIN 6912 - M5x14	
15	2		Sicherungsscheibe S6 - FST	
16-19	4		Tragwinkel Kniepelotte seitlich	
17	2		Zylinderkopfschraube niedriger Kopf DIN 6912 - M5x14	
18	2		Sicherungsscheibe S5 - FST	
19	2		Scheibe ISO 7093 (DIN 9021) - 5,3	
20-22	4	68361202	Kniepelottenpolster seitlich Gr.2, inkl. Bezug	Farbe
21	2		Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M5x10	
22	2		Sicherungsscheibe S5 - FST	




23 1 Winkelschraubendreher 6-kt SW4 L72mm

o.B. 2 Bezug Kniepelottenpolster Gr.2 Farbe

o.B. 4 Bezug Kniepelottenpolster seitlich Gr.2 Farbe

Schwarz (..90)
Feuerrot (..92)
Violett (..93)
Türkis (..94)


Taubenblau (..95)
Limone (..96)
Grün (..97)

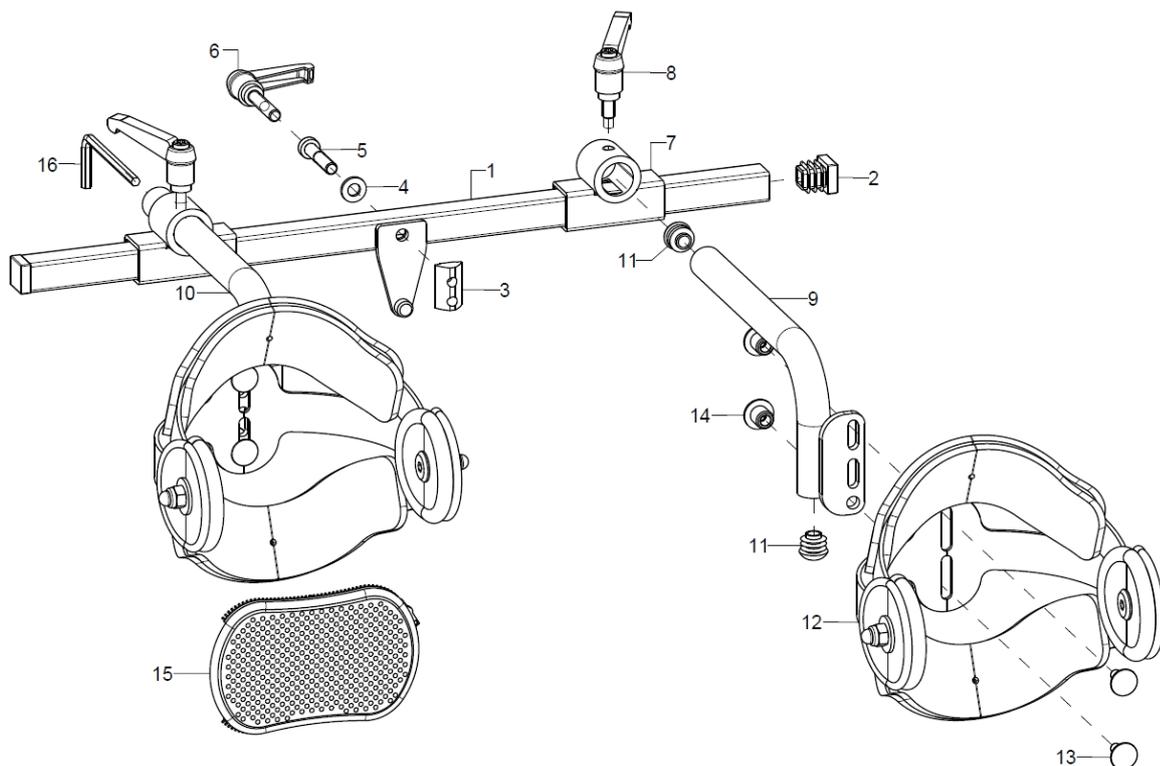Kniepelotte mit Anlagebügel


Pos.:	Menge:	Artikelnr.:	Artikelbezeichnung:	Variante:
1-5(6)	1		Traverse KNP, Rahmengröße 1, kpl.	
altern.	1		Traverse KNP, Rahmengröße 2, kpl.	
altern.	1		Traverse KNP, Rahmengröße 3, kpl.	
2	2		Stopfen mit Lamellen für Vierkantrohre, schwarz, 15x15	
3	1		Nutenstein mit Steg M6	
4	1		Scheibe ISO 7089 (DIN 125) - A 6,4	
5	1		Zylinderschraube niedriger Kopf DIN 7984 - M6x30	
6	1		Klemmhebel verstellbar M6x30, schwarz	
Option				
7-9+11-15			Kniepelotte mit Anlagebügel, links	
7+8+10-16			Kniepelotte mit Anlagebügel, rechts	
7+8	2		Kreuzhalter	
8	1		Klemmhebel verstellbar M6x30, schwarz	
9+11	1		Halter für Kniepelotte, rechts	
10+11	1		Halter für Kniepelotte, links	
11	2		Lamellenstopfen für Rohr Ø14x1-2	
12-14	2		Anlagebügel Kniepelotte Gr.1	Kniebreite 6,5 cm
altern.	2		Anlagebügel Kniepelotte Gr.2	Kniebreite 8,5 cm
altern.	2		Anlagebügel Kniepelotte Gr.3	Kniebreite 10,5 cm
13	2		Flachrundschrauben DIN 603 M5x12	
14	2		Hülsenmutter M5	
15	4		Polsterbezug KNP-Bügel, Gr.1	
altern.	4		Polsterbezug KNP-Bügel, Gr.2	
altern.	4		Polsterbezug KNP-Bügel, Gr.3	
16	1		Winkelschraubendreher 6-kt SW4 L72mm	

Rückenpelotte (nur für Rahmengröße 1 + 2)

Nur in Verbindung mit der Gesäßpelotte und nur für Rahmengrößen 1 und 2 geeignet.

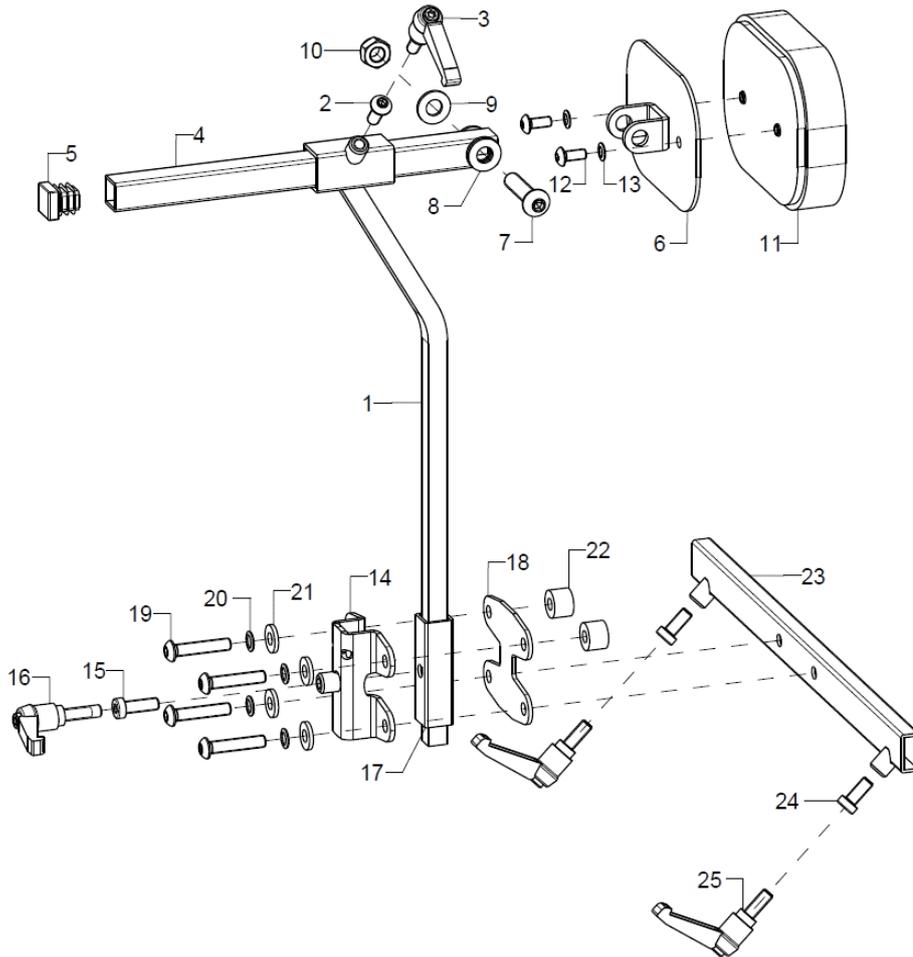

Pos.:	Menge:	Artikelnr:	Artikelbezeichnung:	Variante:
1-13+15(16)	1		Rückenpelotte, kpl.	
1+2(3)	1		Haltestange RÜP RG1/ RG2	
2	1		Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x16	
3	1		Klemmhebel verstellbar M6x15, schwarz	
Option				
4+5	1		Träger RÜP	
5	1	401107	Lamellenstopfen für Vierkant 15x15, schwarz, Set 4 Stück	
6-10	1		Gelenkplatte	
7	1		Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M8x35	
8	3		Scheibe ISO 7089 (DIN 125) - A 8,4 - PA schwarz	
9	1		Scheibe ISO 7089 (DIN 125) - A 8,4	
10	1		Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M8	
11-13	1	68361202	Kniepelottenpolster seitlich Gr.2, inkl. Bezug	Farbe
12	2		Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M5x10	
13	2		Sicherungsscheibe S5 - FST	
14+15(16)	1		Gesäßpelotte Uni-Halter	
Option				
15	1		Zylinderschraube niedriger Kopf DIN 7984 - M6x20	
16	1	403110	Klemmhebel verstellbar M6x20, schwarz	
Option				
17	1		Zwischenstück RÜP für GPK	
18-22	1		Abdeckplatte Uni-Halter	
19	4		Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x30	


20	4		Sicherungsscheibe S6 - FST	
21	4		Scheibe verstärkt Ø14/6,2x2	
22	2	35310209	Distanzbuchse Alu, schwarz Ø14x10 (Set 2 Stück)	
23+24(2 5)	1		Traverse SEP Gr.1	Becken-, bzw. Thoraxbreite 16-24 cm
altern.	1		Traverse SEP Gr.2	Becken-, bzw. Thoraxbreite 22-32 cm
24	2		Zylinderschr. niedr. Kopf DIN 7984 - M6X14	
25	1		Klemmhebel verstellbar M6x15, schwarz	
Option				

o.B.	1		Bezug Kniepelottenpolster seitlich Gr.2	Farbe
------	---	--	---	-------

Schwarz (..90)
 Feuerrot (..92)
 Violett (..93)
 Türkis (..94)

Taubenblau (..95)
 Limone (..96)
 Grün (..97)


Rückenpelotte mit Schwenkbügelrahmen

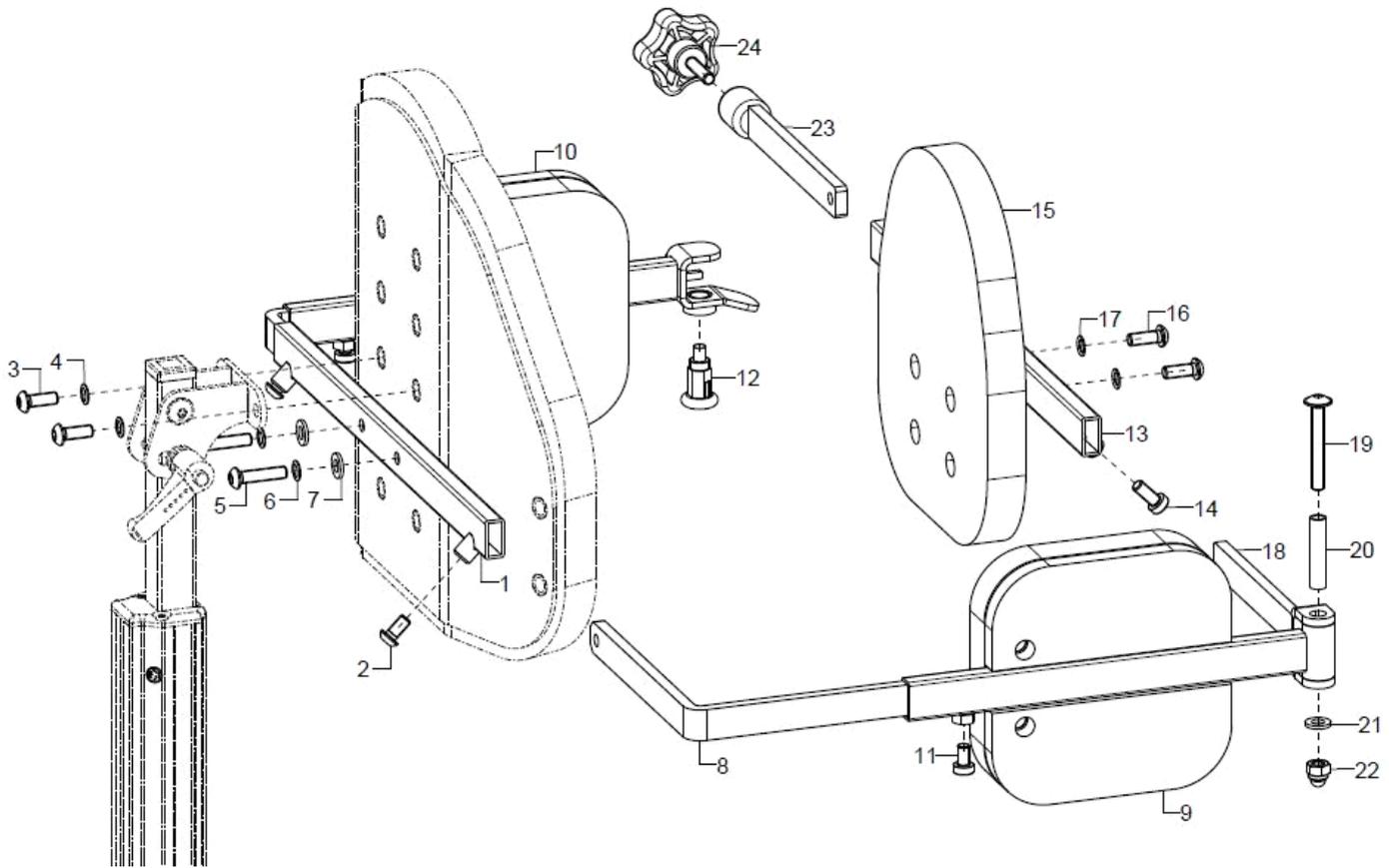

Pos.:	Menge:	Artikelnr.:	Artikelbezeichnung:	Variante:
1-25	1	68480600	Rückenpelotte mit Schwenkbügel (Größe angeben) zur Anbindung an Brustpelott kpl.mit Seitenpelotten	
1-7	1	68430301	Traverse für Seitenpelotte Größe 1 (190 mm)	Becken-, bzw. Thoraxbreite 16-24 cm (mit Schwenkbügelrahmen 18-24)
altern.	1	68430302	Traverse für Seitenpelotte Größe 2 (240 mm)	Becken-, bzw. Thoraxbreite 22-32 cm (mit Schwenkbügelrahmen 24-32)
altern.	1	68430303	Traverse für Seitenpelotte Größe 3 (300 mm)	Becken-, bzw. Thoraxbreite 28-42 cm (mit Schwenkbügelrahmen 30-42)
2	2		Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x12	
3	2		Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x16	
4	2		Sicherungsscheibe S6 - FST	
5	2		Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x25	
6	2		Sicherungsscheibe S6 - FST	
7	2		Scheibe ISO 7089 (DIN 125) - A 6,4	
8	2	68430401	Winkelhalter für Seitenpelotten Größe 1 (75x105 mm)	Becken-, bzw. Thoraxbreite 16-24 cm (mit Schwenkbügelrahmen 18-24)
altern.	2	68430402	Winkelhalter für Seitenpelotten Größe 2 (105x130 mm)	Becken-, bzw. Thoraxbreite 22-32 cm (mit Schwenkbügelrahmen 24-32)
altern.	2	68430403	Winkelhalter für Seitenpelotten Größe 3 (130x135 mm)	Becken-, bzw. Thoraxbreite 28-42 cm (mit Schwenkbügelrahmen 30-42)
9+11	1	68480101	Halter Tiefenverstellung Größe 1, links, in Kombination mit Rückenpelotte, Padgröße 9x9 cm (ohne Bezug)	bei Brustpelotte Gr.1
altern.	1	68480201	Halter Tiefenverstellung Größe 2, links, in Kombination mit Rückenpelotte, Padgröße 12x12 cm (ohne Bezug)	bei Brustpelotte Gr.2 und Gr.3
10-12	1	68480102	Halter Tiefenverstellung Größe 1, rechts, in Kombination mit Rückenpelotte, Padgröße 9x9 cm (ohne Bezug)	bei Brustpelotte Gr.1

altern.	1	68480202	Halter Tiefenverstellung Größe 2, rechts, in Kombination mit Rückenpelotte, Padgröße 12x12 cm (ohne Bezug)	bei Brustpelotte Gr.2 und Gr.3
11	1		Zylinderschraube niedriger Kopf DIN 7984 - M6x10	
12	1		Zugschnapper ø 6/M10x1x31 mit Arretierung	
13+14	1	68420801	Traverse hinten für Kurbelgesäßpelotte Gr.1	Beckenbreite 18-26 cm (mit Schwenkbügelrahmen 18-24)
altern.	1	68420802	Traverse hinten für Kurbelgesäßpelotte Gr.2	Beckenbreite 23-36 cm (mit Schwenkbügelrahmen 24-32)
altern.	1	68420803	Traverse hinten für Kurbelgesäßpelotte Gr.3	Beckenbreite 29-42 cm (mit Schwenkbügelrahmen 30-42)
14	2		Zylinderschr. niedr. Kopf DIN 7984 - M6X14	
15-17	1	68480300	Rückenpelottenpolster 12x16 cm (ohne Bezug) incl. Montagematerial	bei Brustpelotte Gr.1 und Gr.2
altern.	1	68480400	Rückenpelottenpolster 16x19 cm (ohne Bezug) incl. Montagematerial	bei Brustpelotte Gr.3
16	2		Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x16	
17	2		Sicherungsscheibe S6 - FST	
18-22	1	68420401	Breitenverstellung für Kurbelgesäßpelotte Gr. 1, links	Beckenbreite 18-26 cm
altern.	1	68420402	Breitenverstellung für Kurbelgesäßpelotte Gr. 2, links	Beckenbreite 23-42 cm
19	1		Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x45	
20	1		Buchse D8/ d6x36	
21	1		Scheibe ISO 7089 (DIN 125) - A 6,4	
22	1		Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M6	
23+24	1	68420201	Breitenverstellung für Kurbelgesäßpelotte Gr. 1, rechts inkl. Sterngriff	Beckenbreite 18-26 cm
altern.	1	68420202	Breitenverstellung für Kurbelgesäßpelotte Gr. 2, rechts inkl. Sterngriff	Beckenbreite 23-42 cm
24	1		5-Sterngriff n 40 - M6x25 PA soft	
o.Abb.	1	68480301	Bezug Kunstleder für Rückenpelotte 12x16 cm (Farbe angeben)	
altern.	1	68480401	Bezug Kunstleder für Rückenpelotte 16x19 cm	

Brustpelotte ohne Rückenpelotte

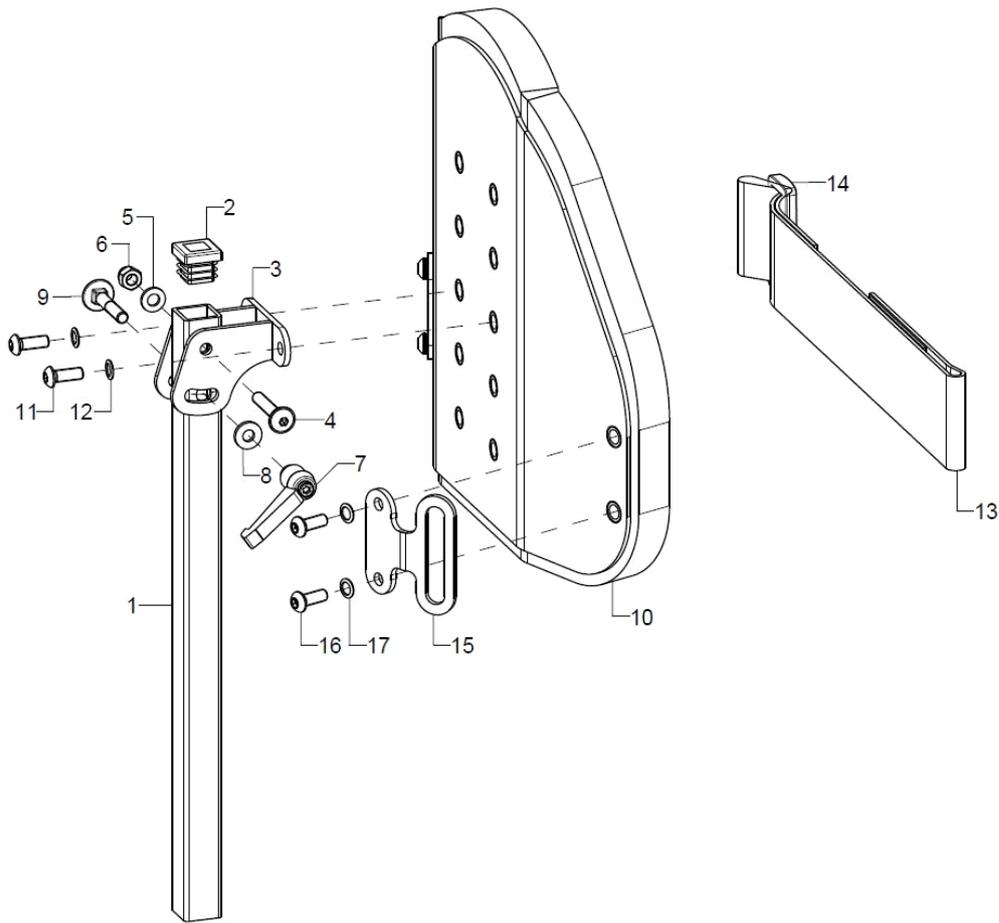

Pos.:	Menge:	Artikelnr.:	Artikelbezeichnung:	Variante:
1+2	1		Halterohr BRP-NV	
2	1		Lamellenstopfen 20x20	
3-9	1		Neigungsverstellung BRP-NV	
4	1		Linsenflanschschraube mit Innensechskant M6x35	
5	1		Scheibe ISO 7089 (DIN 125) - A 6,4	
6	1		Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M6	
7	1		Klemmhebel verstellbar M6 Innengewinde, schwarz	
8	1		Scheibe verstärkt Ø14/6,2x2	
9	1		Flachrundschraben DIN 603 M6x35	
10-12	1	68310201	Brustpelotte Gr.1, 16x17cm (ohne;Bezug) inkl. Montagematerial	
altern.	1	68310202	Brustpelotte Gr.2, 22x22cm (ohne;Bezug) inkl. Montagematerial	
altern.	1	68310203	Brustpelotte Gr.3, 29x27cm (ohne;Bezug) inkl. Montagematerial	
11	2		Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x16	
12	2		Sicherungsscheibe S6 - FST	
13+14	1		Brustgurt Gr.3	RG 1 ohne seitr. Brustpelotte, RG 3 mit seitr. Brustpelotten
o.B.	1		Brustgurt Gr.4	RG 2
o.B.	1		Brustgurt Gr.5	RG 3
14	1		Stegschnalle 50mm	
15-17	2		Gurthalter SEP	
16	4		Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x16	
17	5		Sicherungsscheibe S6 - FST	




o.B.	1	68310204	Bezug Kunstleder für Brustpelotte Gr.1; 16x17cm	Farbe
o.B.	1	68310205	Bezug Kunstleder für Brustpelotte Gr.2; 22x22cm	Farbe
o.B.	1	68310206	Bezug Kunstleder für Brustpelotte Gr.3; 29x27cm	Farbe

Schwarz (.90)
Feuerrot (.92)
Violett (.93)
Türkis (.94)

Taubenblau (.95)
Limone (.96)
Grün (.97)

Gesäßpelotte

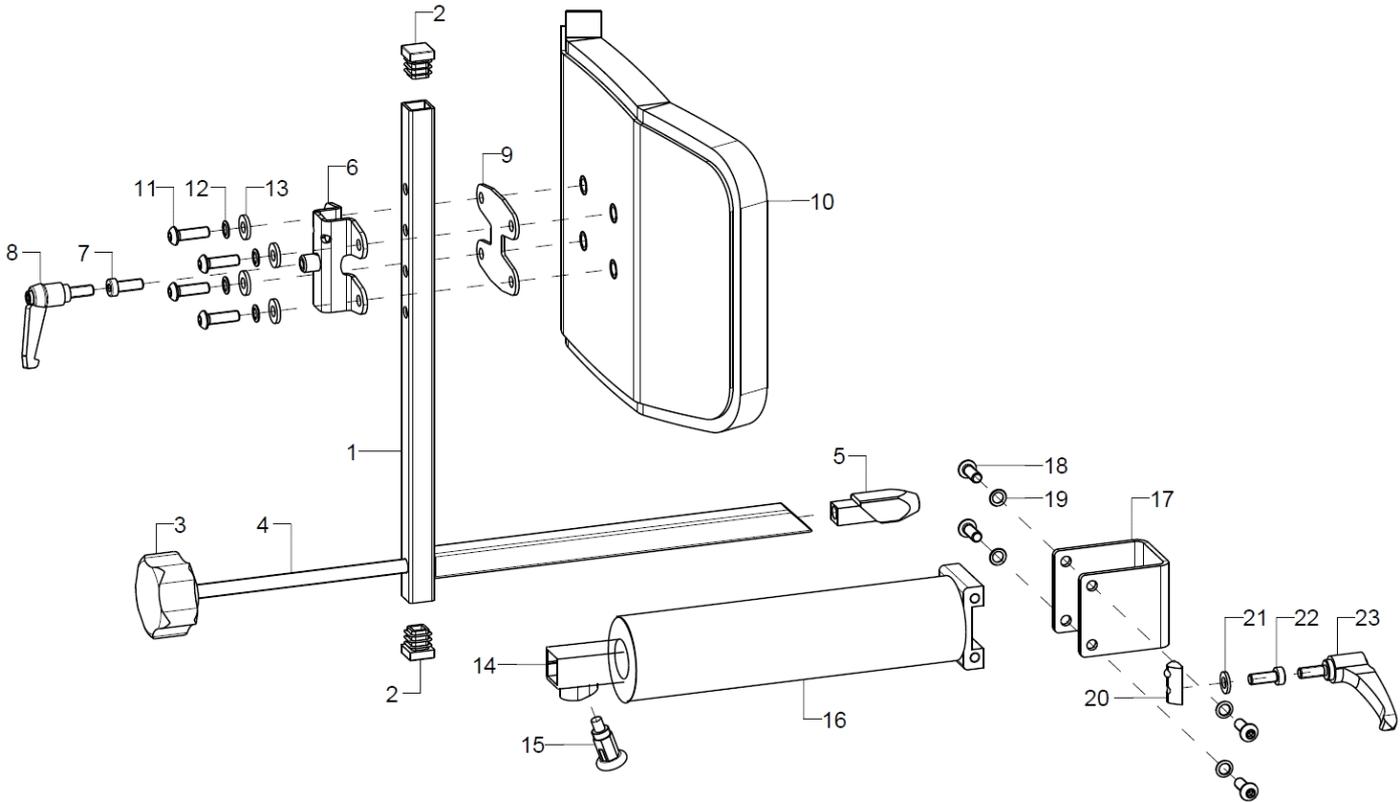

Pos.:	Menge:	Artikelnr.:	Artikelbezeichnung:	Variante:
1-5	1	68420601	Tiefenverstellung GEP Gr.1 inkl. Sterngriff, Gewindestange und Keil	bei Pelottengröße 1
altern.	1	68420602	Tiefenverstellung GEP Gr.2 inkl. Sterngriff, Gewindestange und Keil	bei Pelottengröße 2 + 3
2	2		Stopfen mit Lamellen für Vierkantrohre, schwarz, 15x15	
3+4	1		5-Sterngriff ø50 - M8 Innengewinde , schwarz	
4	1		Gewindestange GEP Gr.1	bei Tiefenverstellung Gr.1
altern.	1		Gewindestange GEP Gr.2	bei Tiefenverstellung Gr.2
5	1		Keil GEP	
6+7(8)+9	1	68420619	Gesäßpelotte-Unihalter	
7	1		Zylinderschraube niedriger Kopf DIN 7984 - M6x16	
8	1		Klemmhebel verstellbar M6x15, schwarz	
Option				
9	1		Abdeckplatte Uni-Halter	
10-13	1	68420505	Polster Gesäßpelotte Gr. 1 (16x16 cm) inkl. Bezug	Farbe Kunstlederbezug
altern.	1	68420506	Polster Gesäßpelotte Gr. 2 (22x18 cm) inkl. Bezug	Farbe Kunstlederbezug
altern.	1	68420507	Polster Gesäßpelotte Gr. 3 (30x19,5 cm) inkl. Bezug	Farbe Kunstlederbezug
11	4		Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x20	
12	4		Sicherungsscheibe S6 - FST	
13	4		Scheibe verstärkt Ø14/6,2x2	
14-16	1	68420501	Anbindung GEP Gr.1	bei Pelottengröße 1
altern.	1	68420502	Anbindung GEP Gr.2	bei Pelottengröße 2 + 3
15	1	690101	Zugschnapper ø6/M10x1x31 mit Arretierung	
16	1	68420614	Schrittpolster Gr.1, 15 cm	bei Pelottengröße 1, Farbe
altern.	1	68420615	Schrittpolster Gr.2, 20 cm	bei Pelottengröße 2 + 3, Farbe

17- 22(23)	1	Schelle für Schrittpolster
18	4	Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x12
19	4	Sicherungsscheibe S6 - FST
20	1	Nutenstein mit Steg M6
21	1	Scheibe ISO 7089 (DIN 125) - A 6,4
22	1	Zylinderschraube niedriger Kopf DIN 7984 - M6x16
23	1	Klemmhebel verstellbar M6x15, schwarz
Option		


o.B.	1	Bezug Gesäßpelotte Gr.1 16x16cm	Farbe
o.B.	1	Bezug Gesäßpelotte Gr.2 22x18cm	Farbe
o.B.	1	Bezug Gesäßpelotte Gr.3 30x19,5cm	Farbe

Schwarz (..90)
 Feuerrot (..92)
 Violett (..93)
 Türkis (..94)

Taubenblau (..95)
 Limone (..96)
 Grün (..97)

Gesäßpelotte mit Kurbel (Linearteil)


Nicht in Kombination mit Rückenpelotte und/oder seitlichen Beckenpelotten

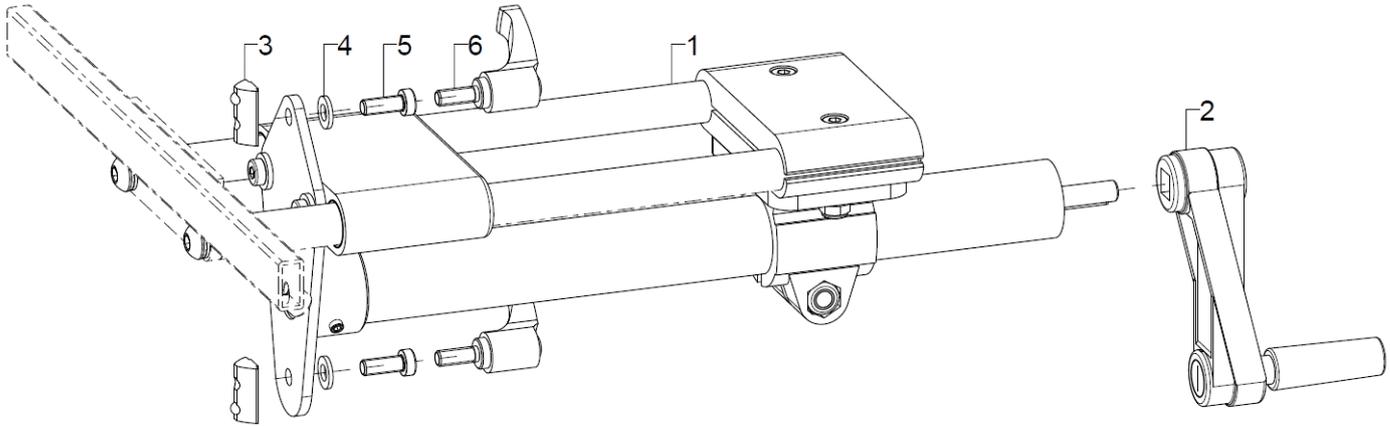

Pos.:	Menge:	Artikelnr:	Artikelbezeichnung:	Variante:
1-5(6)	1	68420113	Lineareinheit inkl. Handkurbel und Montagematerial	
2	1		Handkurbel mit Griff umlegbar	
3-5(6)	2		Nutenstein mit Steg M6	
4	1		Scheibe ISO 7089 (DIN 125) - A 6,4	
5	1		Zylinderschraube niedriger Kopf DIN 7984 - M6x16	
6	1		Klemmhebel verstellbar M6x15, schwarz	
Option				

Gesäßpelotte mit Kurbel (Pelottenteil)

Nicht in Kombination mit Rückenpelotte und/oder seitlichen Beckenpelotten

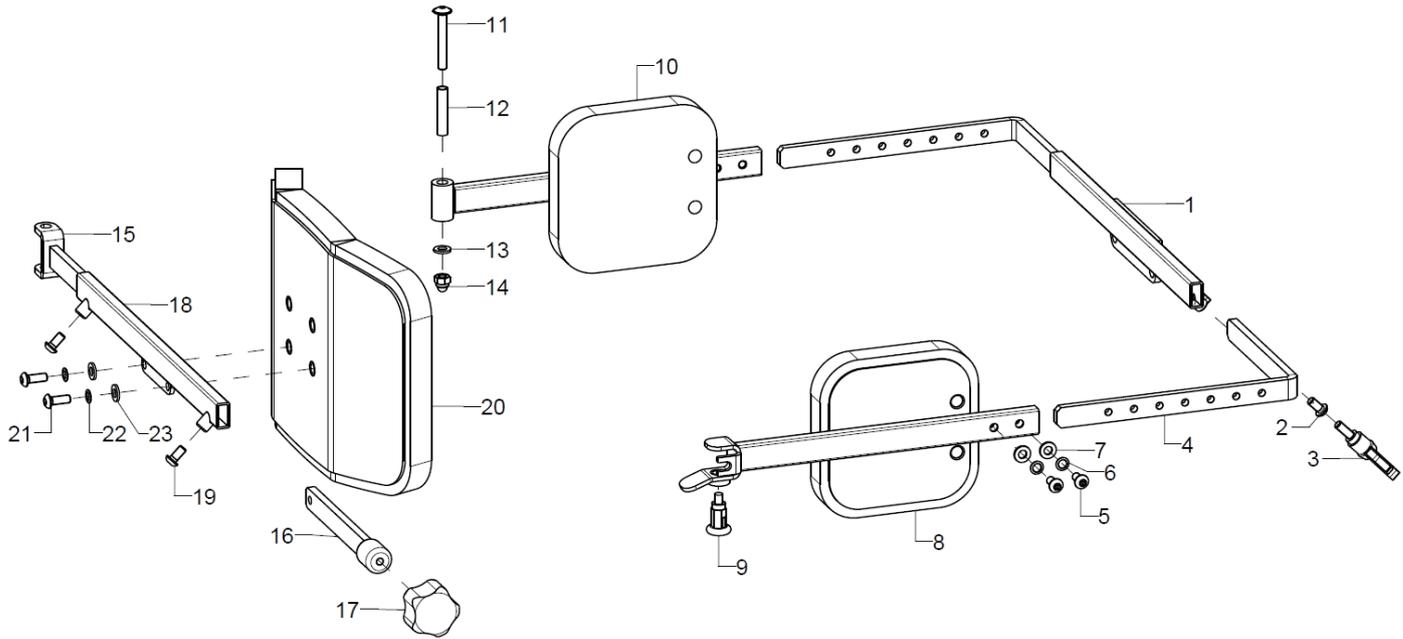

Pos.:	Menge:	Artikelnr.:	Artikelbezeichnung:	Variante:
1-23	1	68422101	Gesäßpelotte für Kurbelbedienung und Bügelhalterung Größe 1 inkl. Seitliche Gesäßpelotten 9x9 cm	Beckentiefe 13-24 cm und Beckenbreite 18-26 cm, Farbe Bezug angeben
altern.	1	68423201	Gesäßpelotte für Kurbelbedienung und Bügelhalterung Größe 2 inkl. Seitliche Gesäßpelotten 12x12 cm	Beckentiefe 18-32 cm und Beckenbreite 23-36 cm, Farbe Bezug angeben
altern.	1	68424201	Gesäßpelotte für Kurbelbedienung und Bügelhalterung Größe 3 inkl. Seitliche Gesäßpelotten 12x12 cm	Beckentiefe 18-32 cm und Beckenbreite 29-42 cm, Farbe Bezug angeben
1-2(3)	1	68420101	Traverse vorne für Kurbelgesäßpelotte Gr.1	Beckenbreite 18-26 cm
altern.	1	68420102	Traverse vorne für Kurbelgesäßpelotte Gr.2	Beckenbreite 23-36 cm
altern.	1	68420103	Traverse vorne für Kurbelgesäßpelotte Gr.3	Beckenbreite 29-42 cm
2	2		Zylinderschr. niedr. Kopf DIN 7984 - M6X14	
3	2		Klemmhebel verstellbar M6x15, schwarz	
Option				
4-7	2	68420701	Winkelhalter für Seitenpelotten Gr. 1 in Kombi. mit Kurbelgesäßpelotte	Beckenbreite 18-26 cm
altern.	2	68420702	Winkelhalter für Seitenpelotten Gr. 2 in Kombi. mit Kurbelgesäßpelotte	Beckenbreite 23-42 cm
5	2		Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x12	
6	2		Sicherungsscheibe S6 - FST	
7	2		Scheibe ISO 7089 (DIN 125) - A 6,4	
8+9	1	68420301	Tiefenverstellung für seidl. Pelotten Gr. 1, rechts in Kombi. mit Kurbelgesäßpelotte	Beckentiefe 13-24 cm
altern.	1	68420302	Tiefenverstellung für seidl. Pelotten Gr. 2, rechts in Kombi. mit Kurbelgesäßpelotte	Beckentiefe 18-32 cm
9	1		Zugschnapper ø 6/M10x1x31 mit Arretierung	




10-14	1	68420503	Tiefenverstellung für seitr. Pelotten Gr. 1, links in Kombi. mit Kurbelgesäßpelotte	Beckentiefe 13-24 cm
altern.	1	68420504	Tiefenverstellung für seitr. Pelotten Gr. 2, links in Kombi. mit Kurbelgesäßpelotte	Beckentiefe 18-32 cm
11	1		Linsenflanschschraube mit Innensechskant M6x45	
12	1		Buchse D8/ d6x36	
13	1		Scheibe ISO 7089 (DIN 125) - A 6,4	
14	1		Sechsk.-Hutmutter niedr. Form mit Klemmt. DIN 986 - M6	
15	1	68420401	Breitenverstellung für Kurbelgesäßpelotte Gr. 1, links	Beckenbreite 18-26 cm
altern.	1	68420402	Breitenverstellung für Kurbelgesäßpelotte Gr. 2, links	Beckenbreite 23-42 cm
16+17	1	68420201	Breitenverstellung für Kurbelgesäßpelotte Gr. 1, rechts inkl. Sterngriff	Beckenbreite 18-26 cm
altern.	1	68420202	Breitenverstellung für Kurbelgesäßpelotte Gr. 2, rechts inkl. Sterngriff	Beckenbreite 23-42 cm
17	1	653106	5-Sterngriff ø40-M6x25 soft incl. Montagematerial (Sattelscheibe, Scheibe)	
18+19	1	68420801	Traverse hinten für Kurbelgesäßpelotte Gr.1	Beckenbreite 18-26 cm (mit Schwenkbügelrahmen 18-24)
altern.	1	68420802	Traverse hinten für Kurbelgesäßpelotte Gr.2	Beckenbreite 23-36 cm (mit Schwenkbügelrahmen 24-32)
altern.	1	68420803	Traverse hinten für Kurbelgesäßpelotte Gr.3	Beckenbreite 29-42 cm (mit Schwenkbügelrahmen 30-42)
19	2		Zylinderschr. niedr. Kopf DIN 7984 - M6X14	
20-23	1	68420505	Polster Gesäßpelotte Gr. 1 (16x16 cm) inkl. Bezug	Farbe Kunstlederbezug
altern.	1	68420506	Polster Gesäßpelotte Gr. 2 (22x18 cm) inkl. Bezug	Farbe Kunstlederbezug
altern.	1	68420507	Polster Gesäßpelotte Gr. 3 (30x19,5 cm) inkl. Bezug	Farbe Kunstlederbezug
21	2		Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x16	
22	2		Sicherungsscheibe S6 - FST	
23	2		Scheibe ISO 7089 (DIN 125) - A 6,4	
o.B.	1		Bezug Gesäßpelotte Gr.1 16x16cm	Farbe
o.B.	1		Bezug Gesäßpelotte Gr.2 22x18cm	Farbe
o.B.	1		Bezug Gesäßpelotte Gr.3 30x19,5cm	Farbe

Schwarz (..90)
Feuerrot (..92)
Violett (..93)
Türkis (..94)

Taubenblau (..95)
Limone (..96)
Grün (..97)

Seitliche Brustpelotten / seitliche Gesäßpelotten

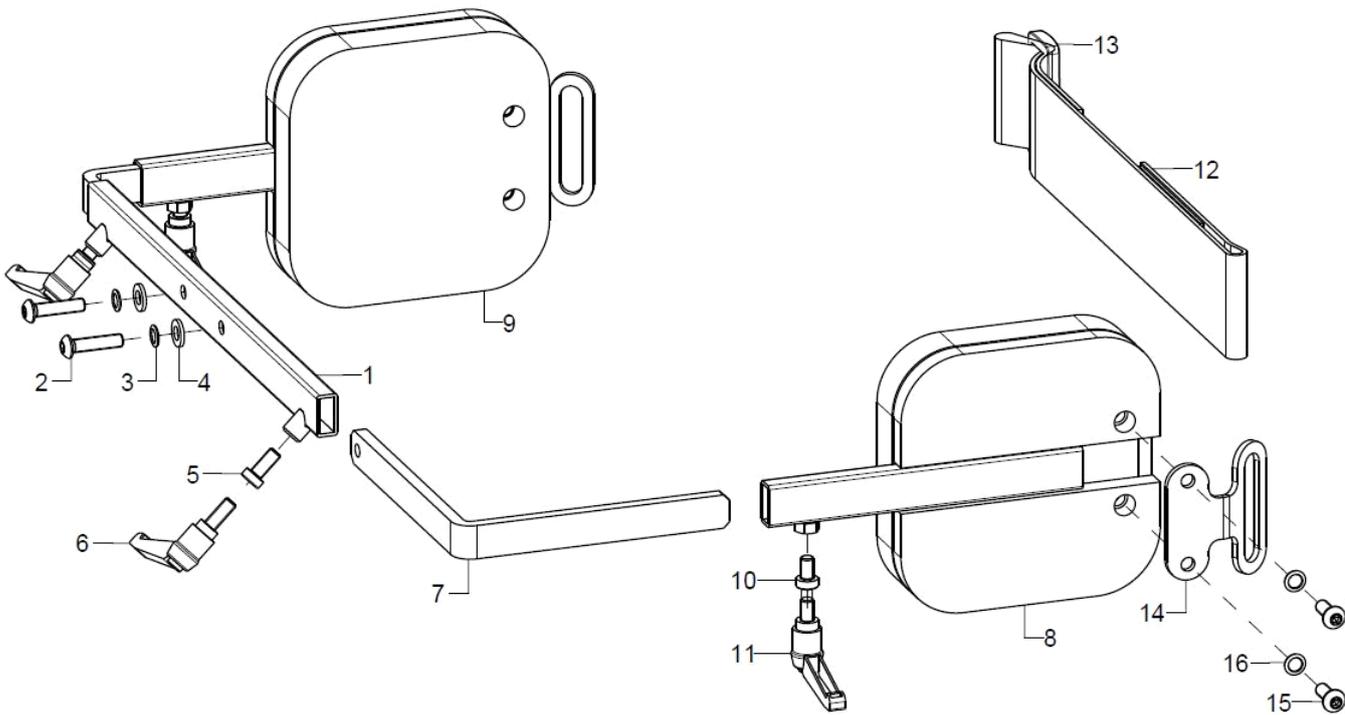

Pos.:	Menge:	Artikelnr.:	Artikelbezeichnung:	Variante:
1-5(6)	1	68430301	Traverse für Seitenpelotte Größe 1 (190 mm)	Becken-, bzw. Thoraxbreite 16-24 cm (mit Schwenkbügelrahmen 18-24)
altern.	1	68430302	Traverse für Seitenpelotte Größe 2 (240 mm)	Becken-, bzw. Thoraxbreite 22-32 cm (mit Schwenkbügelrahmen 24-32)
altern.	1	68430303	Traverse für Seitenpelotte Größe 3 (300 mm)	Becken-, bzw. Thoraxbreite 28-42 cm (mit Schwenkbügelrahmen 30-42)
2	2		Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x25	Bei Brustpelotte
altern.	4		Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x30	Bei Gesäßpelotte
3	2(4)		Sicherungsscheibe S6 - FST	
o.B.	2		Scheibe ISO 7089 (DIN 125) - A 6,4	Bei Brustpelotte
altern.	4		Scheibe verstärkt Ø14/6,2x2	Bei Gesäßpelotte
o.B.	2	35310209	Distanzbuchse Alu, schwarz Ø14x10 (Set 2 Stück)	
5	2		Zylinderschr. niedr. Kopf DIN 7984 - M6X14	
6	2		Klemmhebel verstellbar M6x15, schwarz	
Option				
7	2	68430401	Winkelhalter für Seitenpelotten Größe 1 (75x105 mm)	Becken-, bzw. Thoraxbreite 16-24 cm (mit Schwenkbügelrahmen 18-24)
altern.	2	68430402	Winkelhalter für Seitenpelotten Größe 2 (105x130 mm)	Becken-, bzw. Thoraxbreite 22-32 cm (mit Schwenkbügelrahmen 24-32)
altern.	2	68430403	Winkelhalter für Seitenpelotten Größe 3 (130x135 mm)	Becken-, bzw. Thoraxbreite 28-42 cm (mit Schwenkbügelrahmen 30-42)
8+10(11)	1	68430101	Halter für Seitenpelotte Gr.1, links, inkl. Polsterteile 9x9 cm (ohne Bezug)	Becken-, bzw. Thoraxbreite 16-24 cm
altern.	1	68430201	Halter für Seitenpelotte Gr.2, links, inkl. Polsterteile 12x12 cm (ohne Bezug)	Becken-, bzw. Thoraxbreite 22-42 cm
9+10(11)	1	68430102	Halter für Seitenpelotte Gr.1, rechts, inkl. Polsterteile 9x9 cm (ohne Bezug)	Becken-, bzw. Thoraxbreite 16-24 cm




altern.	1	68430202	Halter für Seitenpelotte Gr.2, rechts, inkl. Polsterteile 12x12 cm (ohne Bezug)	Becken-, bzw. Thoraxbreite 22-42 cm
10	1		Zylinderschraube niedriger Kopf DIN 7984 - M6x10	
11	1		Klemmhebel verstellbar M6x10, schwarz	
Option				
12+13	1	68310601	Brustgurt Gr.1	RG 1
o.B.	1	68310602	Brustgurt Gr.2	RG 2
o.B.	1	68310603	Brustgurt Gr.3	RG 1 ohne seidl. Brustpelotte, RG 3 mit seidl. Brustpelotten
13	1		Stegschnalle 50mm	
14	4	68430104	Gurthalter inkl. Montagmaterial für Brustgurte	
15	4		Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x12	
16	4		Sicherungsscheibe S6 - FST	
o.B.	2	68431001	Bezug Kunstleder für Pelotte Gr.1, 9x9cm	Farbe
o.B.	2	68431002	Bezug Kunstleder für Pelotte Gr.2, 12x12cm	Farbe

Schwarz (..90)
Feuerrot (..92)
Violett (..93)
Türkis (..94)

Taubenblau (..95)
Limone (..96)
Grün (..97)

Seitliche Beckenpelotten

Nicht möglich in Verbindung mit Gesäßpelotte mit Kurbel ODER seitlichen Gesäßpelotten.

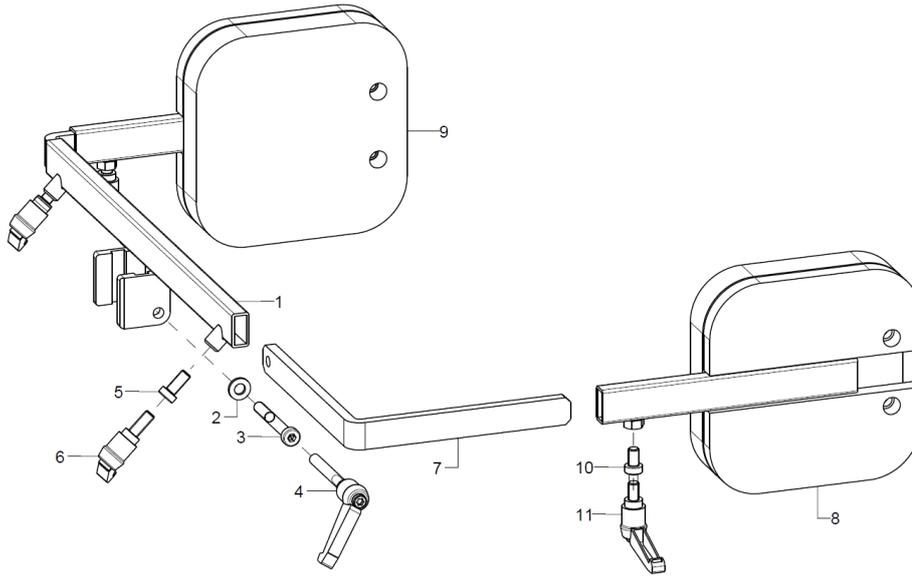


Pos.:	Menge:	Artikelnr.:	Artikelbezeichnung:	Variante:
1-3(4)+5(6)	1	68440101	Traversenrohr für Beckenpelotte 190mm, inkl. Montagezubehör	Beckenbreite 16-24 cm
altern.	1	68440102	Traversenrohr für Beckenpelotte 240mm, inkl. Montagezubehör	Beckenbreite 22-32 cm
altern.	1	68440103	Traversenrohr für Beckenpelotte 300mm, inkl. Montagezubehör	Beckenbreite 28-42 cm
2	1		Scheibe ISO 7089 (DIN 125) - A 6,4	
3	1		Zylinderschraube niedriger Kopf DIN 7984 - M8x50	
4	1		Klemmhebel verstellbar M6x50, schwarz	
Option				
5	2		Zylinderschr. niedr. Kopf DIN 7984 - M6X14	
6	2		Klemmhebel verstellbar M6x15, schwarz	
Option				
7	2	68430401	Winkelhalter für Seitenpelotten Größe 1 (75x105 mm)	Becken-, bzw. Thoraxbreite 16-24 cm (mit Schwenkbügelrahmen 18-24)
altern.	2	68430402	Winkelhalter für Seitenpelotten Größe 2 (105x130 mm)	Becken-, bzw. Thoraxbreite 22-32 cm (mit Schwenkbügelrahmen 24-32)
altern.	2	68430403	Winkelhalter für Seitenpelotten Größe 3 (130x135 mm)	Becken-, bzw. Thoraxbreite 28-42 cm (mit Schwenkbügelrahmen 30-42)
8+10(11)	1	68430101	Halter für Seitenpelotte Gr.1, links, inkl. Polsterteile 9x9 cm (ohne Bezug)	Becken-, bzw. Thoraxbreite 16-24 cm
altern.	1	68430201	Halter für Seitenpelotte Gr.2, links, inkl. Polsterteile 12x12 cm (ohne Bezug)	Becken-, bzw. Thoraxbreite 22-42 cm
9+10(11)	1	68430102	Halter für Seitenpelotte Gr.1, rechts, inkl. Polsterteile 9x9 cm (ohne Bezug)	Becken-, bzw. Thoraxbreite 16-24 cm
altern.	1	68430202	Halter für Seitenpelotte Gr.2, rechts, inkl. Polsterteile 12x12 cm (ohne Bezug)	Becken-, bzw. Thoraxbreite 22-42 cm
10	1		Zylinderschraube niedriger Kopf DIN 7984 - M6x10	
11	1		Klemmhebel verstellbar M6x10, schwarz	
o.B.		68431001	Bezug Kunstleder für Pelotte Gr.1, 9x9cm	Farbe
o.B.		68431002	Bezug Kunstleder für Pelotte Gr.2, 12x12cm	Farbe

Schwarz (..90)
 Feuerrot (..92)
 Violett (..93)
 Türkis (..94)

Taubenblau (..95)
 Limone (..96)
 Grün (..97)

Spinenpelotte 2-teilig


Nur in Verbindung mit Beckenpelotte oder Gesäßpelotte mit Kurbel

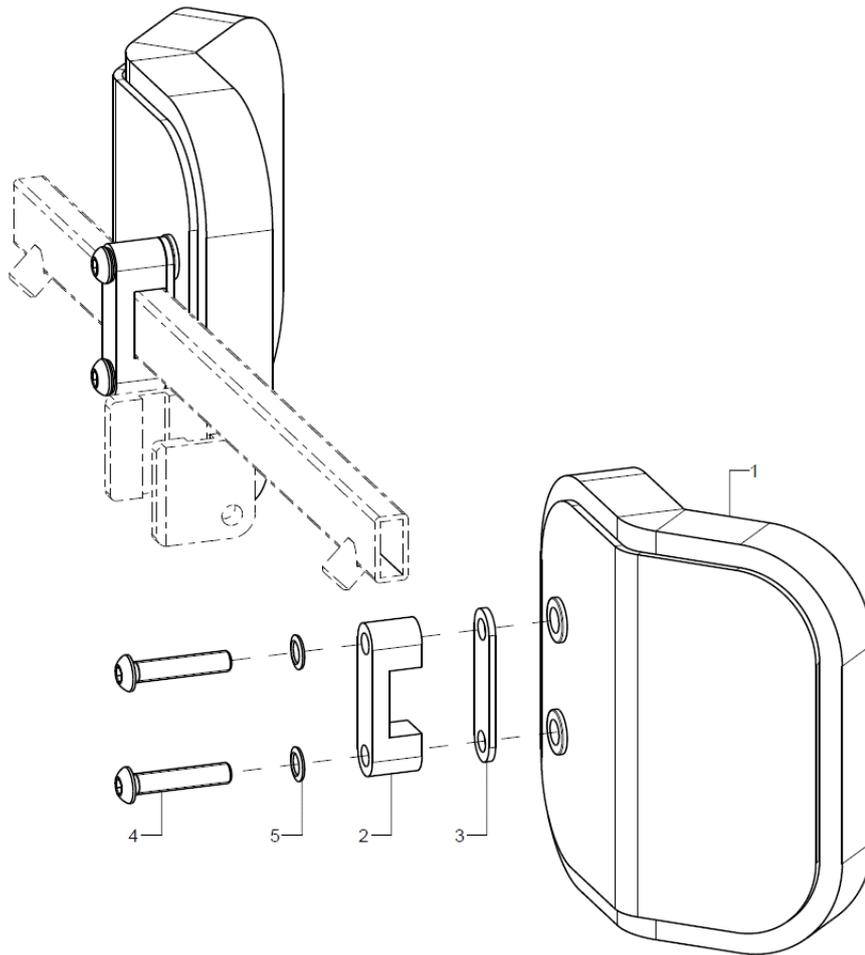

Pos.:	Menge:	Artikelnr.:	Artikelbezeichnung:	Variante:
1-5	2		Blechteil SPIP Gr.1 kpl., inkl. Polsterteil 9x10 cm	Bei Becken-/Gesäßpelotte Gr.1
altern.	2		Blechteil SPIP Gr.2 kpl., inkl. Polsterteil 13x13 cm	Bei Becken-/Gesäßpelotte Gr.2 oder 3
2	1	59760110	Führungsglasche inkl. Montagezubehör	
3	1		Distanzscheibe SPIP	
4	2		Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x30	
5	2		Sicherungsscheibe S6 - FST	
o.B.	2		Bezug Spinenpelotte Gr.1 9x10 cm	Farbe
o.B.	2		Bezug Spinenpelotte Gr.2 13x13 cm	Farbe


Schwarz (..90)
 Feuerrot (..92)
 Violett (..93)
 Türkis (..94)

Taubenblau (..95)
 Limone (..96)
 Grün (..97)

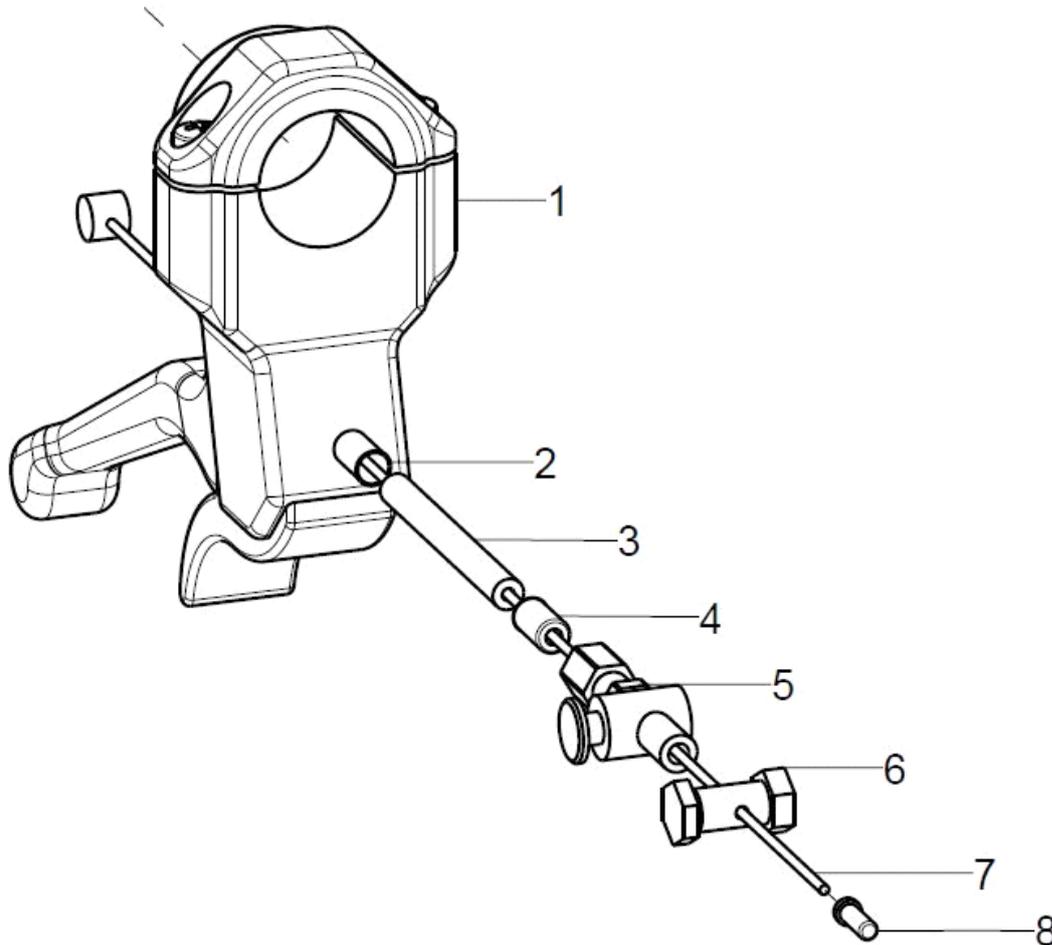
Bremsgriff und Bowdenzug für Trommelbremse


Pos.:	Menge:	Artikelnr.:	Artikelbezeichnung:	Variante:
1-8	1	352016	Handbremshebel kpl. mit Bedieneinheit (Hülle, Seilzug, Anschlusssteile, Endkappen)	
1	1	352010	Handbremshebel schwarz, feststellbar	
2-8	2	352006	Bremsseilzug $\varnothing 1,5 \times 2250$ mm mit Hülle, Einstellschraube, Klemmschraube, Abschlusshülsen und Endkappe	
2	1		Endkappe für Bowdenzug	
3	1		Außenhülle für Bremszug schwarz, 150 cm lang	
4	1		Abschlusshülse gedreht aus Metall, $\varnothing 5$, Endkappen	
5	1		Einstellschraube M6x40 mm inkl. Klemmschraube	
6	1		Klemmschraube für Bowdenzug	
7	1		Innenzug $\varnothing 1,5 \times 2250$ mm mit Doppelnippel	
8	1		Endkappe für Innenzüge $\varnothing 1-1,5$ mm	

Bremsgriff am Therapietisch

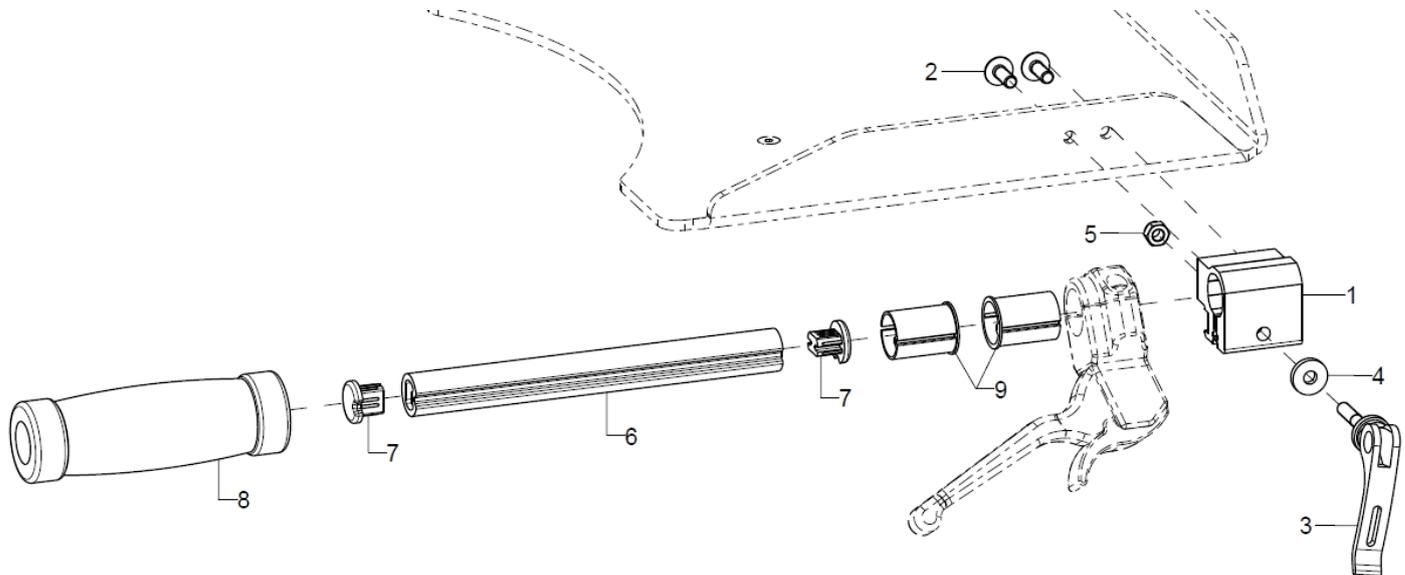


Pos.:	Menge:	Artikelnr:	Artikelbezeichnung:	Variante:
1-5	1	35590110	Aufnahmehalter incl. Exzenterspanner und Montagematerial für Bremsgriff am Therapietisch	
2	2		Linsenflanschschraube mit Innensechskant M6x16	
3	1	652225	Exzenterspanner Länge 35, M6x22, schwarz	
4	1		Scheibe DIN 7349 - 6,4	
5	1		Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M6	
6-9	1	35590101	Aufnahmerohr mit Polsterung und Halterung für Aufnahmerohr mit Polsterung und Halterung für Bremshebel am Therapietisch	
7	2	620105	Stopfen für Profilrohr	
8	1	655004	Griff Moosgummi 12cm	
9	2	352011	Klemmbuchse d/D=20/22 (30 mm) für Handbremshebel bei Profilrohr	

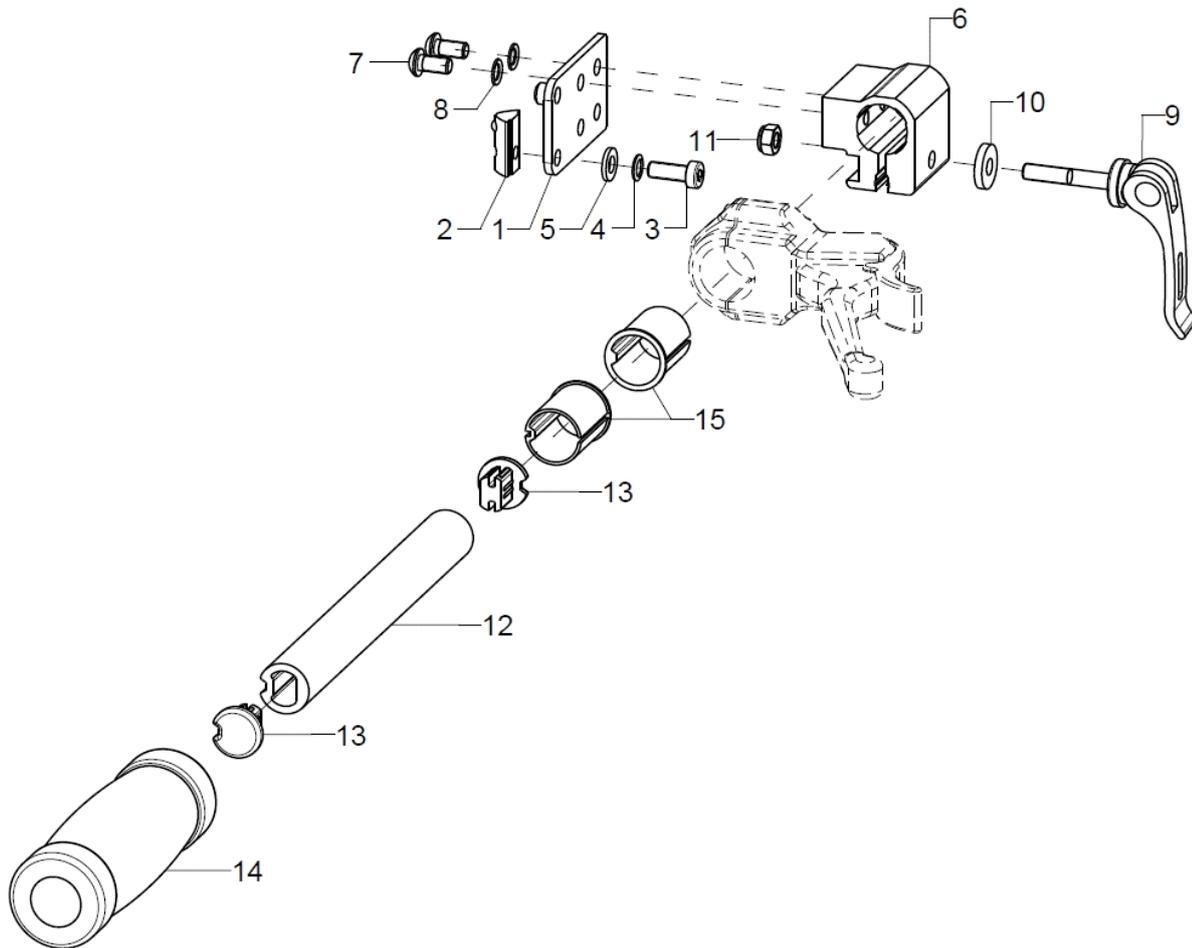Bremsgriff an der Mittelsäule


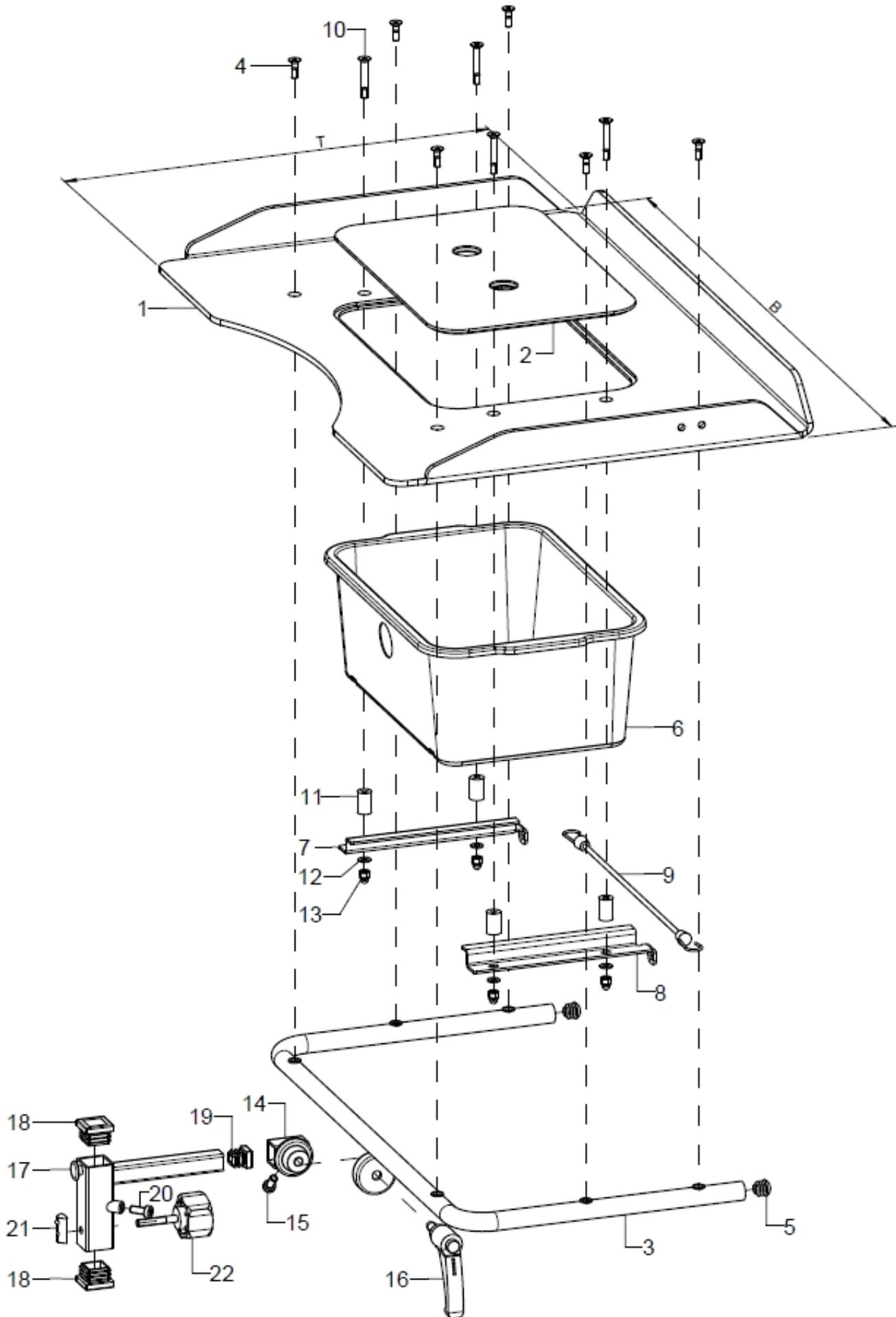
Pos.:	Menge:	Artikelnr.:	Artikelbezeichnung:	Variante:
1-5	1		Bremshalter	
2	1		Nutenstein mit Steg M6	
3	1		Zylinderschraube niedriger Kopf DIN 7984 - M6x16	
4	1		Sicherungsscheibe S6 - FST	
5	1		Scheibe ISO 7089 (DIN 125) - A 6,4	
6-11	1		Aufnahme klemmbar ohne Nase	
7	2		Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x12	
8	2		Sicherungsscheibe S6 - FST	
9	1	652225	Exzenterspanner Länge 35, M6x22, schwarz	
10	1		Scheibe DIN 7349 - 6,4	
11	1		Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M6	
12-15	1		Rohr für Handbremshebel	
13	2	620105	Stopfen für Profilrohr	
14	1	655004	Griff Moosgummi 12cm	
15	2	352011	Klemmbuchse d/D=20/22 (30 mm) für Handbremshebel bei Profilrohr	

Therapietisch

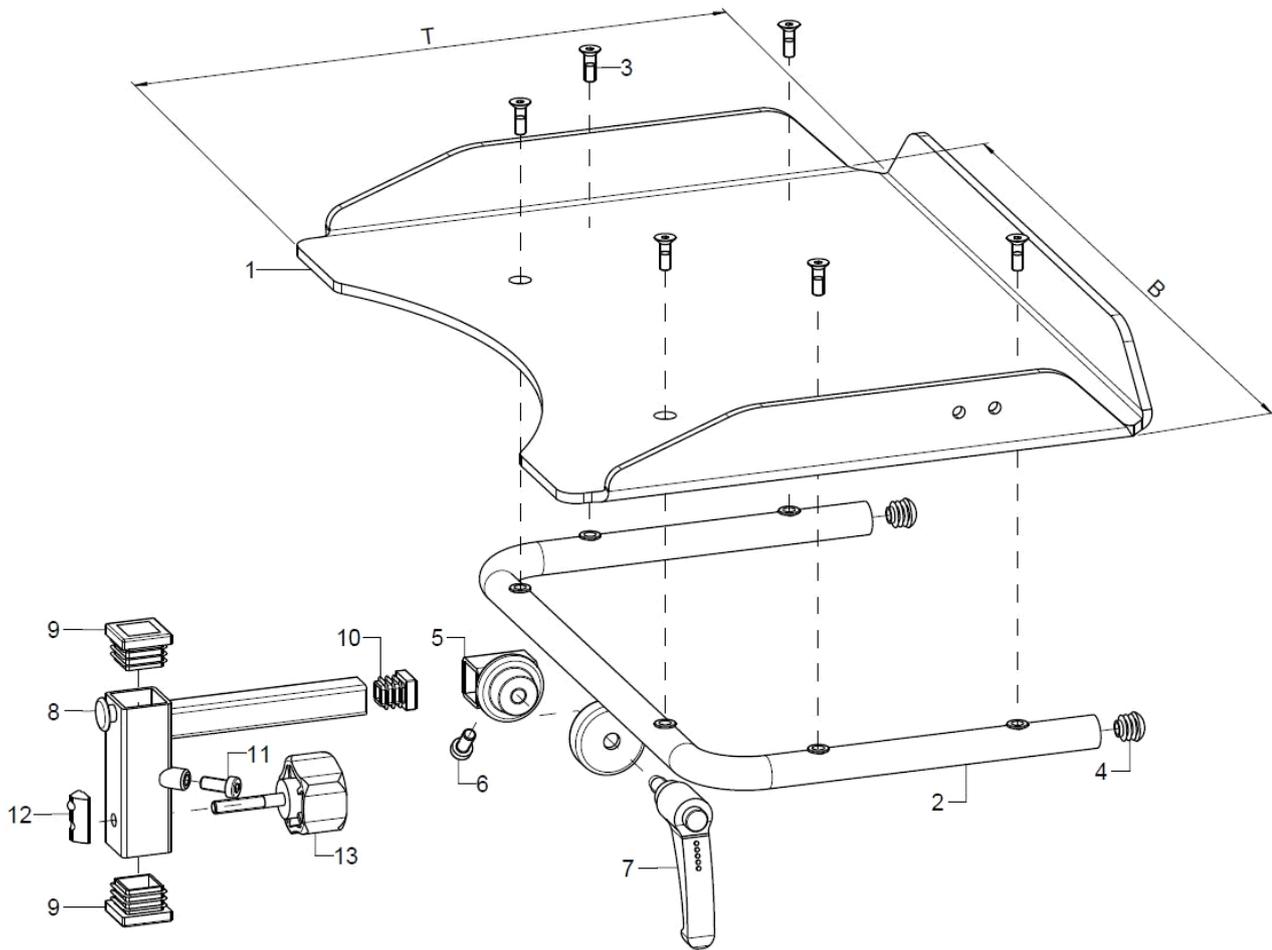

Pos.:	Menge:	Artikelnr.:	Artikelbezeichnung:	Variante:
1	1	920621	Therapietisch SF Gr. 0 (B39xT30)	
altern.	1	920622	Therapietisch SF Gr. 1 (B45xT30)	
altern.	1	920623	Therapietisch SF Gr. 2 (B59xT38)	
2-13	1	920620	Therapietischhalterung kpl.	Größe angeben: 331/480
2-7	1	920901	Therapietischhalterung U-Form 330x205 mm, verchromt incl. Stopfen, Montageschrauben	Variante 331 bei Gr.0+1
o.B.	1	920904	Therapietischhalterung U-Form 480x260 mm, verchromt incl. Stopfen, Montageschrauben	Variante 480 bei Gr.2
3	6		Senkschraube mit Innensechskant ISO 10642 (DIN 7991) M5x16	
4	2		Stopfen mit Lamellen für Rohr $\varnothing 22 \times 1-2$, schwarz	
5-7	1	920629	Konusverstellung Therapietisch	
6	1		Zylinderschr. niedr. Kopf DIN 7984 - M6X14	
7	1	650050	Klemmhebel M8x16, schwarz	
8-13	1	920630	Anbindungswinkel Therapietisch	
9	2		Lamellenstopfen Vierkant 25x25	
10	1		Stopfen mit Lamellen für Vierkantrohre, schwarz, 15x15	
11	1		Zylinderschr. niedr. Kopf DIN 7984 - M6X14	
12	1		Nutenstein mit Steg M6	
13	1		5-Sterngriff $\varnothing 40$ - M6x35 Außengewinde, schwarz	

Therapietisch mit Therapiemulde



Pos.:	Menge:	Artikelnr:	Artikelbezeichnung:	Variante:
1+2	1	920631	Therapietisch SFA Gr. 0 (B39x30)	
altern.	1	920632	Therapietisch SFA Gr. 1 (B45x30)	
altern.	1	920633	Therapietisch SFA Gr. 2 (B59x38)	
2	1		Deckel für Therapietisch	
3-22	1	920620	Therapietischhalterung kpl.	Größe angeben: 331/480
3-5	1	920901	Therapietischhalterung U-Form 330x205 mm, verchromt incl. Stopfen, Montageschrauben	Variante 331 bei Gr.0+1
o.B.	1	920904	Therapietischhalterung U-Form 480x260 mm, verchromt incl. Stopfen, Montageschrauben	Variante 480 bei Gr.2
4	2(6)		Senkschraube mit Innensechskant ISO 10642 (DIN 7991) M5x16	2 St. Bei Gr.0 + 1 / 6 St. Bei Gr.2
5	2		Stopfen mit Lamellen für Rohr ø22x1-2, schwarz	
6-13	1		Spielbox	
7	1		Einschubwinkel links	
8	1		Einschubwinkel rechts	
10	4		Senkschraube mit Innensechskant ISO 10642 (DIN 7991) M5x35	
9	1		Mini-Spannseil	
11	(0) 4		Buchse 12x5,2x18,7	
12	4		Scheibe ISO 7089 (DIN 125) - A 5,3	
13	4		Sechsk.-Hutmutter niedr. Form mit Klemmt. DIN 986 - M5	
14-16	1	920629	Konusverstellung Therapietisch	
15	1		Zylinderschr. niedr. Kopf DIN 7984 - M6X14	
16	1	650050	Klemmhebel M8x16, schwarz	
17-22	1	920630	Anbindungswinkel Therapietisch	
18	2		Lamellenstopfen Vierkant 25x25	
19	1	401107	Lamellenstopfen für Vierkant 15x15, schwarz, Set 4 Stück	
20	1		Zylinderschr. niedr. Kopf DIN 7984 - M6X14	
21	1		Nutenstein mit Steg M6	
22	1		5-Sterngriff ø40 - M6x35 Außengewinde, schwarz	