

Jump beta

ERSATZTEILKATALOG



[SORG Rollstuhltechnik](#)

Revision: 27.09.2023 08:16:47



Sehr geehrter Kunde,

auf den folgenden Seiten finden Sie eine komplette Liste aller Einzelteile aus denen dieser Rollstuhl gebaut wird. Um eine korrekte Ersatzteillieferung zu gewährleisten ist es notwendig, dass Sie uns bei der Bestellung zusätzlich zur Artikelnummer folgende Informationen vom Typenschild zukommen lassen.

Für eine Beschreibung zum Typenschild und wo es an Ihrem Rollstuhl zu finden ist, folgen Sie einfach diesem Link:

https://sorgrollstuhltechnik.de/wp-content/uploads/2017/07/Typenschild_finden.pdf

1. Seriennummer des Rollstuhls

Die Seriennummer ermöglicht uns, auf die Rollstuhlkonfiguration der ursprünglichen Rollstuhllieferung zuzugreifen.

2. Sitzbreite, Sitztiefe und Rückenhöhe

Die Maße auf dem Typenschild beziehen sich auf die Konfiguration der Ursprungslieferung. Sofern Maße nach der Lieferung verändert wurden, beispielsweise durch Stuhlverbreiterung, benötigen wir die aktuellen Maße.

3. Unterschenkellänge

Wir benötigen die Unterschenkellänge um die korrekte Version einiger Anbauteile auswählen zu können, die an das Maß der Unterschenkellänge gebunden sind.

4. Rahmenfarbe

Bitte spezifizieren Sie die Rahmenfarbe des Rollstuhls wenn Sie ein pulverbeschichtetes Ersatzteil bestellen. Bitte geben Sie auch an, ob die Beschichtung matt oder glänzend ist.

5. Andere Änderungen nach der Auslieferung (Anbauartikel etc.)

Wir können von Änderungen die nach der Lieferung durchgeführt wurden nichts wissen. Wenn Sie nicht sicher sind, ob Änderungen Einfluss auf benötigte Ersatzteile haben, informieren Sie uns bitte detailliert.

Abkürzungen:

| | |
|----------|--|
| Pos. | Positionsnummer |
| Art.-Nr. | Artikelnummer |
| M/1 | erforderliche Menge pro Rollstuhl bzw. Baugruppe |
| SB | Sitzbreite |
| ST | Sitztiefe |
| RH | Rückenhöhe |
| alt. | alternativ |

Erläuterungen:

Es können nur Artikel bestellt werden, die in der Spalte **Art.Nr.** einen Nummerneintrag haben.

Bitte beachten Sie in der Spalte **Variante** die erforderlichen Bestellangaben, ohne die Ihre Bestellung nur mit Verzögerung bearbeitet werden kann.

Die Angaben **Links/Rechts** sind immer auf die Fahrtrichtung bezogen.

Bei Unklarheiten oder Fragen rufen Sie uns einfach an, wir beraten Sie gerne.

SORG Rollstuhltechnik GmbH Co.KG

Benzstraße 3-5

68794 Oberhausen-Rheinhausen

Fon 07254 - 9279 0

Fax 07254 - 9279 10

info@sorgrollstuhltechnik.de

<http://www.sorgrollstuhltechnik.de>

Öffnungszeiten:

Montag - Freitag 8.00 - 16.30 Uhr

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Preise auf Nachfrage

Inhaltsverzeichnis

Rahmen

| | |
|----------------|---|
| Rahmen Sport | 1 |
| Rahmen BSA | 3 |
| Sicherheitsrad | 5 |
| Ankipphilfe | 7 |
| Stockhalter | 8 |

Beinstützen

| | |
|--|----|
| Beinstützenhalter abschwengbar und abnehmbar | 9 |
| Beinstütze hochschwenkbar und abnehmbar (nur mit abduziertem Rahmen möglich) | 11 |
| Wadenauflage für Beinstütze hochschwenkbar | 12 |
| Beinstütze durchgehend seitlich hochklappbar, Anbau innen 403601 | 13 |
| Beinstütze durchgehend seitlich hochklappbar, Anbau außen 403610 | 15 |
| Beinstütze durchgehend, seitlich hochklappbar, wegschwenkbar, Anbau außen 403611 | 17 |
| Beinstütze geteilt, seitlich hochklappbar, Anbau außen 403612 | 19 |
| Beinstütze geteilt, seitlich hochklappbar, Anbau innen 403602 | 20 |
| Fußschale | 21 |
| Wadenband | 22 |

Sitz

| | |
|---|----|
| Kreuzstrebe + Sitzbespannung | 23 |
| Sitzfix + Sitzverlängerung | 25 |
| Sitzkissen | 26 |
| Abduktionskeil | 27 |
| Therapietisch Variante 1 seitlich wegklappbar | 28 |
| Therapietisch Variante 2 an Armpolster gesteckt | 29 |

Rücken

| | |
|---|----|
| Rückenrohr Standard | 30 |
| Rücken winkelverstellbar / winkeleinstellbar | 32 |
| Rücken mit Gasdruckfederverstellung | 35 |
| Stabilisierungsstange am Rückenrohr | 36 |
| Stabilisierungsstange für ausziehbare Schiebegriffe | 37 |
| Schiebegriffe | 38 |
| Schiebestange | 39 |
| Rückenbespannung Standard | 40 |
| Rückenbespannung anpassbar | 41 |
| Muldenrücken | 42 |
| Rückenverlängerung | 45 |
| Kissen für Muldenrücken | 46 |
| Seitenpelotte | 47 |
| Kopfstütze | 49 |
| Rückenschalenanbindung | 50 |

Inhaltsverzeichnis

Seitenteil

| | |
|--|----|
| Seitenteil Standard | 52 |
| Armpolster für Seitenteil Standard | 53 |
| Kleiderschutz | 54 |
| Desk-Seitenteil | 55 |
| Kleiderschutz Desk-Seitenteil | 57 |
| Armpolster für Desk-Seitenteil | 58 |
| Langes Seitenteil | 59 |
| Armpolster für langes Seitenteil | 61 |
| Desk/langes Seitenteil, Aufnahme vorne | 63 |
| Rasterarmlehne | 64 |
| Seitenteil für Gasdruckfeder-Rücken | 65 |
| Desk-Seitenteil für Gasdruckfeder-Rücken | 66 |
| Langes Seitenteil für Gasdruckfeder-Rücken | 67 |

Lenkrad

| | |
|--------------------------------|----|
| Lenkradadapter | 68 |
| Adapter für niedrige Sitzhöhen | 70 |
| Lenkradgabel | 71 |
| Lenkradgabel mit Steckachse | 72 |
| Lenkräder | 73 |

Antriebsrad

| | |
|----------------------------------|----|
| Lochplatte Antriebsrad Standard | 74 |
| Lochplatte Trommelbremsrad | 76 |
| Radstandsverlängerung 0°, 3°, 7° | 77 |
| Antriebsräder | 79 |
| Doppelgreifreifen Standard | 80 |
| Doppelgreifreifen Trommelbremse | 82 |
| Bereifung | 84 |
| Greifringe | 85 |
| Greifringüberzüge | 86 |
| Speichenschutz | 87 |

Bremse


| | |
|---------------------------------------|----|
| Kniehebelbremse | 89 |
| Seilzugbremse Bremskörper/Andrückteil | 90 |
| Seilzugbremse Benutzerbedienteil | 92 |
| Bremsgriff bei Trommelbremse | 93 |
| Bremshebelverlängerungen | 94 |

Inhaltsverzeichnis

Zubehör

| | |
|--|-----|
| Caddy | 95 |
| 2-Punkt-Beckengurt mit Kunststoffschloss | 96 |
| 2-Punkt-Beckengurt mit Metallschloss | 97 |
| 4-Punkt-Beckengurt mit Kunststoffschloss | 98 |
| 4-Punkt-Beckengurt mit Metallschloss | 99 |
| Brustschultergurt | 100 |


Rahmen Sport

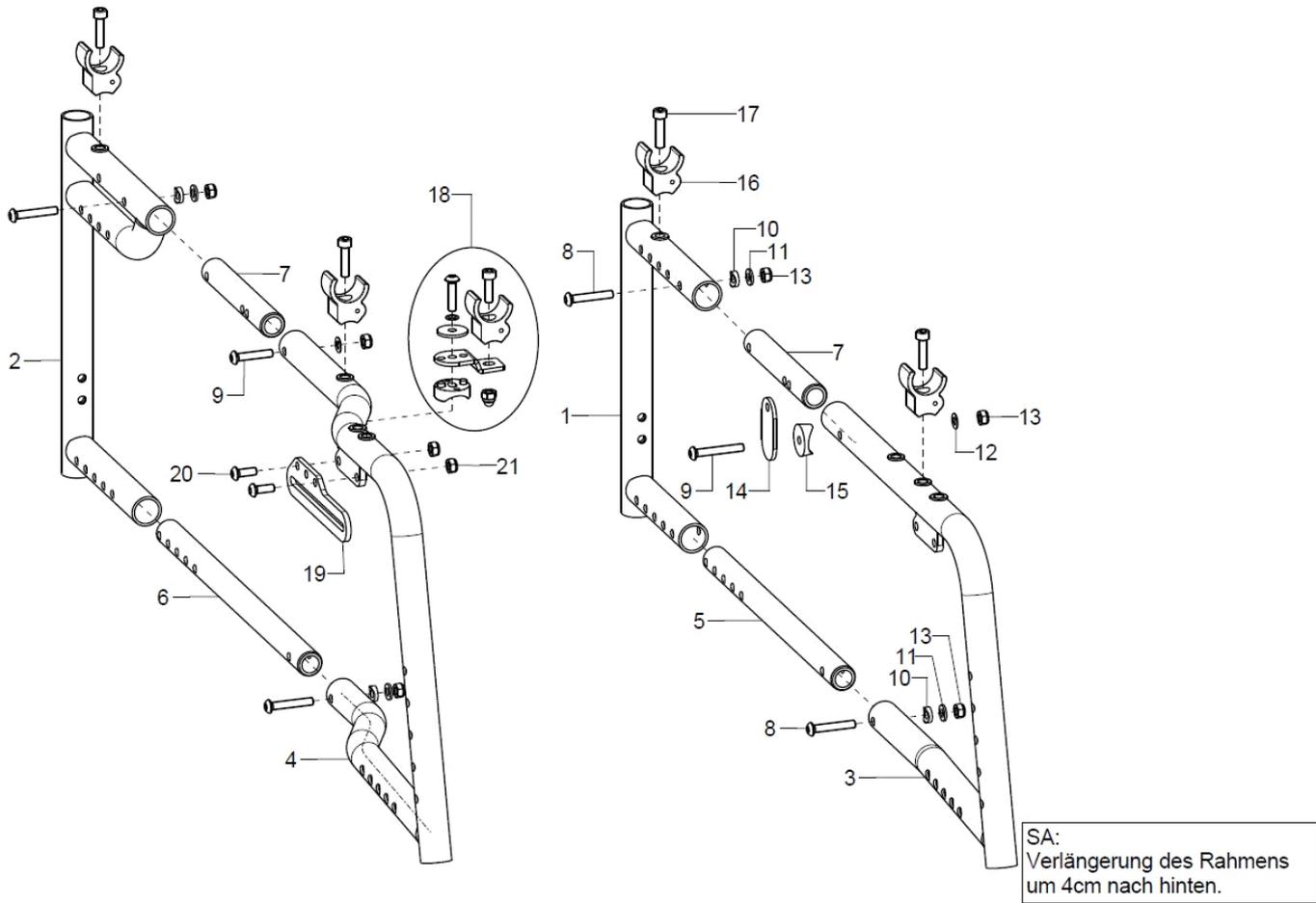

| Pos.: | Menge: | Artikelnr.: | Artikelbezeichnung: | Variante: |
|-------|--------|-------------|--|---|
| 1 | 2 | 59751501 | Rahmenteil hinten Sport | Farbe / Bei geradem Rahmen ab ST44 / bei abdu. Rahmen ab St48 |
| o.B. | 2 | 59751502 | Rahmenteil hinten Sport SA | Farbe / Bei geradem Rahmen ab ST48 |
| 2 | 2 | 59751701 | Rahmenteil hinten XL | Farbe |
| o.B. | 2 | 59751702 | Rahmenteil hinten XL SA | Farbe |
| 3 | 1 | 59750402 | Rahmenteil vorne Sport gerade, Gr.4 rechts (bis ST34-42) | Farbe, ST |
| o.B. | 1 | 59750401 | Rahmenteil vorne Sport gerade, Gr.4 links (bis ST34-42) | Farbe, ST |
| o.B. | 1 | 59750502 | Rahmenteil vorne Sport gerade, Gr.5 rechts (ST44/46) | Farbe, ST |
| o.B. | 1 | 59750501 | Rahmenteil vorne Sport gerade, Gr.5 links (ST44/46) | Farbe, ST |
| o.B. | 1 | 59750602 | Rahmenteil vorne Sport gerade, Gr.6 rechts (ST48/50) | Farbe, ST |
| o.B. | 1 | 59750601 | Rahmenteil vorne Sport gerade, Gr.6 links (ST48/50) | Farbe, ST |
| 4 | 1 | 59750102 | Rahmenteil vorne Sport abduziert, Gr.4 rechts (ST34-42) | Farbe, ST |
| o.B. | 1 | 59750101 | Rahmenteil vorne Sport abduziert, Gr.4 links (ST34-42) | Farbe, ST |
| o.B. | 1 | 59750202 | Rahmenteil vorne Sport abduziert, Gr.5 rechts (ST44/46) | Farbe, ST |
| o.B. | 1 | 59750201 | Rahmenteil vorne Sport abduziert, Gr.5 links (ST44/46) | Farbe, ST |
| o.B. | 1 | 59750302 | Rahmenteil vorne Sport abduziert, Gr.6 rechts (ST48/50) | Farbe, ST |
| o.B. | 1 | 59750301 | Rahmenteil vorne Sport abduziert, Gr.6 links (ST48/50) | Farbe, ST |
| o.B. | 1 | 59751102 | Rahmenteil vorne rechts Jump beta Sport XL gerade (bis ST 50 cm) | |
| o.B. | 1 | 59751101 | Rahmenteil vorne links Jump beta Sport XL gerade (bis ST 50 cm) | |
| o.B. | 1 | 59751104 | Rahmenteil vorne rechts Jump beta Sport XL gerade (ST 52/54 cm) | |
| o.B. | 1 | 59751002 | Rahmenteil vorne rechts Jump beta Sport XL abdu (bis ST 50 cm) | |
| o.B. | 1 | 59751103 | Rahmenteil vorne links Jump beta Sport XL gerade (ST 52/54 cm) | |
| o.B. | 1 | 59751001 | Rahmenteil vorne links Jump beta Sport XL abdu (bis ST 50 cm) | |

| | | | | |
|------------|---|----------|---|---------------------------|
| o.B. | 1 | 59751004 | Rahmenteil vorne rechts Jump beta Sport XL abdu (ST 52/54 cm) | |
| o.B. | 1 | 59751003 | Rahmenteil vorne links Jump beta Sport XL abdu (ST 52/54 cm) | |
| 5 | 2 | 59751801 | Gelenkrohr unten - für Kreuzstrebe "Sport" Variante | |
| 6 | 2 | 59751803 | Gelenkrohr unten - für Kreuzstrebe "XL" Variante | |
| 7 | 2 | 59751804 | Gelenkrohr oben Gr. 4/5/XL | XL , Sport Gr. 4+5 |
| 8-15 | 2 | 45250199 | Montageset Rahmen mit Standard-Seitenteil | |
| 8-13+16+17 | 2 | 46250199 | Montageset Rahmen mit Desk/langem Seitenteil | |
| 8 | 2 | | Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x35 | |
| 9 | 1 | | Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x40 | |
| altern | 1 | | Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x30 | |
| 10 | 2 | | Sattelscheibe $\varnothing 12/6,2 \times 2,5$ | |
| 11 | 2 | | Scheibe ISO 7089 (DIN 125) - A 6,4 | |
| 12 | 1 | | Passscheibe DIN 988 - 6x12x0,5 - A2 | |
| 13 | 3 | | Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M6 | |
| 14 | 1 | 45250111 | Stützscheibe schwarz, oval | |
| 15 | 1 | | Sattelscheibe schwarz Nenn- \varnothing 24/6 | |
| 16-17 | 2 | 58260201 | Auflagebock inkl. Montageschraube | |
| 17 | 2 | | Zylinderschraube ISO 4762 (DIN 912) M6x25 mit Tuflockfleck | |
| 18 | 1 | 58260202 | Auflagebock bei abduziertem Rahmen ohne Desk/langem Seitenteil bei ST ab 44cm | |
| 19-21 | 1 | 59752501 | Bremsschiene kurz, inkl. Montagematerial | Rahmengröße 4+5+XL |
| o.B. | 1 | 59752502 | Bremsschiene lang anschraubbar, inkl. Montagematerial | Rahmengröße 6 |
| o.B. | 1 | 35007602 | Bremsschiene rechts bei Radstandsverl., inkl. Montagematerial | Bei Radstandsverlängerung |
| o.B. | 1 | 35007601 | Bremsschiene links bei Radstandsverl., inkl. Montagematerial | Bei Radstandsverlängerung |
| 20 | 2 | | Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x16 | |
| 21 | 2 | | Sechsk.-Hutmutter niedr. Form mit Klemmt. DIN 986 - M6 | |
| o.B. | 1 | | Faltfixierband kpl. 210 (180) | |

Rahmen BSA

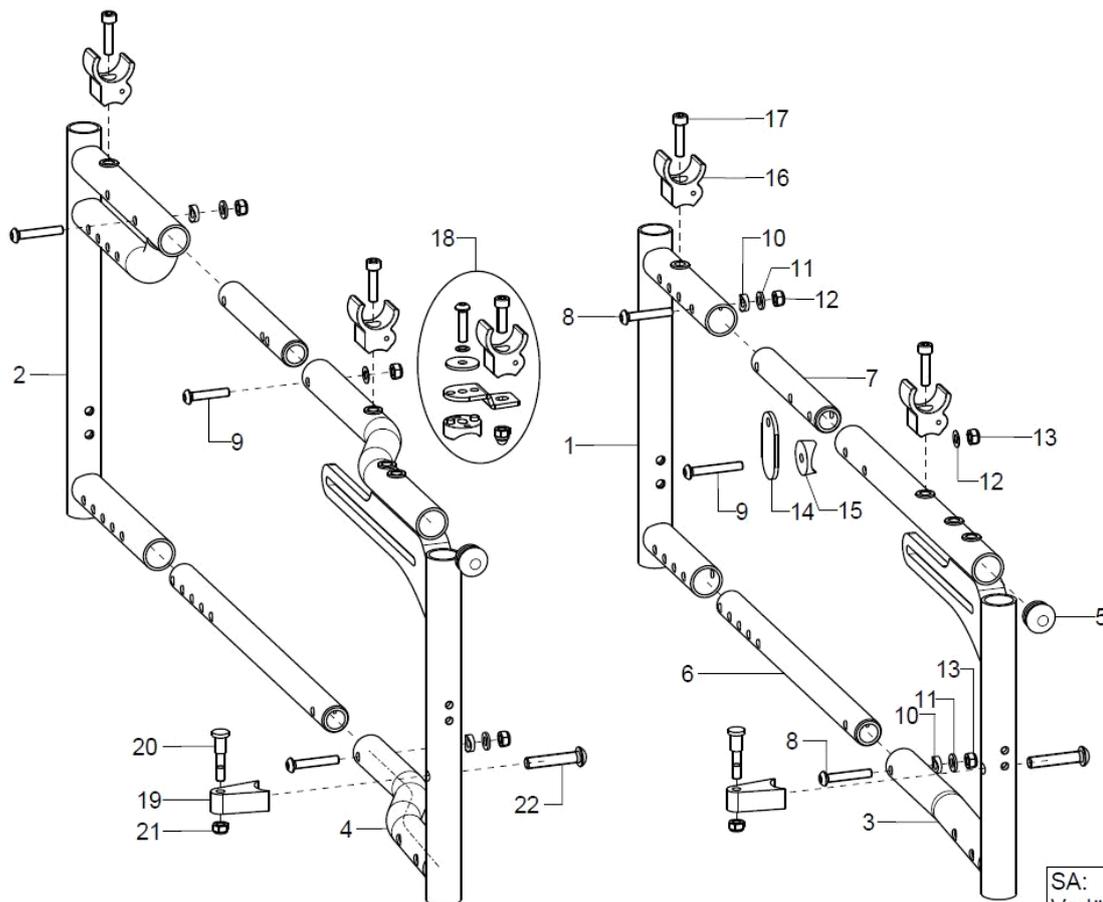


SA:
Verlängerung des Rahmens
um 4cm nach hinten.

| Pos.: | Menge: | Artikelnr.: | Artikelbezeichnung: | Variante: |
|--------|--------|-------------|---|---|
| 1 | 2 | 59751601 | Rahmenteil hinten BSA | Farbe, ST |
| o.B. | 2 | 59751501 | Rahmenteil hinten Sport | Farbe / Bei geradem Rahmen ab ST44 / bei abdu. Rahmen ab St48 |
| o.B. | 2 | 59751602 | Rahmenteil hinten BSA SA | Farbe, ST |
| o.B. | 2 | 59751502 | Rahmenteil hinten Sport SA | Farbe / Bei geradem Rahmen ab ST48 |
| 2 | 2 | 59751701 | Rahmenteil hinten XL | Farbe |
| o.B. | 2 | 59751702 | Rahmenteil hinten XL SA | Farbe |
| 3+5 | 1 | 59750902 | Rahmenteil vorne BSA gerade, rechts (bis ST42) | Farbe, ST |
| o.B.+5 | 1 | 59750901 | Rahmenteil vorne BSA gerade, links (bis ST42) | Farbe, ST |
| o.B.+5 | 1 | 59750904 | Rahmenteil vorne BSA gerade, rechts (ST44/46) | Farbe, ST |
| o.B.+5 | 1 | 59750903 | Rahmenteil vorne BSA gerade, links (ST44/46) | Farbe, ST |
| o.B.+5 | 1 | 59750906 | Rahmenteil vorne BSA gerade, rechts (ST48/50) | Farbe, ST |
| o.B.+5 | 1 | 59750905 | Rahmenteil vorne BSA gerade, links (ST48/50) | Farbe, ST |
| 4+5 | 1 | 59750802 | Rahmenteil vorne BSA abduziert, rechts (bis ST46) | Farbe, ST |
| o.B.+5 | 1 | 59750801 | Rahmenteil vorne BSA abduziert, links (bis ST46) | Farbe, ST |
| o.B.+5 | 1 | 59750804 | Rahmenteil vorne BSA abduziert, rechts (ST48/50) | Farbe, ST |
| o.B.+5 | 1 | 59750803 | Rahmenteil vorne BSA abduziert, links (ST48/50) | Farbe, ST |
| 3+5 | 1 | 59751302 | Rahmenteil vorne XL BSA gerade, rechts (ST44/46) | Farbe, ST |
| o.B.+5 | 1 | 59751301 | Rahmenteil vorne XL BSA gerade, links (ST44/46) | Farbe, ST |
| o.B.+5 | 1 | 59751304 | Rahmenteil vorne XL BSA gerade, rechts (ST48/50) | Farbe, ST |
| o.B.+5 | 1 | 59751303 | Rahmenteil vorne XL BSA gerade, links (ST48/50) | Farbe, ST |
| o.B.+5 | 1 | 59751306 | Rahmenteil vorne XL BSA gerade, rechts (ST52/54) | Farbe, ST |
| o.B.+5 | 1 | 59751305 | Rahmenteil vorne XL BSA gerade, links (ST52/54) | Farbe, ST |

| | | | | |
|---------|---|----------|---|-------------------|
| 4+5 | 1 | 59751202 | Rahmenteil vorne XL BSA abduziert, rechts (ST44/50) | Farbe, ST |
| o.B.+5 | 1 | 59751201 | Rahmenteil vorne XL BSA abduziert, links (ST44/50) | Farbe, ST |
| o.B.+5 | 1 | 59751204 | Rahmenteil vorne XL BSA abduziert, rechts (ST52/54) | Farbe, ST |
| o.B.+5 | 1 | 59751203 | Rahmenteil vorne XL BSA abduziert, links (ST52/54) | Farbe, ST |
| 5 | 1 | | Stopfen mit Lamellen für Rohr $\varnothing 22 \times 1-2$, schwarz | |
| 6 | 2 | 59751802 | Gelenkrohr unten - für Kreuzstrebe "BSA" Variante | |
| o.B. | 2 | 59751803 | Gelenkrohr unten - für Kreuzstrebe "XL" Variante | |
| 7 | 2 | 59741202 | Gelenkrohr oben Gr. 2/3 | BSA |
| o.B. | 2 | 59751804 | Gelenkrohr oben Gr. 4/5/XL | XL, Sport Gr. 4+5 |
| 8-15 | 2 | 45250199 | Montageset Rahmen mit Standard-Seitenteil | |
| 8-13 | 2 | 46250199 | Montageset Rahmen mit Desk/langem Seitenteil | |
| 8 | 2 | | Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x35 | |
| 9 | 1 | | Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x40 | |
| altern. | 1 | | Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x30 | |
| 10 | 2 | | Sattelscheibe $\varnothing 12/6,2 \times 2,5$ | |
| 11 | 2 | | Scheibe ISO 7089 (DIN 125) - A 6,4 | |
| 12 | 1 | | Passscheibe DIN 988 - 6x12x0,5 - A2 | |
| 13 | 3 | | Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M6 | |
| 14 | 1 | 45250111 | Stützscheibe schwarz, oval | |
| 15 | 1 | | Sattelscheibe schwarz Nenn- $\varnothing 24/6$ | |
| 16+17 | 2 | 58260201 | Auflagebock inkl. Montageschraube | |
| 17 | 2 | | Zylinderschraube ISO 4762 (DIN 912) M6x25 mit Tuflockfleck | |
| 18 | 1 | 58260202 | Auflagebock bei abduziertem Rahmen ohne Desk/langem Seitenteil bei ST ab 44cm | |
| 19-22 | 2 | 40370112 | Rastbolzen- und Halter kpl. | |
| o.B. | 1 | | Faltfixierband kpl. 210 (180) | |


Sicherheitsrad

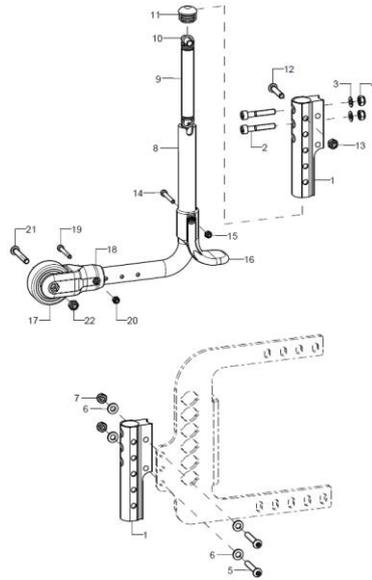

| Pos.: | Menge: | Artikelnr: | Artikelbezeichnung: | Variante: |
|------------|--------|------------|--|-----------------------------------|
| 1+2-4+8-17 | 1 | 721501 | Sicherheitsrad 90° Form, wegschwenkbar 16", 20/22" (186/205) incl. Halter und Montagematerial | bei 22" Antriebsrad, rechts/links |
| 1+2-4+8-17 | 1 | 721502 | Sicherheitsrad 90° Form, wegschwenkbar 24", 22"(M) (186/225) incl. Halter und Montagematerial | bei 24" Antriebsrad, rechts/links |
| 1+2-4+8-17 | 1 | 721503 | Sicherheitsrad 90° Form, wegschwenkbar 26" (210/250) incl. Halter und Montagematerial | bei 26" Antriebsrad, rechts/links |
| 1+5-17 | 1 | 721505 | Sicherheitsrad bei Radstandverlängerung, kpl. | bei 22" Antriebsrad, rechts/links |
| 1+5-17 | 1 | 721506 | Sicherheitsrad bei Radstandverlängerung, kpl. | bei 24" Antriebsrad, rechts/links |
| 1+5-17 | 1 | 721507 | Sicherheitsrad bei Radstandverlängerung, kpl. | bei 26" Antriebsrad, rechts/links |
| 1 | 1 | 72150106 | Kippschutzhalter Aluminium, schwarz, für Sicherheitsrad | |
| 2-4 | 1 | 7215010699 | Montageset für Kippschutzhalter | |
| 2 | 2 | | Zylinderschraube ISO 4762 (DIN 912) M6x35 | |
| 3 | 3 | | Passscheibe DIN 988 - 6x12x0,5 - A2 | |
| 4 | 3 | | Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M6 | |
| 5-7 | 1 | 7215020699 | Montagezubehör Kippschutzhalter Radstandverlängerung | |
| 5 | 2 | | Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x35 | |
| 6 | 4 | | Scheibe ISO 7089 (DIN 125) - A 6,4 | |
| 7 | 2 | | Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M6 | |
| 8-17 | 1 | 72150001 | Sicherheitsradbügel 90° Form, (186/205) für 20/22 Zoll, vormontiert, incl. Feder, Auftritt und Rad ø50mm | |
| 8-17 | 1 | 72150002 | Sicherheitsradbügel 90° Form, (186/225) für 22"(M)/ 24 Zoll, vormontiert, incl. Feder, Auftritt und Rad ø50mm | |
| 8-17 | 1 | 72150003 | Sicherheitsradbügel 90° Form, (210/250) für 26 Zoll, vormontiert, incl. Feder, Auftritt und Rad ø50mm | |
| 8 | 1 | | Kippschutzbügel | Größe Antriebsrad |
| 9-15 | 1 | 72150107 | Zugfeder für Sicherheitsrad 13,5x2x113 kpl. (incl. Buchse, Stopfen, Befestigungsmaterial kpl. oben und unten) | |
| 10 | 1 | | Distanzhülse 18,4mm | |
| 11 | 1 | | Stopfen mit Lamellen für Rohr ø22x1-2, schwarz | |
| 12 | 1 | | Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x30 | |
| 13 | 1 | | Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M6 | |
| 14 | 1 | | Zylinderschraube ISO 4762 (DIN 912) M4x30 | |
| 15 | 1 | | Sechsk.-Hutmutter niedr. Form mit Klemmt. DIN 986 - M4 | |
| 16 | 1 | 72150104 | Auftritt Kippschutz Kunststoff, schwarz | |
| 17 | 1 | 720004 | Rad für Kippschutz ø50, Nabenbreite18 mm, PU-grau incl. Montagematerial | |


| | | | |
|----|---|----------|--|
| 18 | 1 | 72150101 | Halter Sicherheitsrad (Kunststoff schwarz) für Rad ø50 mm, incl. Montagematerial |
| 19 | 1 | | Zylinderschraube ISO 4762 (DIN 912) M4x30 |
| 20 | 1 | | Sechsk.-Hutmutter niedr. Form mit Klemmt. DIN 986 - M4 |
| 21 | 1 | | Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x40 |
| 22 | 1 | | Sechsk.-Hutmutter niedr. Form mit Klemmt. DIN 986 - M6 |

Ankipphilfe

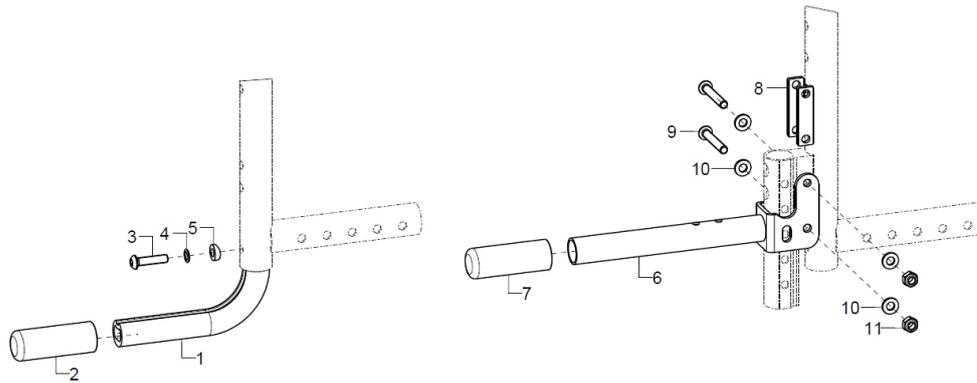


| Pos.: | Menge: | Artikelnr: | Artikelbezeichnung: | Variante: |
|-------|--------|------------|--|-----------|
| 1-5 | 1 | 7401 | Ankipphilfe kpl. | |
| 1 | 1 | | Ankipphilfe | |
| 2 | 1 | 740102 | Tauchkappe | (5er Set) |
| 3-5 | 1 | 74000099 | Montagezubehör Ankipphilfe | |
| 3 | 1 | | Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x25 | |
| 4 | 1 | | Sicherungsscheibe S6 - FST | |
| 5 | 1 | | Sattelscheibe $\phi 12/6,2 \times 2,5$ | |
| 6-11 | 1 | 7404 | Ankippbügel bei doppeltem Sicherheitsrad, kpl. | |
| 7 | 1 | 740102 | Tauchkappe | (5er Set) |
| 8 | 2 | | Distanz Ankippbügel bei doppeltem Si.-Rad | |
| 9 | 2 | | Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x40 | |
| 10 | 4 | | Scheibe ISO 7089 (DIN 125) - A 6,4 | |
| 11 | 2 | | Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M6 | |

Stockhalter

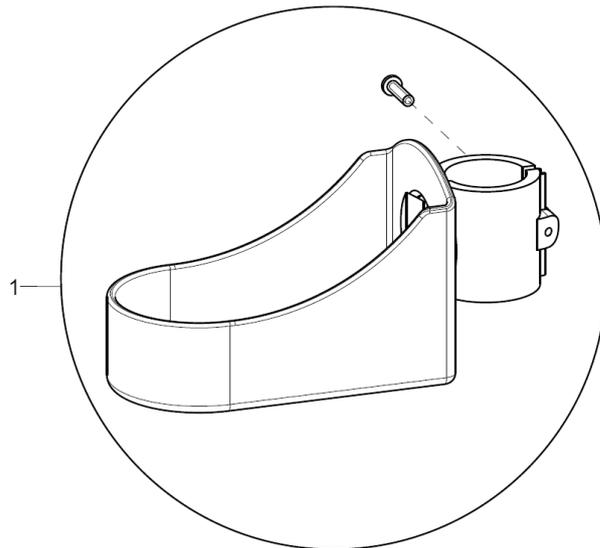


| Pos.: | Menge: | Artikelnr: | Artikelbezeichnung: | Variante: |
|-------|--------|------------|---|-----------|
| 1 | 1 | 7101 | Stockhalter mit Klemmschelle inkl. Montagezubehör | |

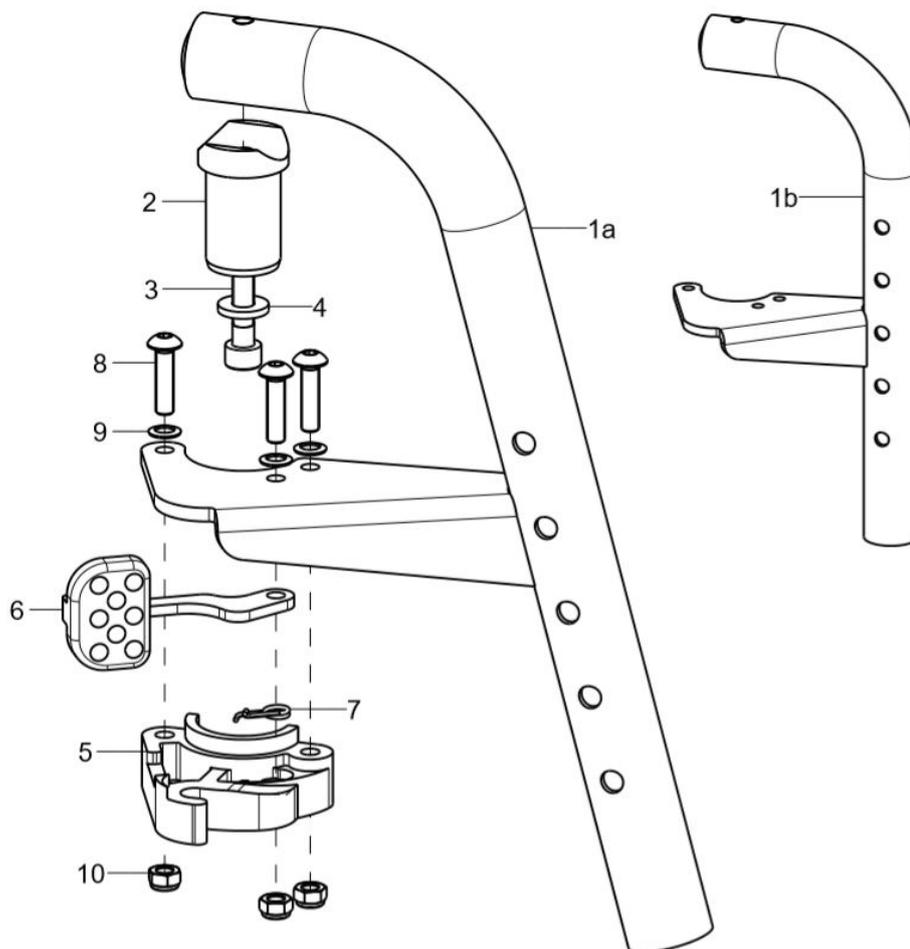Beinstützenhalter abschwenkbar und abnehmbar


| Pos.: | Menge: | Artikelnr: | Artikelbezeichnung: | Variante: |
|-------|--------|------------|--|---|
| 1a-4 | 1 | 40370102 | Beinstützenhalter rechts, kpl. | Farbe |
| o.B. | 1 | 40370101 | Beinstützenhalter links, kpl. | Farbe |
| 1a-4 | 1 | 40370202 | Beinstützenhalter rechts, kpl. für XL-Rahmen | Farbe |
| o.B. | 1 | 40370201 | Beinstützenhalter links, kpl. für XL-Rahmen | Farbe |
| 1b-4 | 1 | 40370302 | Beinstützenhalter rechts, kpl. 90° Version | Farbe, Rahmen abdu, ST34/36, (ST34-40 bei SA-Version) |
| o.B. | 1 | 40370301 | Beinstützenhalter links, kpl. 90° Version | Farbe, Rahmen abdu, ST34/36, (ST34-40 bei SA-Version) |
| 2-4 | 1 | 40370103 | Zapfen BSA inkl. Montagematerial | |
| 3 | 1 | | Zylinderschraube ISO 4762 (DIN 912) M6x30 | |
| 4 | 1 | | Scheibe verstärkt Ø14/6,2x2 | |
| 5-10 | 1 | 40370122 | Verriegelungsmechanismus rechts für BSW/BSH | |
| o.B. | 1 | 40370121 | Verriegelungsmechanismus links für BSW/BSH | |
| 6 | 1 | | Bedienhebel | |
| 7 | 1 | | Schenkelfeder rechts | |
| o.B. | 1 | | Schenkelfeder links | |
| 8 | 3 | | Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M5x20 | |
| 9 | 3 | | Sicherungsscheibe S5 - FST | |
| 10 | 3 | | Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M5 | |


Beinstütze hochschwenkbar und abnehmbar (nur mit abduziertem Rahmen möglich)

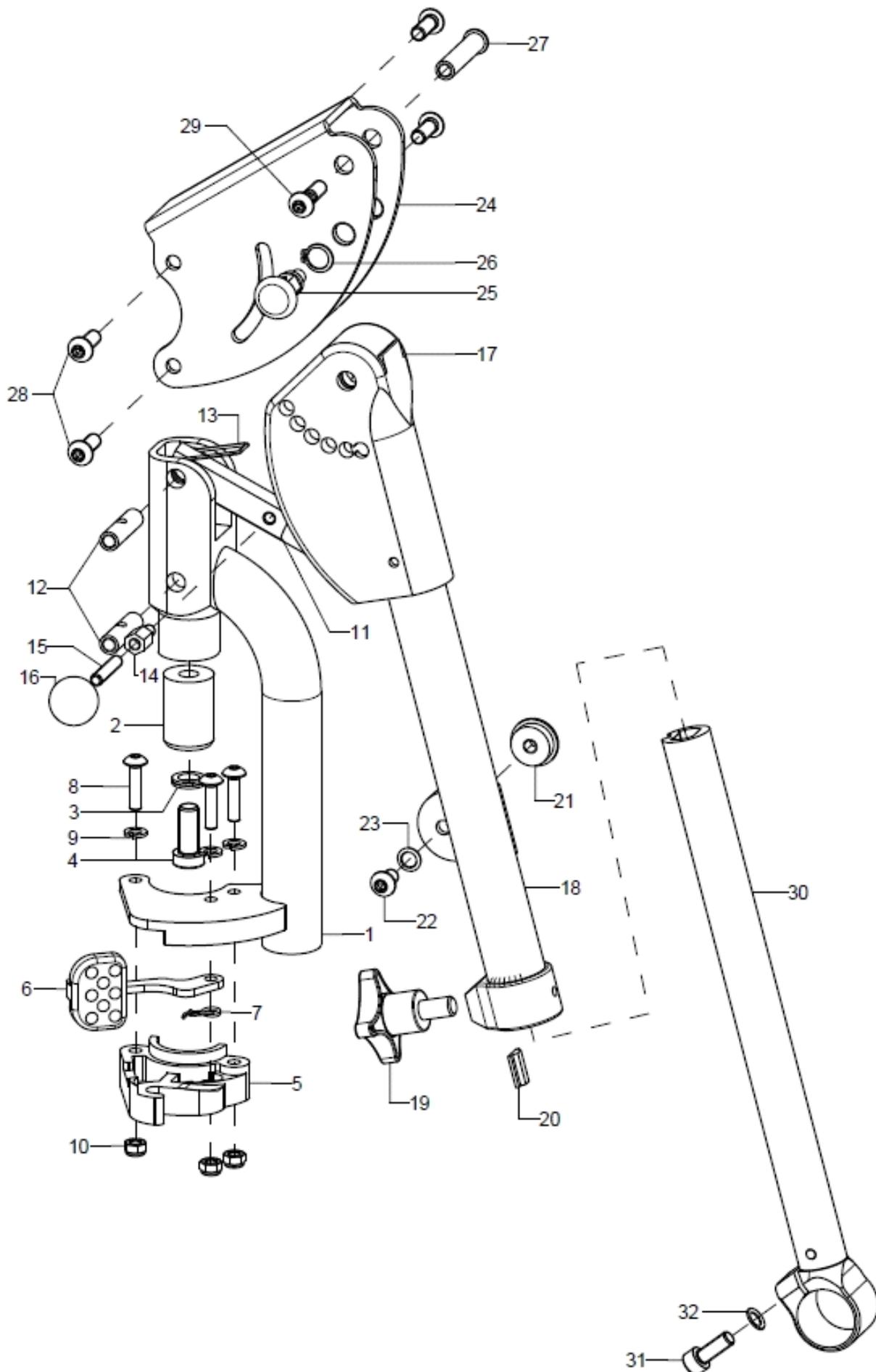

| Pos.: | Menge: | Artikelnr: | Artikelbezeichnung: | Variante: |
|--------------|---------------|-------------------|--|--------------------------------|
| 1-30 | 1 | 40370502 | Beinstützenhalter im physiologischen Drehpunkt hochschwenkbar rechts, kpl. | Farbe, Rahmen standard oder XL |
| o.B. | 1 | 40370501 | Beinstützenhalter im physiologischen Drehpunkt hochschwenkbar links, kpl. | Farbe, Rahmen standard oder XL |
| 1 | 1 | 40371002 | Beinstützenaufnahme rechts für BSH | |
| o.B. | 1 | 40371001 | Beinstützenaufnahme links für BSH | |
| altern. | 1 | 40371004 | Beinstützenaufnahme, rechts für BSH XL mit physiologischem Drehpunkt | |
| o.B. | 1 | 40371003 | Beinstützenaufnahme, links für BSH XL mit physiologischem Drehpunkt | |
| 2-4 | 1 | 40370617 | Zapfenteil BSH | |
| 3 | 1 | | Sicherungsscheibe Nord-Lock M8 | |
| 4 | 1 | | Zylinderschraube niedriger Kopf DIN 7984 - M8x20 | |
| 5-10 | 1 | 40370122 | Verriegelungsmechanismus rechts für BSW/BSH | |
| o.B. | 1 | 40370121 | Verriegelungsmechanismus links für BSW/BSH | |
| 6 | 1 | | Bedienhebel | |
| 7 | 1 | | Schenkelfeder rechts | |
| o.B. | 1 | | Schenkelfeder links | |
| 8 | 3 | | Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M5x20 | |
| 9 | 3 | | Federring DIN 127 - A 5 | |
| 10 | 3 | | Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M5 | |
| 11-16 | 1 | 40370623 | Rastbolzen BSH | |
| 12 | 2 | | Gewindebuchse M6x29,5 | |
| 13 | 1 | | Schenkelfeder Doppelarm | |
| 14 | 1 | | Distanz 6-kt I-A-Gewinde 6/8 M5x10 | |
| 15 | 1 | | Gewindestift mit Innensechskant ISO 4026 (DIN 913), M6x8 | |
| 16 | 1 | | Kugelknopf DIN319 Ø20/M5, Form C, schwarz | |
| 17-20 | 1 | 40370627 | Rasterteil mit Bügelhalterrohr für BSH | links/rechts, Farbe |
| 17 | 1 | 40370622 | Rasterteil für BSH inkl. Montagematerial und Zugschnapper | |
| 18-20 | 1 | 4037060502 | Bügelhalterrohr rechts für BSH | Farbe |
| o.B. | 1 | 4037060501 | Bügelhalterrohr links für BSH | Farbe |
| altern. | 1 | 4037060602 | Bügelhalter BSH XL rechts | Farbe |
| o.B. | 1 | 4037060601 | Bügelhalter BSH XL links | Farbe |
| 19-20 | 1 | 40370521 | Klemmstück+ Kreuzgriff M8x14, für Beinstütze hochschwenkbar | |
| 19 | 1 | | Kreuzgriff M8x14 | |
| 20 | 1 | | Klemmstück | |
| 21-23 | 1 | 40301004 | Abdeckung Konusaufnahme | |
| 22 | 1 | | Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x10 | |
| 23 | 1 | | Sicherungsscheibe S6 - FST | |
| 24-29 | 1 | 40370621 | Verbindungsblech für BSH | |
| 25 | 1 | 690101 | Zugschnapper ø6/M10x1x31 mit Arretierung | |
| 26 | 1 | | Sicherungsring 10, DIN 471 | |
| 27 | 1 | | Gewindebuchse M6x36 vormontiert | |
| 28 | 4 | | Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x16 | |
| 29 | 1 | | Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x22 Tuflockfleck | |
| 30-32 | 1 | 40370526 | Beinstützenrohr BSH verklebt, 265 mm | |
| altern. | 1 | 40370525 | Beinstützenrohr BSH verklebt, 335 mm | |
| 31 | 1 | | Zylinderschraube ISO 4762 (DIN 912) M6x16 | |
| 32 | 1 | | Sicherungsscheibe S6 - FST | |

Die geeigneten Fußauflagen inklusive Halterungen finden Sie unter dem Kapitel „Beinstütze geteilt, nach außen abschwinkbar und abnehmbar“


Wadenauflage für Beinstütze hochschwenkbar

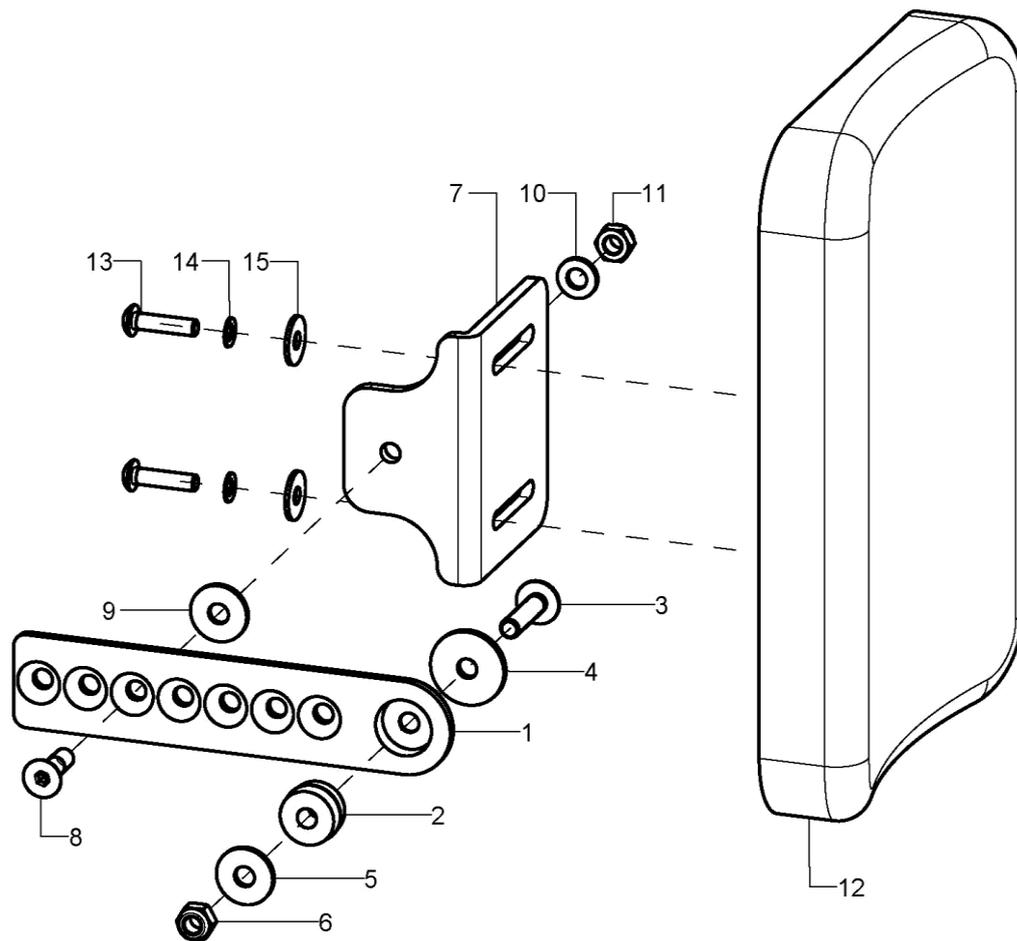

| Pos.: | Menge: | Artikelnr.: | Artikelbezeichnung: | Variante: |
|-------|--------|-------------|--|--------------|
| 1-15 | 1 | 403006 | Wadenauflage, kpl | links/rechts |
| 1-6 | 1 | 40301003 | Konus Gelenklasche BSH | |
| 2 | 1 | | Doppelkonus | |
| 3 | 1 | | Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x25 | |
| 4 | 1 | | Scheibe 23,5x6,2x2, schwarz eloxiert | |
| 5 | 1 | | Scheibe ISO 7093 (DIN 9021) - 6,4 | |
| 6 | 1 | | Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M6 | |
| 7-11 | 1 | 40300604 | Haltewinkel für Wadenauflage inkl. Montagezubehör | |
| 8 | 1 | | Senkschraube mit Innensechskant ISO 10642 (DIN 7991) M6x20 | |
| 9 | 1 | | Scheibe ISO 7093 (DIN 9021) - 6,4 - PA | |
| 10 | 1 | | Scheibe ISO 7089 (DIN 125) - A 6,4 | |
| 11 | 1 | | Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M6 | |
| 12-15 | 1 | 40300610 | Wadenauflage 150x120x30 PU schw. Inkl. Montagezubehör | |
| o.B. | 1 | 40300611 | Wadenauflage 211x153x30 PU schw. inkl. Montagezubehör | |
| 13 | 2 | | Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M5x20 | |
| 14 | 2 | | Sicherungsscheibe S5 - FST | |
| 15 | 2 | | Scheibe ISO 7093 (DIN 9021) - 5,3 | |

Beinstütze durchgehend seitlich hochklappbar, Anbau innen 403601

Für Unterschenkellänge minus Sitzkissen: Standard-Höhe 4,5 bis 32cm, XL-Höhe 8,5 bis 36cm, Bei Rahmen gerade erst ab SB28

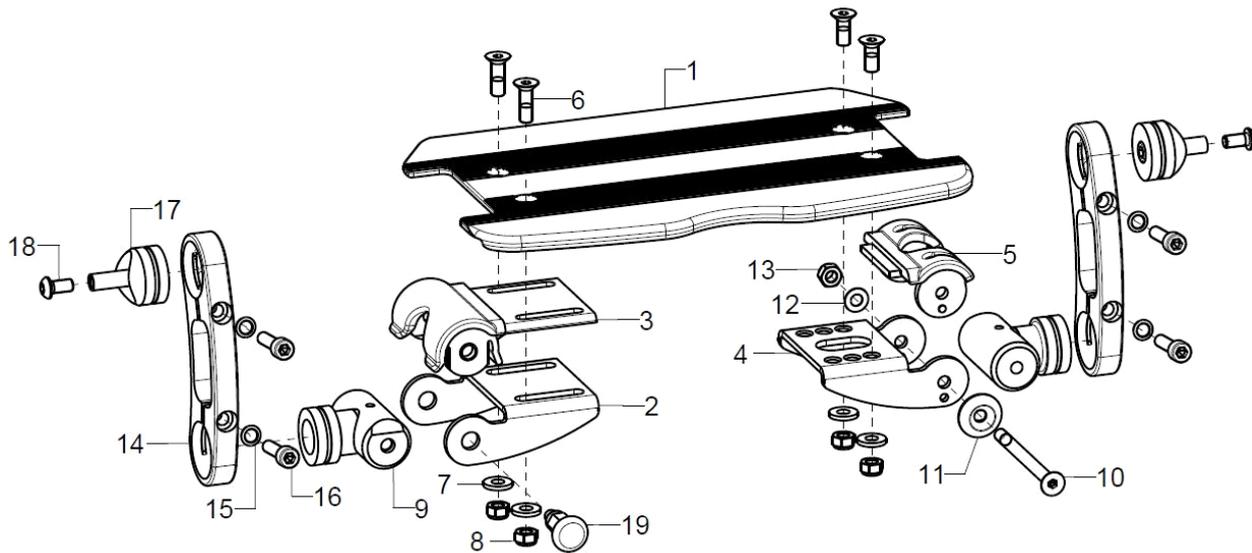


| Pos.: | Menge: | Artikelnr.: | Artikelbezeichnung: | Variante: |
|-------------|--------|-------------|--|--|
| 1-18 | 1 | 403601 | Beinstütze durchgehend Standard, Anbau innen, kpl. | SB, Farbe, USL, Zugschnapper, Rahmenvariante: abduziert, gerade |
| 1 | 1 | 40360710 | Fußplatte 8mm durchgehend | Bis SB38, Farbe, Anbau innen, Rahmenvariante: abduziert, gerade, SB |
| altern. | 1 | 40280100 | Fußplatte 8mm durchgehend | SB, Farbe, Anbau innen oder außen, Rahmenvariante: abduziert, gerade |
| 2+3+9+14-21 | 1 | 40362001 | Anbau Innen rechts, kpl. | USL |
| 4+5+9-18 | 1 | 40362101 | Anbau Beinstütze Innen links, Gelenkseite kpl | USL |
| 2-3 | 1 | 40360106 | Einstellteil rechts inkl. Arretierteil | |
| 3 | 1 | 40360101 | Arretierteil | |
| 4-5 | 1 | 40360501 | Einstellteil links für Anbau innen incl. Rastteil | |
| 5 | 1 | 40360102 | Rastteil für Fußplatte | |
| 6-8 | 2 | 40360599 | Montageset Einstellteil | |
| 6 | 2 | | Senkschraube mit Innensechskant ISO 10642 (DIN 7991) M6x20 | |
| 7 | 2 | | Scheibe verstärkt Ø14/6,2x2 | |
| 8 | 2 | | Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M6 | |
| 9 | 2 | 40360204 | Adapter für Anbau innen, durchgehend inkl. Montagezubehör | |
| 10-13 | 1 | 40360299 | Montageset Einstellteil | |
| 10 | 1 | | Senkschraube mit Innensechskant ISO 10642 (DIN 7991) M6x75 | |
| 11 | 1 | | Rosettenring Ø22/6x4,5, schwarz | |
| 12 | 1 | | Passscheibe DIN 988 - 6x12x0,5 - A2 | |
| 13 | 1 | | Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M6 | |
| 14 | 2 | 40390101 | Positionierlasche Fl 12x125x41,9 kurz | Bis USL 28cm |
| altern. | 2 | 40390110 | Positionierteil Fl 12 x 175 x 42,1 | Ab USL 29cm |
| 15-16 | 2 | 40390199 | Montageset Positionierteil | |
| 15 | 2 | | Sicherungsscheibe S6 - FST | |
| 16 | 2 | | Zylinderschraube ISO 4762 (DIN 912) M6x25 | |
| 17 | 2 | 40390103 | Fußbrettanbindung | |
| 17-18 | 2 | 40390399 | Montageset Fußbrettanbindung | |
| 17 | 1 | | Gewindehülse M6x22 verklebt | |
| 18 | 1 | | Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x12 | |



| | | | | |
|------|---|--------|---|--------------|
| 19 | 1 | 690101 | Zugschnapper $\varnothing 6/M10 \times 1 \times 31$ mit Arretierung | |
| 2+19 | 1 | 400902 | Verriegelung kpl. für Beinstützen - Innenanbau - für durchgehende Fußplatte | links/rechts |

Beinstütze durchgehend seitlich hochklappbar, Anbau außen 403610

Für Unterschenkellänge minus Sitzkissen: Standard-Höhe 31,5 bis 48cm, XL-Höhe 35,5 bis 52cm, Bei Rahmen gerade erst ab SB 28

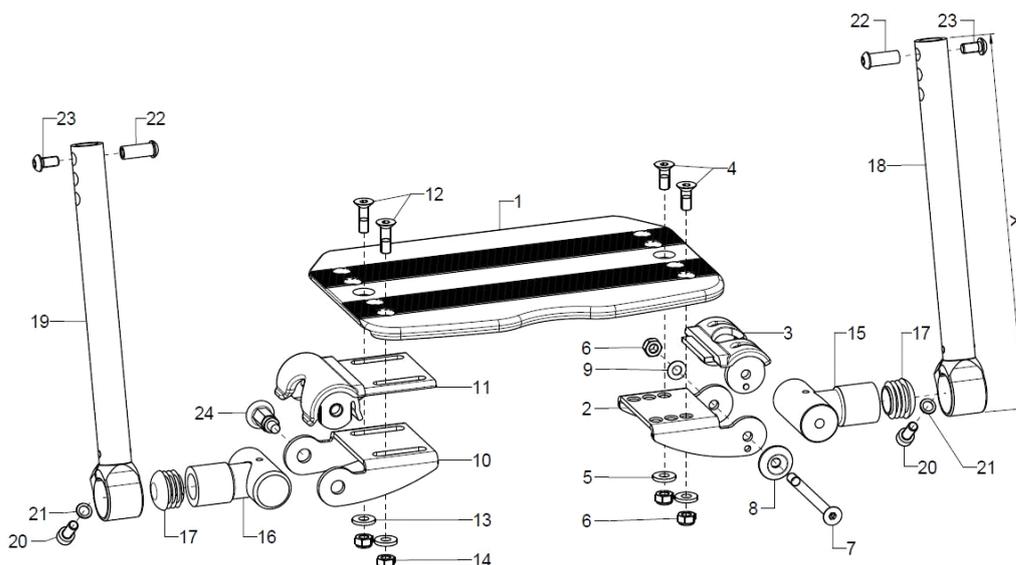


| Pos.: | Menge: | Artikelnr.: | Artikelbezeichnung: | Variante: |
|----------|--------|-------------|--|---|
| 1-23 | 1 | 403610 | Beinstütze durchgehend, seitlich hochklappbar, Anbau außen, kpl. | SB, Farbe, Zugschnapper Rahmenvariante: abduziert, gerade, Länge: X |
| 1 | 1 | 40280100 | Fußplatte 8mm durchgehend | SB, Farbe, Anbau innen oder außen, Rahmenvariante: abduziert, gerade |
| 2-3 | 1 | 40360105 | Einstellteil links inkl. Rastteil | |
| 3 | 1 | 40360102 | Rastteil für Fußplatte | |
| 4-9 | 1 | 40360299 | Montageset Einstellteil | |
| 4 | 2 | | Senkschraube mit Innensechskant ISO 10642 (DIN 7991) M6x16 | |
| 5 | 2 | | Scheibe verstärkt Ø14/6,2x2 | |
| 6 | 3 | | Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M6 | |
| 7 | 1 | | Senkschraube mit Innensechskant ISO 10642 (DIN 7991) M6x75 | |
| 8 | 1 | | Rosettenring ø22/6x4,5, schwarz | |
| 9 | 1 | | Passscheibe DIN 988 - 6x12x0,5 - A2 | |
| 10-11 | 1 | 40360106 | Einstellteil rechts inkl. Arretierteil | |
| 11 | 1 | 40360101 | Arretierteil | |
| 12-14 | 1 | 40360599 | Montageset Einstellteil | |
| 12 | 2 | | Senkschraube mit Innensechskant ISO 10642 (DIN 7991) M6x20 | |
| 13 | 2 | | Scheibe verstärkt Ø14/6,2x2 | |
| 14 | 2 | | Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M6 | |
| 15+17 | 1 | 40360111 | Gelenk D6 inkl. Stopfen | |
| 16+17 | 1 | 40360110 | Gelenk inkl. Stopfen | |
| o.B. | 1 | 40360112 | Gelenk für Zugschnapper inkl. Stopfen | Bei Zugschnapper |
| 17 | 2 | | Stopfen mit Lamellen für Rohr ø25x1-2, schwarz | |
| 18+20+21 | 1 | 40360121 | Beinstützenrohr verklebt 235 mm links, inkl. Montageschraube | Länge: X |
| o.B. | 1 | 40360131 | Beinstützenrohr verklebt 305 mm links, inkl. Montageschraube | Länge: X |
| 19+20+21 | 1 | 40360122 | Beinstützenrohr verklebt 235 mm rechts, inkl. Montageschraube | Länge: X |
| o.B. | 1 | 40360132 | Beinstützenrohr verklebt 305 mm rechts, inkl. Montageschraube | Länge: X |
| 20 | 1 | | Zylinderschraube ISO 4762 (DIN 912) M6x16 | |
| 21 | 1 | | Sicherungsscheibe S6 - FST | |
| 22-23 | 2 | 40390299 | Montageset Beinstützenrohr | |
| 22 | 1 | | Gewindehülse M6x22 verklebt | |

| | | | |
|--------------|---|--------|---|
| 23 | 1 | | Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x12 |
| 24 | 1 | 690101 | Zugschnapper $\varnothing 6$ /M10x1x31 mit Arretierung |
| 10+16+ 24 | 1 | 400903 | Verriegelung kpl. für Beinstützen - Aussenanbau - für durchgehende Fußplatte links/rechts |

Beinstütze durchgehend, seitlich hochklappbar, wegschwenkbar, Anbau außen 403611

Für Unterschenkellänge minus Sitzkissen: Standard-Höhe 31,5 bis 48cm, XL-Höhe 35,5 bis 52cm, Bei Rahmen gerade erst ab SB 28

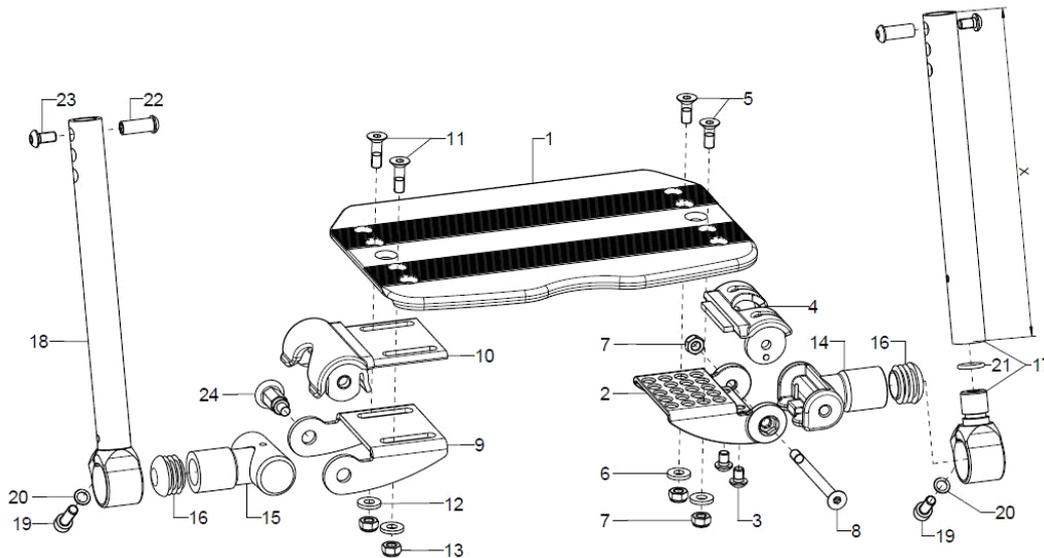


| Pos.: | Menge: | Artikelnr.: | Artikelbezeichnung: | Variante: |
|----------|--------|-------------|---|--|
| 1-23 | 1 | 403611 | Beinstütze durchgehend, seitlich hochklappbar, wegschwenkbar, Anbau außen, kpl. | SB, Farbe, Zugschnapper Rahmenvariante: abduziert, gerade, Länge: A |
| 1 | 1 | 40280100 | Fußplatte 8mm durchgehend | SB, Farbe, Anbau innen oder außen, Rahmenvariante: abduziert, gerade |
| 2-4 | 1 | 40361020 | Einstellteil geteilt inkl. Rastteil | |
| 3 | 2 | | Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x8 | |
| 4 | 1 | 40360102 | Rastteil für Fußplatte | |
| 5-8 | 1 | 40360299 | Montageset Einstellteil | |
| 5 | 2 | | Senkschraube mit Innensechskant ISO 10642 (DIN 7991) M6x16 | |
| 6 | 2 | | Scheibe verstärkt Ø14/6,2x2 | |
| 7 | 3 | | Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M6 | |
| 8 | 1 | | Senkschraube mit Innensechskant ISO 10642 (DIN 7991) M6x75 | |
| 9-10 | 1 | 40360106 | Einstellteil rechts inkl. Arretierteil | |
| 10 | 1 | 40360101 | Arretierteil | |
| 11-13 | 2 | 40360599 | Montageset Einstellteil | |
| 11 | 2 | | Senkschraube mit Innensechskant ISO 10642 (DIN 7991) M6x20 | |
| 12 | 2 | | Scheibe verstärkt Ø14/6,2x2 | |
| 13 | 2 | | Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M6 | |
| 14+16 | 1 | 40360205 | Gelenk für geteilte Beinstütze inkl. Lamellenstopfen | |
| 15+16 | 1 | 40360110 | Gelenk inkl. Stopfen | |
| altern. | 1 | 40360112 | Gelenk für Zugschnapper inkl. Stopfen | Bei Zugschnapper |
| 16 | 2 | | Stopfen mit Lamellen für Rohr ø25x1-2, schwarz | |
| 17+19-21 | 1 | 40360320 | Beinstützenrohr abschw. 235mm kpl. | Länge: X |
| o.B. | 1 | 40360330 | Beinstützenrohr abschw. 305mm, | Länge: X |
| 18-20 | 1 | 40360122 | Beinstützenrohr verklebt 235 mm rechts, inkl. Montageschraube | Länge: X |
| o.B. | 1 | 40360132 | Beinstützenrohr verklebt 305 mm rechts, inkl. Montageschraube | Länge: X |
| 19 | 1 | | Zylinderschraube ISO 4762 (DIN 912) M6x16 | |
| 20 | 1 | | Sicherungsscheibe S6 - FST | |
| 21 | 1 | | O-Ring 12x2,2 mm, schwarz | |
| 22-23 | 2 | 40390299 | Montageset Beinstützenrohr | |
| 22 | 1 | | Gewindehülse M6x19,5 verklebt | |
| 23 | 1 | | Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x12 | |



| | | | |
|-------------|---|--------|--|
| 24 | 1 | 690101 | Zugschnapper \varnothing 6/M10x1x31 mit Arretierung |
| 9+15+2 4 | 1 | 400902 | Verriegelung kpl. für Beinstützen - Innenanbau - für durchgehende Fußplatte links/rechts |

Beinstütze geteilt, seitlich hochklappbar, Anbau außen 403612


Für Unterschenkellänge minus Sitzkissen: Standard-Höhe 31,5 bis 48cm, XL-Höhe 35,5 bis 52cm, Bei Rahmen gerade erst ab SB 28

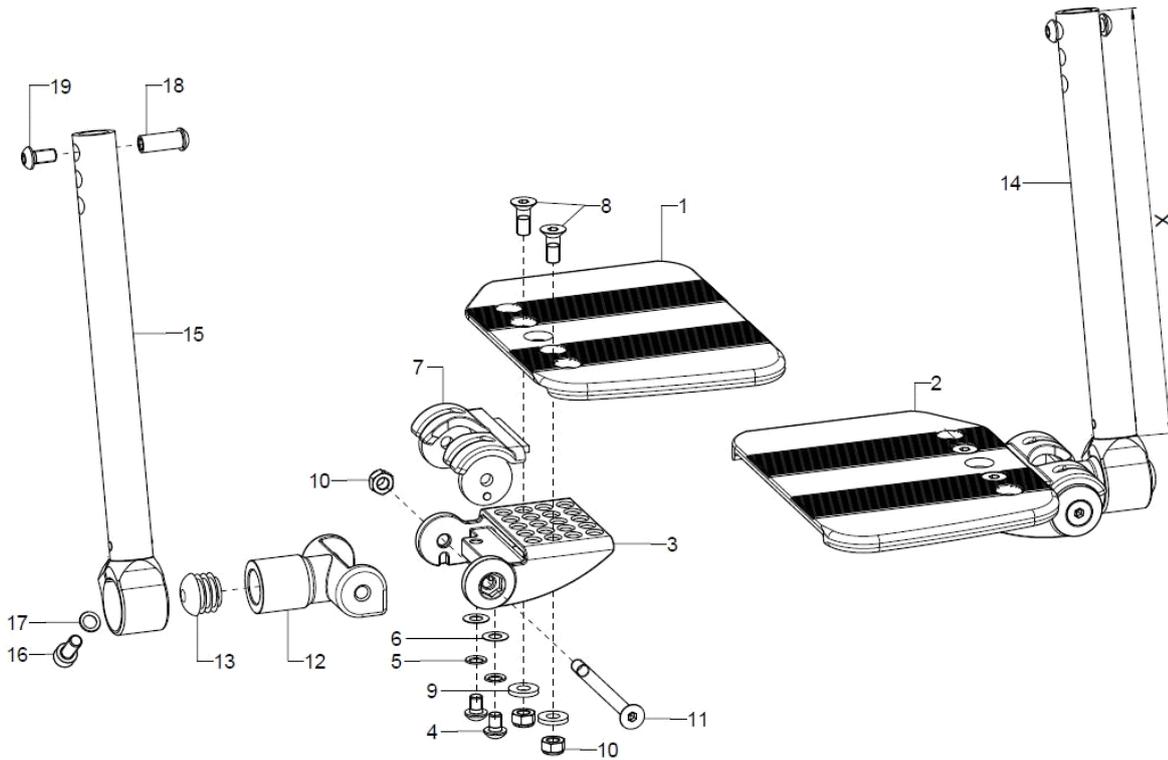

| Pos.: | Menge: | Artikelnr.: | Artikelbezeichnung: | Variante: |
|----------|--------|-------------|---|--|
| 1-19 | 1 | 403612 | Beinstütze, geteilt, seitlich hochklappbar, Anbau außen, kpl. | SB, Farbe, Rahmenvariante: abduziert, gerade, USL |
| 1 | 1 | 40361000 | Fußplatte 8mm geteilt, rechts | SB, Farbe, Anbau innen oder außen, Rahmenvariante: abduziert, gerade |
| 2 | 1 | 40361100 | Fußplatte 8mm geteilt, links | SB, Farbe, Anbau innen oder außen, Rahmenvariante: abduziert, gerade |
| 3-7 | 2 | 40361020 | Einstellteil geteilt inkl. Rastteil | |
| 4 | 2 | | Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x8 | |
| 5 | 1 | | Sicherungsscheibe S6 - FST | |
| 6 | 2 | | Passscheibe DIN 988 - 6x12x0,3 - A2 | |
| 7 | 1 | 40360102 | Rastteil für Fußplatte | |
| 8-11 | 1 | 40360299 | Montageset Einstellteil | |
| 8 | 2 | | Senkschraube mit Innensechskant ISO 10642 (DIN 7991) M6x16 | |
| 9 | 2 | | Scheibe verstärkt Ø14/6,2x2 | |
| 10 | 3 | | Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M6 | |
| 11 | 1 | | Senkschraube mit Innensechskant ISO 10642 (DIN 7991) M6x75 | |
| 12-13 | 2 | 40360205 | Gelenk für geteilte Beinstütze inkl. Lamellenstopfen | |
| 13 | 1 | | Stopfen mit Lamellen für Rohr Ø20x1-2, schwarz | |
| 14+16+17 | 1 | 40360121 | Beinstützenrohr verklebt 235 mm links, inkl. Montageschraube | Länge: X |
| o.B. | 1 | 40360131 | Beinstützenrohr verklebt 305 mm links, inkl. Montageschraube | Länge: X |
| 15+16+17 | 1 | 40360122 | Beinstützenrohr verklebt 235 mm rechts, inkl. Montageschraube | Länge: X |
| o.B. | 1 | 40360132 | Beinstützenrohr verklebt 305 mm rechts, inkl. Montageschraube | Länge: X |
| 16 | 1 | | Zylinderschraube ISO 4762 (DIN 912) M6x16 | |
| 17 | 1 | | Sicherungsscheibe S6 - FST | |
| 18-19 | 2 | 40390299 | Montageset Beinstützenrohr | |
| 18 | 1 | | Gewindehülse M6x19,5 verklebt | |
| 19 | 1 | | Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x12 | |


Beinstütze geteilt, seitlich hochklappbar, Anbau innen 403602

Für Unterschenkelhöhe minus Sitzkissen: Standard-Höhe 4,5 bis 32cm, XL-Höhe 8,5 bis 36cm, Bei Rahmen gerade erst ab SB 30

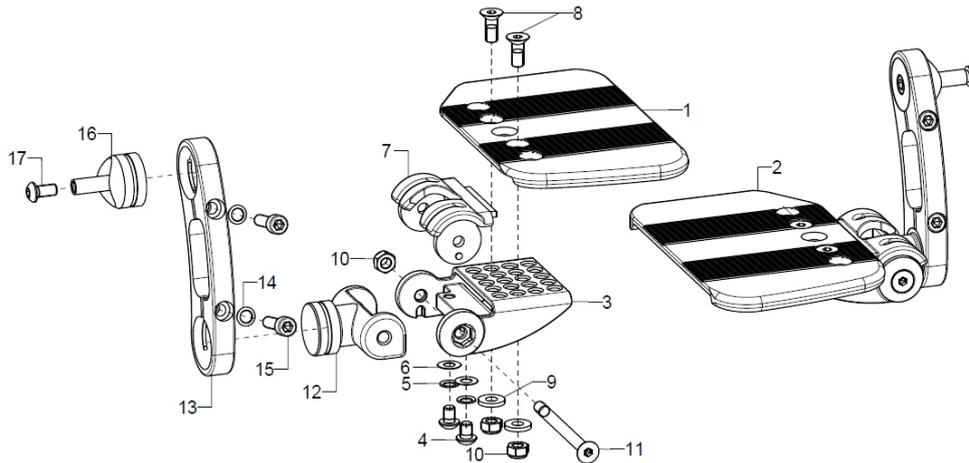


| Pos.: | Menge: | Artikelnr.: | Artikelbezeichnung: | Variante: |
|---------|--------|-------------|--|--|
| 1-17 | 1 | 403602 | Beinstütze, geteilt, seitlich hochklappbar, Anbau innen, kpl. | SB, Farbe, Rahmenvariante: abduziert, gerade |
| 1 | 1 | 40361000 | Fußplatte 8mm geteilt, rechts | SB, Farbe, Anbau innen oder außen, Rahmenvariante: abduziert, gerade |
| 2 | 1 | 40361100 | Fußplatte 8mm geteilt, links | SB, Farbe, Anbau innen oder außen, Rahmenvariante: abduziert, gerade |
| 3-17 | 2 | 40362002 | Anbau Beinstütze geteilt Innen, kpl. (Einstellteil, Arretierteil, Gelenk, Positionierteil (Angabe Länge), Anbindungskonus, Montagezubehör) | |
| 3-7 | 2 | 40361020 | Einstellteil geteilt inkl. Rastteil | |
| 4 | 2 | | Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x8 | |
| 5 | 2 | | Sicherungsscheibe S6 - FST | |
| 6 | 2 | | Passscheibe DIN 988 - 6x12x0,3 - A2 | |
| 7 | 2 | 40360102 | Rastteil für Fußplatte | |
| 8-11 | 2 | 40360299 | Montageset Einstellteil | |
| 8 | 2 | | Senkschraube mit Innensechskant ISO 10642 (DIN 7991) M6x16 | |
| 9 | 2 | | Scheibe verstärkt Ø14/6,2x2 | |
| 10 | 3 | | Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M6 | |
| 11 | 1 | | Senkschraube mit Innensechskant ISO 10642 (DIN 7991) M6x75 | |
| 12 | 2 | 40360400 | Adapter Anbau innen geteilt | |
| 13 | 2 | 40390101 | Positionierlasche FI 12x125x41,9 kurz | Bis USL 28cm |
| altern. | 2 | 40390110 | Positionierteil FI 12 x 175 x 42,1 | Ab USL 29cm |
| 14-15 | 2 | 40390199 | Montageset Positionierteil | |
| 14 | 2 | | Sicherungsscheibe S6 - FST | |
| 15 | 2 | | Zylinderschraube ISO 4762 (DIN 912) M6x25 | |
| 16-17 | 2 | 40390399 | Montageset Fußbrettanbindung | |
| 16 | 1 | | Gewindehülse M6x22 verklebt | |
| 17 | 1 | | Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x12 | |

Fußschale

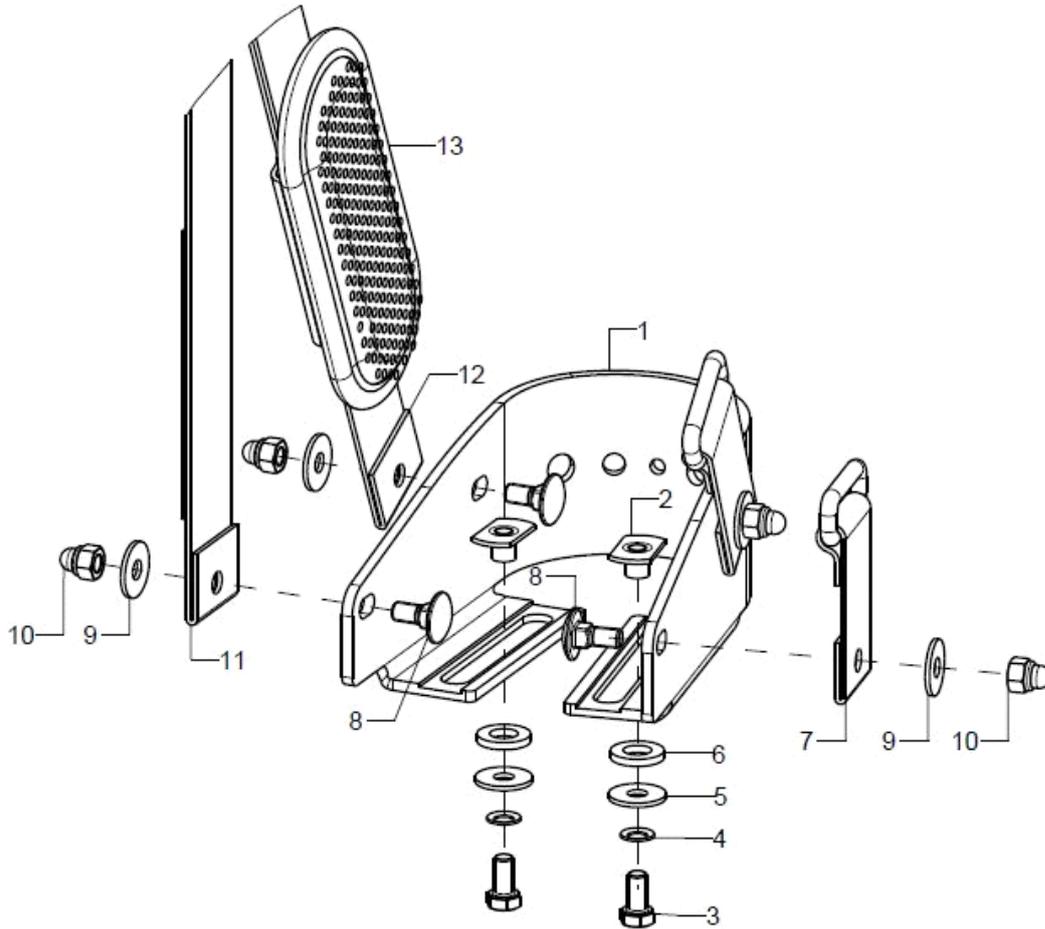


| Pos.: | Menge: | Artikelnr: | Artikelbezeichnung: | Variante: |
|---------|--------|------------|---|-----------|
| 1-6 | 2 | 40551501 | Fußschale Größe 1 (125x80) bis ca. Fußbreite 6,5 cm, schwarz incl. Montagematerial | |
| altern. | 2 | 40551502 | Fußschale Größe 2 (145x100) bis ca. Fußbreite 8 cm, schwarz incl. Montagematerial | |
| altern. | 2 | 40551503 | Fußschale Größe 3 (165x120) bis ca. Fußbreite 9,5 cm, schwarz incl. Montagematerial | |
| 2 | 1 | | Anschweißmutter C - M5x7,5 | |
| 3 | 1 | | Sechskantschraube ISO 4017 (DIN 933) - M5x10 | |
| 4 | 1 | | Sicherungsscheibe S5 - FST | |
| 5 | 1 | | Scheibe ISO 7093 (DIN 9021) - 6,4 | |
| 6 | 1 | | Scheibe verstärkt D14/d7,4x2 | |
| 7-13 | 2 | 40201501 | Fußschalengurt Gr.1 vorne/hinten (2-teilig komplett mit Polster) incl. Montagematerial zur Montage an Fußschale | |
| altern. | 2 | 40201502 | Fußschalengurt Gr.2 vorne/hinten (2-teilig komplett mit Polster) incl. Montagematerial zur Montage an Fußschale | |
| altern. | 2 | 40201503 | Fußschalengurt Gr.3 vorne/hinten (2-teilig komplett mit Polster) incl. Montagematerial zur Montage an Fußschale | |

Wadenband

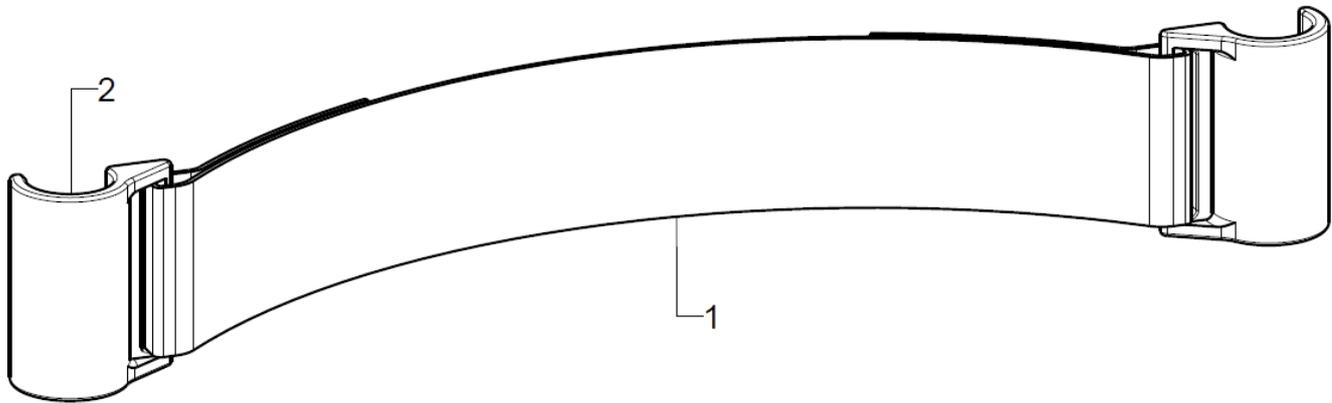

| Pos.: | Menge: | Artikelnr.: | Artikelbezeichnung: | Variante: |
|-------|--------|-------------|------------------------------|---------------------------------------|
| 1-2 | 1 | 4041 | Wadenband kpl. | SB, Rahmenvariante: abduziert, gerade |
| 1 | 1 | 404108 | Wadenbandgurt | SB, Rahmenvariante: abduziert, gerade |
| 2 | 2 | 404106 | Wadenbandhalter R12, schwarz | |

Kreuzstrebe + Sitzbespannung

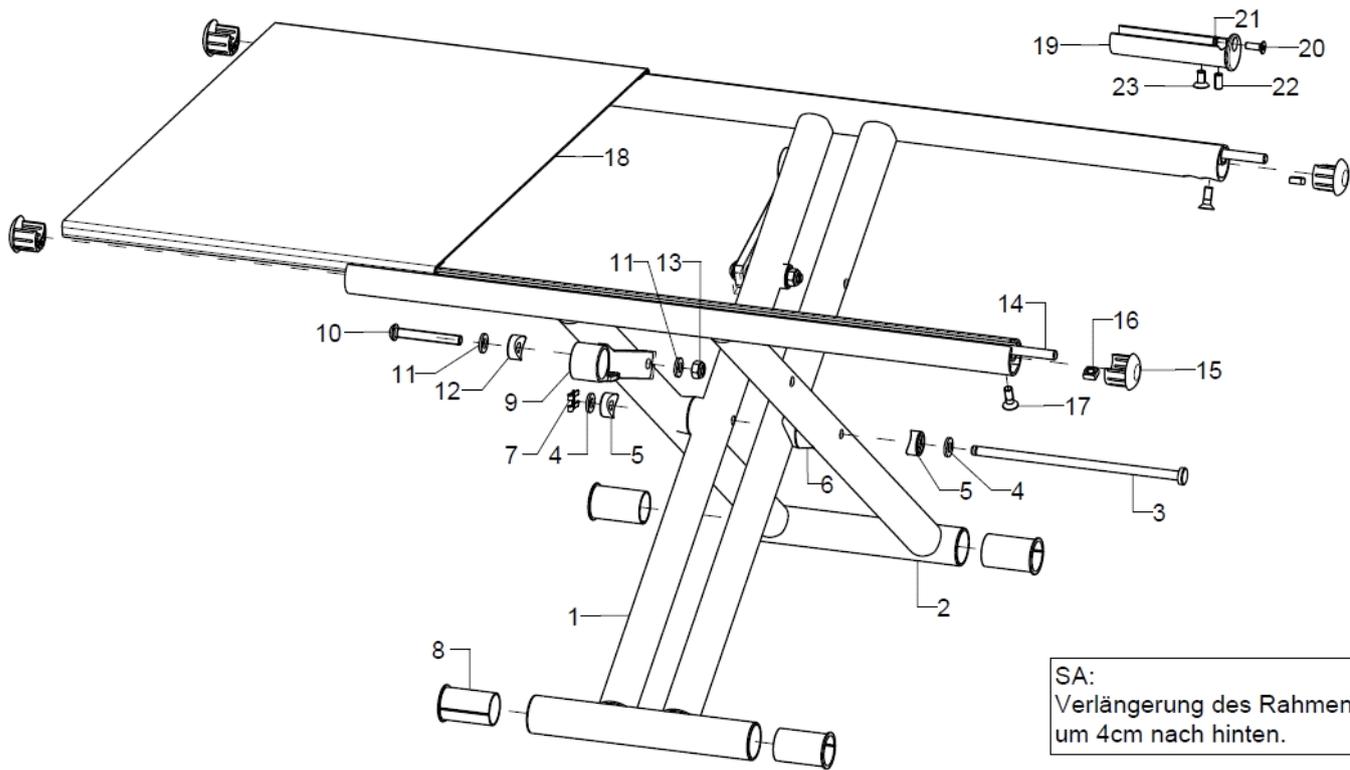


SA:
Verlängerung des Rahmens
um 4cm nach hinten.

| Pos.: | Menge: | Artikelnr.: | Artikelbezeichnung: | Variante: |
|-------|--------|-------------|---|---------------------------------------|
| 1-17 | 1 | 582701 | Kreuzstrebe kpl. Jump beta Sport | SB, ST, Farbe |
| o.B. | 1 | 582702 | Kreuzstrebe kpl. Jump beta Sport mit Sitzschalenaufbau | SB, ST, Farbe |
| o.B. | 1 | 582704 | Kreuzstrebe kpl. Jump beta BSA | SB, ST, Farbe |
| o.B. | 1 | 582705 | Kreuzstrebe kpl. Jump beta BSA mit Sitzschalenaufbau | SB, ST, Farbe |
| o.B. | 1 | 582706 | Kreuzstrebe kpl. Jump beta XL | SB, ST, Farbe |
| o.B. | 1 | 582707 | Kreuzstrebe kpl. Jump beta XL mit Sitzschalenaufbau | SB, ST, Farbe |
| 1 | 1 | | Kreuzstrebenteil rechts | Rahmenvariante, SA, XL, SB, ST, Farbe |
| 2 | 1 | | Kreuzstrebenteil links | Rahmenvariante, SA, XL, SB, ST, Farbe |
| 3-8 | 1 | 58260298 | Montageset Kreuzstrebe | |
| 3 | 1 | | Bolzen ähnlich DIN 1435 | |
| 4 | 2 | | Scheibe ISO 7089 (DIN 125) - A 6,4 | |
| 5 | 2 | | Sattelscheibe Ø16, R11 | |
| 6 | 4 | | Sattelscheibe schwarz Nenn-Ø 24/6 | |
| 7 | 1 | | SL Sicherung für Bolzen und Wellen 6 | |
| 8 | 4 | 582604 | Klemmbuchse d/D=20/22 (35 mm) für Handbremshebel bei Rundrohr / Anbau Kreuzstrebe | |
| 9-13 | 2 | 582603 | Kreuzstrebenlasche inkl. Montageset | SB, XL? |
| 10-13 | 2 | 58260399 | Montageset Kreuzstrebenlasche | |
| 10 | 1 | | Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x45 | |
| 11 | 2 | | Scheibe ISO 7089 (DIN 125) - A 6,4 | |
| 12 | 1 | | Sattelscheibe Ø16, R11 | |
| 13 | 1 | | Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M6 | |
| 14-17 | 2 | 191408 | Bespannungsstange inkl. Montageschraube | ST |
| 15 | 2 | 58260501 | Endstopfen für Sitzprofil | Set (2 Stück) |
| 16 | 1 | | Vierkantmutter DIN 557 - M5 | |
| 17 | 1 | | Senkschraube mit Innensechskant ISO 10642 (DIN 7991) M5x14 | |

| | | | | |
|-------|---|--------|--|--------|
| 18 | 1 | 1914 | Sitzbespannung | SB, ST |
| 19-23 | 2 | 582605 | Sitzverlängerung inkl. Montagezubehör | |
| 20 | 1 | | Senkschraube mit Innensechskant ISO 10642 (DIN 7991) M4x12 | |
| 21 | 1 | | Sicherungsscheibe S4 - FST | |
| 22 | 1 | | Gewindestift mit Innensechskant ISO 4026 (DIN 913), M5x10 | |
| 23 | 1 | | Senkschraube mit Innensechskant ISO 10642 (DIN 7991) M5x10 | |

Sitzfix + Sitzverlängerung

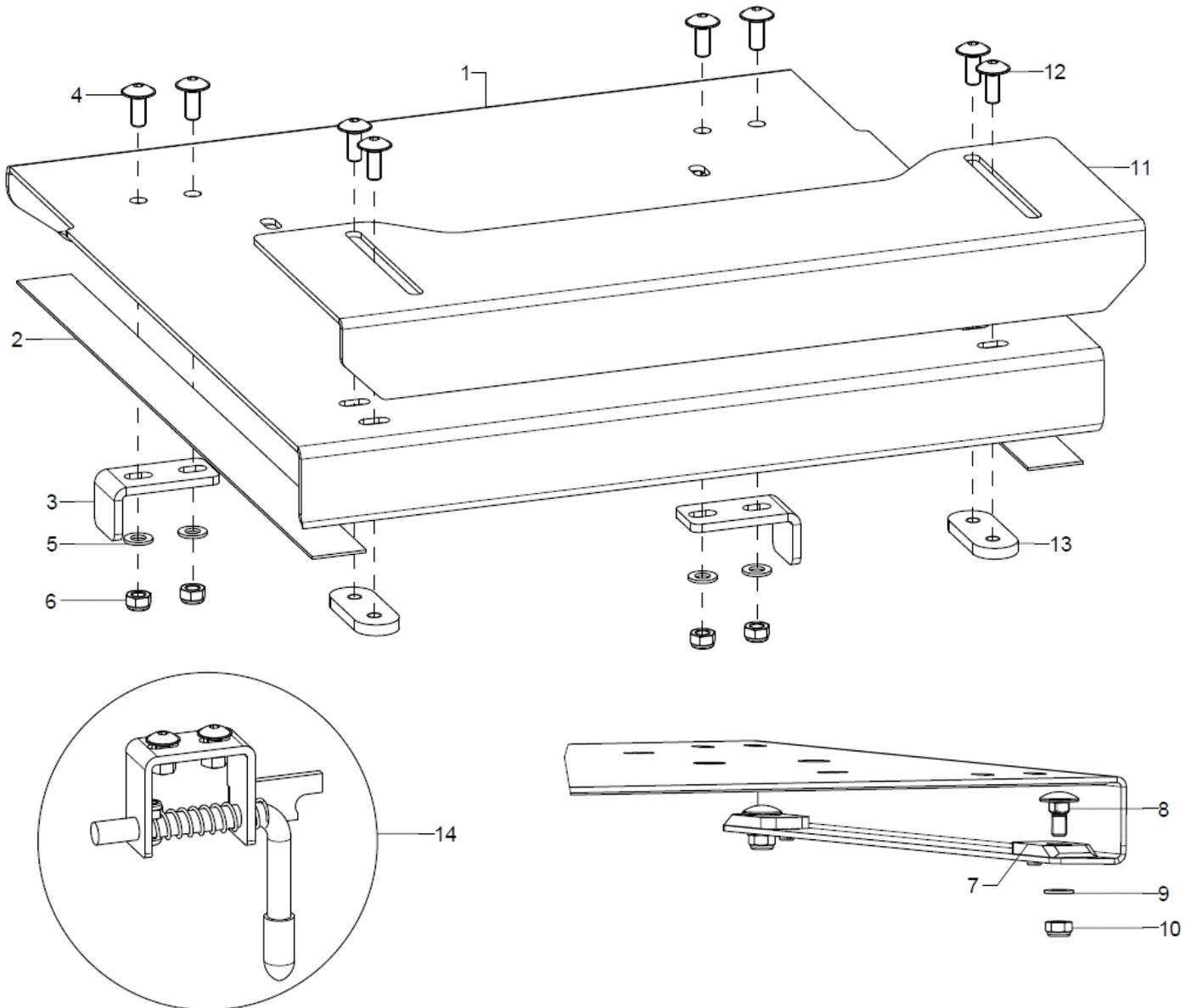

| Pos.: | Menge: | Artikelnr.: | Artikelbezeichnung: | Variante: |
|-------|--------|-------------|--|---------------|
| 1-10 | 1 | 1926 | Sitzfix Jump, inkl. Flauschband | SB, ST, Farbe |
| 2 | 2 | | Flauschband selbstklebend 25mm, schwarz | |
| 3-6 | 2 | 191103 | Fixierwinkel inkl. Montagezubehör | |
| 4 | 4 | | Linsenflanschschraube mit Innensechskant M5x12 | |
| 5 | 4 | | Scheibe ISO 7089 (DIN 125) - A 5,3 | |
| 6 | 4 | | Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M5 | |
| 7-10 | 2 | 192601 | Keil inkl. Montagezubehör | |
| 8 | 4 | | Flachrundschrauben DIN 603 M5x12 | |
| 9 | 4 | | Scheibe ISO 7089 (DIN 125) - A 5,3 | |
| 10 | 4 | | Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M5 | |
| 11-13 | 1 | 191107 | Sitzverlängerung inkl. Montagezubehör | SB, Farbe |
| 12 | 4 | | Linsenflanschschraube mit Innensechskant M5x10 | |
| 13 | 2 | | Lasche 4x16x40 | |
| 14 | 2 | 192021 | Sitzverriegelung, kpl. | Links/rechts |


Sitzkissen

| Pos.: | Menge: | Artikelnr: | Artikelbezeichnung: | Variante: |
|-------|--------|------------|--|---------------------------------------|
| o.B. | 1 | 891002 | Sitzformteil, anatomisch geformt, incl. Bezug | SB, ST, Bezugsfarbe |
| o.B. | 1 | 891001 | Sitzformteil, anatomisch geformt, ohne Bezug | SB, ST |
| o.B. | 1 | 891003 | Wechselbezug für Sitzformteil, anatomisch geformt | SB, ST, Bezugsfarbe |
| o.B. | 1 | 891004 | Inkontinenzbezug für Sitzformteil, anatomisch geformt | SB, ST |
| o.B. | 1 | 8003 | Sitzkissen, Verbundschaum 3 cm mit Bezug | SB, ST, Bezugsfarbe |
| o.B. | 1 | 8005 | Sitzkissen, Verbundschaum 5 cm mit Bezug | SB, ST, Bezugsfarbe |
| o.B. | 1 | 8103 | Sitzkissen, Relaxschaum 3 cm mit Bezug | SB, ST, Bezugsfarbe |
| o.B. | 1 | 8105 | Sitzkissen, Relaxschaum 5 cm mit Bezug | SB, ST, Bezugsfarbe |
| o.B. | 1 | 800050 | Bezug Sitzkissen Trevira | SB, ST, Dicke Sitzkissen, Bezugsfarbe |
| o.B. | 1 | 8603 | Inkontinenzbezug für Standardkissen 3 cm (vom Umtausch ausgeschlossen) | SB, ST |
| o.B. | 1 | 8605 | Inkontinenzbezug für Standardkissen 5 cm (vom Umtausch ausgeschlossen) | SB, ST |

| Stoffmuster | XX |
|----------------|----|
| schwarz | 30 |
| grau | 31 |
| nachtblau | 32 |
| ultramarinblau | 33 |
| petrol | 34 |
| applegreen | 35 |
| bordeauxrot | 36 |
| rot | 38 |
| pink | 39 |


Alle Stoffmuster können unter www.sorgrollstuhltechnik.de angesehen werden.

Abduktionskeil

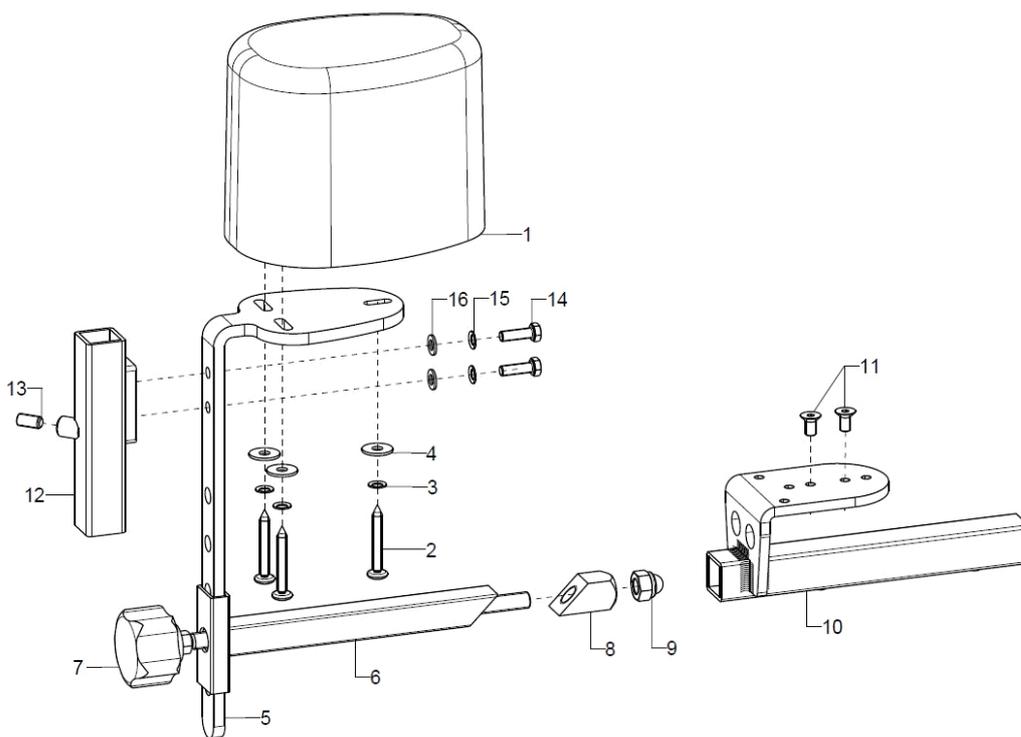


| Pos.: | Menge: | Artikelnr: | Artikelbezeichnung: | Variante: |
|-------|--------|------------|---|---------------------|
| 1-10 | 1 | 1952 | Abduktionskeil Größe S, kpl., Halter mit Polster inkl. Montageteile | |
| o.B. | 1 | 1953 | Abduktionskeil Größe M, kpl., Halter mit Polster inkl. Montageteile | |
| o.B. | 1 | 1954 | Abduktionskeil Größe L, kpl., Halter mit Polster inkl. Montageteile | |
| 1 | 1 | 195002 | Abduktionskeilpolster Größe S (93x66x90 mm) incl. Montageschrauben | LxBxH 93x66x90 mm |
| o.B. | 1 | 195003 | Abduktionskeilpolster Größe M (113x82x100 mm) incl. Montageschrauben | LxBxH 113x82x100 mm |
| o.B. | 1 | 195004 | Abduktionskeilpolster Größe L (128x92x100 mm) incl. Montageschrauben | LxBxH 128x92x100 mm |
| 2-4 | 1 | 19500299 | Montagezubehör Abduktionskeil an Haltewinkel | |
| 2 | 3 | | Spanplattensch. Flachrund m. Kreuzschl. 5x35 vz | |
| 3 | 3 | | Sicherungsscheibe S5 - FST | |
| 4 | 3 | | Scheibe ISO 7093 (DIN 9021) - 5,3 | |
| 5 | 1 | 195101 | Haltewinkel für Abduktionskeilpolster, schwarz | |
| 6 | 1 | 195103 | Einschubhalter 15x15 mm für Abduktionskeilaufnahme, schwarz | |
| 7-9 | 1 | 684004 | Klemmset für Gesäßpelotte oder Abduktionskeil | |
| 7 | 1 | | Gewindestange M6/M8 kpl. | |
| 8 | 1 | | Klemmteil - Gesäßpelotte, 4kt 15x15x30 | |
| 9 | 1 | | Sechsk.-Hutmutter niedr. Form mit Klemmt. DIN 986 - M8 | |
| 10 | 1 | 195102 | Schweißteil Aufnahme mit Flanschwinkel, inkl. Montagezubehör | |
| 11 | 2 | | Senkschraube mit Innensechskant ISO 10642 (DIN 7991) M5x10 | |
| 12-16 | 1 | 400105 | Adaptieraufnahme vierkant für Therapietisch 15x15x100, schwarz, incl. Montageschrauben und Klemmung | |
| 13 | 1 | | Gewindestift mit Innensechskant ISO 4026 (DIN 913), M6x12 | |
| 14 | 2 | | Sechskantschraube ISO 4017 (DIN 933) - M5x16 | |
| 15 | 2 | | Sicherungsscheibe S5 - FST | |
| 16 | 2 | | Scheibe ISO 7089 (DIN 125) - A 5,3 | |

Therapietisch Variante 1 seitlich wegklappbar

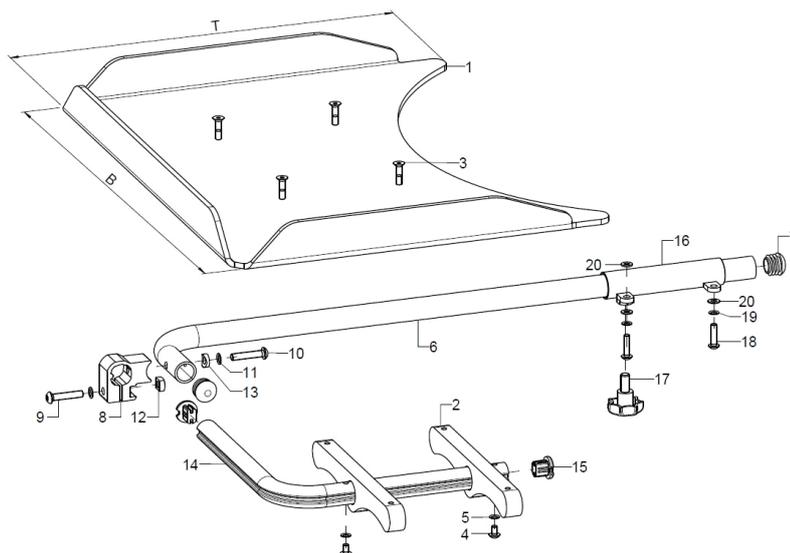


| Pos.: | Menge: | Artikelnr: | Artikelbezeichnung: | Variante: |
|-------|--------|------------|---|---------------------------------------|
| 1-20 | 1 | 9204XX | Therapietisch Variante 1 seitlich wegklappbar kpl., | Holz, Polycarbonat, Größe, Seitenteil |
| 1 | 1 | 920030 | Therapietisch aus Polycarbonat Gr.1, BxT 45x36 cm (ohne Montageset) | XX=10, Empfohlen SB28 –30 |
| o.B. | 1 | 920031 | Therapietisch aus Polycarbonat Gr.2, BxT 59x45 cm (ohne Montageset) | XX=11, Empfohlen SB32 –40 |
| o.B. | 1 | 920032 | Therapietisch aus Polycarbonat Gr.3 (B70xT50) | XX=12, Empfohlen >SB42 |
| o.B. | 1 | 920033 | Therapietisch Gr.1 (B50xT40) Holz | XX=13, Empfohlen SB26 –30 |
| o.B. | 1 | 920034 | Therapietisch Gr.2 (B60xT50) Holz | XX=14, Empfohlen SB32 –42 |
| 2-20 | 1 | 9204 | Montagezubehör Therapietisch Variante 1 kpl. (ohne Tisch) | |
| 2 | 2 | 920403 | Tragkonsole umlegbar 15x35x200 | |
| 3-5 | 1 | 92040399 | Montageset Tragkonsole | |
| 3 | 4 | | Senkschraube mit Innensechskant ISO 10642 (DIN 7991) M5x20 | |
| 4 | 2 | | Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M5x8 | |
| 5 | 2 | | Sicherungsscheibe S5 - FST | |
| 6 | 1 | 920402 | Zsb. Tragrohr inkl. Stopfen | |
| 7 | 2 | | Stopfen mit Lamellen für Rohr ø20x1-2, schwarz | |
| 8 | 1 | 92040403 | Klemmteil inkl. Montagezubehör | |
| 9-13 | 1 | 92040499 | Montageset Klemmteil | |
| 9 | 1 | | Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x30 | |
| 10 | 1 | | Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x35 | |
| 11 | 2 | | Sicherungsscheibe S6 - FST | |
| 12 | 1 | | Vierkantmutter DIN 557 – M6 | |
| 13 | 1 | | Sattelscheibe ø 12/5x2.5 | |
| 14 | 1 | 920404 | Klappbügelrohr inkl. Profilrohr-Endstopfen | |
| 15 | 2 | 620105 | Stopfen für Profilrohr | |
| 16 | 1 | 920405 | Rohraufnahme, Schweißteil, rechts inkl. Montagezubehör Rohraufnahme | Anbau rechts bei S-teil standard |
| o.B. | 1 | 920406 | Rohraufnahme, Schweißteil, links inkl. Montagezubehör Rohraufnahme | Anbau links bei S-teil standard |
| o.B. | 2 | 920407 | Rohraufnahme, Schweißteil inkl. Montageset | Bei Kleider- und Radschutz |
| 17-20 | 2 | 92040599 | Montagezubehör Rohraufnahme | |
| 17 | 1 | | 7-Sterngriff ø32 - M8x15 Außengewinde, schwarz | |
| 18 | 2 | | Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M5x20 | |
| 19 | 2 | | Sicherungsscheibe S5 - FST | |
| 20 | 3 | | Scheibe ISO 7089 (DIN 125) - A 5,3 | |

Therapietisch Variante 2 an Armpolster gesteckt

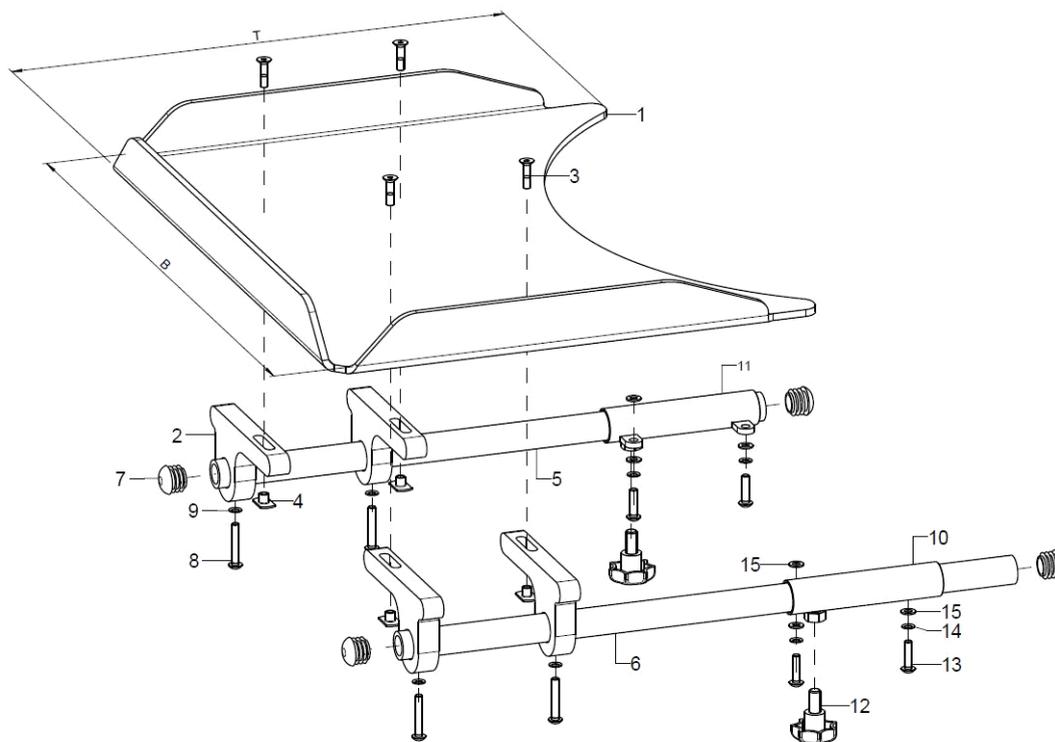




| Pos.: | Menge: | Artikelnr: | Artikelbezeichnung: | Variante: |
|-------|--------|------------|---|---------------------------------------|
| 1-15 | 1 | 9207XX | Therapietisch Variante 2 an Armpolster kpl. | Holz, Polycarbonat, Größe, Seitenteil |
| 1 | 1 | 920030 | Therapietisch aus Polycarbonat Gr.1, BxT 45x36 cm (ohne Montageset) | XX=10, Empfohlen SB28 –30 |
| o.B. | 1 | 920031 | Therapietisch aus Polycarbonat Gr.2, BxT 59x45 cm (ohne Montageset) | XX=11, Empfohlen SB32 –40 |
| o.B. | 1 | 920032 | Therapietisch aus Polycarbonat Gr.3 (B70xT50) | XX=12, Empfohlen >SB42 |
| o.B. | 1 | 920033 | Therapietisch Gr.1 (B50xT40) Holz | XX=13, Empfohlen SB26 –30 |
| o.B. | 1 | 920034 | Therapietisch Gr.2 (B60xT50) Holz | XX=14, Empfohlen SB32 –42 |
| 2-15 | | 9207 | Montagezubehör Therapietisch Variante 2 an Armpolster | |
| 2 | 4 | 920705 | Tragkonsole steckbar 15x61x120 | |
| 3-4 | 1 | 92070599 | Montagezubehör Tragkonsole | |
| 3 | 4 | | Senkschraube mit Innensechskant ISO 10642 (DIN 7991) M5x20 | |
| 4 | 4 | | Anschweißmutter C - M5x7,5 | |
| 5 | 1 | 920702 | Tragrohr Ro 20x3x400 inkl. Montagezubehör | |
| 6 | 1 | 920704 | Tragrohr Ro 20x3x450 inkl. Montagezubehör | |
| 7-9 | 2 | | Montageset Tragrohr | |
| 7 | 2 | | Stopfen mit Lamellen für Rohr ø20x1-2, schwarz | |
| 8 | 2 | | Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M5x30 | |
| 9 | 2 | | Sicherungsscheibe S5 - FST | |
| 10 | 1 | 920703 | Rohraufnahme, Schweißst., links inkl. Montagezubehör | Bei Seitenteil standard |
| 11 | 1 | 920701 | Rohraufnahme, Schweißst., rechts inkl. Montagezubehör | Bei Seitenteil standard |
| o.B. | 2 | 920407 | Rohraufnahme, Schweißteil inkl. Montageset | Bei Kleider- und Radschutz |
| 12-15 | 2 | 92040599 | Montagezubehör Rohraufnahme | |
| 12 | 1 | | 7-Sterngriff ø32 - M8x15 Außengewinde, schwarz | |
| 13 | 2 | | Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M5x20 | |
| 14 | 2 | | Sicherungsscheibe S5 - FST | |
| 15 | 3 | | Scheibe ISO 7089 (DIN 125) - A 5,3 | |

Rückenrohr Standard

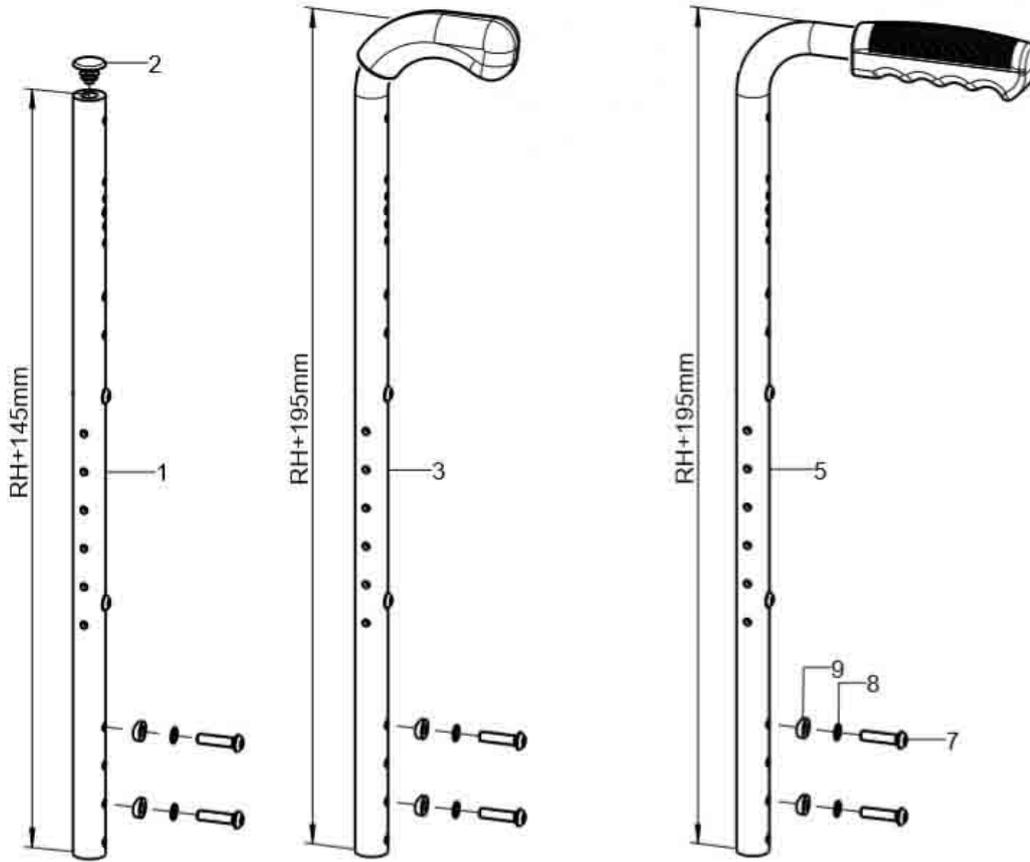

| Pos.: | Menge: | Artikelnr: | Artikelbezeichnung: | Variante: |
|-------|--------|------------|--|-----------|
| 1-2 | 2 | 623705XX | Rückenrohr 90° standard inkl. Stopfen | XX=RH |
| o.B. | 2 | 623707XX | Rückenrohr Stahl 90° standard inkl. Stopfen | XX=RH |
| 2 | 1 | | Lamellenstopfen f. Ø20x5mm | |
| 3 | 2 | 623806XX | Rückenrohr 90° standard, Griff kurz | XX=RH |
| o.B. | 2 | 623807XX | Rückenrohr Stahl 90° standard, Griff kurz | XX=RH |
| 5 | 2 | 623706XX | Rückenrohr 90° standard, Griff lang | XX=RH |
| o.B. | 2 | 623708XX | Rückenrohr Stahl 90° standard, Griff lang | XX=RH |
| 7-9 | 2 | 62370099 | Montageset Rückenrohr | |
| 7 | 2 | | Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x25 | |
| 8 | 2 | | Sicherungsscheibe S6 - FST | |
| 9 | 2 | | Sattelscheibe ø12/6,2x2,5 | |


Rücken winkelverstellbar / winkeleinstellbar

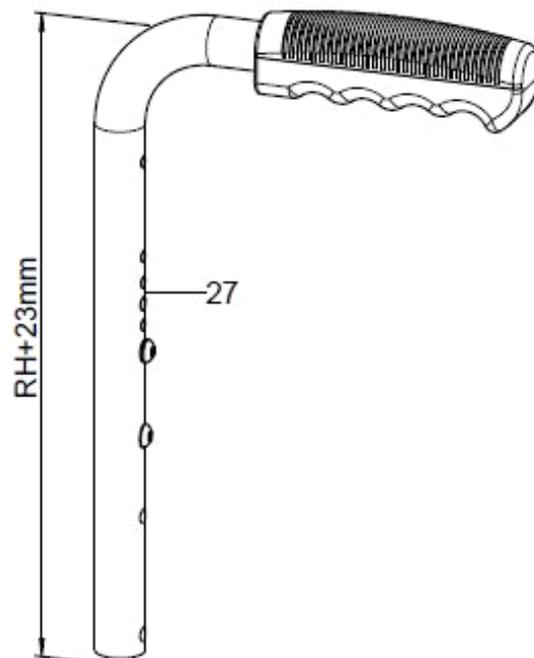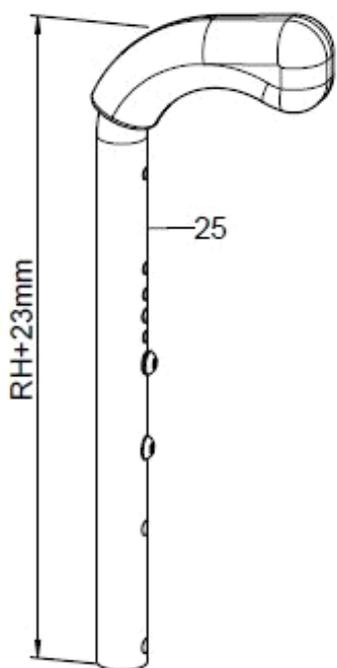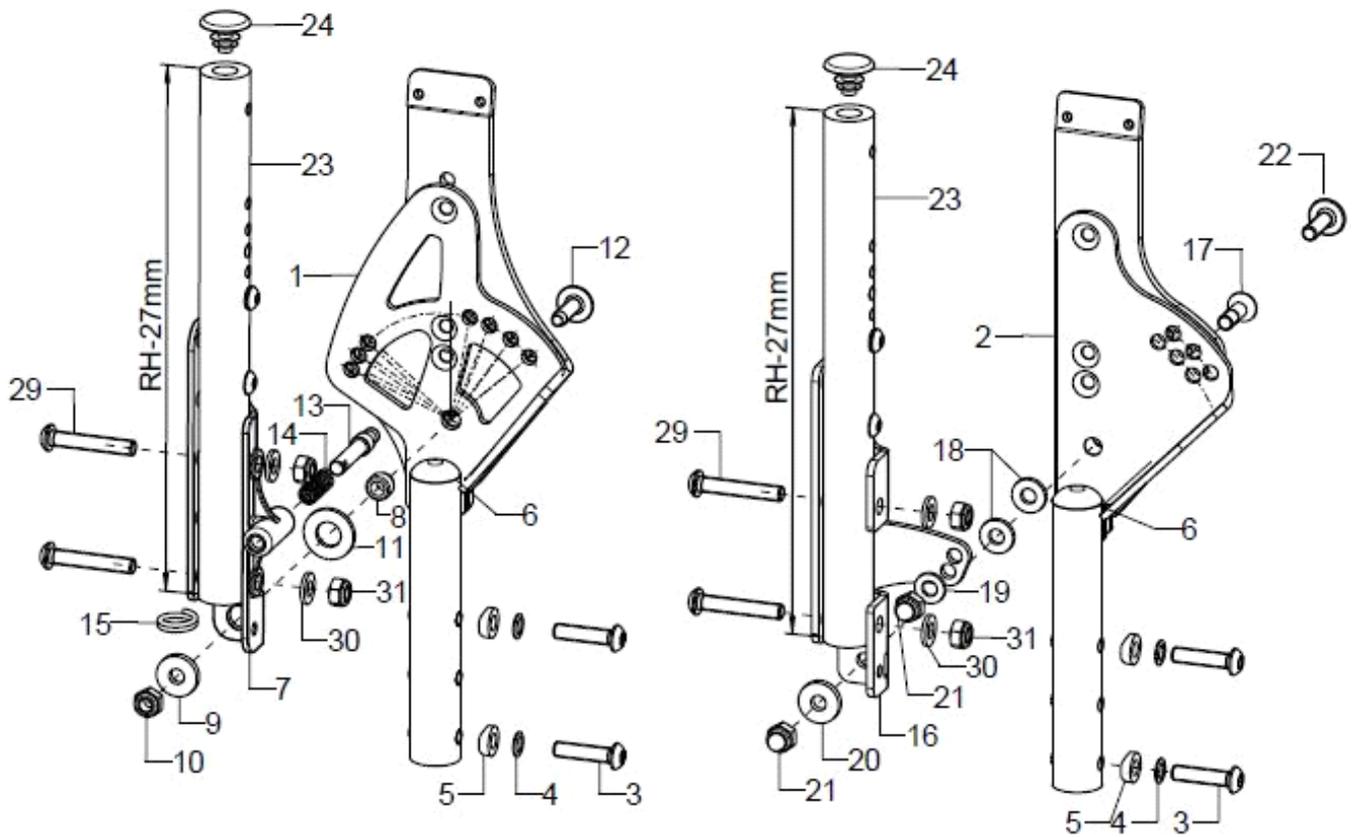

| Pos.: | Menge: | Artikelnr: | Artikelbezeichnung: | Variante: |
|--------------|---------------|-------------------|--|--|
| 1a | 1 | 62370202 | Rückenwinkelverstellung, rechts | |
| o.B. | 1 | 62370201 | Rückenwinkelverstellung, links | |
| 1b | 1 | 61110202 | Rückenwinkelverstellung rechts für Desk-/Langes Seitenteil, inkl. Kunststoffschrauben | Bei Desk/langem Seitenteil |
| o.B. | 1 | 61110201 | Rückenwinkelverstellung links für Desk-/Langes Seitenteil, inkl. Kunststoffschrauben | Bei Desk/langem Seitenteil |
| 2a | 1 | 61110102 | Winklereinstellung, rechts | |
| o.B. | 1 | 61110101 | Winklereinstellung, links | |
| 2b | 1 | 61110104 | Winklereinstellung Desk, rechts, inkl. Kunststoffschrauben | Bei Desk/langem Seitenteil |
| o.B. | 1 | 61110103 | Winklereinstellung Desk, links, inkl. Kunststoffschrauben | Bei Desk/langem Seitenteil |
| 3-6 | 2 | 62370299 | Montagezubehör Rückenwinkelverstellung | |
| 3 | 2 | | Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x25 | |
| 4 | 2 | | Sicherungsscheibe S6 - FST | |
| 5 | 2 | | Sattelscheibe $\varnothing 12/6,2 \times 2,5$ | |
| 6 | 1 | | Stopfen mit Lamellen für Rohr $\varnothing 18 \times 1-2$, schwarz | |
| 7-12 | 1 | 62370204 | Rückenrohrgelenk rechts kpl. inkl. Montagematerial | |
| o.B. | 1 | 62370203 | Rückenrohrgelenk links kpl. inkl. Montagematerial | |
| 8-12 | 2 | 62370298 | Montagezubehör U-Teil 137 mm | |
| 8 | 1 | | Bundbuchse $\varnothing 8/10 \times 8,1$ | |
| o.B. | 1 | | Passscheibe DIN 988 - 10x16x0,3 | Bei Desk/langem Seitenteil und winkelverstellbar |
| o.B. | 1 | | Passscheibe DIN 988 - 10x16x0,5 | Bei Desk/langem Seitenteil und winkelverstellbar, bei großem Spiel |
| 9 | 1 | | Scheibe DIN 7349 - 6,4 | |
| 10 | 1 | | Sechskantmutter selbstst. niedrige Form DIN 985 - M6 | |
| 11 | 1 | | Scheibe ISO 7089 (DIN 125) - A 10,5 - PA schwarz | |
| 12 | 1 | | Flachkopfschraube m. Innensechskant und Schräge - M6x20 | Bei Desk/langem Seitenteil |
| o.B. | 1 | | Linsenflanschschraube mit Innensechskant M6x20 | |
| 13-15 | 2 | 610109 | Rastbolzen $\varnothing 8 \times 44$ für Rückenwinkelverstellung incl. Feder und Drahtformring | |
| 14 | 2 | | Druckfeder DIN 2098 0,7x7,65/9,05x21 | |
| 15 | 2 | | Schlüsselring $\varnothing 25/20$ mm flach, silber | |
| o.B. | 1 | 61130601 | Entriegelungsband winkelverstellbarer Rücken mit Schließer | SB |
| 16 | 1 | 61110302 | Rückenrohrgelenk U-Teil, schwarz, rechts für feste Winklereinstellung incl. Montagematerial | |
| o.B. | 1 | 61110301 | Rückenrohrgelenk U-Teil, schwarz, links für feste Winklereinstellung incl. Montagematerial | |
| 17-22 | 2 | 61110399 | Montagezubehör U-Teil für Winkelverstellung | |
| 17 | 1 | | Senkschraube mit Innensechskant ISO 10642 (DIN 7991) M6x20 | |
| 18 | 2 | | Scheibe verstärkt $\varnothing 14/6,2 \times 2$ | |
| 19 | 1 | | Scheibe ISO 7089 (DIN 125) - A 6,4 | |
| 20 | 1 | | Scheibe DIN 7349 - 6,4 | |
| 21 | 2 | | Sechsk.-Hutmutter niedr. Form mit Klemmt. DIN 986 - M6 | |
| 22 | 1 | | Flachkopfschraube m. Innensechskant und Schräge - M6x20 | Bei Desk/langem Seitenteil |
| o.B. | 1 | | Linsenflanschschraube mit Innensechskant M6x20 | |
| 23-24 | 2 | 623302XX | Rückenrohr winkelverstellbar incl. Stopfen | XX=RH |
| o.B. | 2 | 623304XX | Rückenrohr Stahl winkelverstellbar incl. Stopfen | XX=RH |
| 24 | 2 | | Lamellenstopfen f. $\varnothing 20 \times 5$ mm | |
| 25 | 2 | 623403XX | Rückenrohr winkelverstellbar, Griff kurz | XX=RH |
| o.B. | 2 | 623404XX | Rückenrohr Stahl winkelverstellbar, Griff kurz | XX=RH |
| 27 | 2 | 623303XX | Rückenrohr winkelverstellbar, Griff lang | XX=RH |
| o.B. | 2 | 623305XX | Rückenrohr Stahl winkelverstellbar, Griff lang | XX=RH |


| | | | |
|-------|---|----------|---|
| 29-31 | 2 | 62330099 | Montageset Rückenrohr winkelverstellbar an Rückenrohrgelenk |
| 29 | 2 | | Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x35 |
| 30 | 2 | | Scheibe ISO 7089 (DIN 125) - A 6,4 |
| 31 | 2 | | Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M6 |

Rücken mit Gasdruckfederverstellung

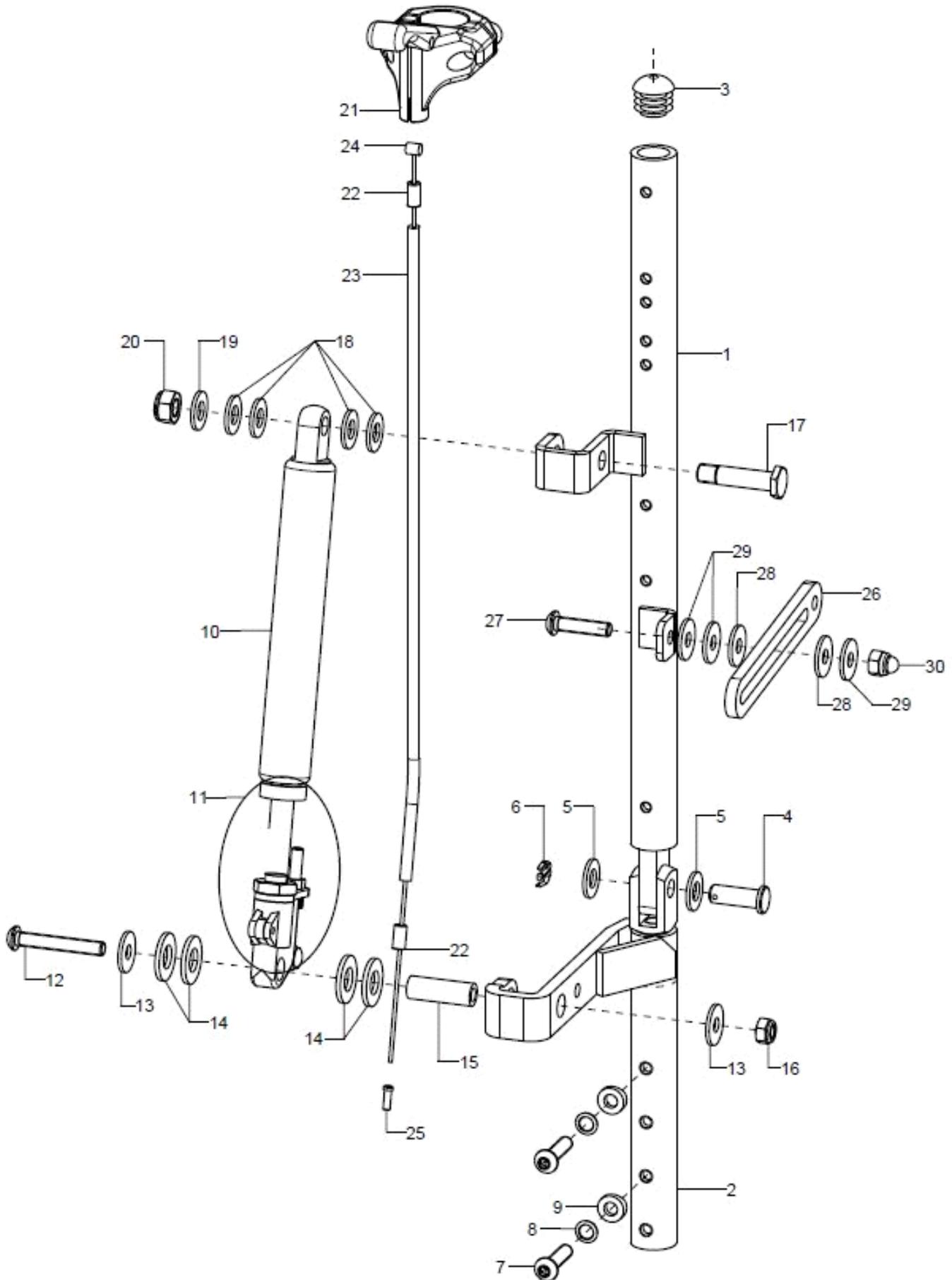

| Pos.: | Menge: | Artikelnr: | Artikelbezeichnung: | Variante: |
|--------------|---------------|-------------------|---|--------------------------|
| 1-30 | 1 | 6107 | Rücken mit Gasdruckfederverstellung | RH |
| 1+3-6 | 1 | 6107XX02 | Rückenrohr für GDF-Rücken, rechts | XX=RH |
| o.B. | 1 | 6107XX01 | Rückenrohr für GDF-Rücken, links | XX=RH |
| 2 | 1P | 610710 | Rückenrohr GDF Unterteil | links/rechts |
| 3 | 1 | | Stopfen mit Lamellen für Rohr ø18x1-2, schwarz | |
| 4 | 1 | | Bolzen DIN1434 kleiner Kopf ø8x23 | |
| 5 | 2 | | Scheibe ISO 7089 (DIN 125) - A 8,4 | |
| 6 | 1 | | Splint DIN94 2x20 | |
| 7-9 | 2 | 62370299 | Montagezubehör Rückenwinkelverstellung | |
| 7 | 2 | | Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x25 | |
| 8 | 2 | | Sicherungsscheibe S6 - FST | |
| 9 | 2 | | Sattelscheibe ø12/6,2x2,5 | |
| 10 | 2 | 190505 | Gasdruckfeder 100N/40 mm Hub für GDF-Rücken | Bis SB36 und bis RH45 |
| o.B. | 2 | 190507 | Gasdruckfeder 200N/40 mm Hub für GDF-Rücken | Ab SB38 und/oder ab RH50 |
| 11 | 2 | 190521 | GDF-Auslösekopf kpl. | |
| 12-16 | 2 | 19050599 | Montageset Gasdruckfeder Auslösekopf (Schraube, Scheiben, Buchse, Mutter) | |
| 12 | 1 | | Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x40 | |
| 13 | 2 | | Scheibe ISO 7093 (DIN 9021) - 6,4 | |
| 14 | 3 | | Scheibe ISO 7089 (DIN 125) - A 10,5 - PA schwarz | |
| 15 | 1 | | Distanzbuchse Ro 10x2x29 | |
| 16 | 1 | | Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M6 | |
| 17-20 | 1 | 190503 | Passschraube M8x35 SW13 inkl. Montagezubehör | |
| 18 | 4 | | Scheibe ISO 7089 (DIN 125) - A 8,4 - PA schwarz | |
| 19 | 1 | | Scheibe ISO 7089 (DIN 125) - A 8,4 | |
| 20 | 1 | | Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M8 | |
| 21-25 | 1 | 190512 | Bedieneinheit für GDF mit Auslösehebel kurz inkl. Zug, Hülle, Anschlusssteile | |
| 21 | 1 | 190513 | Handauslösehebel für Gasdruckfeder ohne Feststeller | Standard |
| 22 | 1 | 352412 | Abschlußhülse gedreht aus Metall, ø5, Endkappen | |
| 23 | 1 | 352013 | Außenhülle für Bremszug schwarz, 150 cm lang | |
| 24 | 1 | 190517 | Innenzug für Gasdruckfeder ø1.3x2000, Einfachnippel | |
| 25 | 1 | 352005 | Endkappe für Innenzüge ø1-1,5 mm | Set 2 Stück |
| 26-30 | 2 | 610703 | Langloflasche 110 | |
| 27 | 1 | | Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x25 | |
| 28 | 2 | | Scheibe ISO 7093 (DIN 9021) - 6,4 - PA | |
| 29 | 3 | | Scheibe ISO 7093 (DIN 9021) - 6,4 | |
| 30 | 1 | | Sechskantmutter ISO 4032 (DIN 934) - M6 | |


Stabilisierungsstange am Rückenrohr

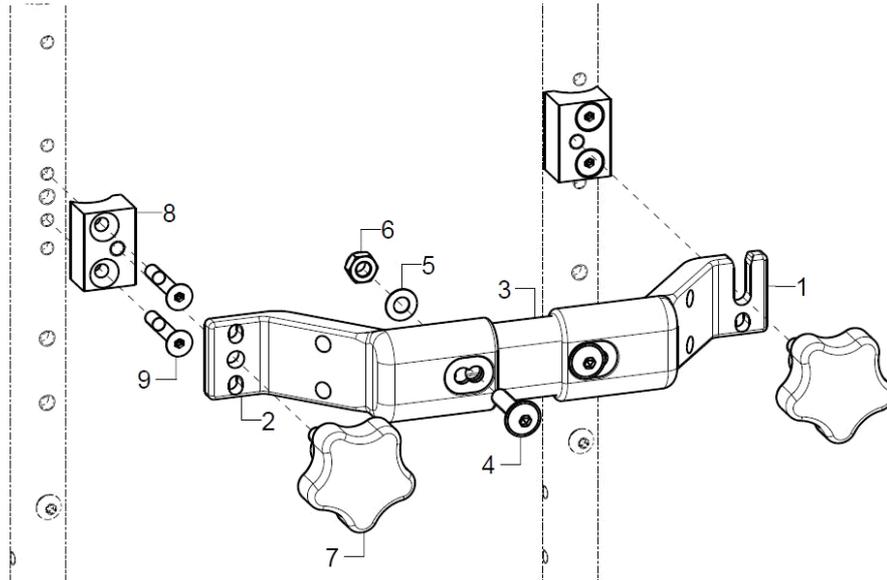

| Pos.: | Menge: | Artikelnr: | Artikelbezeichnung: | Variante: |
|-------|--------|------------|--|-----------|
| 1-6 | | 64090201 | Stabilisierungsstange tief (50mm)/ABS für Faltrollstuhl | SB |
| 1 | 1 | 64090102 | Stabilisierungsstangenadapter, schwarz, tief, ABS | |
| 2 | 1 | 64090101 | Stabilisierungsstangenadapter, schwarz, tief/fest | |
| 3-6 | 1 | 64090110 | Stabilisierungsstangenrohr, schwarz | SB |
| 4 | 2 | | Linseflanschschraube mit Innensechskant M6x25 | |
| 5 | 2 | | Passscheibe DIN 988 - 6x12x0,5 - A2 | |
| 6 | 2 | | Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M6 | |
| 7 | 2 | | Distanz mit Sterngriff verklebt | |
| 8+9 | 2 | 640701 | Distanz für Stabilisierungsstange bei winkelverstellbarem Rücken | |
| 9 | 2 | | Senkschraube mit Innensechskant ISO 10642 (DIN 7991) M5x30 | |

| SB | L Stabilisierungsrohr | |
|----|------------------------|--------------------|
| | Rücken winkelverst. | Rücken Standard |
| 30 | 155 | 175 |
| 32 | 175 | 195 |
| 34 | 195 | 215 |
| 36 | 215 | 235 |
| 38 | 235 | 255 |
| 40 | 255 | 275 |
| 42 | 275 | 295 |
| 44 | 295 | 315 |
| 46 | 315 | 335 |
| 48 | 335 | 355 |
| 50 | 355 | 375 |


Stabilisierungsstange für ausziehbare Schiebegriffe

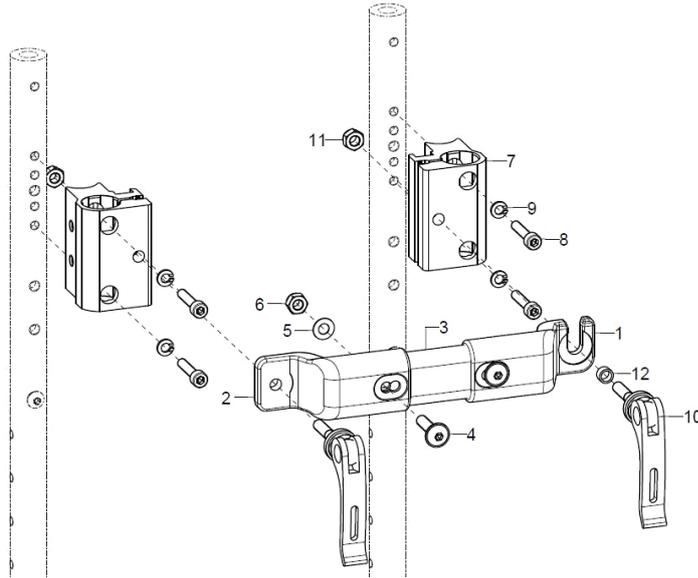

| Pos.: | Menge: | Artikelnr: | Artikelbezeichnung: | Variante: |
|-------|--------|------------|--|---|
| 1-6 | 1 | 64090202 | Stabilisierungsstange flach (30mm)/ABS für Faltrollstuhl | SB |
| 1 | 1 | 64090104 | Stabilisierungsadapter, schwarz, flach/ABS | |
| 2 | 1 | 64090103 | Stabilisierungsstangenadapter, flach/fest | |
| 3 | 1 | 64090110 | Stabilisierungsstangenrohr, schwarz | SB |
| 4 | 2 | | Linseflanschschraube mit Innensechskant M6x25 | |
| 5 | 2 | | Passscheibe DIN 988 - 6x12x0,5 - A2 | |
| 6 | 2 | | Sechskantmutter selbstst. niedrige Form DIN 985 - M6 | |
| 7-12 | 2 | 650051 | Halter Schiebegriff 58mm/R10 incl. Montagematerial und Exzenterspanner | Montage an Rückenrohr (bei Rücken Standard 90°) |
| 8 | 2 | | Zylinderschraube ISO 4762 (DIN 912) M5x25 | |
| 9 | 2 | | Federring DIN 127 - A 5 | |
| 10 | 1 | 652225 | Exzenterspanner Länge 35, M6x22, schwarz | |
| 11 | 1 | | Sechskantmutter selbstst. niedrige Form DIN 985 - M6 | |
| 12 | 1 | | Buchse 8x6x4,5 | |


| SB | L Stabilisierungsrohr |
|----|-----------------------|
| 30 | 175 |
| 32 | 195 |
| 34 | 215 |
| 36 | 235 |
| 38 | 255 |
| 40 | 275 |
| 42 | 295 |
| 44 | 315 |
| 46 | 335 |
| 48 | 355 |
| 50 | 375 |

Schiebegriffe

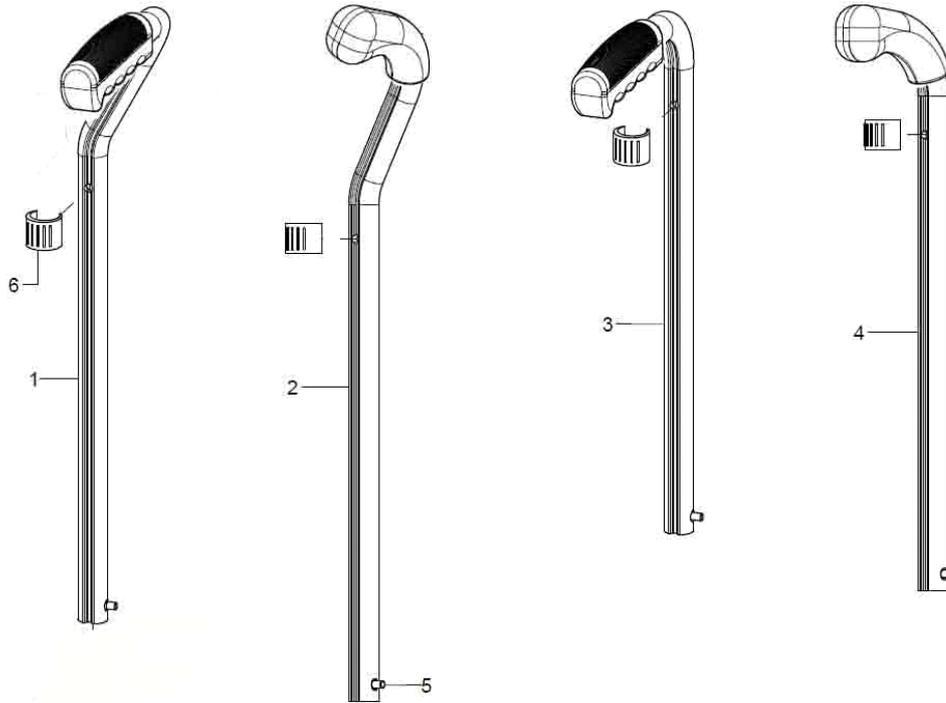

| Pos.: | Menge: | Artikelnr.: | Artikelbezeichnung: | Variante: |
|-------|--------|--------------|--|-----------|
| 1+5+6 | 1 | 650532 | Schiebegriff 15 cm ausziehbar gekröpft -rechts- Handgriff lang incl. Stativfeder | |
| o.B. | 1 | 650531 | Schiebegriff 15 cm ausziehbar gekröpft -links- Handgriff lang incl. Stativfeder | |
| o.B. | 1 | 650632 | Schiebegriff 25 cm ausziehbar gekröpft -rechts- Handgriff lang incl. Stativfeder | |
| o.B. | 1 | 650631 | Schiebegriff 25 cm ausziehbar gekröpft -links- Handgriff lang incl. Stativfeder | |
| 2+5+6 | 1 | 650552 | Schiebegriff 15 cm ausziehbar gekröpft -rechts- Handgriff kurz incl. Stativfeder | |
| o.B. | 1 | 650551 | Schiebegriff 15 cm ausziehbar gekröpft -links- Handgriff kurz incl. Stativfeder | |
| o.B. | 1 | 650554 | Schiebegriff 25 cm ausziehbar gekröpft -rechts- Handgriff kurz incl. Stativfeder | |
| o.B. | 1 | 650553 | Schiebegriff 25 cm ausziehbar gekröpft -links- Handgriff kurz incl. Stativfeder | |
| 3+5+6 | 2 | 650130 | Schiebegriff, 15 cm ausziehbar gerade Handgriff lang incl. Stativfeder | |
| o.B. | 2 | 650230 | Schiebegriff, 25 cm ausziehbar gerade Handgriff lang incl. Stativfeder | |
| 4+5+6 | 2 | 650251 | Schiebegriff, 15 cm ausziehbar gerade Handgriff kurz incl. Stativfeder | |
| o.B. | 2 | 650250 | Schiebegriff, 25 cm ausziehbar gerade Handgriff kurz incl. Stativfeder | |
| 5 | 2 | 650160 | Stativfeder für Schiebegriffsicherung (2er Set) | 2er Set |
| 6 | 2 | 046350200010 | Klemmschalengleiter schwarz, Nenn-ø 20-22 | 10 er Set |


Schiebestange

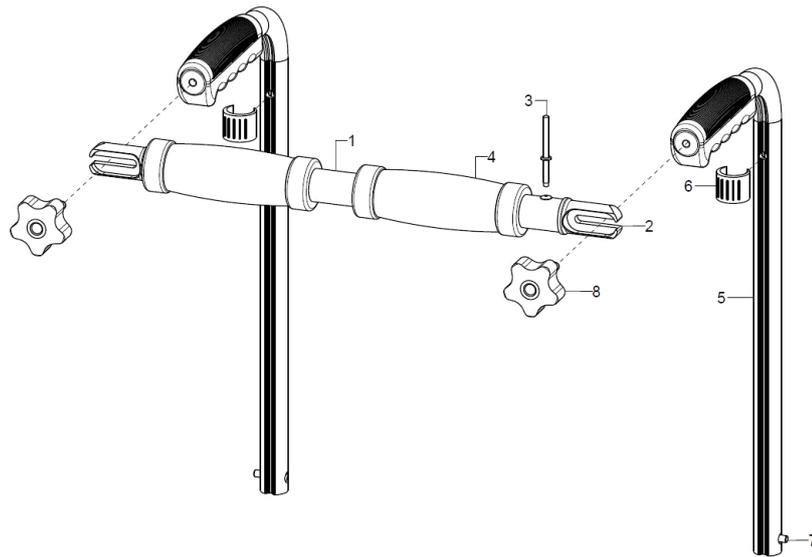

| Pos.: | Menge: | Artikelnr: | Artikelbezeichnung: | Variante: |
|---------|--------|--------------|--|---|
| 1-4 | 1 | 65500902 | Schiebestangenrohr vormontiert mit Moosgummigriffen und Haltern | SB, Schiebegriff gerade - gekröpft, Standard- oder ausziehbare Schiebegriffe, Rücken standard - winkelverstellbar - GDF-winkelverstellbar |
| 1 | 1 | | Schiebestangenrohr | |
| 2+3 | 2 | 65500901 | Halter Schiebestange abnehmbar | |
| 3 | 1 | | Blindniet F4x18 Al/St | |
| 4 | 2 | 655004 | Griff Moosgummi 12cm | |
| o.B. | 2 | 65500915 | Griff Moosgummi 9cm | |
| 5-7 | 2 | 650140 | Schiebegriff 15 cm ausziehbar gerade, Handgriff für Schiebestange inkl. Stativfeder | |
| o.B. | 2 | 650240 | Schiebegriff 25 cm ausziehbar gerade, Handgriff für Schiebestange inkl. Stativfeder | |
| altern. | 1 | 650542 | Schiebegriff 15 cm ausziehbar gekröpft rechts, Handgriff für Schiebestange inkl. Stativfeder | |
| o.B. | 1 | 650541 | Schiebegriff 15 cm ausziehbar gekröpft links, Handgriff für Schiebestange inkl. Stativfeder | |
| altern. | 1 | 650642 | Schiebegriff 25 cm ausziehbar gekröpft rechts, Handgriff für Schiebestange inkl. Stativfeder | |
| o.B. | 1 | 650641 | Schiebegriff 25 cm ausziehbar gekröpft links, Handgriff für Schiebestange inkl. Stativfeder | |
| 6 | 1 | 046350200010 | Klemmschalengleiter schwarz, Nenn- \varnothing 20-22 | 10 er Set |
| 7 | 1 | 650160 | Stativfeder für Schiebegriffsicherung (2er Set) | 2er Set |
| 6 | 2 | 65500904 | Sterngriff \varnothing 40-M6x25 mit Markierungsscheibe | |

| | |
|-------------------------|---|
| gerade Schiebegriffe | - Griff Moosgummi 9 cm von SB30-34 cm - Griff Moosgummi 12 cm ab SB36 cm |
| gekröpfte Schiebegriffe | - Griff Moosgummi 12 cm |


Rückenbespannung Standard

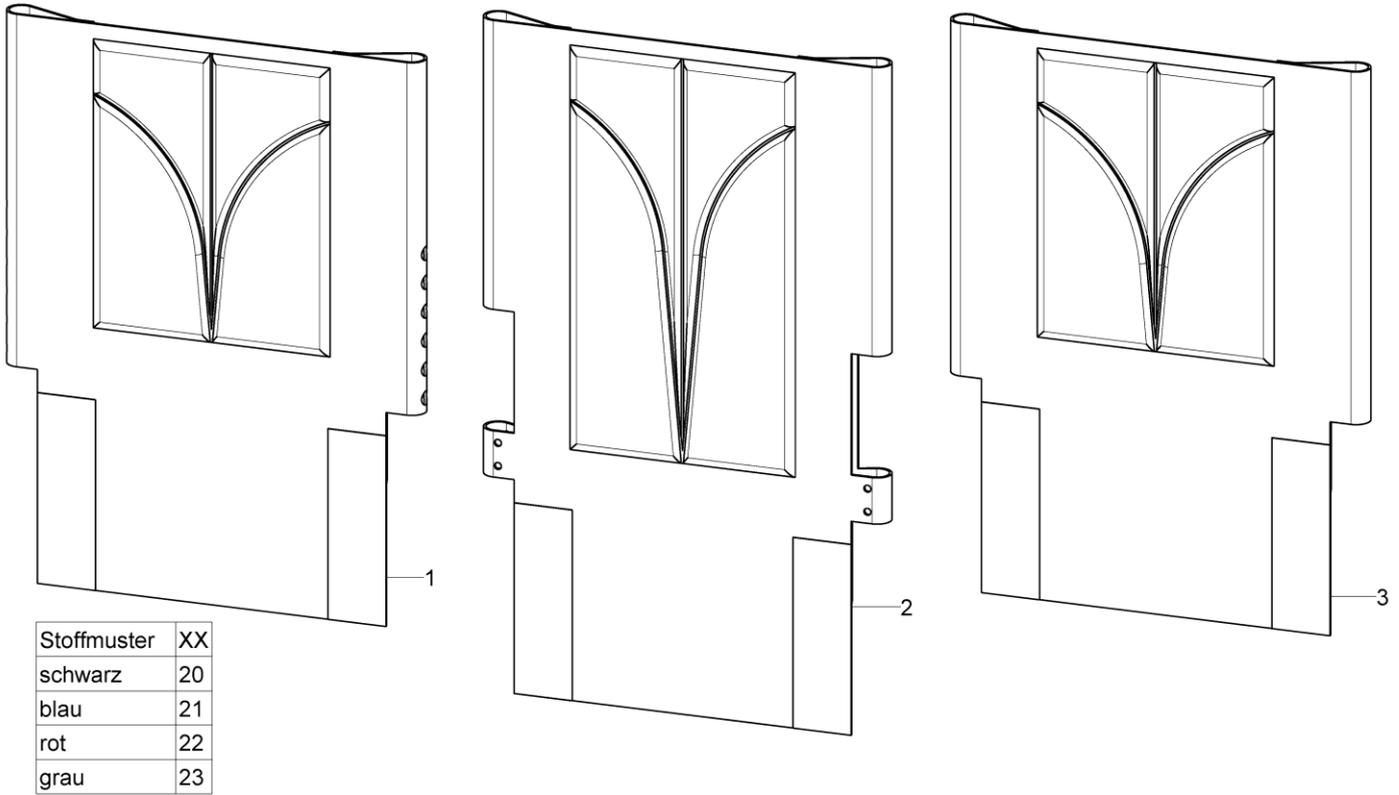

| Pos.: | Menge: | Artikelnr: | Artikelbezeichnung: | Variante: |
|-------|--------|------------|---|------------------|
| 1 | 1 | 671102XX | Rückenbespannung standard, für Rücken 90° mit STD Seitenteil | SB, RH, XX=Farbe |
| 2 | 1 | 671104XX | Rückenbespannung standard, für Rückenwinkelverstellung | SB, RH, XX=Farbe |
| 3 | 1 | 671103XX | Rückenbespannung standard, für Rücken 90° mit DESK Seitenteil | SB, RH, XX=Farbe |
| o.B. | 2 | | Senkschraube mit Innensechskant ISO 10642 (DIN 7991) M5x16 | |
| o.B. | 2 | | Rosette ø13/6x2, schwarz | |

Rückenbespannung anpassbar


Alle Stoffmuster können unter www.sorgrollstuhltechnik.de angesehen werden.

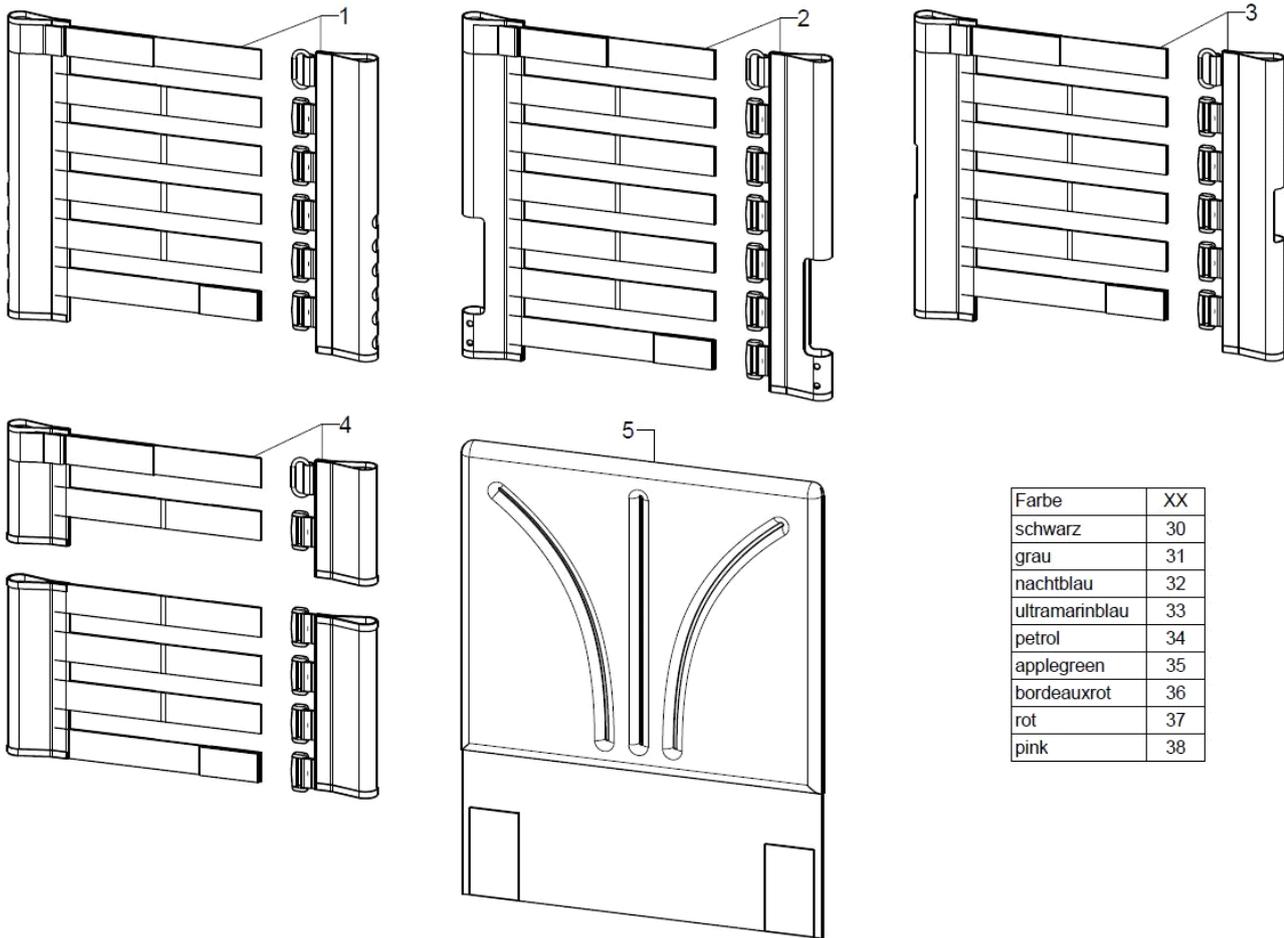

| Farbe | XX |
|----------------|----|
| schwarz | 30 |
| grau | 31 |
| nachtblau | 32 |
| ultramarinblau | 33 |
| petrol | 34 |
| applegreen | 35 |
| bordeauxrot | 36 |
| rot | 37 |
| pink | 38 |



| Pos.: | Menge: | Artikelnr.: | Artikelbezeichnung: | Variante: |
|-------|--------|-------------|---|--|
| 1+5 | 1 | 670102XX | Bespannung anpassbar 3-teilig, für Rücken 90° mit STD Seitenteil | SB, RH, Farbe, Farbe der Sitzbespannung wenn vorhanden |
| 2+5 | 1 | 670103XX | Bespannung anpassbar 3-teilig, für Rückenwinkelverstellung | SB, RH, Farbe, Farbe der Sitzbespannung wenn vorhanden |
| 3+5 | 1 | 670104XX | Bespannung anpassbar 3-teilig, für Rücken 90° mit Desk Seitenteil | SB, RH, Farbe, Farbe der Sitzbespannung wenn vorhanden |
| 4+5 | 1 | 610105XX | Bespannung anpassbar 5-teilig, für GDF-Rücken | SB, RH, Farbe, Farbe der Sitzbespannung wenn vorhanden |
| 1 | 1 | | Bespannung anpassbar, für Rücken 90° mit STD Seitenteil | SB, RH, Farbe, Farbe der Sitzbespannung wenn vorhanden |
| 2 | 1 | 670500 | Unterteil 2-teilig der anpassbaren Rückenbespannung mit Gurtbändern | SB, RH, Farbe, Farbe der Sitzbespannung wenn vorhanden |
| 3 | 1 | | Bespannung anpassbar, für Rücken 90° mit Desk Seitenteil | SB, RH, Farbe, Farbe der Sitzbespannung wenn vorhanden |
| 4 | 1 | | Bespannung anpassbar, für GDF-Rücken 90° | SB, RH, Farbe, Farbe der Sitzbespannung wenn vorhanden |
| 5 | 1 | 670599 | Überwurf Rückenbespannung universal nachspannbar mit Kissenfüllung | SB, RH, Farbe, Farbe der Sitzbespannung wenn vorhanden |
| o.B. | 2 | | Senkschraube mit Innensechskant ISO 10642 (DIN 7991) M5x16 | |
| o.B. | 2 | | Rosette ø13/6x2, schwarz | |

Muldenrücken

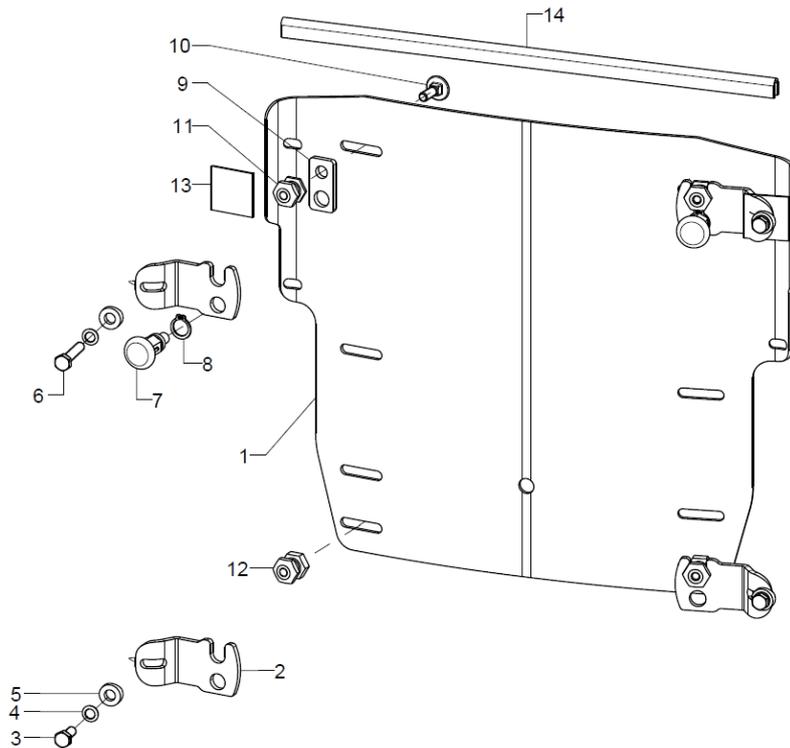

| Pos.: | Menge: | Artikelnr: | Artikelbezeichnung: | Variante: |
|----------|--------|------------|---|-------------------------------|
| 19 | 1 | 6930XX | Muldenrücken Modell 1, RH gerade verlängert um 2 cm | SB, RH, Farbe, XX=Muldentiefe |
| o.B. | 1 | 6931XX | Muldenrücken Modell 2, RH gerade verlängert um 10 cm | SB, RH, Farbe, XX=Muldentiefe |
| o.B. | 1 | 6932XX | Muldenrücken Modell 2, RH gerade verlängert um 20 cm | SB, RH, Farbe, XX=Muldentiefe |
| o.B. | 1 | 6933XX | Muldenrücken Modell 3, RH gebogen verlängert um 5 cm | SB, RH, Farbe, XX=Muldentiefe |
| o.B. | 1 | 6934XX | Muldenrücken Modell 3, RH gebogen verlängert um 10 cm | SB, RH, Farbe, XX=Muldentiefe |
| o.B. | 1 | 6935XX | Muldenrücken Modell 3, RH gebogen verlängert um 15 cm | SB, RH, Farbe, XX=Muldentiefe |
| o.B. | 1 | 6950XX | Muldenrücken Modell 1 winkelverstellbar, Rückenhöhe gerade verlängert um 2 cm | SB, RH, Farbe, XX=Muldentiefe |
| o.B. | 1 | 6951XX | Muldenrücken Modell 2 winkelverstellbar, RH gerade verlängert um 10 cm | SB, RH, Farbe, XX=Muldentiefe |
| o.B. | 1 | 6952XX | Muldenrücken Modell 2 winkelverstellbar, RH gerade verlängert um 20 cm | SB, RH, Farbe, XX=Muldentiefe |
| o.B. | 1 | 6953XX | Muldenrücken Modell 3 winkelverstellbar, Rückenhöhe gebogen verlängert um 5 cm | SB, RH, Farbe, XX=Muldentiefe |
| o.B. | 1 | 6954XX | Muldenrücken Model 3 winkelverstellbar, Rückenhöhe gebogen, verlängert um 10 cm | SB, RH, Farbe, XX=Muldentiefe |
| o.B. | 1 | 6955XX | Muldenrücken Modell 3 winkelverstellbar, RH gebogen verlängert um 15 cm | SB, RH, Farbe, XX=Muldentiefe |
| 2+4-13 | 1 | 692594 | Halterungsset fester Rücken, oben, abnehmbar (links/rechts) | |
| 2-5+10+1 | 1 | 692595 | Halterungsset fester Rücken, unten, abnehmbar (links/rechts) | |
| 2 | 2 | 692500 | Halteblech links offen für Verriegelung Fester Rücken | |
| o.B. | 2 | 692501 | Halteblech rechts offen für Verriegelung Fester Rücken | |
| 3-5+1012 | 2 | 692596 | Montageset für Halteblech offen, unten, für Verriegelung Fester Rücken | |
| 4-11 | 2 | 692597 | Montageset für Halteblech offen, oben, für Verriegelung Fester Rücken | |
| 3 | 1 | | Sechskantschraube ISO 4017 (DIN 933) - M5x16 | |
| 4 | 1 | | Sicherungsscheibe S5 - FST | |
| 5 | 1 | | Sattelscheibe ø 12/5x2.5 | |
| 6 | 1 | | Sechskantschraube ISO 4017 (DIN 933) - M5x25 | |
| 7 | 1 | | Zugschnapper ø 6/M10x1x31 mit Arretierung | |
| 8 | 1 | | Sicherungsring 10, DIN 471 | |

| | | | | |
|----|---|--------|--|-----|
| 9 | 1 | 692502 | Distanzblech fester Rücken rund | |
| 10 | 2 | | Flachrundschrauben DIN 603 M5x16 - 4.6 vz | |
| 11 | 1 | 692505 | Einhängebolzen oben | |
| 12 | 1 | 692506 | Einhängebolzen unten | |
| 13 | 1 | | Flauschband selbstklebend 25mm, schwarz | |
| 14 | 1 | 450030 | Kantenschutzprofil - Stahlklemmband, 1-2 mm, schwarz | 1 m |

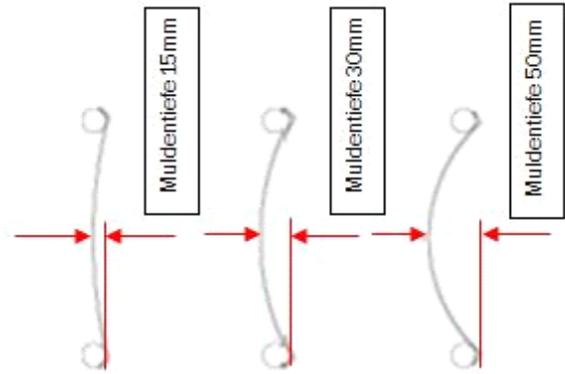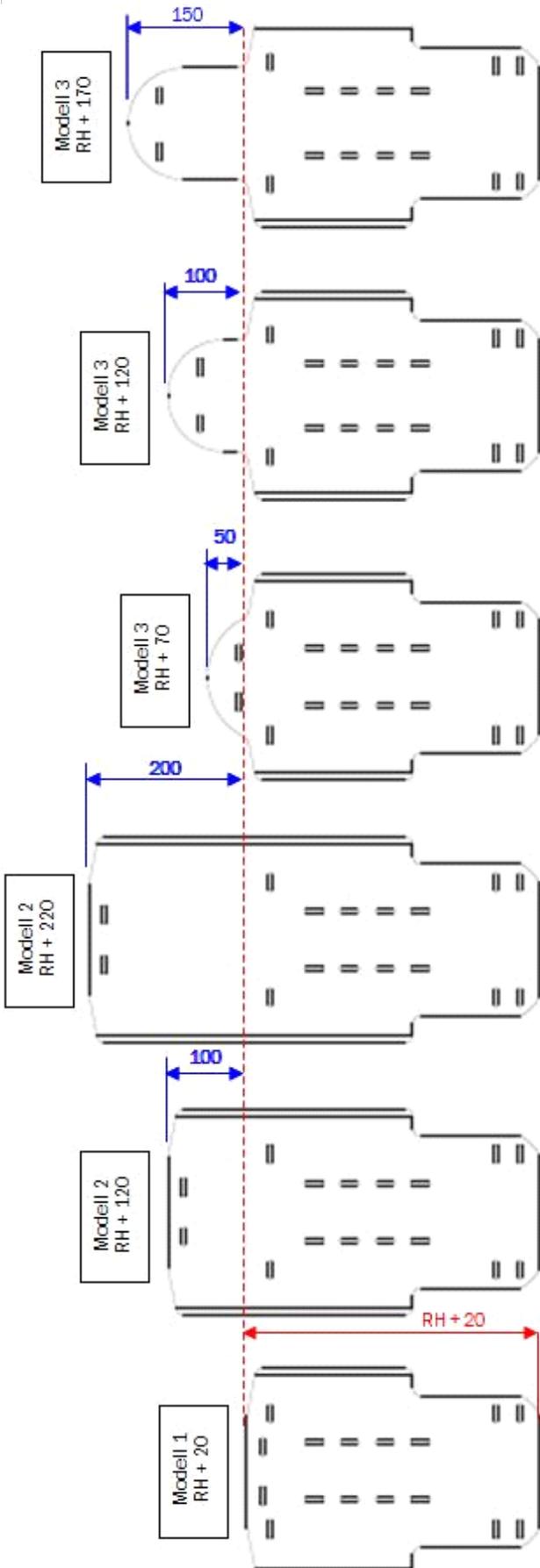


Rückenverlängerung

Muldenrücken Modell 1: erst ab RH35cm

Muldenrücken Modell 3: erst ab RH30cm, nur mit RH+5cm

Wenn der Muldenrücken mit dem Halterungsset für Muldenrücken befestigt wird, ist eine Rückenverlängerung erst ab SB28 möglich.

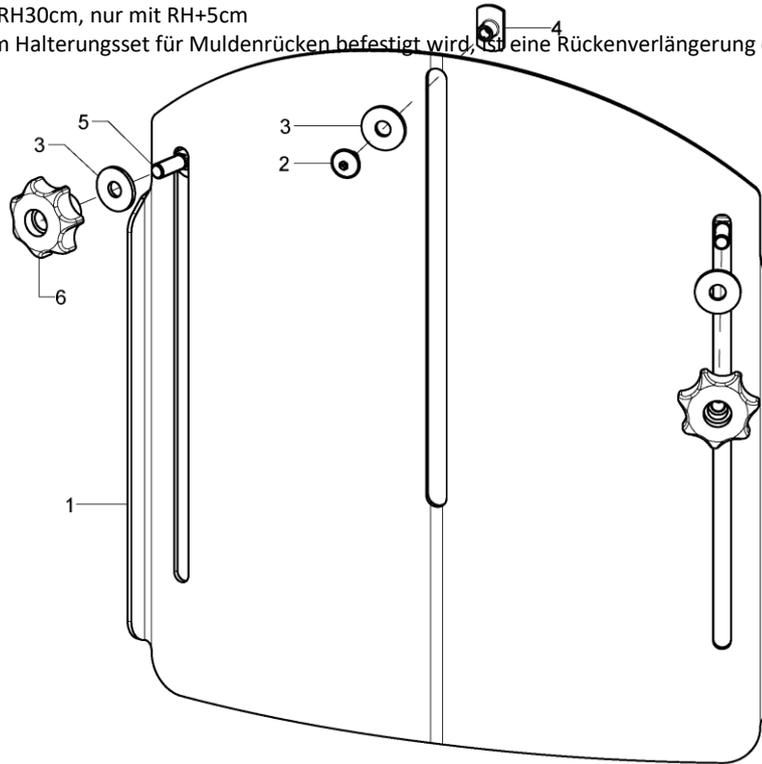

| Pos.: | Menge: | Artikelnr: | Artikelbezeichnung: | Variante: |
|-------|--------|------------|--|---------------|
| 1 | 1 | 686091 | Rückenverlängerung für Muldenrücken standard | SB, MT, Farbe |
| o.B. | 1 | 686092 | Rückenverlängerungsblech für winkelverstellbaren Muldenrücken incl. Montageset | SB, MT, Farbe |
| 2-6 | 1 | 68607299 | Montagezubehör Rückenverlängerung | |
| 2 | 1 | | Linseflanschschraube mit Innensechskant M5x8 | |
| 3 | 3 | | Scheibe ISO 7093 (DIN 9021) - 6,4 - PA | |
| 4 | 1 | | Anschweißmutter C - M5x7,5 | |
| 5 | 2 | | Flachrundschraben DIN 603 M6x20 | |
| 6 | 2 | | 7-Sterngriff ø32 - M6 Innengewinde durchgehend, schwarz | |

Kissen für Muldenrücken


| Pos.: | Menge: | Artikelnr: | Artikelbezeichnung: | Variante: |
|-------|--------|------------|---|--|
| o.B. | 1 | 8517 | Rückenkissen, 3 cm Dicke, für Muldenrücken incl. Bezug | SB, RH, Modell, Bezugsfarbe |
| o.B. | 1 | 8517XX | Bezug für Rückenkissen | SB, RH, Modell, XX=Bezugsstoff |
| o.B. | 1 | 891104 | Rückenformteil, anatomisch geformt, Muldentiefe 3 cm, incl. Bezug | SB, RH, Modell, Bezugsfarbe |
| o.B. | 1 | 891106 | Rückenformteil, anatomisch geformt, Muldentiefe 5 cm, incl. Bezug | SB, RH, Modell, Bezugsfarbe |
| o.B. | 1 | 8911XX | Bezug für Rückenformteil | SB,RH, Modell, Muldentiefe, XX=Bezugsstoff |
| o.B. | 1 | 68607201 | Kopfstützenpolster inkl. Bezug für Rückenverlängerung | Farbe angeben |

| Stoffmuster | XX |
|----------------|----|
| schwarz | 30 |
| grau | 31 |
| nachtblau | 32 |
| ultramarinblau | 33 |
| petrol | 34 |
| applegreen | 35 |
| bordeauxrot | 36 |
| rot | 38 |
| pink | 39 |

Alle Stoffmuster können unter www.sorgrollstuhltechnik.de angesehen werden.


Seitenpelotte

SORG-Pelottensystem nicht kompatibel mit Pelotten von Stealth. Betrifft Lieferungen vor Juni 2016.

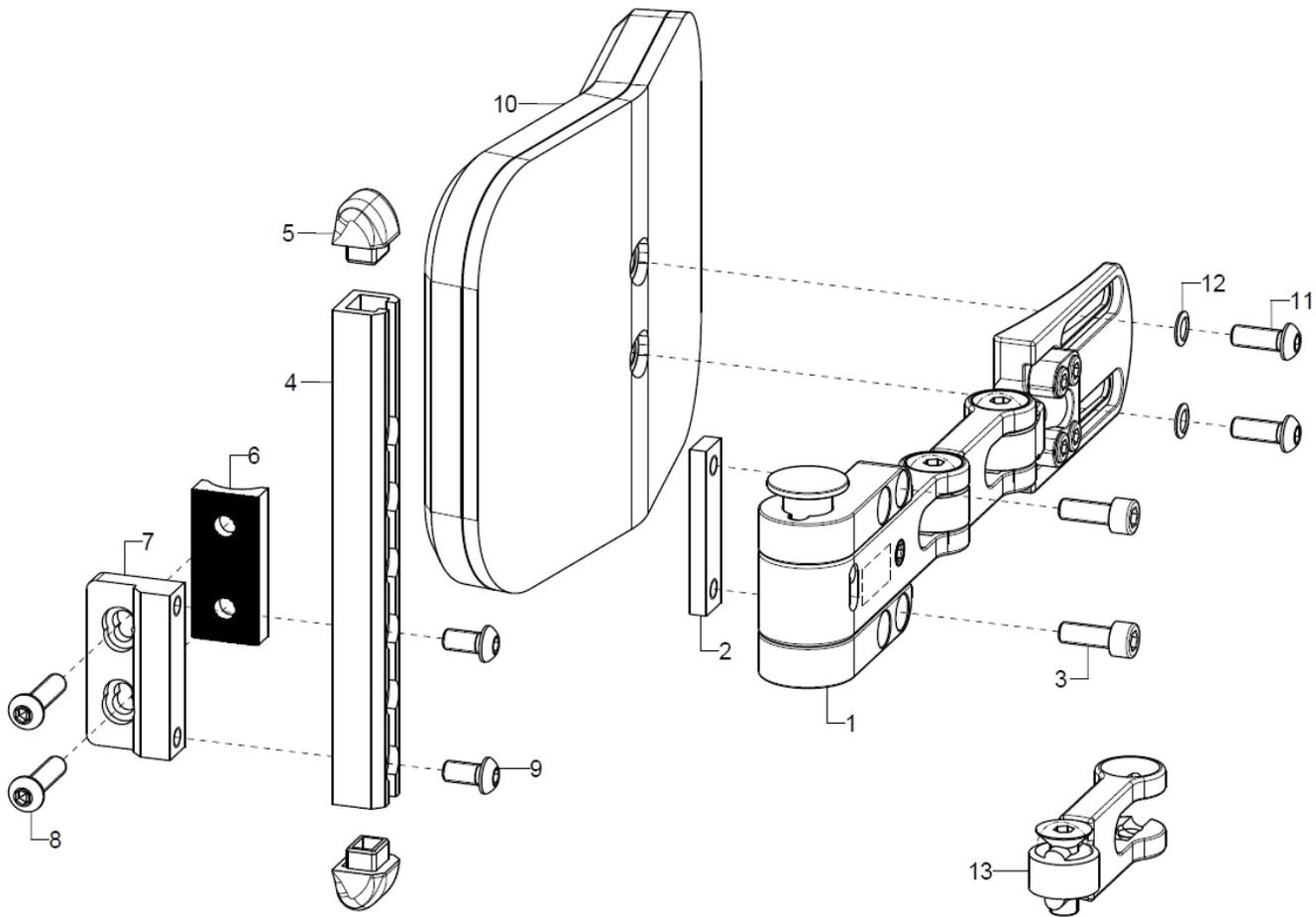


| Pos.: | Menge: | Artikelnr.: | Artikelbezeichnung: | Variante: |
|-------|--------|-------------|---|---|
| 1 | 1 | 68590202 | Halterung anpassbar Gr.2 für rechte Seite (ohne Polster) | |
| o.B. | 1 | 68590201 | Halterung anpassbar Gr.2 für linke Seite (ohne Polster) | |
| 2-9 | 1 | 68590111 | Anbindungset für abklappbare Seitenpelotten, montierbar an Rückenrohr, ab Rückenhöhe 35 bei STD-Rücken, ab RH 40 bei WVR-Rücken | WVR-Rücken ab RH40, STRD-Rücken ab RH35 |
| 2-5+9 | 1 | 68590112 | Anbindungset für abklappbare Seitenpelotten, montierbar an SHG-Halter, ab Rückenhöhe 30 bei STD-Rücken, ab RH 35 bei WVR-Rücken | WVR-Rücken ab RH35, STRD-Rücken ab RH30 |
| 2 | 1 | | Gewindeplatte Gr.2 | |
| 3 | 2 | | Zylinderschraube ISO 4762 (DIN 912) M6x16 | |
| 4 | 1 | | C-Schiene | |
| 5 | 2 | | C-Profil-Endstopfen | |
| 6 | 1 | | Halbschale 45 R10 | |
| 7 | 1 | | Pelottenanbindung Std. | |
| 8 | 2 | | Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x25 | Bei Alu-Rückenrohren |
| o.B. | 2 | | Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x30 | Bei Stahl-Rückenrohren |
| 9 | 2 | | Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x12 | |
| o.B. | 2 | | Senkschraube mit Innensechskant ISO 10642 (DIN 7991) M5x16 | |
| 10-12 | 1 | 68590106 | Polster inkl. Abnehmbarem Bezug für Halter Gr.1+2 (12 x 9 cm) | |
| o.B. | 1 | 68590204 | Polster inkl. Abnehmbarem Bezug für Halter Gr.2 (15 x 10 cm) | |
| o.B. | 1 | 68590205 | Polster inkl. Abnehmbarem Bezug für Halter Gr.2 (18 x 13 cm) | |
| 11 | 2 | | Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x16 | |
| 12 | 2 | | Sicherungsscheibe S6 - FST | |
| 13 | 1 | 68590203 | Zusätzliches Verlängerungsgelenk (5,5 cm) für Halterung Gr.2 | |


Kopfstütze

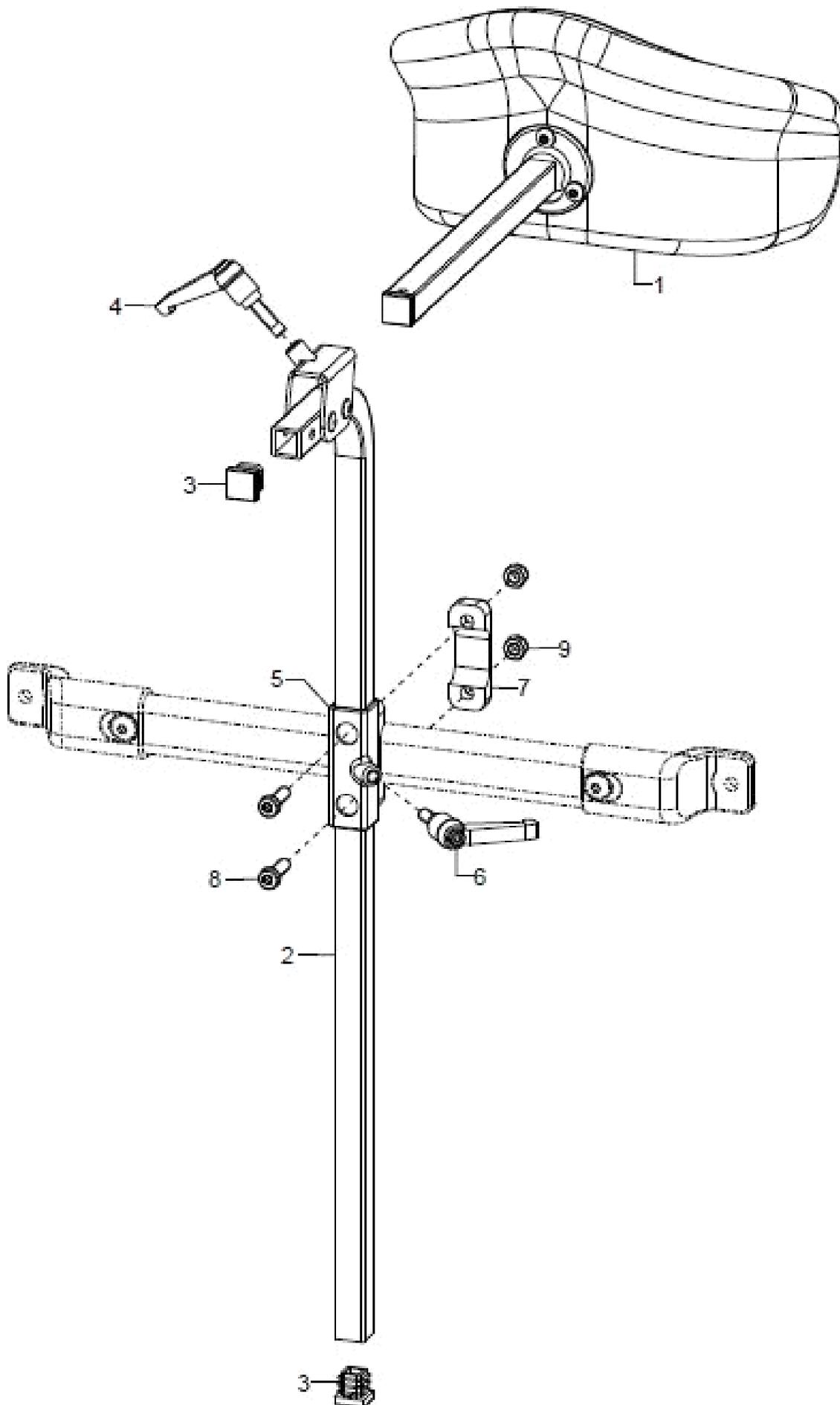

| Pos.: | Menge: | Artikelnr: | Artikelbezeichnung: | Variante: |
|---------|--------|------------|---|------------------------|
| 1 | 1 | 686031 | Kopfstützenpolster Modell 1, 213x145 mm muschelförmig kpl. | Nr. 21 |
| altern. | 1 | 686033 | Kopfstützenpolster Modell 3, 225x100 bogenförmig kpl. | Nr. 23 |
| altern. | 1 | 686034 | Kopfstützenpolster Modell 4, 300x150 bogenförmig kpl. | Nr. 24 |
| o.B. | 1 | 68605001 | Kopfstützenbezug, wasch- und wechselbar aus Trevira (Bitte Kopfstützenmodell+Bezugsfarbe auswählen) | Kopfstützenform, Farbe |
| 2-4 | 1 | 68600801 | Haltestange 500mm für Kopfstützen | empfohlen bis RH45 |
| o.B. | 1 | 68600802 | Haltestange 700mm für Kopfstützen | empfohlen ab RH50 |
| 3 | 2 | | Stopfen mit Lamellen für Vierkantrohre, schwarz, 15x15 | |
| 4 | 1 | 403110 | Klemmhebel verstellbar M6x20, schwarz | |
| 5-9 | 1 | 68600810 | Stangenhalter an Profilrohr 15x15mm kpl., schwarz incl. Klemmhebel M6x15 | |
| 6 | 1 | 45320303 | Klemmhebel verstellbar M6x15, schwarz | |
| 7 | 1 | | Kopfstütze Klemmteil | |
| 8 | 2 | | Zylinderschraube niedriger Kopf DIN 7984 - M6x20 | |
| 9 | 2 | | Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M6 | |

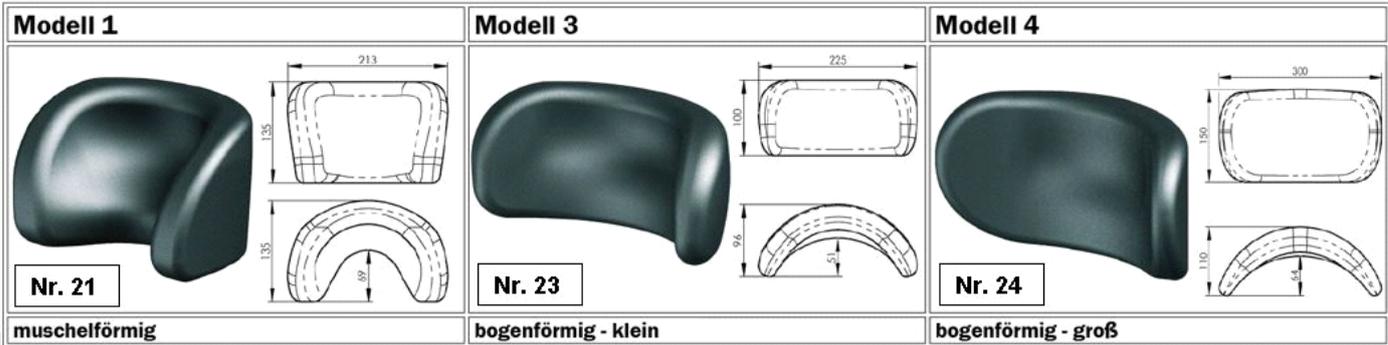


Rückenschalenanbindung

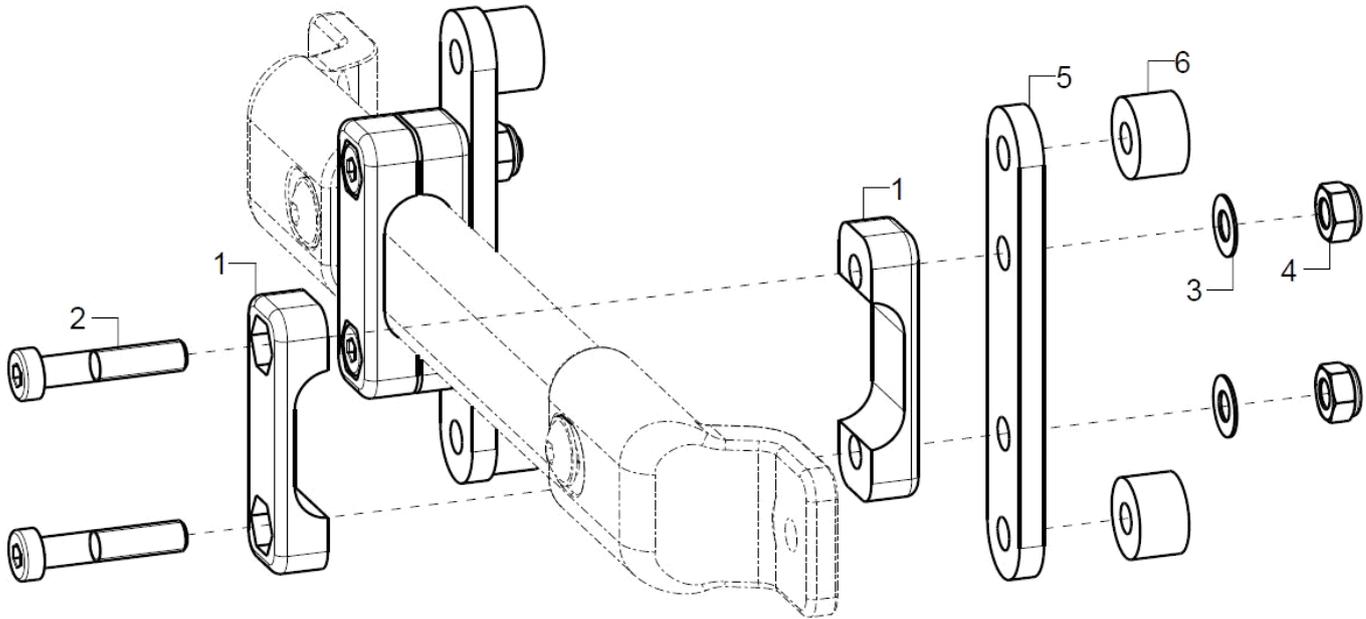


| Pos.: | Menge: | Artikelnr.: | Artikelbezeichnung: | Variante: |
|-------|--------|-------------|--|------------------------|
| 1-6 | 1/2 | | Rückenschalenanbindung kpl. | Immer zwei Anbindungen |
| 1 | 2 | | Kopfstütze Klemmteil | |
| 2 | 2 | | Zylinderschraube niedriger Kopf DIN 7984 - M6x30 | |
| 3 | 2 | | Passscheibe DIN 988 - 6x12x0,5 - A2 | |
| 4 | 2 | | Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M6 | |
| 5 | 1 | | Anbindelasche | |
| 6 | 2 | 35310209 | Distanzbuchse Alu, schwarz Ø14x10 (Set 2 Stück) | |

Seitenteil Standard


Verschraubung hinten bei Rücken Standard

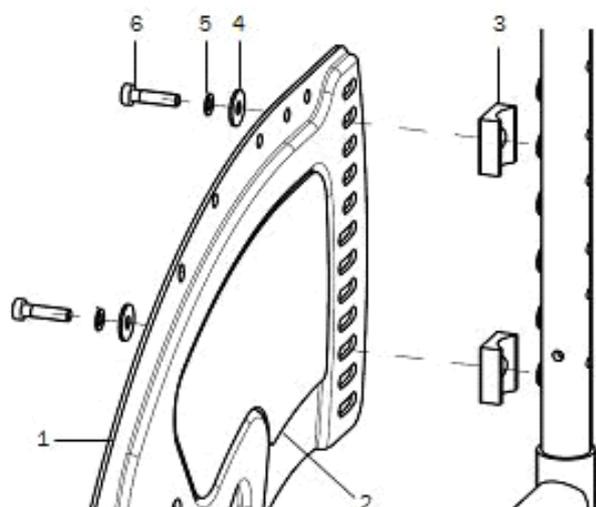


Verschraubung hinten bei Rücken winkelverstellbar

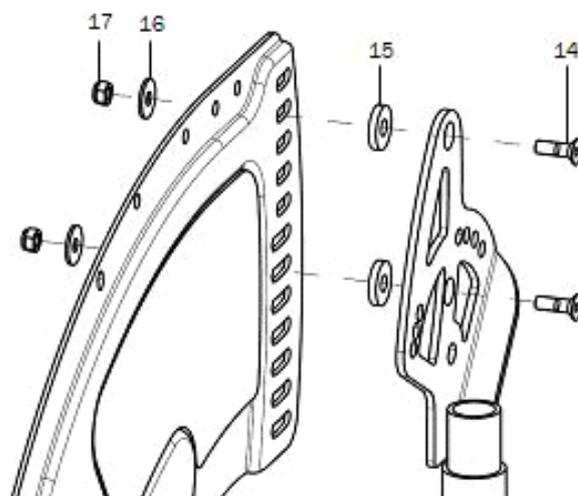


Verschraubung vorne

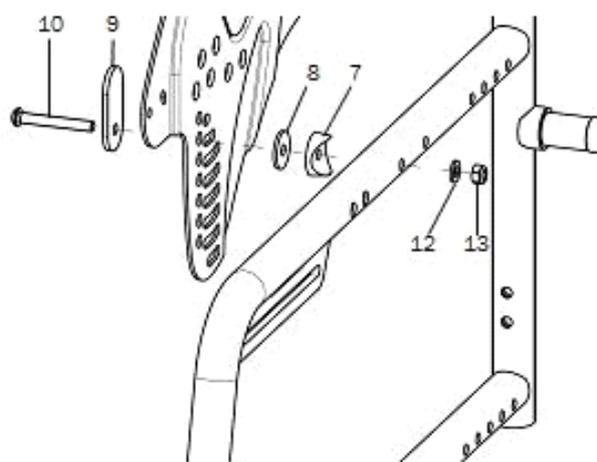

Seitenteilverlängerung

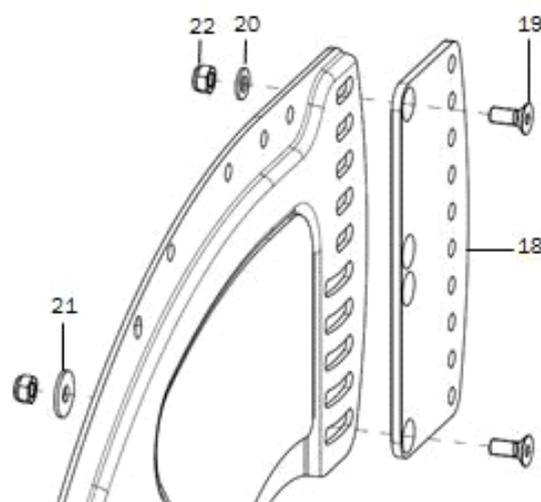


Adapter für 22° Seitenteil

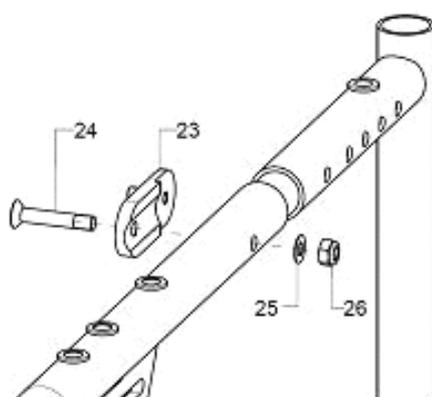


| Pos.: | Menge: | Artikelnr: | Artikelbezeichnung: | Variante: |
|--------------|---------------|-------------------|--|----------------------------------|
| 1 | 1 | 45252202 | Seitenteil 20/22", Aluminium geprägt, rechts | Farbe |
| o.B. | 1 | 45252201 | Seitenteil 20/22", Aluminium geprägt, links | Farbe |
| o.B. | 1 | 45252402 | Seitenteil 24", Aluminium geprägt, rechts | Farbe |
| o.B. | 1 | 45252401 | Seitenteil 24", Aluminium geprägt, links | Farbe |
| o.B. | 1 | 45252601 | Seitenteil 26", Aluminium geprägt, links | Farbe |
| o.B. | 1 | 45252602 | Seitenteil 26", Aluminium geprägt, rechts | Farbe |
| 2 | 1 | 452522 | Kälteschutz für Alu-Seitenteile 20-22" gesickt | Rechts/links |
| o.B. | 1 | 452524 | Kälteschutz für Alu-Seitenteile 24" gesickt | Rechts/links, auch bei 26" |
| 3-13 | 2 | 452599 | Montageset Seitenteil, Rücken Standard | |
| 7-17 | 2 | 452598 | Montageset Seitenteil, Rücken winkelverstellbar | |
| 3 | 2 | | Halbschale 24, R10 | |
| 4 | 2 | | Scheibe ISO 7093 (DIN 9021) - 5,3 | |
| 5 | 2 | | Sicherungsscheibe S5 - FST | |
| 6 | 2 | | Zylinderkopfschraube niedriger Kopf DIN 6912 - M5x20 | |
| 7 | 1 | | Sattelscheibe schwarz Nenn-ø 24/6 | |
| 8 | 1 | | Scheibe ISO 7094 (DIN 440), 6.6x22x2 | |
| 9 | 1 | 45250111 | Stützscheibe schwarz, oval | |
| 10 | 1 | | Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x45 | |
| 12 | 1 | | Passscheibe DIN 988 - 6x12x0,5 - A2 | |
| 13 | 1 | | Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M6 | |
| 14 | 2 | | Senkschraube mit Innensechskant ISO 10642 (DIN 7991) M5x16 | |
| 15 | 2 | | Scheibe DIN 7349 - 6,4 | |
| 16 | 2 | | Scheibe ISO 7093 (DIN 9021) - 5,3 | |
| 17 | 1 | | Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M5 | |
| 18-22 | 2 | 452502 | Seitenteilverlängerung inkl. Montagematerial | Bei Rahmen für Aufbau Sitzschale |
| 19 | 2 | | Senkschraube mit Innensechskant ISO 10642 (DIN 7991) M5x12 | |
| 20 | 1 | | Scheibe ISO 7089 (DIN 125) - A 5,3 | |
| 21 | 1 | | Scheibe ISO 7093 (DIN 9021) - 5,3 | |
| 22 | 2 | | Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M5 | |
| 23-26 | 2 | 45250501 | Adapter für Montage 22" Seitenteil | |
| 24 | 2 | | Senkschraube mit Innensechskant ISO 10642 (DIN 7991) M6x35 | |
| 25 | 2 | | Passscheibe DIN 988 - 6x12x0,5 - A2 | |
| 26 | 2 | | Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M6 | |
| o.B. | 1 | 452550 | Verbreiterungsset Seitenteil am Rücken Standard | |
| o.B. | 6 | | Buchse D:25x6,2x10 | |
| o.B. | 4 | | Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M5x35 | |
| o.B. | 2 | | Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x55 | |
| o.B. | 1 | 452551 | Verbreiterungsset Seitenteil am Rücken winkelver- bzw. einstellbar | |
| o.B. | 6 | | Buchse D:25x6,2x10 | |
| o.B. | 4 | | Senkschraube mit Innensechskant ISO 10642 (DIN 7991) M5x25 | |
| o.B. | 2 | | Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x55 | |

Armpolster für Seitenteil Standard

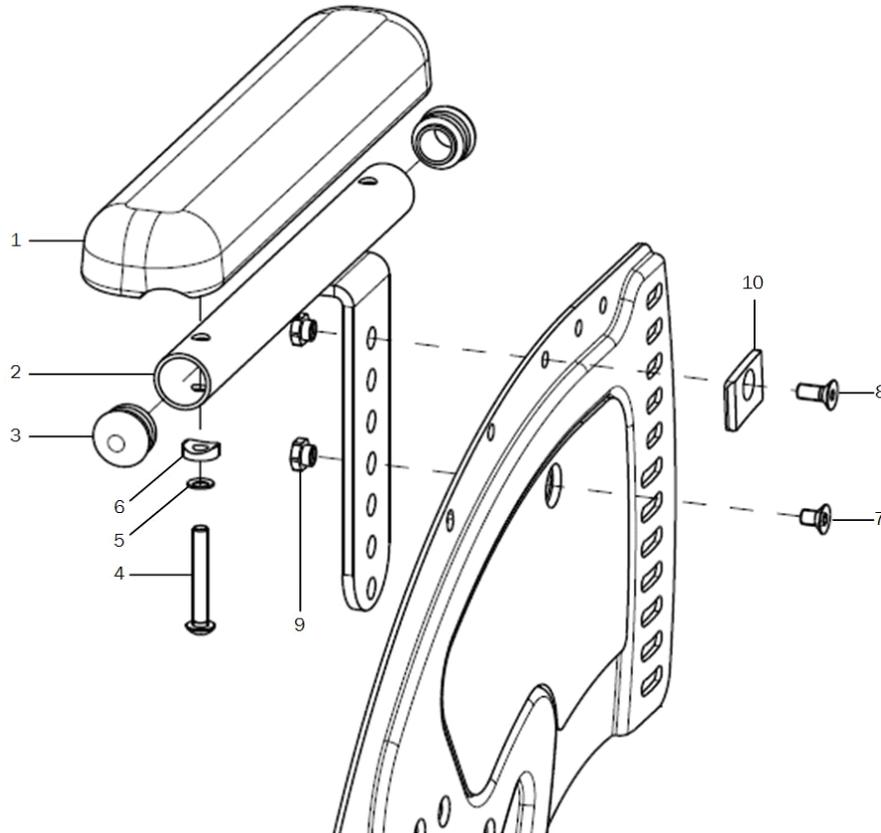


| Pos.: | Menge: | Artikelnr.: | Artikelbezeichnung: | Variante: |
|-------|--------|-------------|---|--|
| 1-10 | 1 P | 452600 | Armpolster für Seitenteil Standard, kpl. | Farbe, Kleiderschutz, Variante ab 02/2014 |
| 1 | 2 | 450007 | Armauflage gerade 240x50x26-M5/164mm, schwarz incl. Montagematerial | |
| 2-3 | 1P | 452603 | Halter für Armlehne kpl. | Links/rechts |
| 3 | 2 | | Stopfen mit Lamellen für Rohr ø20x1-2, schwarz | |
| 4-10 | 2 | 452699 | Montageset Armpolster | Kleiderschutz |
| 4 | 2 | | Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M5x35 | |
| 5 | 2 | | Sicherungsscheibe S5 - FST | |
| 6 | 2 | | Sattelscheibe ø 12/5x2.5 | |
| 7 | 1 | | Senkschraube mit Innensechskant ISO 10642 (DIN 7991) M5x8, Tuflok | |
| 8 | 1 | | Senkschraube mit Innensechskant ISO 10642 (DIN 7991) M5x12 | |
| 9 | 2 | | Flanshmutter M5 | |
| 10 | 1 | | Stützscheibe für Armlehne | Bei Seitenteil standard, wenn kein Kleiderschutz |

Kleiderschutz

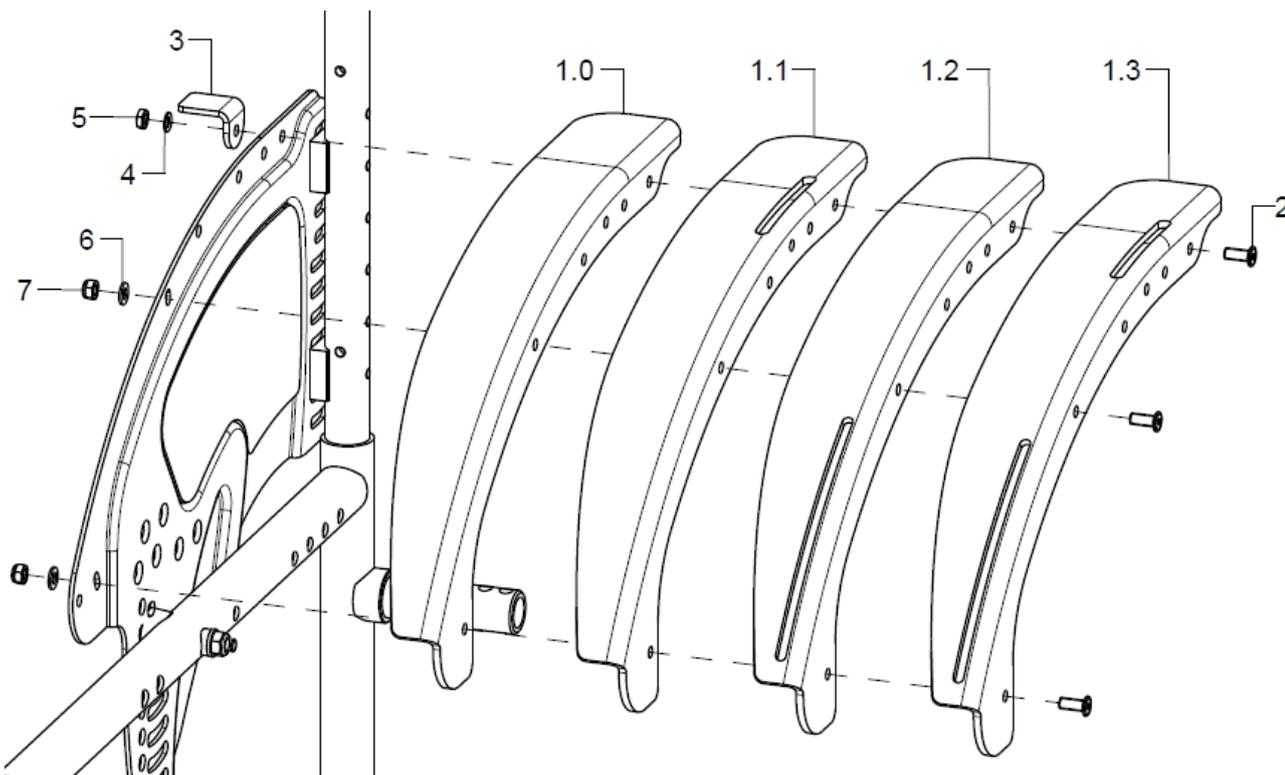

| Pos.: | Menge: | Artikelnr.: | Artikelbezeichnung: | Variante: |
|---------|--------|-------------|---|-----------|
| 1 | 1 | 50240102 | Kleiderschutz 22" Standard, rechts, inkl. Stützwinkel | |
| o.B. | 1 | 50240101 | Kleiderschutz 22" Standard, links, inkl. Stützwinkel | |
| altern. | 1 | 50240202 | Kleiderschutz 24" Standard, rechts, inkl. Stützwinkel | |
| altern. | 1 | 50240201 | Kleiderschutz 24" Standard, links, inkl. Stützwinkel | |
| 1.1 | 1 | 50240302 | Kleiderschutz 22" für Armlehne, rechts, inkl. Stützwinkel | |
| o.B. | 1 | 50240301 | Kleiderschutz 22" für Armlehne, links, inkl. Stützwinkel | |
| altern. | 1 | 50240402 | Kleiderschutz 24" für Armlehne, rechts, inkl. Stützwinkel | |
| altern. | 1 | 50240401 | Kleiderschutz 24" für Armlehne, links, inkl. Stützwinkel | |
| 1.2 | 1 | 50240502 | Kleiderschutz 22" für Seilzugbremse, rechts, inkl. Stützwinkel | |
| o.B. | 1 | 50240501 | Kleiderschutz 22" für Seilzugbremse, links, inkl. Stützwinkel | |
| altern. | 1 | 50240602 | Kleiderschutz 24" für Seilzugbremse, rechts, inkl. Stützwinkel | |
| altern. | 1 | 50240601 | Kleiderschutz 24" für Seilzugbremse, links, inkl. Stützwinkel | |
| 1.3 | 1 | 50240702 | Kleiderschutz 22" Seilzugbremse/Armauflage, rechts, inkl. Stützwinkel | |
| o.B. | 1 | 50240701 | Kleiderschutz 22" Seilzugbremse/Armauflage, links, inkl. Stützwinkel | |
| altern. | 1 | 50240802 | Kleiderschutz 24" Seilzugbremse/Armauflage, rechts, inkl. Stützwinkel | |
| altern. | 1 | 50240801 | Kleiderschutz 24" Seilzugbremse/Armauflage, links, inkl. Stützwinkel | |
| 2-7 | 2 | 502499 | Montageset Kleiderschutz | |
| 2 | 3 | | Schmalkopfschraube Torx M5x12 | |
| 3 | 1 | 50240115 | Stützwinkel 20x25 für Kleiderschutz inkl. Montagematerial | |
| 4 | 1 | | Sicherungsscheibe S5 - FST | |
| 5 | 1 | | Niedrige Sechskantmutter ISO 4035 (DIN 439) - M5 - 05 vz | |
| 6 | 2 | | Scheibe ISO 7089 (DIN 125) - A 5,3 | |
| 7 | 2 | | Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M5 | |

Desk-Seitenteil

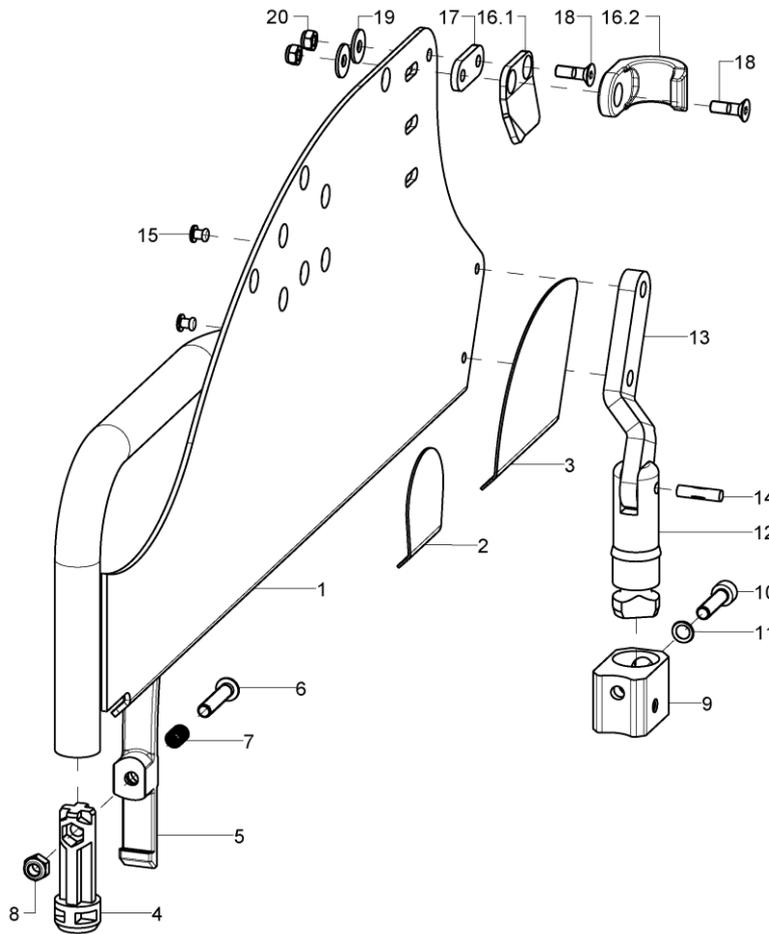


| Pos.: | Menge: | Artikelnr: | Artikelbezeichnung: | Variante: |
|---------|--------|------------|--|---------------------------|
| 1 | 1 | 46100202 | Desk-Seitenteil rechts | Farbe |
| o.B. | 1 | 46100201 | Desk-Seitenteil links | Farbe |
| altern. | 1 | 46100302 | Desk-Seitenteil rechts bei SA Rahmenvariante | Farbe |
| o.B. | 1 | 46100301 | Desk-Seitenteil SA links bei SA Rahmenvariante | Farbe |
| 2 | 2 | 46100121 | Schutzfolie Mitte bei Desk-Seitenteil | Nur bei umlegbarem Rücken |
| 3 | 2 | 46100120 | Schutzfolie hinten bei Desk-Seitenteil | Nur bei umlegbarem Rücken |
| o.B. | 1 | 45170202 | Kälteschutzteil rechts bei Desk-Seitenteil | |
| o.B. | 1 | 45170201 | Kälteschutzteil links bei Desk-Seitenteil | |
| 4 | 2 | 46100113 | Zapfen vorne bei Desk-/Langes Seitenteil | |
| 5-8 | 2 | 46100114 | Rasthebel bei Desk-/Langes Seitenteil incl. Montagematerial | |
| 6 | 1 | | Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x30 | |
| 7 | 1 | | Druckfeder DIN 2098 0,7x7,65/9,05x21 | |
| 8 | 1 | | Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M6 | |
| 9-11 | 2 | 46100117 | Aufnahme hinten für Desk-Seitenteil incl. Montagematerial | |
| 10 | 1 | | Zylinderschraube ISO 4762 (DIN 912) M6x25 | |
| 11 | 1 | | Sicherungsscheibe S6 - FST | |
| 12-15 | 2 | 46101802 | Zapfen hinten für Desk-/Langes Seitenteil incl. Gelenklasche | |
| 13 | 1 | | Gelenklasche Desk rechts | |
| o.B. | 1 | | Gelenklasche Desk links | |
| 14 | 1 | | Kerbstift DIN 1475 - 5x20 | |
| 15 | 2 | | Blindniet F5x10 A2/A2 | |
| 16.1+18 | 1 | 46101602 | Haltekralle links für Desk-Seitenteil incl. Montagematerial | Bei umlegbarem Rücken |
| -20 | | | | |

| | | | | |
|------------|------|----------|--|-----------------------|
| o.B. | 1 | 46101601 | Haltekralle rechts für Desk-Seitenteil incl. Montagematerial | Bei umlegbarem Rücken |
| 16.2+18-20 | 2 | 45260110 | Seitenteilclip | Bei Standard Rücken |
| 17 | 2 | | Distanz für Krallen | bei umlegbarem Rücken |
| 18 | 2(1) | | Senkschraube mit Innensechskant ISO 10642 (DIN 7991) M5x16 | |
| 19 | 2(1) | | Scheibe ISO 7093 (DIN 9021) - 5,3 | |
| 20 | 2(1) | | Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M5 | |


Kleiderschutz Desk-Seitenteil

(Bei Desk-Seitenteil und Desk-Seitenteil bei Gasdruckfeder-Rücken)

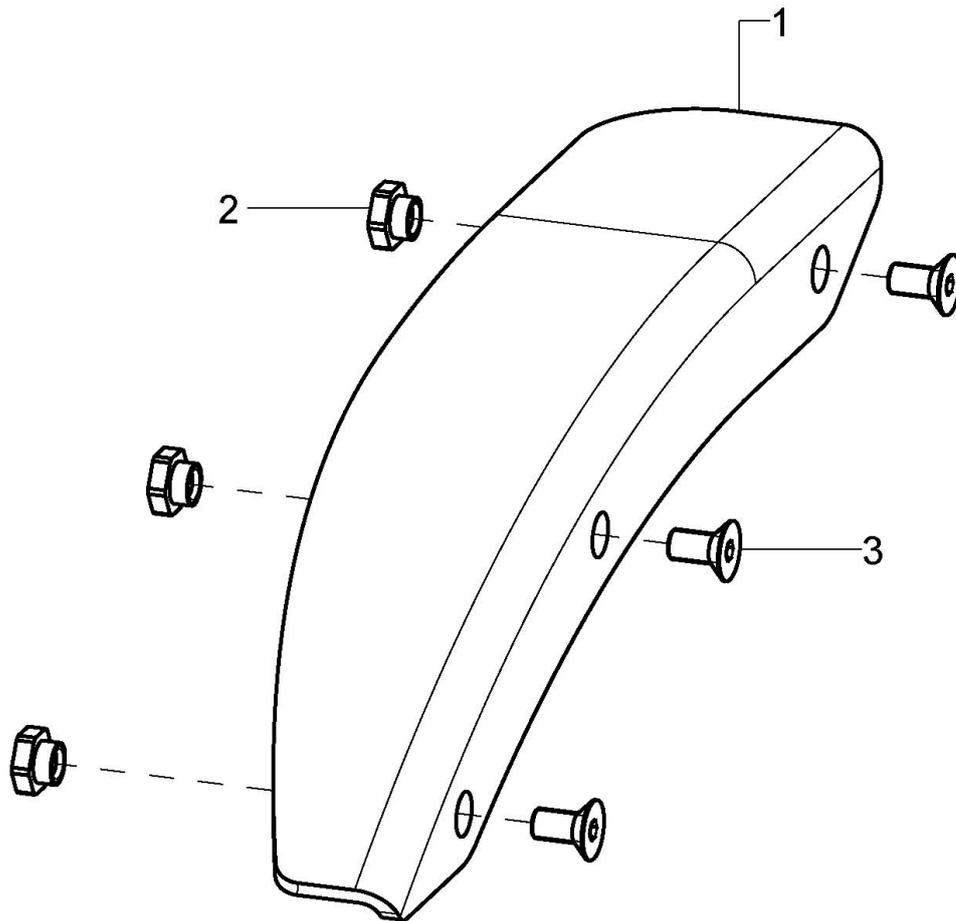


| Pos.: | Menge: | Artikelnr: | Artikelbezeichnung: | Variante: |
|-------|--------|------------|--|-----------|
| 1-3 | 1 | 46100102 | Kleiderschutz für Desk-Seitenteil rechts incl. Montagematerial | |
| o.B. | 1 | 46100101 | Kleiderschutz für Desk-Seitenteil links incl. Montagematerial | |
| 2 | 3 | | Flanschmutter M5 | |
| 3 | 3 | | Senkschraube mit Innensechskant ISO 10642 (DIN 7991) M5x10 | |

Armpolster für Desk-Seitenteil

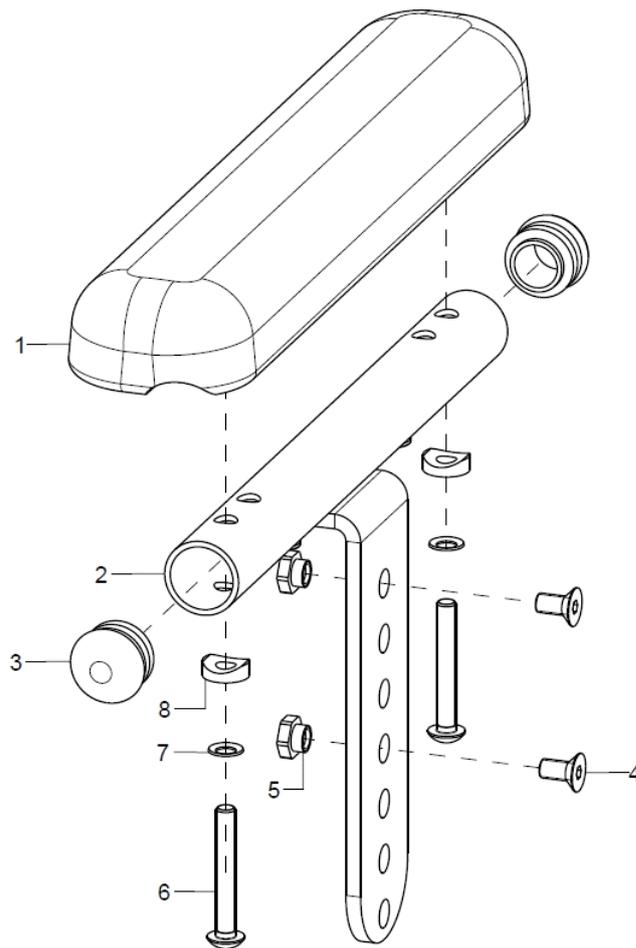


| Pos.: | Menge: | Artikelnr: | Artikelbezeichnung: | Variante: |
|-------|--------|------------|---|-------------|
| 1-8 | 1 | 461005 | Armlehne für Desk-Seitenteil | Farbe |
| 1 | 1 | 450007 | Armauflage gerade 240x50x26-M5/164mm, schwarz incl. Montagmaterial | |
| 2-5 | 1 | 461002 | Halter Armlehne Desk | Farbe |
| 3 | 2 | 620002 | Stopfen mit Lamellen für Rohr $\varnothing 20 \times 1-2$, schwarz | Set 2 Stück |
| 4 | 2 | | Senkschraube mit Innensechskant ISO 10642 (DIN 7991) M5x8, Tuflok | |
| 5 | 2 | | Flanschmutter M5 | |
| 6-8 | 1 | 452697 | Montageset für Armpolster | |
| 6 | 2 | | Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M5x35 | |
| 7 | 2 | | Sicherungsscheibe S5 - FST | |
| 8 | 2 | | Sattelscheibe $\varnothing 12/5 \times 2.5$ | |

Langes Seitenteil

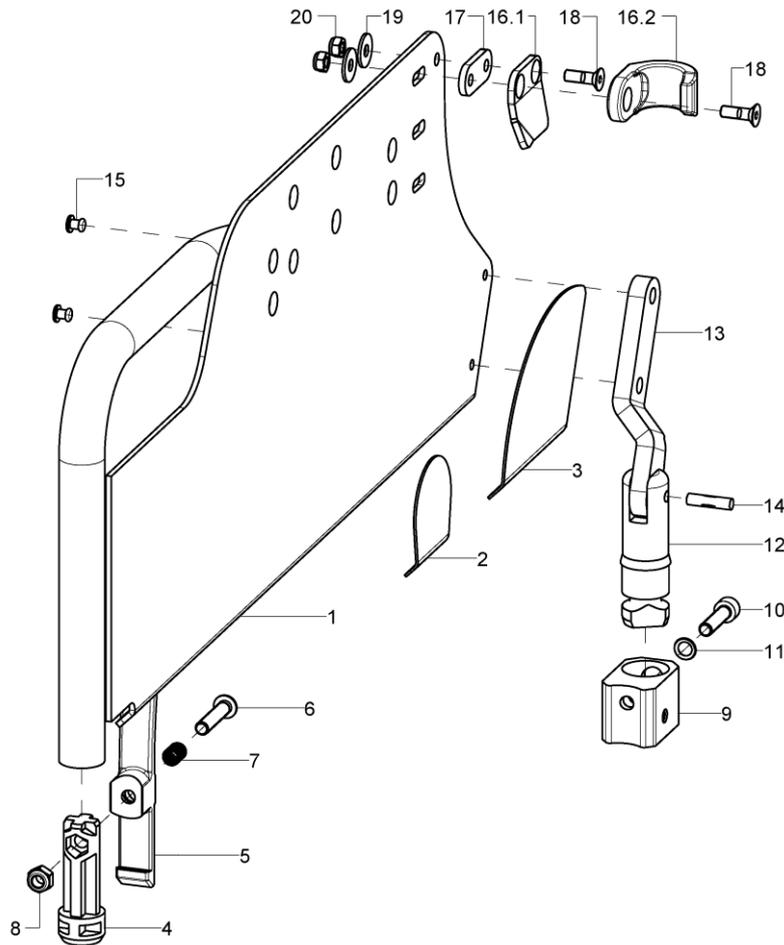

| Pos.: | Menge: | Artikelnr.: | Artikelbezeichnung: | Variante: |
|---------|--------|-------------|--|---------------------------|
| 1 | 1 | 46110202 | Langes Seitenteil rechts | Farbe |
| o.B. | 1 | 46110201 | Langes Seitenteil links | Farbe |
| altern. | 1 | 46110302 | Langes Seitentei rechts bei SA Rahmenvariante | Farbe, SA Rahmenvariante |
| o.B. | 1 | 46110301 | Langes Seitentei SA links bei SA Rahmenvariante | Farbe, SA Rahmenvariante |
| 2 | 2 | 46100121 | Schutzfolie Mitte bei Desk-Seitenteil | Nur bei umlegbarem Rücken |
| 3 | 2 | 46100120 | Schutzfolie hinten bei Desk-Seitenteil | Nur bei umlegbarem Rücken |
| o.B. | 1 | 45170202 | Kälteschutzteil rechts bei Desk-Seitenteil | |
| o.B. | 1 | 45170201 | Kälteschutzteil links bei Desk-Seitenteil | |
| 4 | 2 | 46100113 | Zapfen vorne bei Desk-/Langes Seitenteil | |
| 5-8 | 2 | 46100114 | Rasthebel bei Desk-/Langes Seitenteil incl. Montagematerial | |
| 6 | 1 | | Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x30 | |
| 7 | 1 | | Druckfeder DIN 2098 0,7x7,65/9,05x21 | |
| 8 | 1 | | Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M6 | |
| 9-11 | 2 | 46100117 | Aufnahme hinten für Desk-Seitenteil incl. Montagematerial | |
| 10 | 1 | | Zylinderschraube ISO 4762 (DIN 912) M6x25 | |
| 11 | 1 | | Sicherungsscheibe S6 - FST | |
| 12-15 | 2 | 46101802 | Zapfen hinten für Desk-/Langes Seitenteil incl. Gelenklasche | |
| 13 | 1 | | Gelenklasche Desk rechts | |
| o.B. | 1 | | Gelenklasche Desk links | |
| 14 | 1 | | Kerbstift DIN 1475 - 5x20 | |
| 15 | 2 | | Blindniet F5x10 A2/A2 | |
| 16.1+18 | 1 | 46101602 | Haltekralle links für Desk-Seitenteil incl. Montagematerial | Bei umlegbarem Rücken |
| -20 | | | | |


| | | | | |
|------------|------|----------|--|-----------------------|
| o.B. | 1 | 46101601 | Haltekralle rechts für Desk-Seitenteil incl. Montagematerial | Bei umlegbarem Rücken |
| 16.2+18-20 | 2 | 45260110 | Seitenteilclip | Bei Standard Rücken |
| 17 | 2 | | Distanz für Kralle | bei umlegbarem Rücken |
| 18 | 2(1) | | Senkschraube mit Innensechskant ISO 10642 (DIN 7991) M5x16 | |
| 19 | 2(1) | | Scheibe ISO 7093 (DIN 9021) - 5,3 | |
| 20 | 2(1) | | Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M5 | |

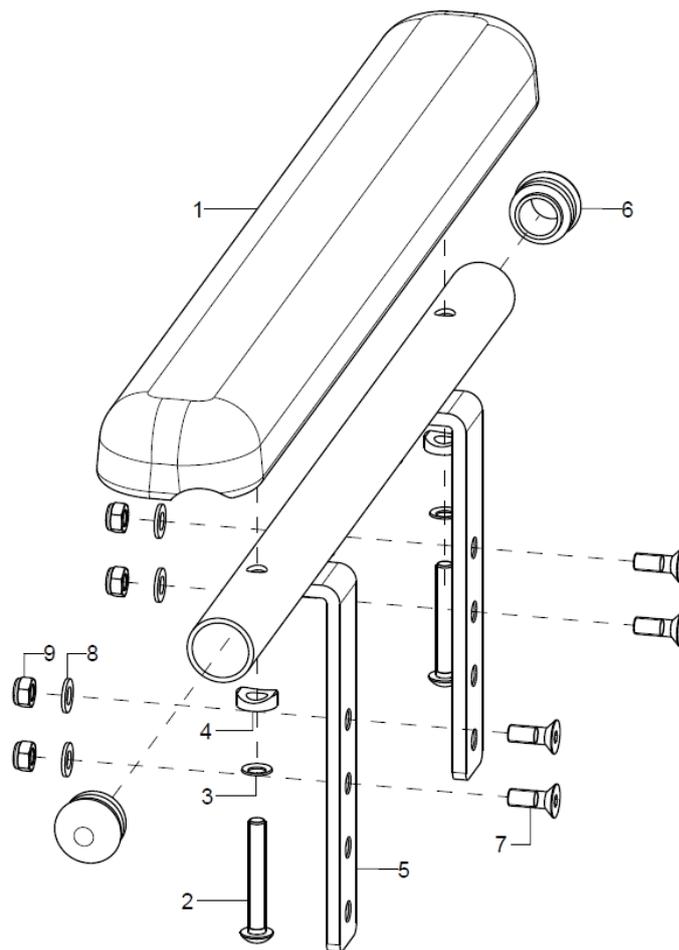Armpolster für langes Seitenteil


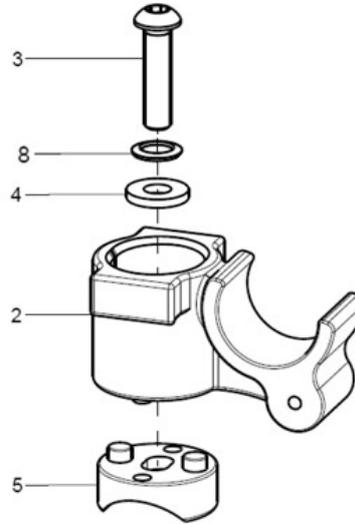
| Pos.: | Menge: | Artikelnr: | Artikelbezeichnung: | Variante: |
|-------|--------|------------|---|---------------------|
| 1-9 | 1P | 452507 | Armlehne für langes Seitenteil | Farbe, links/rechts |
| 1 | 2 | 450010 | Armauflage gerade 370mm | |
| 2-4 | 1 | 45250799 | Montageset für langes Armpolster | |
| 2 | 2 | | Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M5x35 | |
| 3 | 2 | | Sicherungsscheibe S5 - FST | |
| 4 | 2 | | Sattelscheibe \varnothing 12/5x2.5 | |
| 5-9 | 1 | 45250702 | Halter Armlehne rechts | Farbe |
| o.B. | 1 | 45250701 | Halter Armlehne links | Farbe |
| 6 | 2 | | Stopfen mit Lamellen für Rohr \varnothing 20x1-2, schwarz | |
| 7 | 4 | | Senkschraube mit Innensechskant ISO 10642 (DIN 7991) M5x14 | |
| 8 | 4 | | Scheibe ISO 7089 (DIN 125) - A 5,3 | |
| 9 | 4 | | Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M5 | |

Desk/langes Seitenteil, Aufnahme vorne


Bei abduzierten Rahmen (nicht bei XL Rahmen)
Bis ST 42cm

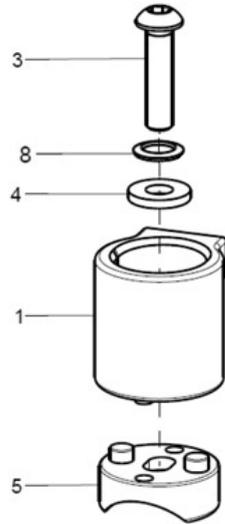


Ab ST 44 cm




Bei abduzierten XL Rahmen
Bis ST 42cm

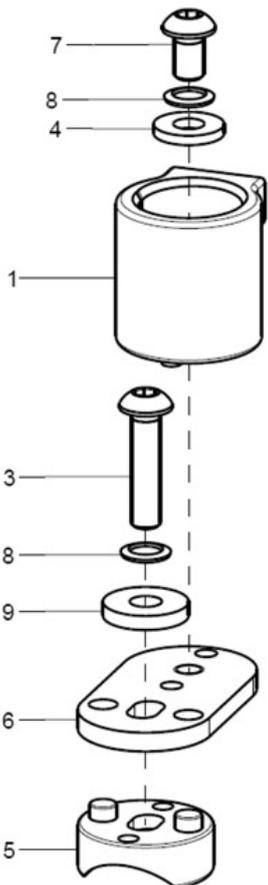

Ab ST 44 cm

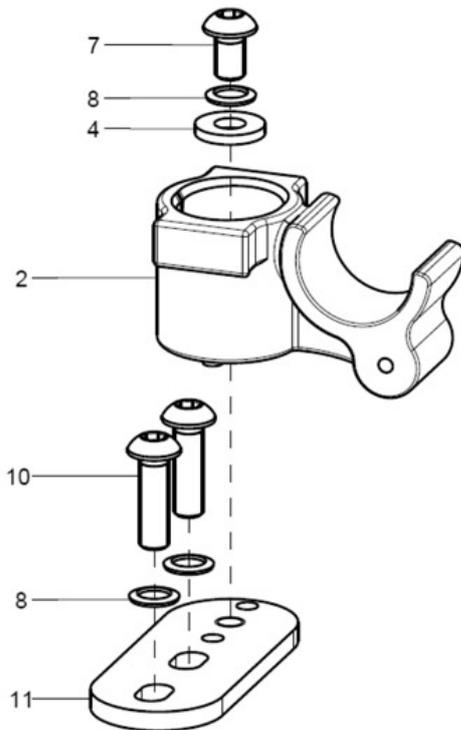


Bei geradem Rahmen

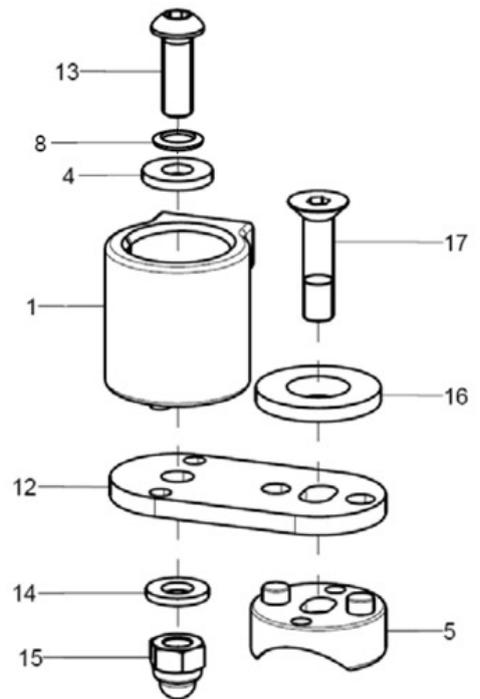

| Pos.: | Menge: | Artikelnr: | Artikelbezeichnung: | Variante: |
|---------|---------|------------|---|-------------------------------|
| 1+3-5+8 | 2 | 46100130 | Deskaufnahme vorne bei abduziertem Rahmen kpl. | bis ST42 cm (nicht XL-Rahmen) |
| 2-5+8 | 2 | 46100131 | Deskaufnahme vorne bei abduziertem Rahmen kpl. | ab ST44cm (nicht XL-Rahmen) |
| 1+3-9 | 2 | 46100132 | Deskaufnahme vorne bei abduziertem XL-Rahmen bis ST42cm, kpl. | |
| 2+4+7+ | 2 | 46100133 | Deskaufnahme vorne bei abduziertem XL-Rahmen ab ST44cm, kpl. | |
| 8+10+1 | | | | |
| 1 | | | | |
| 1+4+5+ | 2 | 46100134 | Deskaufnahme vorne bei geradem Rahmen, kpl. | |
| 8+12-17 | | | | |
| 1 | 1 | 46100110 | Aufnahme vorne für Desk-/Langes Seitenteil | |
| 2 | 1 | 46100111 | Aufnahme Kombi vorne für Desk-/Langes Seitenteil | ab ST 44 cm |
| 3 | 1 | | Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x25 | |
| 4 | 1 | | Scheibe verstärkt Ø14/6,2x2 | |
| 5 | 1 | 46100112 | Sattelscheibe für Desk-/Langes Seitenteil | |
| 6 | 1 | 46100126 | Lasche für Desk-/Langes Seitenteil bei XL abdu Rahmen | |
| 7 | 1 | | Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x10 | |
| 8 | 1(2)(3) | | Sicherungsscheibe S6 - FST | |
| 9 | 1 | | Scheibe DIN 7349 - 6,4 | |
| 7 | 1 | | Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x20 | |
| 11 | 1 | 46100127 | Lasche für Desk-/Langes Seitenteil bei XL abdu Rahmen+ ST>44 | |
| 12 | 1 | 46100125 | Lasche für Desk-/Langes Seitenteil bei geradem Rahmen | |
| 13 | 1 | | Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x18 | |
| 14 | 1 | | Scheibe ISO 7089 (DIN 125) - A 6,4 | |
| 15 | 1 | | Sechsk.-Hutmutter niedr. Form mit Klemmt. DIN 986 - M6 | |
| 16 | 1 | 46100122 | Stützscheibe mit Senkung M6 bei Desk-/Langem Seitenteil | |
| 17 | 1 | | Senkschraube mit Innensechskant ISO 10642 (DIN 7991) M6x25 | |


Rasterarmlehne

Geeignet für Desk-Seitenteil und langes Seitenteil

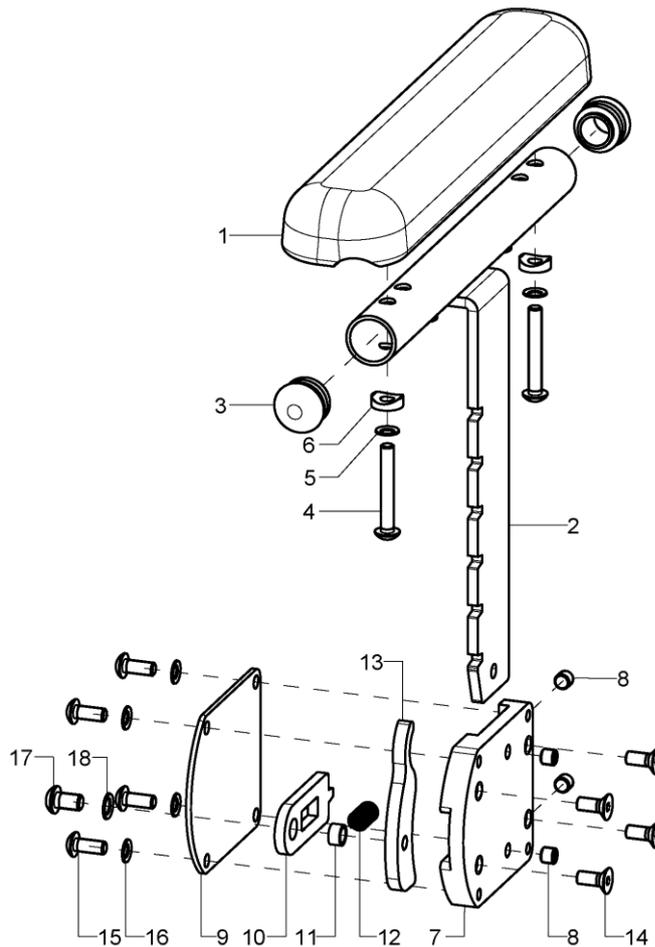


| Pos.: | Menge: | Artikelnr: | Artikelbezeichnung: | Variante: |
|-------|--------|------------|---|--------------|
| 1-18 | 1 | 452506 | Armpolster für Rasterarmlehne kpl. | links/rechts |
| 1 | 1 | 450007 | Armauflage gerade 240x50x26-M5/164mm, schwarz incl. Montagmaterial | |
| 2-3 | 1 | 45250611 | Armlehnenhalter mit Raster, rechts incl. Stopfen | |
| o.B. | 1 | 45250610 | Armlehnenhalter mit Raster, links incl. Stopfen | |
| 3 | 2 | | Stopfen mit Lamellen für Rohr $\varnothing 20 \times 1-2$, schwarz | |
| 4 | 2 | | Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M5x35 | |
| 5 | 2 | | Sicherungsscheibe S5 - FST | |
| 6 | 2 | | Sattelscheibe $\varnothing 12/5 \times 2,5$ | |
| 7-18 | 1 | 45250622 | Rastereinheit vormontiert rechts für Rasterarmlehne | |
| o.B. | 1 | 45250621 | Rastereinheit vormontiert links für Rasterarmlehne | |
| 7 | 1 | | Grundplatte | |
| 8 | 4 | | Gewindestift m. Schlitz - M6X5 - PA | |
| 9 | 1 | | Abdeckplatte | |
| 10 | 1 | | Riegel für Rasterarmlehne | |
| 11 | 1 | | Buchse 8x6x4,5 | |
| 12 | 1 | | Druckfeder DIN 2098 0,7x7,65/9,05x21 | |
| 13 | 1 | | Exzenterhebel | |
| 14 | 4 | | Senkschraube mit Innensechskant ISO 10642 (DIN 7991) M5x12 | |
| 15 | 4 | | Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M5x12 | |
| 16 | 4 | | Sicherungsscheibe S5 - FST | |
| 17 | 1 | | Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x10 | |
| 18 | 1 | | Sicherungsscheibe S6 - FST | |

Seitenteil für Gasdruckfeder-Rücken

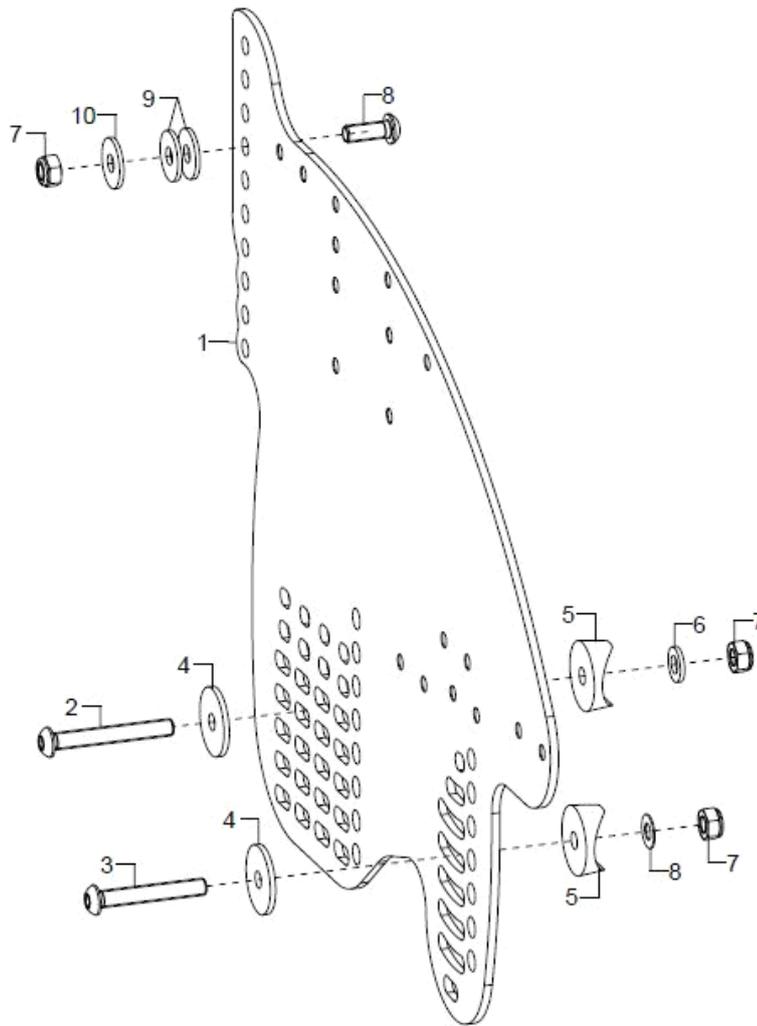


| Pos.: | Menge: | Artikelnr: | Artikelbezeichnung: | Variante: |
|---------|--------|------------|--|-----------|
| 1 | 1 | 45252604 | Seitenteil 26" rechts bei GDF-Rücken | Farbe |
| o.B. | 1 | 45252603 | Seitenteil 26" links bei GDF-Rücken | Farbe |
| altern. | 1 | 45252404 | Seitenteil 24" rechts bei GDF-Rücken | Farbe |
| o.B. | 1 | 45252403 | Seitenteil 24" links bei GDF-Rücken | Farbe |
| altern. | 1 | 45252204 | Seitenteil 22" rechts bei GDF-Rücken | Farbe |
| o.B. | 1 | 45252203 | Seitenteil 22" links bei GDF-Rücken | Farbe |
| 2-11 | 2 | 452597 | Montageset Seitenteil bei Gasdruckfeder-Rücken | |
| 2 | 1 | | Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x45 | |
| 3 | 1 | | Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x40 | |
| 4 | 2 | | Distanzscheibe (Konus) Ø24,7x6x2 | |
| 5 | 2 | | Sattelscheibe schwarz Nenn-ø 24/8 | |
| 6 | 1 | | Scheibe ISO 7089 (DIN 125) - A 6,4 | |
| 7 | 3 | | Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M6 | |
| 8 | 1 | | Passscheibe DIN 988 - 6x12x0,5 - A2 | |
| 9 | 1 | | Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x20 | |
| 10 | 2 | | Scheibe ISO 7093 (DIN 9021) - 6,4 - PA | |
| 11 | 1 | | Scheibe ISO 7093 (DIN 9021) - 6,4 | |

Desk-Seitenteil für Gasdruckfeder-Rücken

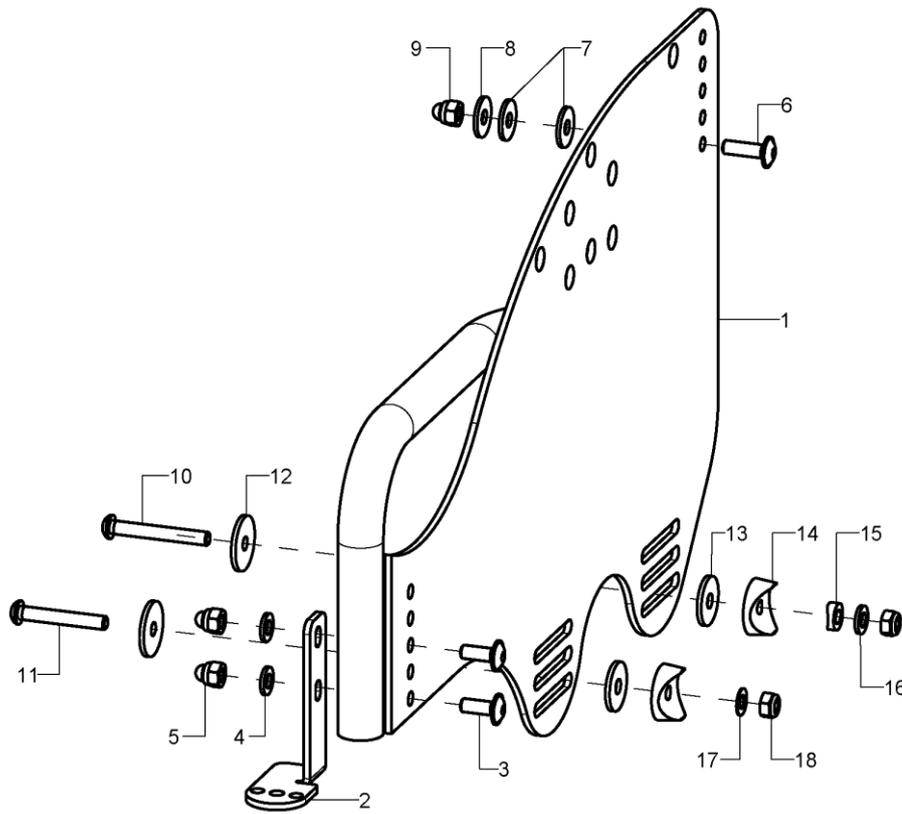


| Pos.: | Menge: | Artikelnr.: | Artikelbezeichnung: | Variante: |
|---------|--------|-------------|--|------------------|
| 1 | 1 | 46100402 | Desk-Seitenteil rechts bei GDF-Rücken | Farbe |
| o.B. | 1 | 46100401 | Desk-Seitenteil links bei GDF-Rücken | Farbe |
| altern. | 1 | 46100502 | Desk-Seitenteil SA rechts bei GDF-Rücken | Farbe |
| o.B. | 1 | 46100501 | Desk-Seitenteil SA links bei GDF-Rücken | Farbe |
| 2-5 | 1 | 46100404 | Befestigungswinkel rechts | Rahmen abduziert |
| o.B. | 1 | 46100403 | Befestigungswinkel links | Rahmen abduziert |
| altern. | 1 | 46100604 | Befestigungswinkel gerader Rahmen rechts | Rahmen gerade |
| o.B. | 1 | 46100603 | Befestigungswinkel gerader Rahmen links | Rahmen gerade |
| 3 | 2 | | Linsenflanschschraube mit Innensechskant M6x16 | |
| 4 | 2 | | Scheibe ISO 7089 (DIN 125) - A 6,4 | |
| 5 | 2 | | Sechsk.-Hutmutter niedr. Form mit Klemmt. DIN 986 - M6 | |
| 6-18 | 2 | 46100499 | Montageset Desk-Seitenteil bei GDF-Rücken | |
| 6 | 1 | | Linsenflanschschraube mit Innensechskant M6x20 | |
| 7 | 2 | | Scheibe ISO 7093 (DIN 9021) - 6,4 - PA | |
| 8 | 1 | | Scheibe ISO 7093 (DIN 9021) - 6,4 | |
| 9 | 1 | | Sechsk.-Hutmutter niedr. Form mit Klemmt. DIN 986 - M6 | |
| 10 | 1 | | Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x45 | |
| 11 | 1 | | Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x40 | |
| 12 | 2 | | Distanzscheibe (Konus) Ø24,7x6x2 | |
| 13 | 2 | | Scheibe ISO 7094 (DIN 440), 6.6x22x2 | |
| 14 | 2 | | Sattelscheibe schwarz Nenn-Ø 24/8 | |
| 15 | 1 | | Sattelscheibe Ø12/6,2x2,5 | |
| 16 | 1 | | Scheibe ISO 7089 (DIN 125) - A 6,4 | |
| 17 | 1 | | Passscheibe DIN 988 - 6x12x0,5 - A2 | |
| 18 | 2 | | Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M6 | |

Langes Seitenteil für Gasdruckfeder-Rücken

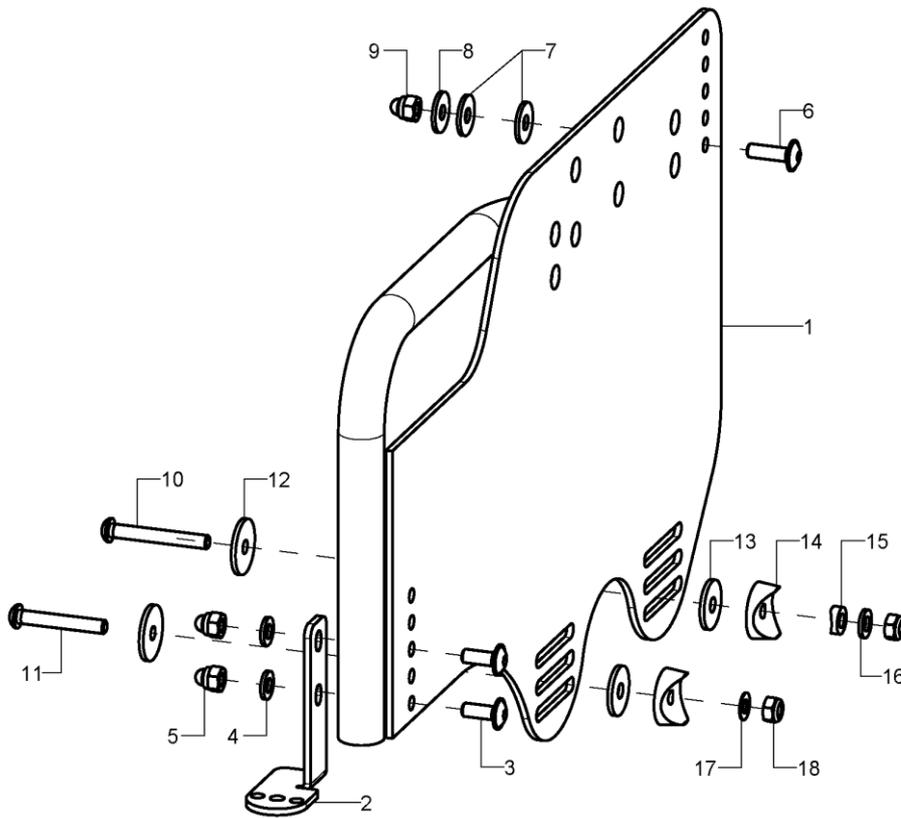

| Pos.: | Menge: | Artikelnr.: | Artikelbezeichnung: | Variante: |
|---------|--------|-------------|--|------------------|
| 1 | 1 | 46110402 | Langes Seitenteil rechts bei GDF-Rücken | Farbe |
| o.B. | 1 | 46110401 | Langes Seitenteil links bei GDF-Rücken | Farbe |
| altern. | 1 | 46110502 | Langes Seitenteil SA für GDF-Rücken rechts | Farbe |
| o.B. | 1 | 46110501 | Langes Seitenteil SA für GDF-Rücken links | Farbe |
| 2-5 | 1 | 46100404 | Befestigungswinkel rechts | Rahmen abduziert |
| o.B. | 1 | 46100403 | Befestigungswinkel links | Rahmen abduziert |
| altern. | 1 | 46100604 | Befestigungswinkel gerader Rahmen rechts | Rahmen gerade |
| o.B. | 1 | 46100603 | Befestigungswinkel gerader Rahmen links | Rahmen gerade |
| 3 | 2 | | Linsenflanschschraube mit Innensechskant M6x16 | |
| 4 | 2 | | Scheibe ISO 7089 (DIN 125) - A 6,4 | |
| 5 | 2 | | Sechsk.-Hutmutter niedr. Form mit Klemmt. DIN 986 - M6 | |
| 6-18 | 2 | 46100499 | Montageset Desk-Seitenteil bei GDF-Rücken | |
| 6 | 1 | | Linsenflanschschraube mit Innensechskant M6x20 | |
| 7 | 2 | | Scheibe ISO 7093 (DIN 9021) - 6,4 - PA | |
| 8 | 1 | | Scheibe ISO 7093 (DIN 9021) - 6,4 | |
| 9 | 1 | | Sechsk.-Hutmutter niedr. Form mit Klemmt. DIN 986 - M6 | |
| 10 | 1 | | Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x45 | |
| 11 | 1 | | Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x40 | |
| 12 | 2 | | Distanzscheibe (Konus) Ø24,7x6x2 | |
| 13 | 2 | | Scheibe ISO 7094 (DIN 440), 6.6x22x2 | |
| 14 | 2 | | Sattelscheibe schwarz Nenn-Ø 24/8 | |
| 15 | 1 | | Sattelscheibe Ø12/6,2x2,5 | |
| 16 | 1 | | Scheibe ISO 7089 (DIN 125) - A 6,4 | |
| 17 | 1 | | Passscheibe DIN 988 - 6x12x0,5 - A2 | |
| 18 | 2 | | Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M6 | |


Lenkradadapter

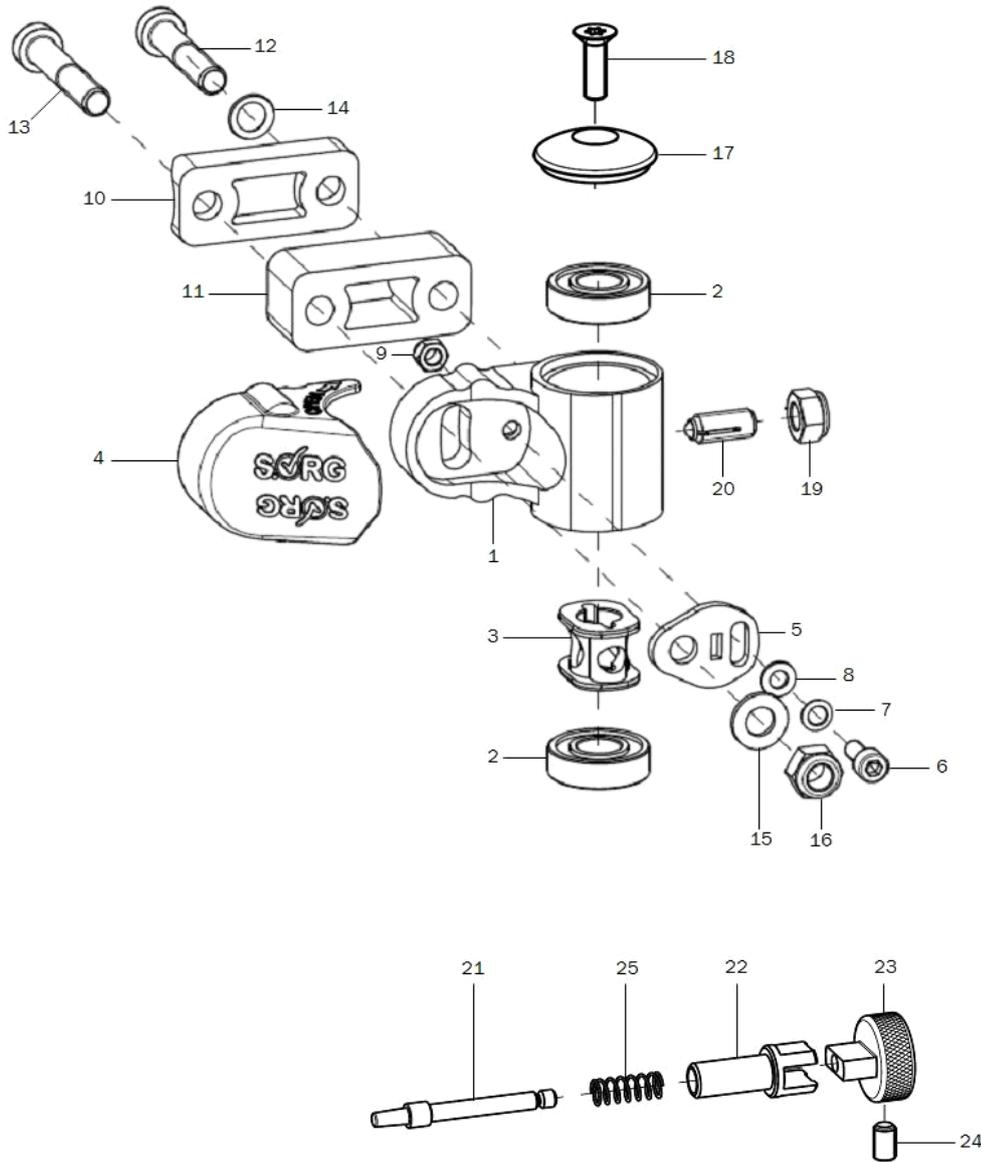

| Pos.: | Menge: | Artikelnr: | Artikelbezeichnung: | Variante: |
|-----------|--------|------------|--|------------------------------|
| 1-9+19-24 | 2 | 280506 | Lenkradadapter Alu, Spurfixierung, kpl. | Spurfixierung,- Verriegelung |
| 1-9 | 2 | 280500 | Lenkradadapter Alu, kpl. | |
| 1 | 1 | 280501 | Lenkradadapter Aluminium | |
| altern. | 1 | 280507 | Lenkradadapter Alu, Spurfixierung, | Spurfixierung,- Verriegelung |
| 2 | 2 | 200011 | Rillenkugellager $\varnothing 28/12$ 6001z | |
| 3 | 1 | 280504 | Dämpferelement | |
| 4 | 1 | 280030 | Abdeckkappe | |
| 5 | 1 | 280503 | Exzentrerscheibe | |
| 6 | 1 | | Zylinderschraube ISO 4762 (DIN 912) M5x12 | |
| 7 | 1 | | Sicherungscheibe S5 - FST | |
| 8 | 1 | | Scheibe ISO 7089 (DIN 125) - A 5,3 | |
| 9 | 1 | | Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M5 | |


| | | | | |
|----------|---|--------|--|--------------------------|
| 10+12-16 | 2 | 280510 | Montageset Lenkradadapter Alu | |
| 10+12-16 | 2 | 280511 | Montageset Lenkradadapter Aluminium für Verbreiterung 20mm | |
| 10+12-16 | 2 | 280512 | Montageset Lenkradadapter Aluminium für Verbreiterung 40mm | |
| 10 | 1 | 280502 | Halbschale LRAD – R12 | |
| 11 | 1 | 280513 | Spurverbreiterung 20mm | |
| altern. | 1 | 280514 | Spurverbreiterung 40mm | |
| 12 | 1 | | Zylinderschraube niedriger Kopf DIN 7984 - M8x40 | |
| altern. | 1 | | Zylinderschraube niedriger Kopf DIN 7984 - M8x60 | Spurverbreiterung 20mm |
| altern. | 1 | | Zylinderschraube niedriger Kopf DIN 7984 - M8x80 | Spurverbreiterung 40mm |
| 13 | 1 | | Zylinderschraube niedriger Kopf DIN 7984 - M8x45 | |
| altern. | 1 | | Zylinderschraube niedriger Kopf DIN 7984 - M8x65 | Spurverbreiterung 20mm |
| altern. | 1 | | Zylinderschraube niedriger Kopf DIN 7984 - M8x85 | Spurverbreiterung 40mm |
| 14 | 1 | | Sicherungsscheibe S8 - FST | |
| 15 | 1 | | Scheibe ISO 7089 (DIN 125) - A 8,4 | |
| 16 | 1 | | Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M8 | |
| 17-18 | 1 | 282107 | Kappe 35x10, schwarz eloxiert inkl. Montageschraube | Aluminium Lenkradadapter |
| 18 | 1 | | Senkschraube mit Torx ISO 14581 M6x20 vz, schwarz | |
| 19 | 1 | | Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M8 | |
| 20 | 2 | 285103 | Druckfederstück M8x19 incl. Mutter und Kappe | Spurfixierung |
| 21-25 | 2 | 285003 | Spurverriegelung kpl. | Spurverriegelung |
| 21 | 1 | | Fixierstift | Spurverriegelung |
| 22 | 1 | | Aufnahme Fixierstift | Spurverriegelung |
| 23 | 1 | | Zugknopf Lenkradverriegelung | Spurverriegelung |
| 24 | 1 | | Gewindestift mit Innensechskant ISO 4026 (DIN 913), M5x8 | |
| 25 | 1 | | Druckfeder 0,55x5,5x23,7 | |

Achtung: Wenn eine Lenk- und Schiebehilfe oder Rückhalteösen am Rollstuhl angebaut sind, bitte bei Bestellungen von Ersatzteilen angeben.

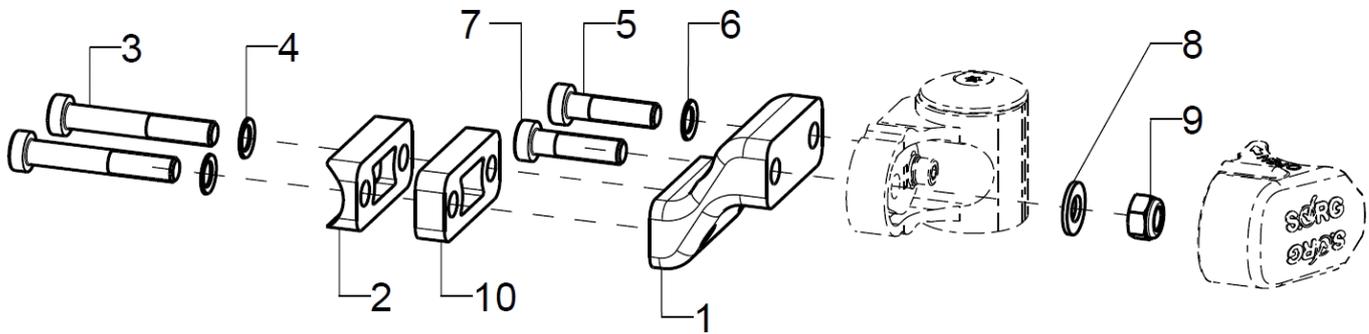Adapter für niedrige Sitzhöhen


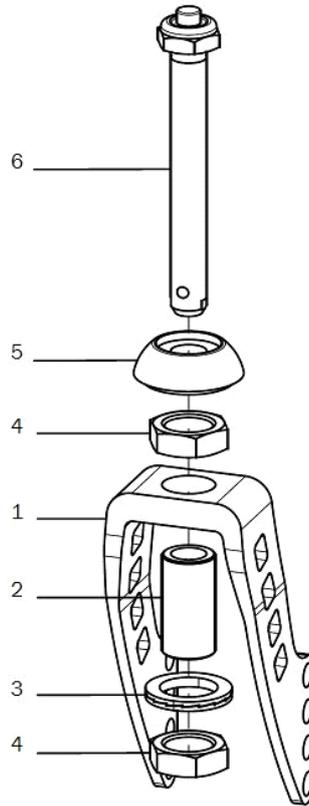
| Pos.: | Menge: | Artikelnr.: | Artikelbezeichnung: | Variante: |
|------------------|--------|-------------|---|-----------|
| 1 | 2 | 280525 | Hemiadapter 25 mm für niedrige Sitzhöhen, schwarz incl. Montagematerial | |
| altern. | 2 | 280526 | Adapter 4", 40mm für niedrige Sitzhöhen | |
| 2-9 | 2 | 280527 | Montageset, Hemiadapter an Rahmen Ø24mm | |
| 2 | 1 | 280502 | Halbschale LRAD – R12 | |
| 3 | 2 | | Zylinderschraube niedriger Kopf DIN 7984 - M8x40 | |
| altern. | 2 | | Zylinderschraube niedriger Kopf DIN 7984 - M8x50 | |
| 4 | 2 | | Sicherungsscheibe S8 - FST | |
| 5 | 1 | | Zylinderschraube niedriger Kopf DIN 7984 - M8x30 | |
| 6 | 1 | | Sicherungsscheibe S8 - FST | |
| 7 | 1 | | Zylinderschraube niedriger Kopf DIN 7984 - M8x35 | |
| 8 | 1 | | Scheibe ISO 7089 (DIN 125) - A 8,4 | |
| 9 | 1 | | Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M8 | |
| 10 (optional) | 1 | 280515 | Spurverbreiterung 10mm | |

Lenkradgabel

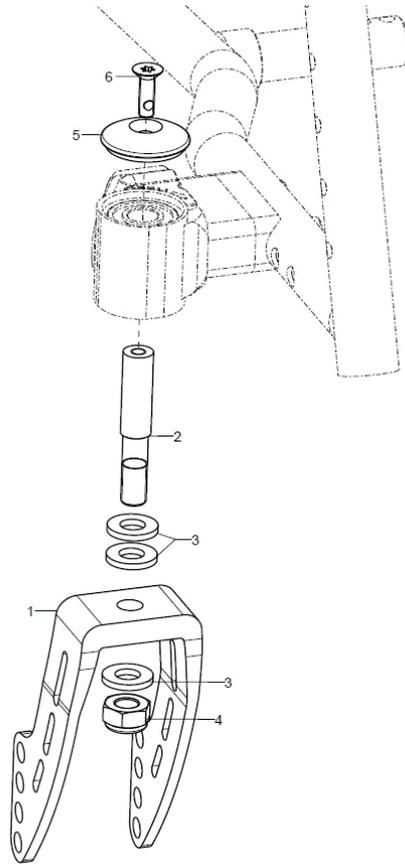

| Pos.: | Menge: | Artikelnr: | Artikelbezeichnung: | Variante: |
|-------|--------|------------|---|--------------------------|
| 1 | 2 | 2841 | Lenkrad-Gabel Alu lang 164x45 mm, 4 Loch | |
| o.B. | 2 | 2842 | Lenkrad-Gabel Alu mittel 126x45 mm, 4 Loch | |
| o.B. | 2 | 2843 | Lenkrad-Gabel Alu klein 100x45 mm, 2 Loch | |
| o.B. | 2 | 2845 | Lenkradgabel breit, Alu 130x60mm, 2-Loch | nur bei Artikel 2807 |
| 2 | 2 | 282104 | Lenkachse $\varnothing 12 \times 65,1$ mm | |
| o.B. | 2 | 285101 | Lenkachse 65 mm für Spurfixierung | |
| o.B. | 2 | 285001 | Lenkachse 65 mm für Lenkradverriegelung | |
| 3+4 | 2 | 282120 | Montageset Lenkradachse an Lenkradgabel Alu (Scheiben, 6-kt Mutter) | |
| 3 | 3 | | Scheibe DIN 1440 - 10x20x2,5 | |
| 4 | 1 | | Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M10 | |
| 5-6 | 2 | 282107 | Kappe 35x10, schwarz eloxiert inkl. Montageschraube | Aluminium Lenkradadapter |
| 6 | 2 | | Senkschraube mit Torx ISO 14581 M6x20 vz, schwarz | |


Lenkradgabel mit Steckachse




| Pos.: | Menge: | Artikelnr: | Artikelbezeichnung: | Variante: |
|-------|--------|------------|--|-----------|
| 1 | 2 | 272114 | Lenkradgabel 164x45 für Steckachse | |
| o.B. | 2 | 272113 | Lenkradgabel 126x45 für Steckachse | |
| o.B. | 2 | 272112 | Lenkradgabel 100x45 für Steckachse | |
| 2 | 2 | 272102 | Einschraubadapter M18x1 Ø12; 35 mm | |
| 3-4 | 2 | 272104 | Montagezubehör Einschraubadapter | |
| 3 | 1 | | Sicherungsscheibe Nord-Lock M18 | |
| 4 | 2 | | Mutter M18x1 SW24 | |
| 5 | 1 | 272101 | Distanzkappe 37x16,2, Alu schwarz eloxiert | |
| 6 | 1 | 272103 | Steckachse Ø 12x85 mm | |

Lenkräder


| Pos.: | Menge: | Artikelnr: | Artikelbezeichnung: | Variante: |
|-------|--------|------------|--|---|
| o.B. | 2 | 2812 | Lenkrad 4 Zoll PU | |
| o.B. | 2 | 2804 | Lenkrad 4 Zoll Vollgummi | |
| o.B. | 2 | 2820 | Lenkrad 4 Zoll PU transparent mit Leuchtdioden | |
| o.B. | 2 | 2835 | Lenkrad 4 Zoll Vollgummi schwarz, mit Alufelge | |
| o.B. | 2 | 2805 | Lenkrad 5 Zoll PU | |
| o.B. | 2 | 2809 | Lenkrad 5 Zoll Vollgummi | |
| o.B. | 2 | 2834 | Lenkrad 5 Zoll PU transparent mit Leuchtdioden | |
| o.B. | 2 | 2836 | Lenkrad 5 Zoll Vollgummi schwarz, mit Alufelge | |
| o.B. | 2 | 2802 | Lenkrad 5,5 Zoll Vollgummi, grau | |
| o.B. | 2 | 2803 | Lenkrad 6 Zoll PU | |
| o.B. | 2 | 2811 | Lenkrad 6 Zoll Vollgummi | |
| o.B. | 2 | 2808 | Lenkrad 6 Zoll luftbereift | |
| o.B. | 2 | 2838 | Lenkrad 6 Zoll Vollgummi schwarz, mit Alufelge | |
| o.B. | 2 | 2813 | Lenkrad 7 Zoll Vollgummi | |
| o.B. | 2 | 2807 | Lenkrad 7 Zoll luftbereift | nur mit Lenkradgabel 2845 |
| o.B. | 2 | 289998 | Montageset Lenkrad an Lenkradgabel (Schrauben, Distanzhülsen, Gewindebuchse) | Angepasst an Lenkrad / Lenkradgabel Kombination |

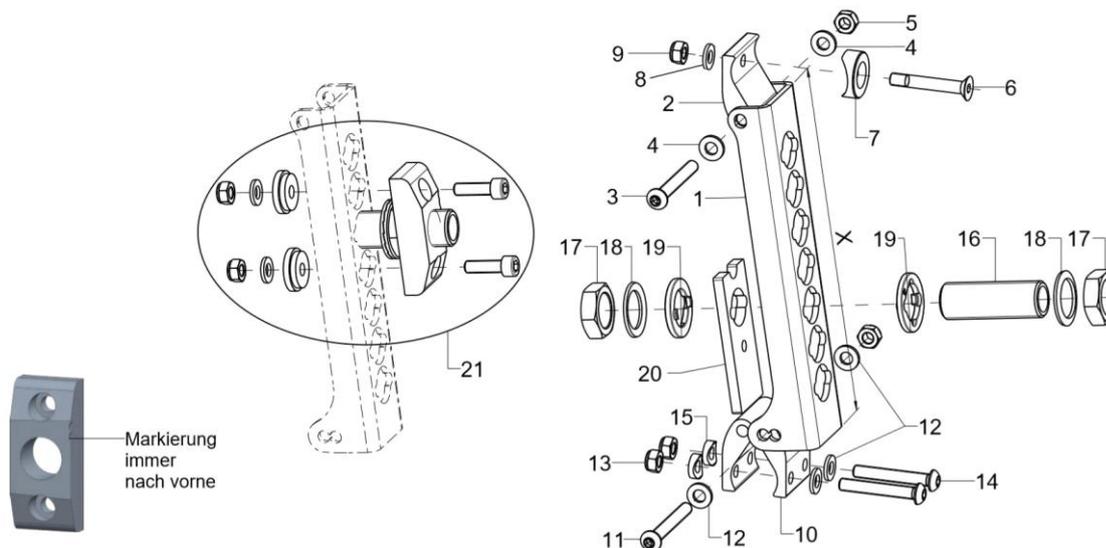Lochplatte Antriebsrad Standard


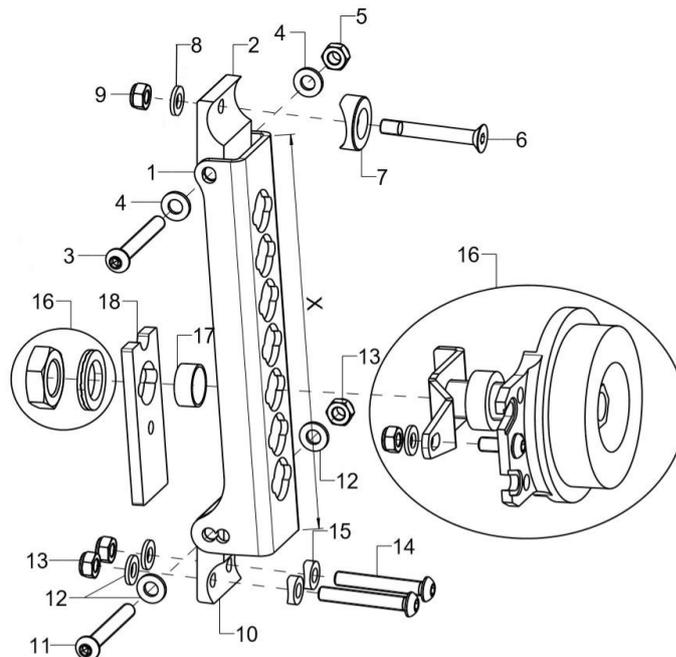
| Pos.: | Menge: | Artikelnr.: | Artikelbezeichnung: | Variante: |
|-------|--------|-------------|---|---|
| 1 | 2 | 20150902 | Lochplatte, X = 176,5 mm | |
| 2 | 2 | 20150903 | Aufhängung 1B oben | Standard-Rad: 0/2/5/8°, TRB-Rad: 0/2//8° |
| 3-9 | 2 | 20150999 | Montageset Aufhängung 1B oben | |
| 3 | 1 | | Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x50 | |
| 4 | 2 | | Scheibe ISO 7089 (DIN 125) - A 6,4 | |
| 5 | 1 | | Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M6 | |
| 6 | 1 | | Senkschraube mit Innensechskant ISO 10642 (DIN 7991) M6x40 | |
| 7 | 1 | | Sattelscheibe Alu d=23x8 | |
| 8 | 1 | | Scheibe ISO 7089 (DIN 125) - A 6,4 | |
| 9 | 1 | | Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M6 | |
| 10 | 2 | 20150913 | Aufhängung 2B unten | Standard-Rad: 2/5/8°, TRB-Rad: 2/8° |
| o.B. | 2 | 20150917 | Aufhängung bei Trommelbremse 2B unten | Standard-Rad: 0°, TRB-Rad: 0/5° |
| 11-15 | 2 | 20150998 | Montageset Aufhängung 2B | |
| 11 | 1 | | Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x50 | |
| 12 | 4 | | Scheibe ISO 7089 (DIN 125) - A 6,4 | |
| 13 | 3 | | Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M6 | |
| 14 | 2 | | Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x40 | |
| 15 | 2 | | Sattelscheibe ø12/6,2x2,5 | |
| 16-20 | 1 | 210024 | Einschraubadapter M18x1 d=12 | |
| 17 | 2 | | Mutter M18x1 SW24 | |
| 18 | 2 | | Sicherungsscheibe S18 - FST | |
| 19 | 2 | 20150501 | Sturz-Vorspurscheibe 0,5°, Set (2 Stück) | 0,5° Spurausgleich |
| o.B. | 2 | 20150502 | Sturz-Vorspurscheibe 1° | 1° Spurausgleich |
| 20 | 1 | 20150921 | Verstärkung Lochplatte | |
| 21 | 2 | 20150929 | Distanzblock f. Radstandsverbreiterung inklusive Montageset | Bis zu 20mm Verbreiterung pro Seite möglich |

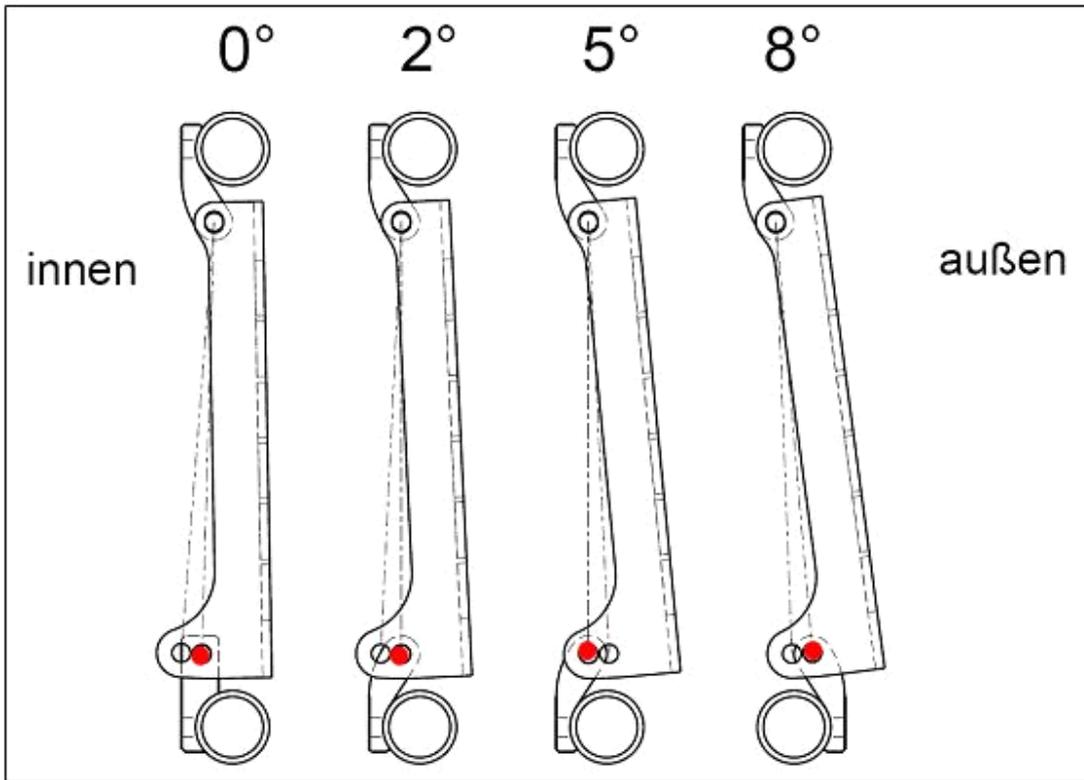


Einstellungen Radsturz bei Trommelbremsrädern - Stand: 25.02.14

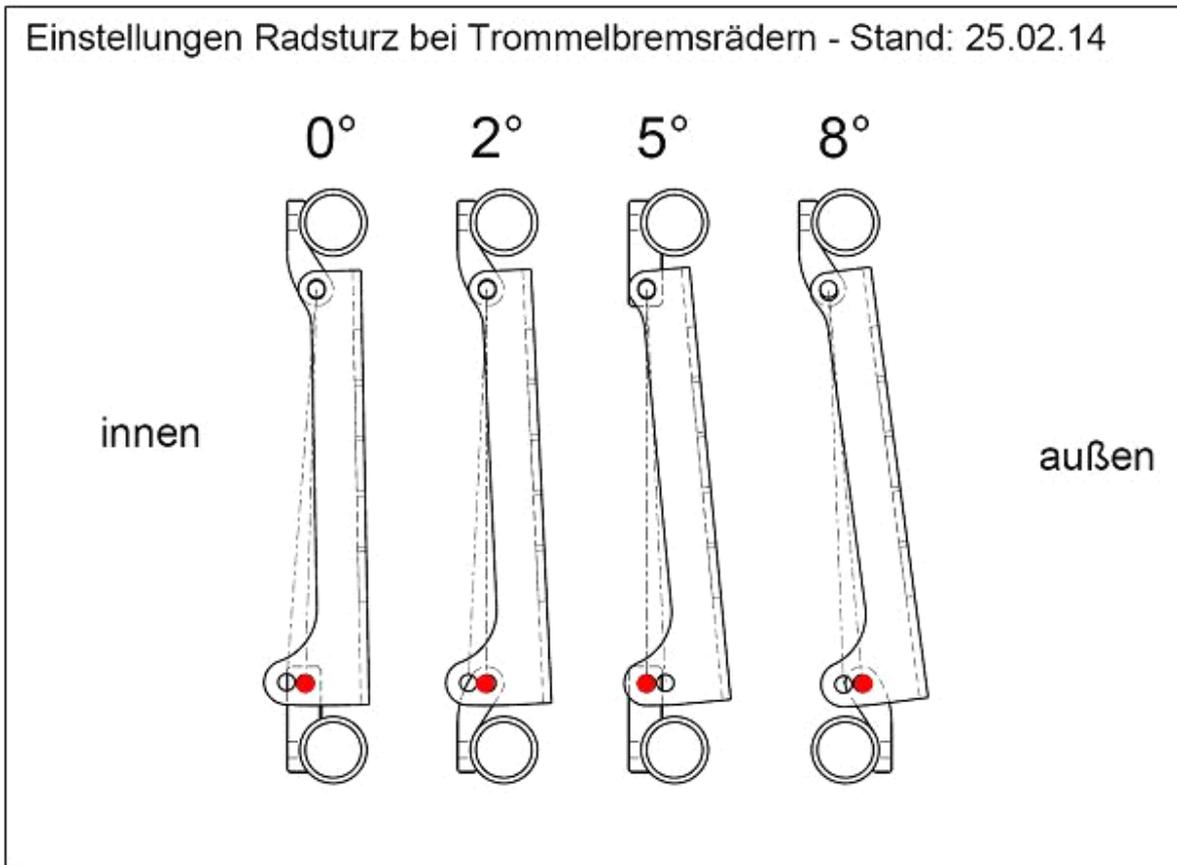

Lochplatte Trommelbremsrad



| Pos.: | Menge: | Artikelnr.: | Artikelbezeichnung: | Variante: |
|-------|--------|-------------|--|--|
| 1 | 2 | 20150902 | Lochplatte, X = 176,5 mm | |
| 2 | 2 | 20150916 | Aufhängung bei Trommelbremse 1B oben | TRB-Rad: 5° |
| o.B. | 2 | 20150903 | Aufhängung 1B oben | Standard-Rad: 0/2/5/8°, TRB-Rad: 0/2//8° |
| 3-9 | 2 | 20150999 | Montageset Aufhängung 1B oben | |
| 3 | 1 | | Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x50 | |
| 4 | 1 | | Scheibe ISO 7089 (DIN 125) - A 6,4 | |
| 5 | 1 | | Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M6 | |
| 6 | 1 | | Senkschraube mit Innensechskant ISO 10642 (DIN 7991) M6x40 | |
| 7 | 1 | | Sattelscheibe Alu d=23x8 | |
| 8 | 1 | | Scheibe ISO 7089 (DIN 125) - A 6,4 | |
| 9 | 1 | | Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M6 | |
| 10 | 2 | 20150917 | Aufhängung bei Trommelbremse 2B unten | Standard-Rad: 0°, TRB-Rad: 0/5° |
| o.B. | 2 | 20150913 | Aufhängung 2B unten | Standard-Rad: 2/5/8°, TRB-Rad: 2/8° |
| 11-15 | 2 | 20150998 | Montageset Aufhängung 2B | |
| 11 | 1 | | Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x50 | |
| 12 | 4 | | Scheibe ISO 7089 (DIN 125) - A 6,4 | |
| 13 | 3 | | Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M6 | |
| 14 | 2 | | Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x40 | |
| 15 | 2 | | Sattelscheibe ø12/6,2x2,5 | |
| 16-18 | 1 | 220005 | Trommelbremskörper kpl., inkl. Einschraubadapter und Gegenhalter | links/rechts |
| o.B. | 1 | 220013 | Trommelbremskörper für LLR-TBR Rad, incl.Einschraubadapter und Gegenhalter(links/rechts angeben) | links/rechts |
| 17 | 2 | 22001202 | Reduzierbuchse 8mm | |
| 18 | 2 | 20150921 | Verstärkung Lochplatte | |
| o.B. | 2 | 597492 | Verbreiterungsset für Trommelbremsrad | |

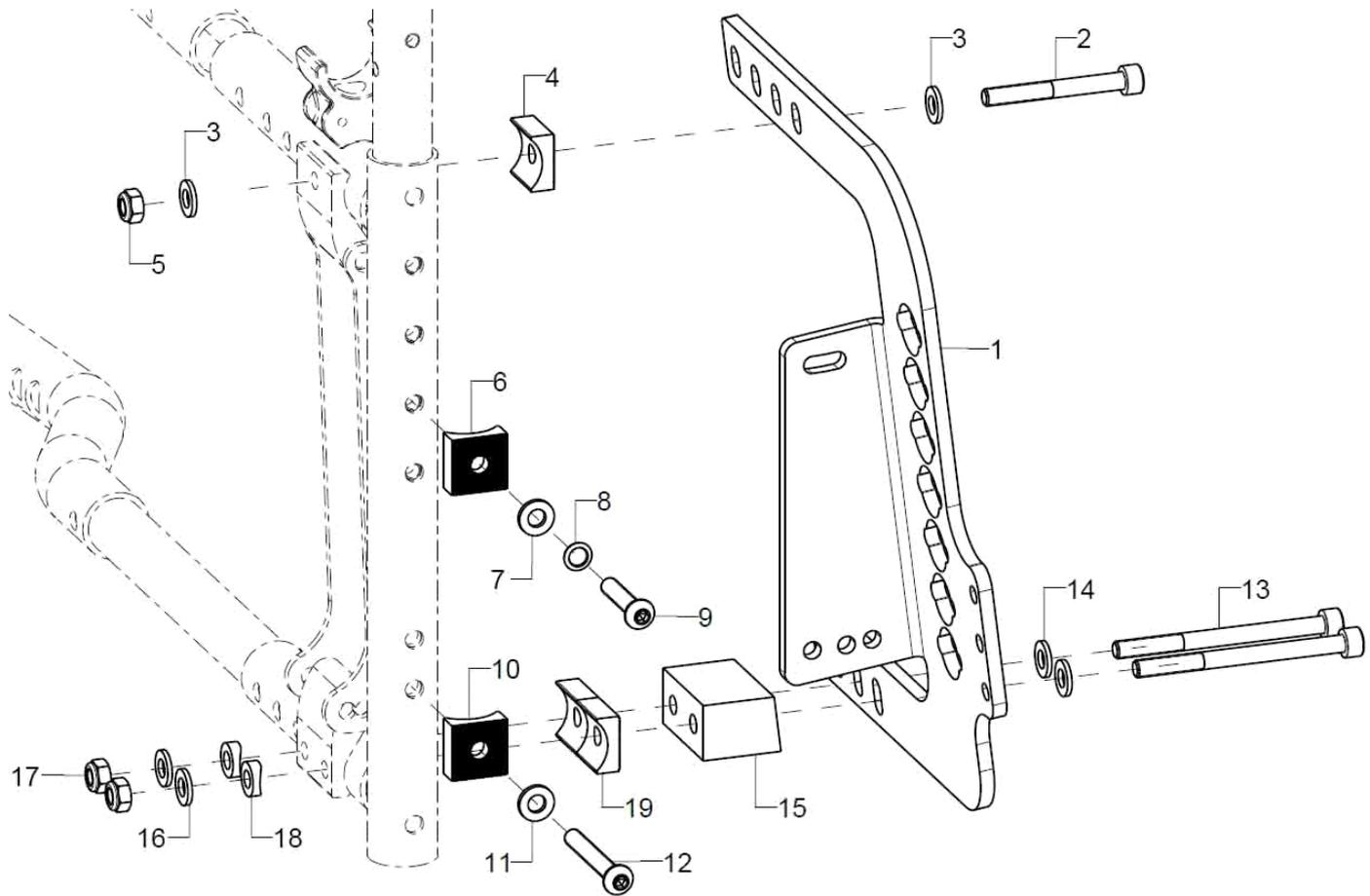Radstandsverlängerung 0°, 3°, 7°


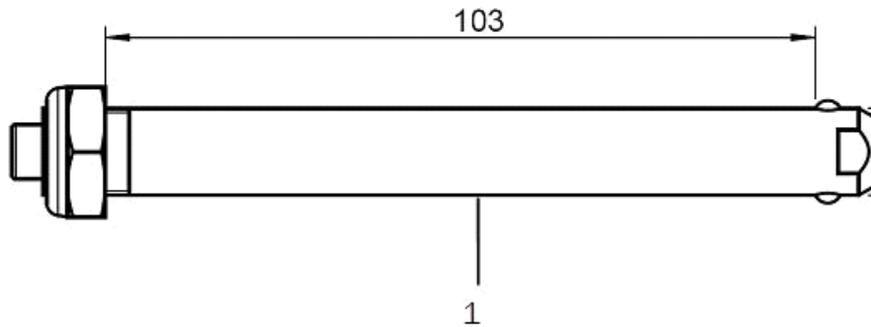
| Pos.: | Menge: | Artikelnr.: | Artikelbezeichnung: | Variante: |
|---------|--------|-------------|--|--|
| 1-19 | 1P | 7601 | Radstandverlängerung, kpl. | Radsturz, Rahmengröße, Lochplattenmontage innen oder außen |
| 1-19 | 1 | 76060202 | Radstandsverlängerung Gr.2, rechts | bei Rahmenhöhe strd. |
| o.B. | 1 | 76060201 | Radstandsverlängerung Gr.2, links | bei Rahmenhöhe strd. |
| altern. | 1 | 76060302 | Radstandsverlängerung XL, rechts | bei Rahmenhöhe XL |
| o.B. | 1 | 76060301 | Radstandsverlängerung XL, links | bei Rahmenhöhe XL |
| 2 | 1 | | Zylinderschraube ISO 4762 (DIN 912) M6x50 | |
| 3 | 2 | | Scheibe ISO 7089 (DIN 125) - A 6,4 | |
| 4 | 1 | | Halbschale 20, R12 | |
| 5 | 1 | | Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M6 | |
| 6 | 1 | | Halbschale 20, R12 | |
| 7 | 1 | | Scheibe ISO 7089 (DIN 125) - A 6,4 | |
| 8 | 1 | | Sicherungsscheibe S6 - FST | |
| 9 | 1 | | Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x30 | |
| 10 | 1 | | Halbschale 20, R12 | |
| 11 | 1 | | Scheibe ISO 7089 (DIN 125) - A 6,4 | |
| 12 | 1 | | Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x45 | |
| 13 | 2 | | Zylinderschraube ISO 4762 (DIN 912) M6x45 | Radsturz 0° |
| altern. | 2 | | Zylinderschraube ISO 4762 (DIN 912) M6x60 | Radsturz 3° |
| altern. | 2 | | Zylinderschraube ISO 4762 (DIN 912) M6x75 | Radsturz 7° |
| 14 | 2 | | Scheibe ISO 7089 (DIN 125) - A 6,4 | |
| 15-19 | 1 | 76060103 | Radsturzkeil 3° inkl. Montageset | Lochplattenanbau innen oder außen |
| altern. | 1 | 76060104 | Radsturzkeil 7° inkl. Montageset | Lochplattenanbau innen oder außen |

| | | |
|----|---|--|
| 16 | 2 | Scheibe ISO 7089 (DIN 125) - A 6,4 |
| 17 | 2 | Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M6 |
| 18 | 2 | Sattelscheibe $\varnothing 12/6,2 \times 2,5$ |
| 19 | 2 | Halbschale 20, R12 |

Achtung:

Bei dem Anbau der Radstandsverlängerung ist auch der Anbau der Bremsschiene für die Radstandsverlängerung erforderlich. Siehe Baugruppe Rahmen Sport.


Antriebsräder



| Pos.: | Menge: | Artikelnr: | Artikelbezeichnung: | Variante: |
|-------|--------|------------|--|-----------|
| o.B. | 2 | 212200 | Antriebsradfelge 22 Zoll/Standard-Nabe | |
| o.B. | 2 | 212400 | Antriebsradfelge 24 Zoll/Standard-Nabe | |
| o.B. | 2 | 222200 | Antriebsradfelge 22 Zoll/Trommelbrems-Nabe | |
| o.B. | 2 | 222400 | Antriebsradfelge 24 Zoll/Trommelbrems-Nabe | |
| o.B. | 2 | 222600 | Antriebsradfelge 26 Zoll/Trommelbrems-Nabe | |
| o.B. | 2 | 212240 | Profilradfelge 22 Zoll/Standard-Nabe und integr. Greifring | |
| o.B. | 2 | 212440 | Profilradfelge 24 Zoll/Standard-Nabe und integr. Greifring | |
| o.B. | 2 | 222240 | Profilradfelge 22 Zoll/Trommelbrems-Nabe und integr. Greifring | |
| o.B. | 2 | 222440 | Profilradfelge 24 Zoll/Trommelbrems-Nabe und integr. Greifring | |
| o.B. | 2 | 222640 | Profilradfelge 26 Zoll/Trommelbrems-Nabe und integr. Greifring | |
| o.B. | 2 | 212277 | Leichtlaufradfelge 22 Zoll/Standard-Nabe | |
| o.B. | 2 | 212477 | Leichtlaufradfelge 24 Zoll/Standard-Nabe | |
| o.B. | 2 | 212281 | Leichtlaufradfelge 22 Zoll/Trommelbrems-Nabe, schwarz | |
| o.B. | 2 | 212481 | Leichtlaufradfelge 24 Zoll/Trommelbrems-Nabe, schwarz | |
| o.B. | 2 | 220001 | Steckachse $\varnothing 12 \times 123$, für Trommelbremsnabe | |
| o.B. | 2 | 210003 | Steckachse $\varnothing 12 \times 103$ mm für Standardnaben (bei Standard-, Profil- und Leichtlaufrad) | |
| o.B. | 2 | 200011 | Rillenkugellager $\varnothing 28/12$ 6001z | |


Doppelgreifreifen Standard

Erst ab SB24 möglich.

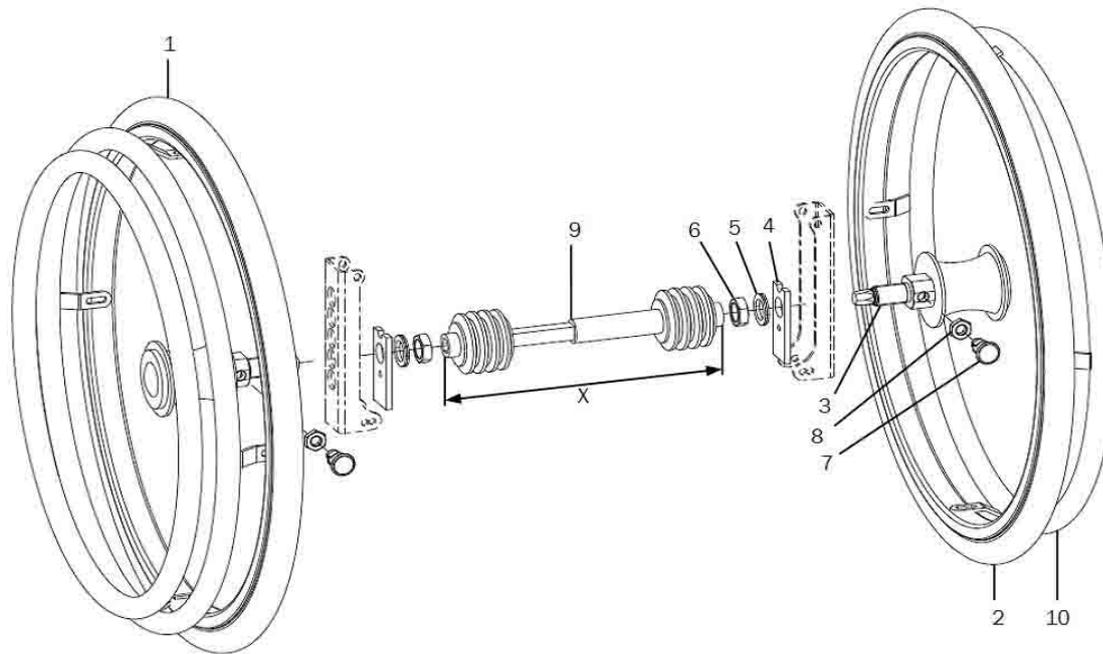


| Pos.: | Menge: | Artikelnr.: | Artikelbezeichnung: | Variante: |
|-------|--------|-------------|--|-----------|
| 1-9 | 1 | 261403 | Doppelgreifringssystem 22" für Standard-Nabe inkl. Bremsanker, Einschraubadapter, Gegenhalter und Teleskopstange | SB |
| o.B. | 1 | 261405 | Doppelgreifringssystem 24" für Standard-Nabe inkl. Bremsanker, Einschraubadapter, Gegenhalter und Teleskopstange | SB |
| 1 | 1 | 261442 | 22" Doppelgreifringrad mit Standard-Nabe inkl. Steckachse, Antriebsseite | |
| o.B. | 1 | 261444 | 24" Doppelgreifringrad mit Standard-Nabe inkl. Steckachse, Antriebsseite | |
| 2 | 1 | 261443 | 22" Doppelgreifringrad mit Standard-Nabe inkl. Steckachse, Gegenseite | |
| o.B. | 1 | 261445 | 24" Doppelgreifringrad mit Standard-Nabe inkl. Steckachse, Gegenseite | |
| 3-8 | 1 | 261429 | Montagezubehör DGR | |
| 3 | 1 | | Einschraubadapter DGR Standard | |
| 4 | 1 | 20150921 | Verstärkung Lochplatte | |
| 5 | 1 | | Sicherungsscheibe Nord-Lock M18 | |
| 6 | 1 | | Mutter M18x1 SW24 | |
| 7 | 1 | | Arretierbolzen mit Rastnut, M10x1 | |
| 8 | 1 | | Sechskantmutter ISO 4032 (DIN 934) - M10 | |
| 9 | 1 | 26140004 | Teleskopstange 220-280mm für Doppelgreifringssystem | SB30+32 |
| o.B. | 1 | 26140005 | Teleskopstange 270-330mm für Doppelgreifringssystem | SB34+36 |
| o.B. | 1 | 26140006 | Teleskopstange 295-370mm für Doppelgreifringssystem | SB38+40 |
| o.B. | 1 | 26140007 | Teleskopstange 350-460mm für Doppelgreifringssystem | SB42-50 |
| 10 | 1 | 261431 | Greifring 22" für Gegenseite | |
| o.B. | 1 | 261432 | Greifring 24" für Gegenseite | |

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Die passenden Greifringüberzüge finden Sie im Kapitel "Greifringüberzüge"




Doppelgreifreifen Trommelbremse

Erst ab SB24 möglich

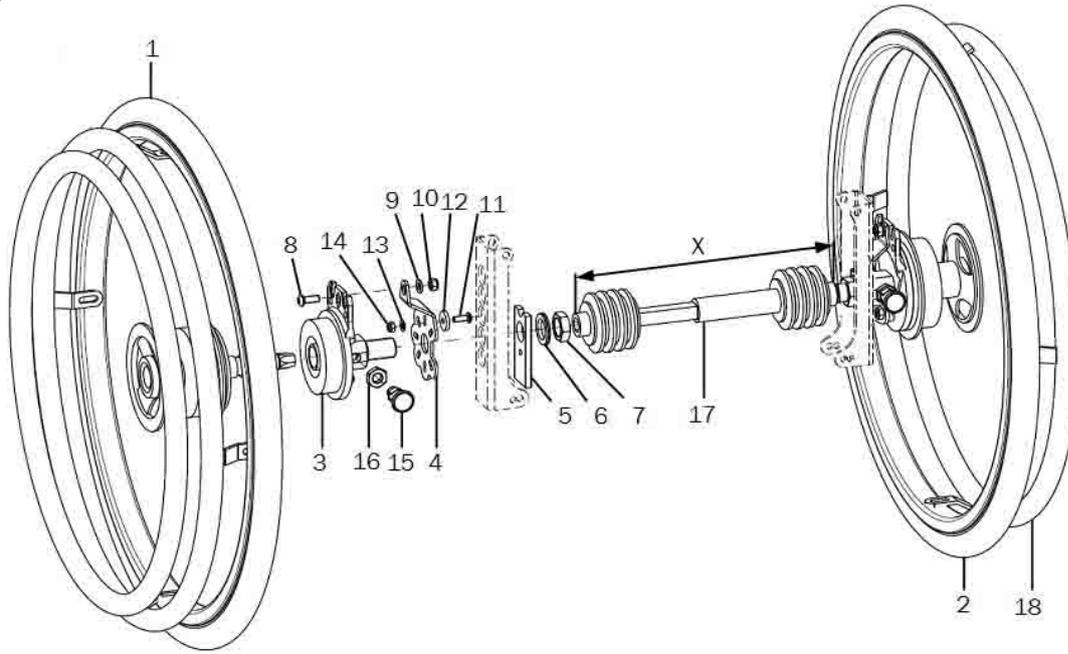

| Pos.: | Menge: | Artikelnr.: | Artikelbezeichnung: | Variante: |
|-------|--------|-------------|---|-------------------------|
| 1-17 | 1 | 261404 | Doppelgreifringssystem 22" für TBR-Nabe inkl. Bremsanker, Einschraubadapter, Gegenhalter und Teleskopstange | SB |
| o.B. | 1 | 261406 | Doppelgreifringssystem 24" für TBR-Nabe inkl. Bremsanker, Einschraubadapter, Gegenhalter und Teleskopstange | SB |
| 1 | 1 | 261452 | 22" Doppelgreifringrad mit Trommelbremse inkl. Steckachse, Antriebsseite | Anbau rechts oder links |
| o.B. | 1 | 261454 | 24" Doppelgreifringrad mit Trommelbremse inkl. Steckachse, Antriebsseite | Anbau rechts oder links |
| 2 | 1 | 261453 | 22" Doppelgreifringrad mit Trommelbremse inkl. Steckachse, Gegenseite | Anbau rechts oder links |
| o.B. | 1 | 261455 | 24" Doppelgreifringrad mit Trommelbremse inkl. Steckachse, Gegenseite | Anbau rechts oder links |
| 3-16 | 1 | 261428 | Montagezubehör DGR Trommelbremse | Anbau rechts oder links |
| 3 | 1 | | Bremsanker inkl. Einschraubadapter Fitting DGR | |
| 4 | 1 | 220012 | Trommelbremskörper schwarz für LLR incl. Gegenhalter, TBR-Distanz, Verschraubung (Radsturz/ links-rechts angeben) | Anbau rechts oder links |
| 5 | 1 | 20150921 | Verstärkung Lochplatte | |
| 6 | 1 | | Sicherungsscheibe Nord-Lock M18 | |
| 7 | 1 | | Mutter M18x1 SW24 | |
| 8 | 1 | | Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x16 | |
| 9 | 1 | | Scheibe ISO 7089 (DIN 125) - A 6,4 | |
| 10 | 1 | | Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M6 | |
| 11 | 1 | | Linsenflanschschraube mit Innensechskant M5x14 | |
| 12 | 1 | | Scheibe, ø18/5,2x3 für Bremsgegenhalter DGR, schwarz | |
| 13 | 1 | | Scheibe ISO 7089 (DIN 125) - A 5,3 | |
| 14 | 1 | | Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M5 | |
| 15 | 1 | | Arretierbolzen mit Rastnut, M10x1 | |
| 16 | 1 | | Sechskantmutter ISO 4032 (DIN 934) - M10 | |
| 17 | 1 | 26140004 | Teleskopstange 220-280mm für Doppelgreifringssystem | SB30+32 |
| o.B. | 1 | 26140005 | Teleskopstange 270-330mm für Doppelgreifringssystem | SB34+36 |
| o.B. | 1 | 26140006 | Teleskopstange 295-370mm für Doppelgreifringssystem | SB38+40 |
| o.B. | 1 | 26140007 | Teleskopstange 350-460mm für Doppelgreifringssystem | SB42-50 |
| 18 | 1 | 261431 | Greifring 22" für Gegenseite | |
| o.B. | 1 | 261432 | Greifring 24" für Gegenseite | |

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Die passenden Greifringüberzüge finden Sie im Kapitel "Greifringüberzüge"



Bereifung

| Pos.: | Menge: | Artikelnr: | Artikelbezeichnung: | Variante: |
|--------------|---------------|-------------------|--|------------------|
| o.B. | 2 | 202216 | Luftbereifung 22 x1" Right Run schwarz (ETRTO-489) | |
| o.B. | 2 | 202416 | Luftbereifung 24 x1" Right Run schwarz (ETRTO-540) | |
| o.B. | 2 | 202613 | Luftbereifung 26 x 1" Right Run, grau/schwarz | |
| o.B. | 2 | 202212 | Luftbereifung 22 x 1" Marathon plus, schwarz | |
| o.B. | 2 | 202412 | Luftbereifung 24 x 1" Marathon plus, schwarz | |
| o.B. | 2 | 202612 | Luftbereifung 26 x 1" Marathon plus, schwarz | |
| o.B. | 2 | 202221 | Luftbereifung 22 x 1 3/8", grau (ETRTO-489) | |
| o.B. | 2 | 202421 | Luftbereifung 24 x 1 3/8", grau (ETRTO-540) | |
| o.B. | 2 | 200522 | Schlauch 22" | |
| o.B. | 2 | 200524 | Schlauch 24" | |
| o.B. | 2 | 232213 | Pannensichere Bereifung 22x1", schwarz | |
| o.B. | 2 | 232413 | Pannensichere Bereifung 24x1", schwarz | |
| o.B. | 2 | 232214 | Pannensichere Bereifung 22x1 3/8", schwarz | |
| o.B. | 2 | 232414 | Pannensichere Bereifung 24x1 3/8", schwarz | |
| o.B. | 2 | 232212 | Pannensichere Bereifung 22 x 1 Zoll, grau mit 16 mm Felgenbreite | |
| o.B. | 2 | 232412 | Pannensichere Bereifung 24 x 1 Zoll, grau mit 16 mm Felgenbreite | |


Greifringe

| Pos.: | Menge: | Artikelnr: | Artikelbezeichnung: | Variante: |
|-------|--------|------------|---|------------------------------------|
| o.B. | 2 | 302201 | Greifring, Edelstahl 22 Zoll standard (4 Laschen/ø465 mm) | Nur für Standardrad |
| o.B. | 2 | 302301 | Greifring, Edelstahl 22 Zoll hoch (4 Laschen/ø 515 mm) | Nur für Standardrad |
| o.B. | 2 | 302401 | Greifring, Edelstahl 24 Zoll standard (6 Laschen/ø515 mm) | Nur für Standardrad |
| o.B. | 2 | 302501 | Greifring, Edelstahl 24 Zoll hoch (6Laschen/ø 567 mm) | Nur für Standardrad |
| o.B. | 2 | 302601 | Greifring 26" Standard, Edelstahl poliert | Nur für Standardrad |
| o.B. | 2 | 302701 | Greifring 26" hoch, Edelstahl poliert | Nur für Standardrad |
| o.B. | 2 | 3422 | Greifring Maxgrepp Ergo-Para 22 Zoll mit 4 Laschen kpl. | Für Standard- + Leichtlaufad |
| o.B. | 2 | 3424 | Greifring Maxgrepp Ergo-Para 24" Zoll mit 4 Laschen kpl. | Für Standard- + Leichtlaufad |
| o.B. | 2 | 3122 | Greifring Edelstahl 22", 8 Noppen | Nur für Standardrad |
| o.B. | 2 | 3124 | Greifring Edelstahl 24", 8 Noppen | Nur für Standardrad |
| o.B. | 2 | 312611 | Greifring Edelstahl 26", 8 Noppen | Nur für Standardrad |
| o.B. | 2 | 3322 | Greifring Aluminium 22", schwarz; PVC beschichtet | Nicht für Profilräder |
| o.B. | 2 | 3324 | Greifring Aluminium 24", schwarz; PVC beschichtet | Nicht für Profilräder |
| o.B. | 2 | 3326 | Greifring Aluminium 26", schwarz; PVC-Ummantelung | Nicht für Profilräder |
| o.B. | 2 | 342424 | Greifring 24" mit ergonomischem Greifringprofil, schwarz eloxiert mit integriertem Griffgummi | Für Standard- + Leichtlaufad |
| o.B. | 2 | 302078 | Greifring 20", Aluminium schwarz, 6 Laschen | für Leichtlaufad mit Trommelbremse |
| o.B. | 2 | 302278 | Greifring 22", Aluminium schwarz, 6 Laschen | für Leichtlaufad mit Trommelbremse |
| o.B. | 2 | 302478 | Greifring 24", Aluminium schwarz, 6 Laschen | für Leichtlaufad mit Trommelbremse |

Greifringüberzüge

| Pos.: | Menge: | Artikelnr: | Artikelbezeichnung: | Variante: |
|--------------|---------------|-------------------|---|------------------|
| o.B. | 2 | 322002 | Greifring-Überzug 20 Zoll Silikon für 20" Profilrad, 20" LLR hoch, 22" Greifring Std. Edelstahl, 20" Greifring hoch Edelstahl, DGR 24" Innenring (1400mm) | |
| o.B. | 2 | 322202 | Greifring-Überzug 22 Zoll Silikon für 22" Profilrad | |
| o.B. | 2 | 322205 | Greifring-Überzug 22 Zoll Silikon für 22" LLR Std, DGR 22" Außenring | |
| o.B. | 2 | 322208 | Greifring-Überzug 22 Zoll Silikon für DGR 22" Innenring | |
| o.B. | 2 | 322402 | Greifring-Überzug 24 Zoll Silikon für 24" Profilrad (1660mm) | |
| o.B. | 2 | 322404 | Greifring-Überzug 24 Zoll Silikon für 24" Greifring Std. Edelstahl, 22" LLR hoch | |
| o.B. | 2 | 322405 | Greifring-Überzug 24 Zoll Silikon für 24" LLR, DGR 24" Außenring | |
| o.B. | 2 | 322603 | Greifring-Überzug 24 Zoll Silikon für 24" LLR hoch, 24" Greifring Std. Edelstahl hoch, 26" Greifring Std. Edelstahl | |
| o.B. | 2 | 322602 | Greifring-Überzug 26 Zoll Silikon für 26" Profilrad, 26" Greifring hoch Edelstahl (1853mm) | |
| o.B. | 2 | 322201 | Greifring-Überzug Profilrad, Ergo 22" | |
| o.B. | 2 | 322401 | Greifring-Überzug Profilrad, Ergo 24" | |
| o.B. | 2 | 322601 | Greifring-Überzug Profilrad, Ergo 26" | |

Speichenschutz

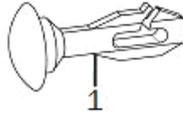

| Pos.: | Menge: | Artikelnr: | Artikelbezeichnung: | Variante: |
|-------|--------|------------|---|-----------|
| 1 | 1 | 250001 | Clip-Halter für transparenten Speichensch. Set=20 St. | |
| o.B. | 2 | 252200 | Speichenschutz 22", Unicolor transparent | |
| o.B. | 2 | 252400 | Speichenschutz 24", Unicolor transparent | |
| o.B. | 2 | 252600 | Speichenschutz 26", Unicolor transparent | |


Design-Dekor-Speichenschützer können Sie unter den folgenden Internetadressen wählen:

www.speichen-schutz.de
www.wheelchairgadgets.com

Kniehebelbremse


Bitte wählen Sie zu jeder Bremsenvariante die benötigte Anbauvariante

Bremsenvarianten

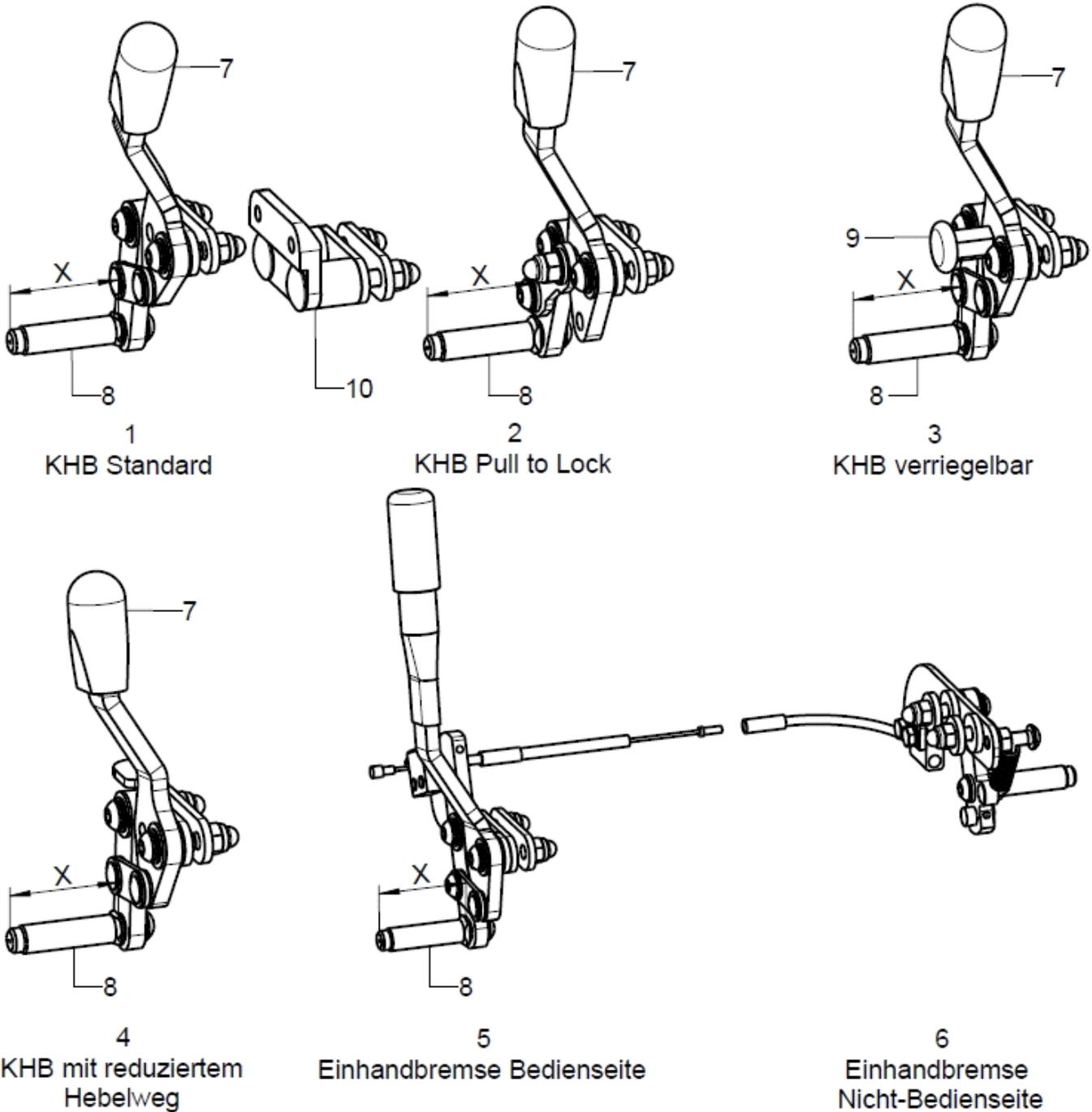

| Pos.: | Menge: | Artikelnr: | Artikelbezeichnung: | Variante: |
|-----------------|--------|------------|--|--|
| Anbauvariante | | | | |
| o.B. | 1 | 357501 | Anbauset Kniehebelbremse: Jump beta BSA/Vector BSA mit geradem Rahmen incl. Bremserhöhung (Anbau Distanzen beachten) | |
| o.B. | 1 | 357502 | Anbauset Kniehebelbremse: Jump beta BSA/Vector BSA mit geradem Rahmen incl. Bremserhöhung (Anbau Distanzen beachten) | |
| o.B. | 1 | 357503 | Anbauset Kniehebelbremse: Jump beta BSA/Vector BSA mit abduziertem Rahmen incl. Bremserhöhung (Anbau Distanzen beachten) | |
| o.B. | 1 | 357504 | Anbauset Kniehebelbremse: Jump beta BSA/Vector BSA mit abduziertem Rahmen und Desk-Seitenteil incl. Bremserhöhung (Anbau Distanzen beachten) | |
| o.B. | 1 | 357505 | Anbauset Kniehebelbremse: Jump beta Sport mit geradem Rahmen (Anbau Distanzen beachten) | |
| o.B. | 1 | 357506 | Anbauset Kniehebelbremse: Jump beta Sport mit geradem Rahmen und Desk-Seitenteil (Anbau Distanzen beachten) | |
| o.B. | 1 | 357507 | Anbauset Kniehebelbremse: Jump beta Sport mit abduziertem Rahmen (Anbau Distanzen beachten) | |
| o.B. | 1 | 357508 | Anbauset Kniehebelbremse: Jump beta Sport mit abduziertem Rahmen und Desk-Seiten (Anbau Distanzen beachten)teil | |
| Bremsenvariante | | | | |
| 1+7+8 | 1 | 352502 | Kniehebelbremse Standard, rechts, kpl. | Länge X, Rahmenvariante |
| o.B. | 1 | 352501 | Kniehebelbremse Standard, links, kpl. | Länge X, Rahmenvariante |
| 2+7+8 | 1 | 352902 | Kniehebelbremse Pull-to-Lock, rechts, kpl. | Länge X, Rahmenvariante |
| o.B. | 1 | 352901 | Kniehebelbremse Pull-to-Lock, links, kpl. | Länge X, Rahmenvariante |
| 3+7-9 | 1 | 351302 | Kniehebelbremse verriegelbar, rechts kpl. | Länge X, Rahmenvariante |
| o.B. | 1 | 351301 | Kniehebelbremse verriegelbar, links, kpl. | Länge X, Rahmenvariante |
| 4+7+8 | 1 | 353402 | Kniehebelbremse BSH, rechts, kpl. | Beinstütze hochschwenkbar, Länge X, Rahmenvariante |
| o.B. | 1 | 353401 | Kniehebelbremse BSH, links, kpl. | Beinstütze hochschwenkbar, Länge X, Rahmenvariante |
| 5+6+8 | 1 | 350902 | Einhandbremse rechts, kpl, Bedienseite + Nichtbedienseite | Länge X, Rahmenvariante |
| o.B. | 1 | 350901 | Einhandbremse links, kpl, Bedienseite + Nichtbedienseite | Länge X, Rahmenvariante |
| 5+8 | 1 | 350904 | Einhandbremse Bedienseite rechts, kpl. | Länge X, Rahmenvariante |
| o.B. | 1 | 350903 | Einhandbremse Bedienseite links, kpl. | Länge X, Rahmenvariante |
| 6+8 | 1 | 350912 | Einhandbremse Nicht-Bedienseite, kpl. | Länge X, Rahmenvariante, links/rechts |
| 7 | 2 | 350017 | Abdeckkappe schwarz, 15x6,8 | |
| 8 | 1 | 352518 | Bremsbolzen 40 mm Linksgew. inkl. Montagezubehör | Länge X, Rechte Seite |
| o.B. | 1 | 352506 | Bremsbolzen gerändelt 40 mm, inkl. Montagezubehör | Länge X, Linke Seite |
| o.B. | 1 | 352519 | Bremsbolzen 50 mm Linksgew. inkl. Montagezubehör | Länge X, Rechte Seite |
| o.B. | 1 | 352507 | Bremsbolzen gerändelt 50 mm, inkl. Montagezubehör | Länge X, Linke Seite |
| o.B. | 1 | 352520 | Bremsbolzen 60 mm Linksgew. inkl. Montagezubehör | Länge X, Rechte Seite |
| o.B. | 1 | 352510 | Bremsbolzen gerändelt 60 mm, inkl. Montagezubehör | Länge X, Linke Seite |
| 9 | 1 | 350530 | Zugschnapper M10 Ø6 arretierbar, schwarz | |
| 10 | 2 | 35250301 | Bremserhöhung für KHB kpl. | BSA-Rahmen |


Seilzugbremse Bremskörper/Andrückteil

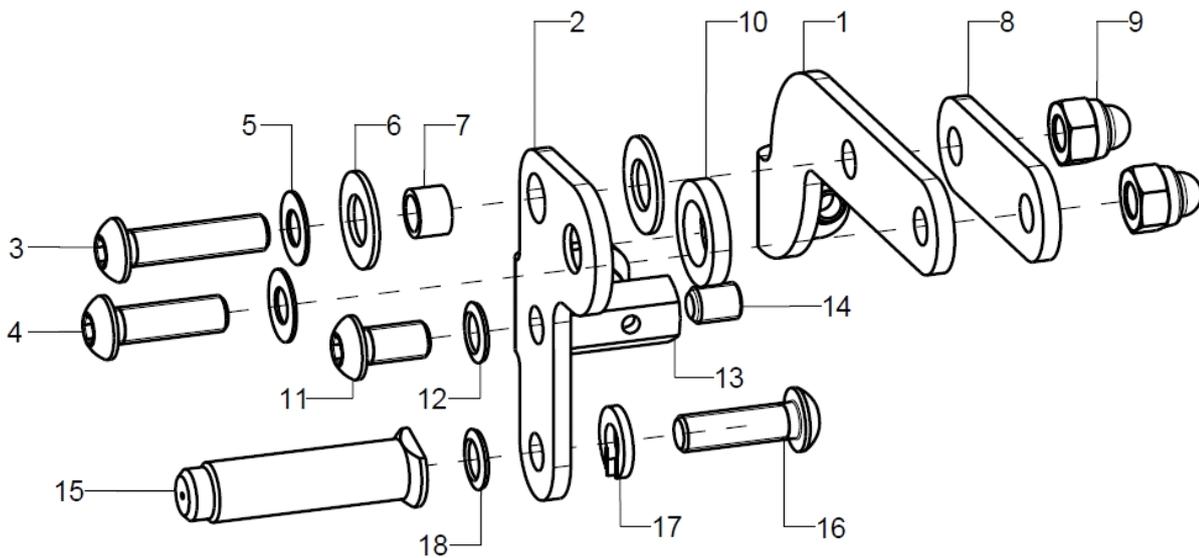

| Pos.: | Menge: | Artikelnr.: | Artikelbezeichnung: | Variante: |
|-------|--------|-------------|--|---------------------------------------|
| 1-32 | 1 | 3531 | Seilzugbremse im Seitenteil integriert kpl. (Bremskörper , Benutzerbedienung, Verschraubung) | Länge X, Rahmenvariante, links/rechts |
| 1-14 | 1 | 353116 | Seilzugbremse Bremskörper rechts, kpl. | |
| o.B. | 1 | 353115 | Seilzugbremse Bremskörper links, kpl. | |
| 1 | 1 | 35310205 | Basisteil, rechts | Benutzerbedienteil |
| o.B. | 1 | 35310204 | Basisteil, links | Benutzerbedienteil |
| 2 | 1 | 35310202 | Andrückteil, rechts | Benutzerbedienteil |
| o.B. | 1 | 35310201 | Andrückteil links | Benutzerbedienteil |
| 3-14 | 2 | 353199 | Montageset bei Bremskörper der Seilzugbremse | Rahmenvariante |
| 3 | 1 | | Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x25 | |
| o.B. | 1 | | Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x35 | |
| o.B. | 1 | | Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x40 | |
| o.B. | 1 | | Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x50 | |
| 4 | 1 | | Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x20 | |
| o.B. | 1 | | Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x30 | |
| o.B. | 1 | | Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x35 | |
| o.B. | 1 | | Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x45 | |
| o.B. | 1 | 352505 | Lasche 34, Bd 16x3x50 | |
| o.B. | 2 | 35310209 | Distanzbuchse Alu, schwarz Ø14x10 (Set 2 Stück) | |
| o.B. | 2 | 35310207 | Distanzbuchse Alu, schwarz Ø16x15 (Set 2 Stück) | |
| o.B. | 2 | 35310208 | Distanzbuchse Alu, schwarz Ø16x25 (Set 2 Stück) | |
| 5 | 2 | | Passscheibe DIN 988 - 6x12x0,5 - A2 | |
| 6 | 2 | | Kotflügelscheibe 8,4x16x1 PE | |
| 7 | 1 | | Messingbuchse 8x6x5,5 | |
| 8 | 2 | 352505 | Lasche 34, Bd 16x3x50 | |
| o.B. | 2 | | Scheibe ISO 7093 (DIN 9021) - 6,4 | |
| 9 | 2 | | Sechsk.-Hutmutter niedr. Form mit Klemmt. DIN 986 - M6 | |
| 10 | 1 | | Scheibe PS 3xØ17,5/10,7 schwarz | |
| 11 | 1 | | Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x12 | |
| 12 | 1 | | Sicherungsscheibe S6 - FST | |
| 13 | 1 | | Klemmnippelmuffe SW10 M6x20 mit Bohrung | |
| 14 | 1 | | Gewindestift mit Innensechskant ISO 4026 (DIN 913), M6x8 | |
| 15-18 | 1 | 352518 | Bremsbolzen 40 mm Linksgew. inkl. Montagezubehör | Länge X, Rechte Seite |


| | | | | |
|-------|---|--------|--|-----------------------|
| o.B. | 1 | 352506 | Bremsbolzen gerändelt 40 mm, inkl. Montagezubehör | Länge X, Linke Seite |
| 15-18 | 1 | 352519 | Bremsbolzen 50 mm Linksgew. inkl. Montagezubehör | Länge X, Rechte Seite |
| o.B. | 1 | 352507 | Bremsbolzen gerändelt 50 mm, inkl. Montagezubehör | Länge X, Linke Seite |
| 15-18 | 1 | 352520 | Bremsbolzen 60 mm Linksgew. inkl. Montagezubehör | Länge X, Rechte Seite |
| o.B. | 1 | 352510 | Bremsbolzen gerändelt 60 mm, inkl. Montagezubehör | Länge X, Linke Seite |
| 16 | 1 | | Li-schr. m. Innensechsk. ISO 7380, M6x20, Links-gew. | |
| o.B. | 1 | | Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x20 | |
| 17 | 1 | | Federring DIN 127 - A 6 | |
| 18 | 1 | | Sicherungsscheibe S6 - FST | |

Seilzugbremse Benutzerbedienteil

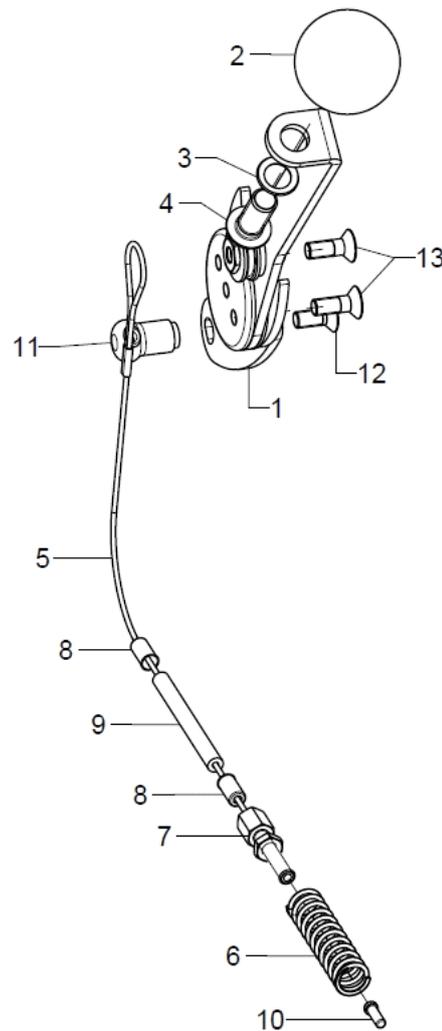


| Pos.: | Menge: | Artikelnr: | Artikelbezeichnung: | Variante: |
|-------|--------|------------|--|---------------|
| 1-13 | 2 | 353103 | Benutzerbedienung bei Seilzugbremse im Seitenteil integriert kpl. | rechts, links |
| 1-4 | 1 | 353111 | Bedienteil der Seilzugbremse, rechts - vormontiert | |
| o.B. | 1 | 353112 | Bedienteil der Seilzugbremse, links - vormontiert | |
| 2-4 | 1 | 35310109 | Kugelknopf $\varnothing 32/M8$, Form C, schw., inkl. Montagezubehör | |
| 3 | 1 | | Sicherungsscheibe S8 - FST | |
| 4 | 1 | | Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M8x20 | |
| 5-10 | 2 | 353105 | Seilzug kpl. Bei Seilzugbremse | |
| 5 | 1 | 35310301 | Seilzug mit Schlaufe 90 cm | |
| 6 | 1 | 352405 | Druckfeder, 1,1x9,4x44,3 | |
| 7 | 1 | 352406 | Einstellschraube f. Bowdenzug, M5x34 mm | |
| 8 | 2 | 352412 | Abschlußhülse gedreht aus Metall, $\varnothing 5$, Endkappen | |
| 9 | 1 | 35310303 | Außenhülle für Bremszug schwarz, 38 cm lang | |
| 10 | 1 | 352005 | Endkappe für Innenzüge $\varnothing 1-1,5$ mm | Set 2 Stück |
| 11 | 1 | | Seilzug-Durchführung | |
| 12 | 1 | | Sicherungsscheibe S5 - FST | |
| 13 | 1 | | Senkschraube mit Innensechskant ISO 10642 (DIN 7991) M5x12 | |
| 14 | 2 | | Senkschraube mit Innensechskant ISO 10642 (DIN 7991) M5x14 | |

Bremsgriff bei Trommelbremse

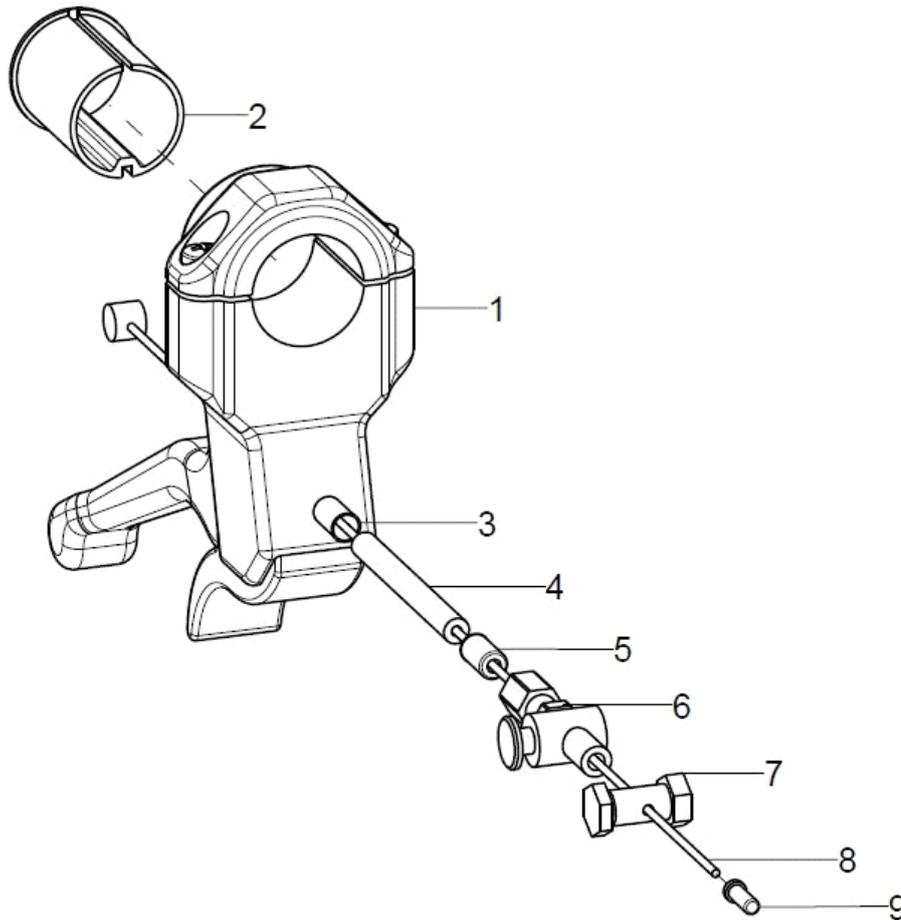


| Pos.: | Menge: | Artikelnr.: | Artikelbezeichnung: | Variante: |
|-------|--------|-------------|--|---|
| 1-9 | 2 | 352016 | Handbremshebel kpl. mit Bedieneinheit (Hülle, Seilzug, Anschlusssteile, Endkappen) | Schiebegriffvariante |
| 1+2 | 1 | 352010 | Handbremshebel schwarz, feststellbar | |
| 2 | 1 | 352011 | Klemmbuchse d/D=20/22 (30 mm) für Handbremshebel bei Profilrohr | Bei ausziehbaren Schiebegriffen und Schiebebügelgriff |
| 3-9 | 2 | 352006 | Bremsseilzug $\varnothing 1,5 \times 2250$ mm mit Hülle, Einstellschraube, Klemmschraube, Abschlusshülsen und Endkappe | |
| 3 | 1 | | Endkappe für Bowdenzug | |
| 4 | 1 | | Außenhülle für Bremszug schwarz, 150 cm lang | |
| 5 | 1 | | Abschlusshülse gedreht aus Metall, $\varnothing 5$, Endkappen | |
| 6 | 1 | | Einstellschraube M6x40 mm inkl. Klemmschraube | |
| 7 | 1 | | Klemmschraube für Bowdenzug | |
| 8 | 1 | | Innenzug $\varnothing 1,5 \times 2250$ mm mit Doppelnippel | |
| 9 | 1 | | Endkappe für Innenzüge $\varnothing 1-1,5$ mm | Set 2 Stück |

Bremshebelverlängerungen

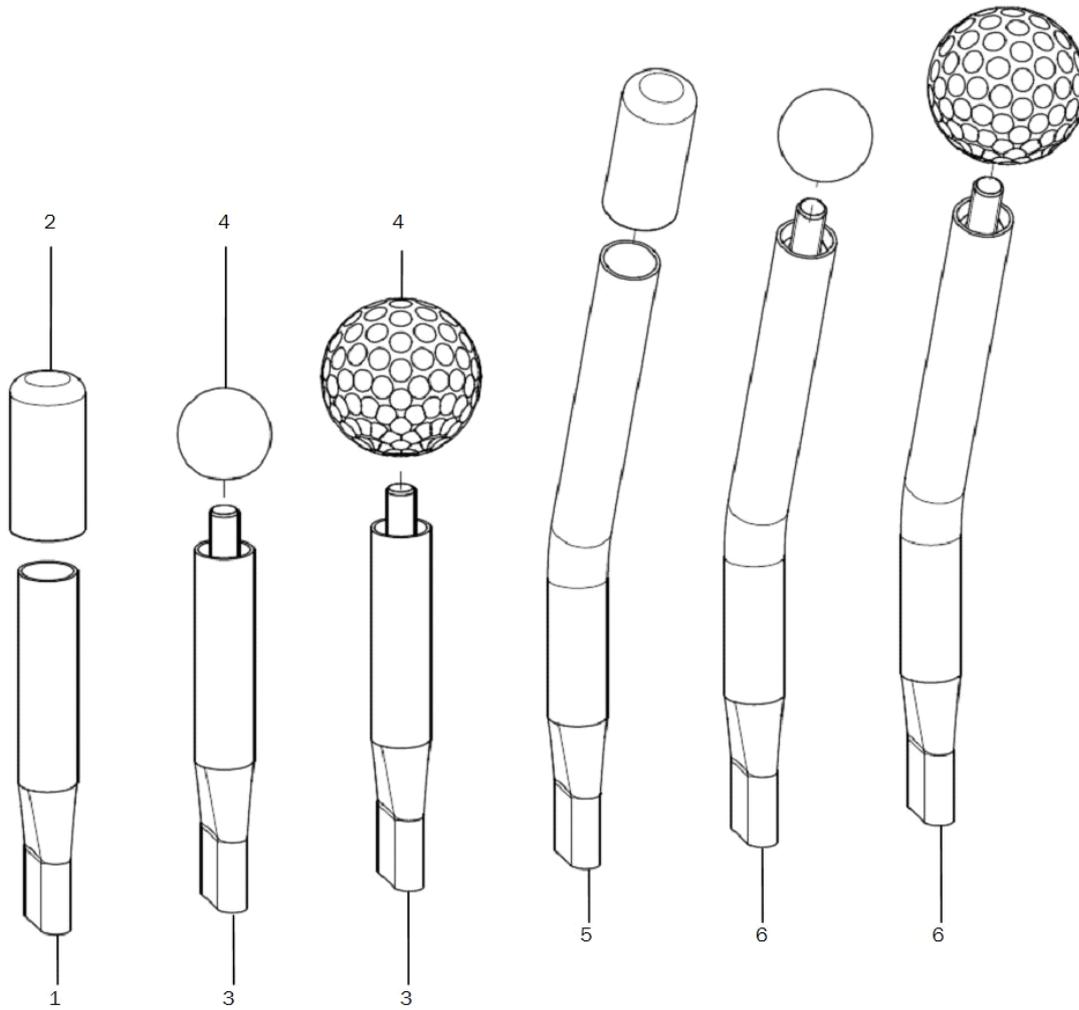


| Pos.: | Menge: | Artikelnr: | Artikelbezeichnung: | Variante: |
|---------|--------|------------|---|----------------------|
| 1-2 | 2 | 3510 | Bremshebelverlängerung, 6 cm gerade mit Kappe | |
| 2 | 2 | 351011 | Rohrendkappe für Bremshebel-Verlängerung (2 Stück) | |
| 3-4 | 2 | 3512 | Bremshebelverlängerung 6 cm gerade mit Kugelknopf/Golfball | Kugelknopf, Golfball |
| 4 | 2 | 351016 | Kugelknopf ä. DIN319 | |
| altern. | 2 | 351211 | Golfball | |
| 5+2 | 2 | 3515 | Bremshebelverlängerung 12 cm gekröpft mit Kappe | |
| 6+4 | 2 | 3516 | Bremshebelverlängerung 12 cm gekröpft mit Kugelknopf/Golfball | Kugelknopf, Golfball |

Caddy

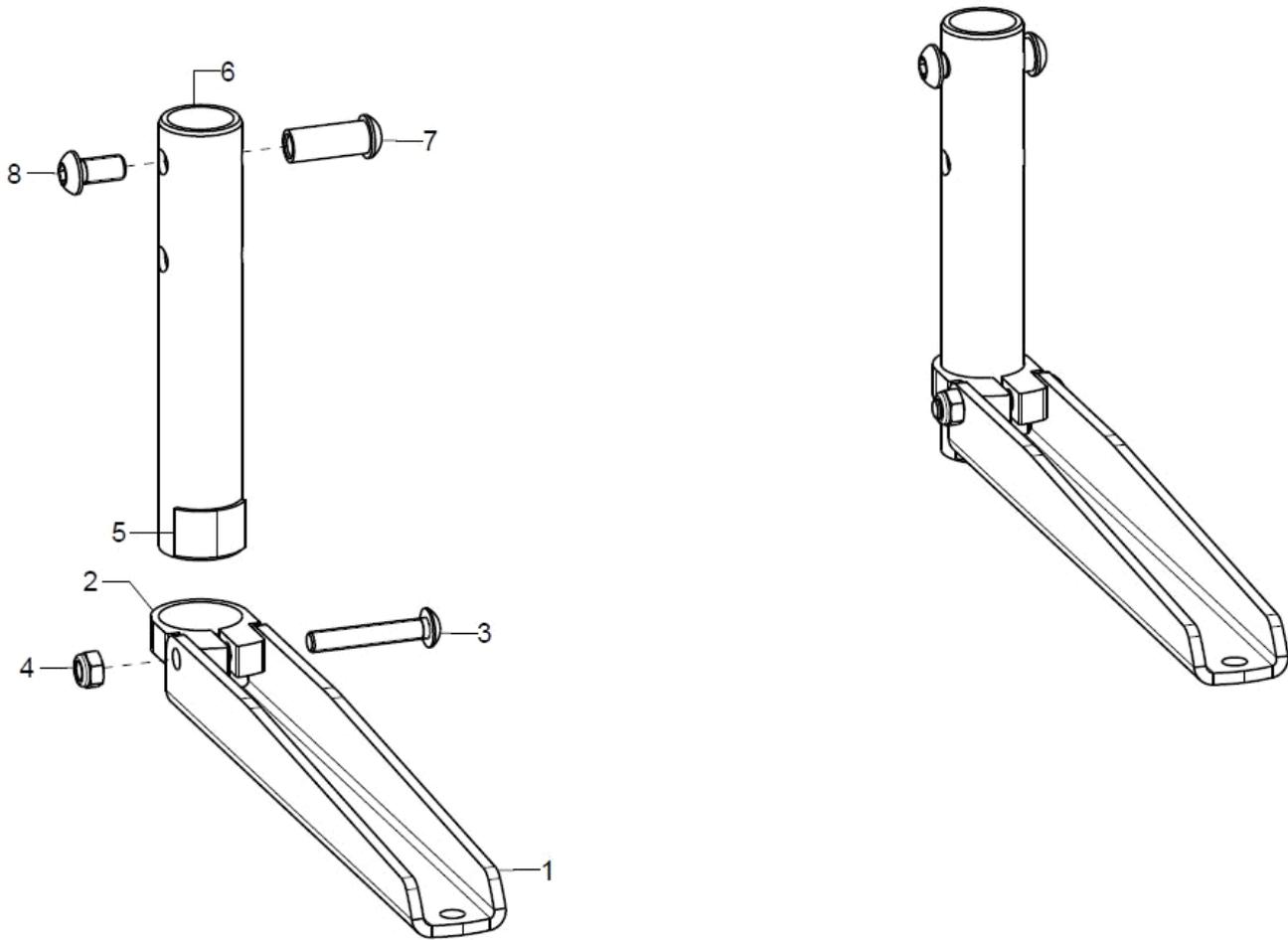

| Pos.: | Menge: | Artikelnr: | Artikelbezeichnung: | Variante: |
|-------|--------|------------|--|-----------|
| 1-8 | 2 | 910112 | Caddy für Beinstützenanbau innen, kpl. | |
| 1-5 | 2 | 910110 | Caddy für Beinstützenanbau außen, kpl. | |
| 1 | 1 | 910101 | Halter für Caddy | |
| 2 | 1 | 910102 | Klemmschelle \varnothing 29mm | |
| 3 | 1 | | Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M5x30 | |
| 4 | 1 | | Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M5 | |
| 5 | 1 | | Flauschband selbstklebend 20mm, schwarz | |
| 6-8 | 1 | 910103 | Rohradapter inkl. Montagematerial | |
| 7 | 1 | | Gewindehülse M6x19,5 verklebt | |
| 8 | 2 | | Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x10 | |


2-Punkt-Beckengurt mit Kunststoffschloss

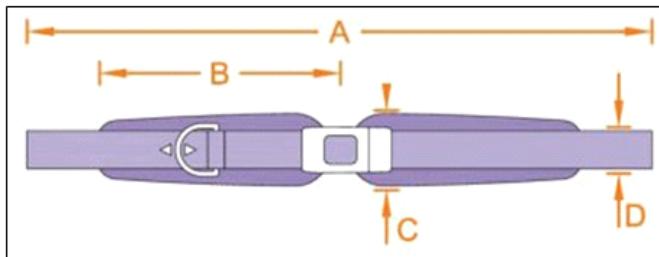

| Größe | A | B | C | D |
|-------|-----|----|---|-----|
| 1 | 148 | 14 | 5 | 2,5 |
| 2 | 156 | 17 | 6 | 2,5 |
| 3 | 166 | 22 | 7 | 2,5 |

| Pos.: | Menge: | Artikelnr: | Artikelbezeichnung: | Variante: |
|-------|--------|------------|--|-----------|
| 1 | 1 | 78050201 | 2-Punkt Beckengurt Gr.1 mit Kunststoffschloss incl. Befestigungsmaterial zur Selbstmontage | |
| o.B. | 1 | 78050202 | 2-Punkt Beckengurt Gr.2 mit Kunststoffschloss incl. Befestigungsmaterial zur Selbstmontage | |
| o.B. | 1 | 78050203 | 2-Punkt Beckengurt Gr.3 mit Kunststoffschloss incl. Befestigungsmaterial zur Selbstmontage | |
| o.B. | 1 | 780106 | Rohrschellenset für Rohre 19-25 mm (2 Schellen) | |
| o.B. | 1 | 780107 | Klappschellenset (4 Stück) für Gurte mit 25 mm mit Bohrung | |


2-Punkt-Beckengurt mit Metallschloss

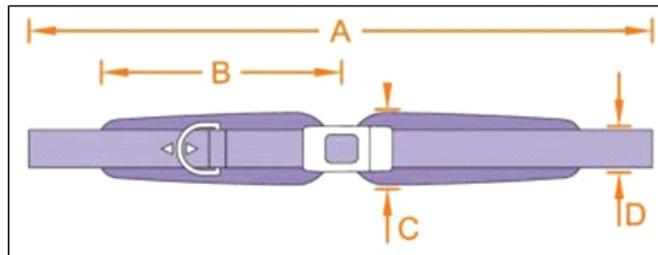

| Größe | A | B | C | D |
|-------|-----|----|---|-----|
| 1 | 148 | 14 | 5 | 2,5 |
| 2 | 156 | 17 | 6 | 2,5 |
| 3 | 166 | 22 | 7 | 2,5 |

| Pos.: | Menge: | Artikelnr: | Artikelbezeichnung: | Variante: |
|-------|--------|------------|--|-----------|
| 1 | 1 | 78050204 | 2-Punkt Beckengurt Gr.1 mit Metallschloss incl. Befestigungsmaterial zur Selbstmontage | |
| o.B. | 1 | 78050205 | 2-Punkt Beckengurt Gr.2 mit Metallschloss incl. Befestigungsmaterial zur Selbstmontage | |
| o.B. | 1 | 78050206 | 2-Punkt Beckengurt Gr.3 mit Metallschloss incl. Befestigungsmaterial zur Selbstmontage | |
| o.B. | 1 | 78050210 | Sicherheits-Schutz-Kappe für Metallschloss | |
| o.B. | 1 | 780106 | Rohrschellenset für Rohre 19-25 mm (2 Schellen) | |
| o.B. | 1 | 780107 | Klappschellenset (4 Stück) für Gurte mit 25 mm mit Bohrung | |


4-Punkt-Beckengurt mit Kunststoffschloss

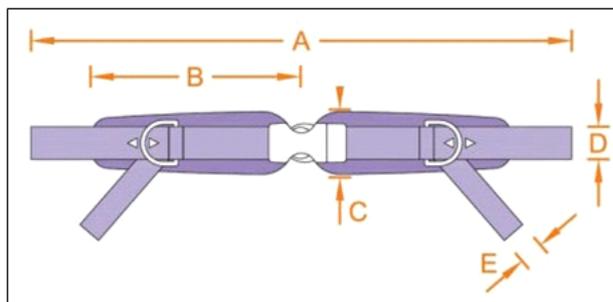

| Größe | A | B | C | D | E |
|-------|-----|----|---|-----|-----|
| 1 | 148 | 14 | 5 | 2,5 | 2,5 |
| 2 | 156 | 17 | 6 | 2,5 | 2,5 |
| 3 | 166 | 22 | 7 | 2,5 | 2,5 |

| Pos.: | Menge: | Artikelnr.: | Artikelbezeichnung: | Variante: |
|-------|--------|-------------|--|-----------|
| 1 | 1 | 78050401 | 4-Punkt Beckengurt Gr.1 mit Kunststoffschloss incl. Befestigungsmaterial zur Selbstmontage | |
| o.B. | 1 | 78050402 | 4-Punkt Beckengurt Gr.2 mit Kunststoffschloss incl. Befestigungsmaterial zur Selbstmontage | |
| o.B. | 1 | 78050403 | 4-Punkt Beckengurt Gr.3 mit Kunststoffschloss incl. Befestigungsmaterial zur Selbstmontage | |
| o.B. | 1 | 780106 | Rohrschellenset für Rohre 19-25 mm (2 Schellen) | |
| o.B. | 1 | 780107 | Klappschellenset (4 Stück) für Gurte mit 25 mm mit Bohrung | |


4-Punkt-Beckengurt mit Metallschloss

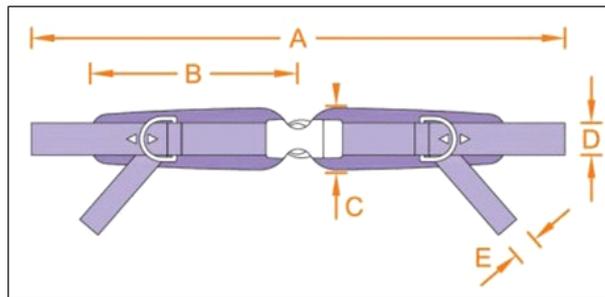

| Größe | A | B | C | D | E |
|-------|-----|----|---|-----|-----|
| 1 | 148 | 14 | 5 | 2,5 | 2,5 |
| 2 | 156 | 17 | 6 | 2,5 | 2,5 |
| 3 | 166 | 22 | 7 | 2,5 | 2,5 |

| Pos.: | Menge: | Artikelnr.: | Artikelbezeichnung: | Variante: |
|-------|--------|-------------|--|-----------|
| 1 | 1 | 78050404 | 4-Punkt Beckengurt Gr.1 mit Metallschloss incl. Befestigungsmaterial zur Selbstmontage | |
| o.B. | 1 | 78050405 | 4-Punkt Beckengurt Gr.2 mit Metallschloss incl. Befestigungsmaterial zur Selbstmontage | |
| o.B. | 1 | 78050406 | 4-Punkt Beckengurt Gr.3 mit Metallschloss incl. Befestigungsmaterial zur Selbstmontage | |
| o.B. | 1 | 78050210 | Sicherheits-Schutz-Kappe für Metallschloss | |
| o.B. | 1 | 780106 | Rohrschellenset für Rohre 19-25 mm (2 Schellen) | |
| o.B. | 1 | 780107 | Klappschellenset (4 Stück) für Gurte mit 25 mm mit Bohrung | |

Brustschultergurt

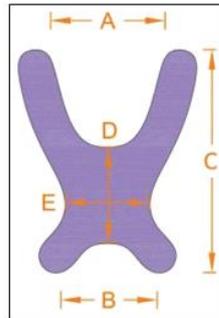

| Größe | A | B | C | D | E |
|-------|----|----|----|----|----|
| 1 | 9 | 21 | 27 | 10 | 12 |
| 2 | 12 | 24 | 36 | 14 | 14 |
| 3 | 17 | 30 | 42 | 15 | 18 |
| 4 | 20 | 32 | 48 | 17 | 21 |

| Pos.: | Menge: | Artikelnr.: | Artikelbezeichnung: | Variante: |
|-------|--------|-------------|---|-----------|
| 1 | 1 | 781001 | Brustschultergurt Gr. 1 ohne Reißverschluß incl. Befestigungsmaterial zur Selbstmontage | |
| o.B. | 1 | 781002 | Brustschultergurt Gr. 2 ohne Reißverschluß incl. Befestigungsmaterial zur Selbstmontage | |
| o.B. | 1 | 781003 | Brustschultergurt Gr. 3 ohne Reißverschluß incl. Befestigungsmaterial zur Selbstmontage | |
| o.B. | 1 | 781004 | Brustschultergurt Gr. 4 ohne Reißverschluß incl. Befestigungsmaterial zur Selbstmontage | |
| o.B. | 1 | 780106 | Rohrschellenset für Rohre 19-25 mm (2 Schellen) | |
| o.B. | 1 | 780107 | Klappschellenset (4 Stück) für Gurte mit 25 mm mit Bohrung | |